

Le nouveau CONTOUR® Link

Le CONTOUR® Link transmet sans fil les taux de glycémie sanguins vers votre pompe à insuline Paradigm®.

Mesurer votre glycémie



1) Placez l'extrémité grise de la bandelette d'analyse CONTOUR® dans le lecteur. Celui-ci est automatiquement codé. La flèche (I) à côté de la date indique que l'option Envoi est activée.



2) Attendez que la bandelette test absorbe la goutte de sang.



3) Après 5 sec., le résultat du test s'affiche en clignotant jusqu'à ce que le résultat soit envoyé à votre pompe à insuline.

4) Une fois le résultat envoyé avec succès vers la pompe à insuline, il arrête de clignoter. Il s'affiche alors sur l'écran de votre pompe à insuline.



5) Pour ne pas envoyer un seul résultat distinct : placez la bandelette test – appuyez sur (▼) ou (▲) jusqu'à ce que « OFF » apparaisse à l'écran – le résultat ne sera alors pas envoyé séparément à la pompe à insuline.



Avant de commencer :

- Programmez le numéro de série du CONTOUR® Link dans la pompe à insuline.
- Veillez à ce que l'option Envoi du lecteur soit enclenchée. (Si une flèche est affichée à l'écran du lecteur, à côté de la date, l'option Envoi est enclenchée)
- Tenez les deux appareils à une distance de 1,2 mètre l'un de l'autre.
- Veillez à ce que les batteries des deux appareils soient suffisamment chargées. Si, à l'écran, la batterie clignote, le résultat ne sera pas transféré.
- Si votre pompe à insuline est réglée sur l'unité de mesure mmol/L, il convient de la changer en mg/dL. Pour ce faire, procédez comme suit :
 1. Appuyez sur ACT pour accéder au menu principal.
 2. Sélectionnez Bolus.
 3. Sélectionnez Régler Bolus Wizard.
 4. Sélectionnez Modifier les paramètres.
 5. Sélectionnez Unités puis choisissez mg/dL.
 6. Appuyez 5 fois sur ESC et votre pompe Paradigm sera alors correctement paramétrée.



CONTOUR®
Wireless Blood Glucose Monitoring System
LINK



Bayer HealthCare
Diabetes Care

CONFIGURATION DU LECTEUR

Quand vous recevez votre lecteur de glycémie CONTOUR® Link, l'option Envoi est, par défaut, toujours allumée.

Dés-/activation de l'option Envoi




Maintenez le bouton M appuyé jusqu'à ce que vous entriez dans le système de configuration.



- 1) Le symbole Envoi (↑) s'affiche en haut de l'écran et ON clignote. Cela signifie que l'option Envoi est activée.
- 2) Choisissez (▼) ou (▲) pour arrêter (OFF) ou allumer (ON) l'option d'envoi.
- 3) Appuyez sur M pour confirmer.
- 4) Appuyez encore quelques fois sur le M pour quitter le menu de configuration. Dans le menu de configuration, vous pouvez éventuellement encore changer l'heure, la date, etc.

Pour davantage d'informations, consultez le mode d'emploi de CONTOUR® Link.

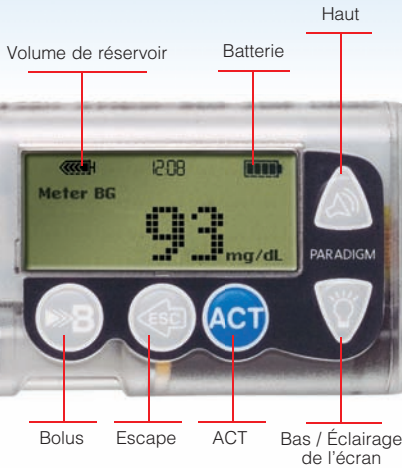

Pour davantage d'informations, consultez le mode d'emploi de la pompe à insuline Paradigm®.




Medtronic


Soulager la douleur • Rétablir la santé • Prolonger la vie

CONFIGURATION DE LA POMPE À INSULINE


Appuyez sur ACT pour accéder au menu principal. Sélectionnez FONCTIONS et choisissez OPTION LECTEUR.

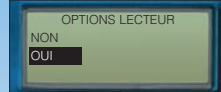

Choisissez OUI pour accéder au MENU ID LECTEUR.

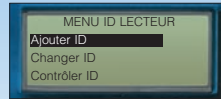


Choisissez AJOUTER ID et appuyez sur ACT.

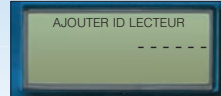

(clignotant)

Utilisez le bouton haut/bas pour introduire le numéro de série à six chiffres du lecteur CONTOUR® Link. Appuyez sur ACT après chaque chiffre.

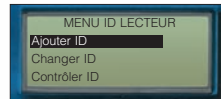

Une fois que le dernier chiffre a été introduit, vous accédez au MENU ID LECTEUR. Appuyez sur ESC pour quitter le menu.

Pour davantage d'informations sur le lecteur CONTOUR® Link, composez le 0800 97 212.

Pour davantage d'informations sur les pompes à insuline et la surveillance continue de la glycémie, surfez sur www.medtronic.be

© 2007 Bayer HealthCare LLC. CONTOUR est une marque déposée de Bayer HealthCare LLC. Bayer, la croix Bayer, No Coding et le logo No Coding, sont des marques déposées Bayer AG utilisées sous licence. Paradigm, Guardian et Bolus Wizard sont des marques déposées de Medtronic MiniMed, Inc.



CONTOUR
Wireless Blood Glucose Monitoring System **LINK**



Bayer HealthCare
Diabetes Care