



Medtronic

Medtronic CareLink[®]サービス概要 Medtronic CareLinkモニターについて

Medtronic CareLink[®]モニターとは?

Medtronic CareLinkモニター (右図) は、心臓デバイスからのデータを一般の電話回線を通じて送信し、医師や病院が検討できるようにするためのものです。本体は小さく、持ち運びができ、使い方も簡単です。

どのように役立つのですか?

フォローアップ治療では、医師が心臓デバイスから最新の情報を入手し、患者さんの心臓の状態に最も適した治療を継続的に確実に行えるようにします。Medtronic CareLinkサービスによる遠隔フォローアップを利用すると、患者さんは必要なケアをより簡単に受けられるようになります。病院に通う回数や時間が減る場合もあります - その時間は、ご自身の人生のためにお使い下さい! CareLinkモニターから病院への情報の送信は、素早く、簡単で、一般の電話回線を使い、アメリカ本土、アラスカ、およびハワイのどこにいても行うことができます。



Medtronic CareLinkモニター及びアンテナ

どのように動かすのですか?

Medtronic CareLinkモニターは、心臓デバイスからの情報を医師に容易に送信できるように設計されています。モニターの使い方は簡単です。

1. 病院で指定された時間に、Medtronic CareLinkモニターを一般の電話回線に繋ぎ、「電源」ボタンを押します (モニターは、一般の電話回線を用いて、アメリカ本土、アラスカ、およびハワイで使用することができます)。
2. モニターの「アンテナ」を、心臓に植え込まれたデバイスに当てます。モニターはデバイスからの情報を読み込み、記憶します。読み込み処理にかかる時間は、通常は3分以内ですが、最長で12分かかる場合もあります。
3. モニターは、あらかじめプログラムされたフリーダイヤルの番号に自動的に電話し (ダイヤルアップ)、データを安全なサーバーに送信します。モニターがダイヤルアップを始めたら、アンテナをデバイスから離して下さい。情報の送信処理にかかる時間は、通常は3分以内ですが、送信する情報量や電話回線の状態により、最長で60分かかる場合もあります。

病院では、インターネットを使い、デバイスからのデータを見て解析します。病院側の手順により、あるいは患者さんの状態に応じて、病院から連絡がある場合があります。症状が確認されたら、指定された時間以外にデータを送信するよう医師から指示がある場合もあります。

より詳しい情報につきましては病院でお問い合わせ下さい。ご使用にあたっての詳細は、Medtronic CareLinkモニター患者用マニュアルを必ずお読み下さい。



Giving you the freedom to **LIVE**
LIFE



Giving you the freedom to **LIVE** LIFE

モニターはいつ手に入りますか?

医師が注文してから数週間で入手することができます。プライバシー保護のため、モニターは茶色の無地の箱でお届けします。荷物が到着した際にサインが必要な場合があります。30日以内にモニターを入手できない場合には、病院にご連絡下さい。

どのように使うのですか?

箱の中に、機材とモニターの使用方法が同梱されています。モニターを使用する前に機材をご確認下さい。

いつ使うのですか?

いつモニターを使ってデバイスの情報を送信するかについては、病院から指示があります。病院からの指示がない場合にはモニターを使用しないで下さい。

分からないことがある場合はどうすればいいですか?

モニター、または健康状態に関してご不明な点がある場合は、病院にご連絡下さい。

旅行中でも使用できますか?

使用できます。モニターは約450グラムで、スーツケースに入り、空港のセキュリティも簡単に通過できます。モニターは、一般の電話回線を用いて、アメリカ本土、アラスカ、およびハワイのどこにいても使用することができます（空港のセキュリティでデバイスが金属探知機を起動させ、質問を受ける場合もありますので、メドトロニックデバイスIDカードを必ずお持ち下さい）。


デバイスを新しく植え込んだ場合、モニターは使用できるのですか?

デバイスを新しいものと交換した場合には、モニターの使用について病院でお問い合わせ下さい。病院からの指示がない場合には、交換したデバイスとモニターを一緒に使用しないで下さい。

メドトロニック社製ICD患者用ウェブの重要情報

ICD（植込み型除細動器）を使用すると人生が変わります。Medtronic CareLink患者用ウェブサイトは、患者さんがご自身の人生を送るためのお手伝いをします。

「www.medtroniccarelink.com」にアクセスして下さい。メドトロニック社製ICDをお使いになっている皆様の専用サイトです。当ウェブサイトでは、ICDや皆様の心臓の状態、ショックなどについての分かりやすい情報や、ICDとともに生活するための実用的なヒント、その他たくさんの情報が紹介されています。

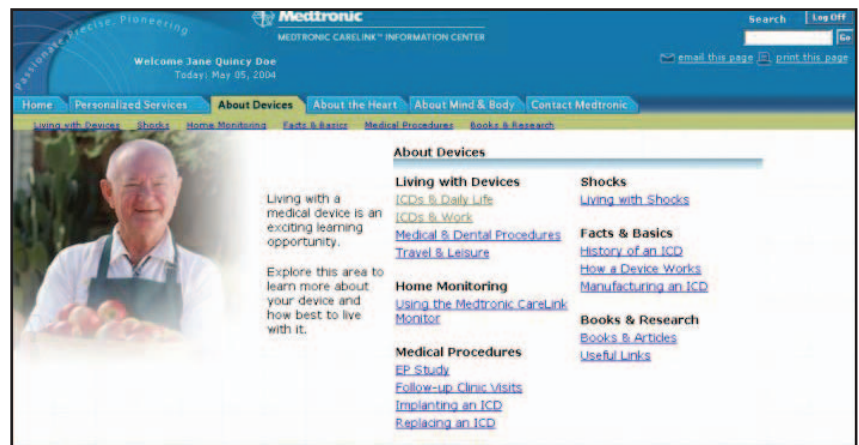

Medtronic
Alleviating Pain · Restoring Health · Extending Life

World Headquarters
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
USA
Tel: (763) 514-4000
Fax: (763) 514-4879
www.medtronic.com

Medtronic Patient Services
1 (800) 551-5544
アメリカ中部時間 7 AM ~ 6 PM

開示情報: Medtronic CareLink®モニターは、医師の処方が必要なデバイスで、メドトロニック社製の心臓用植込みデバイスから患者データを送信するために使用します。送信は、医師の指示に基づき、製品マニュアルに記載されている通りに行います。本製品は、緊急時に必要となる適切な医学的処置の代わりとなるものではありません。また、医師の指導のもとでのみ使用して下さい。Medtronic CareLinkサービスは、現在、アメリカ本土、アラスカ、およびハワイでご使用になれます。詳細については医師にご相談下さい。