



Medtronic


SERVICIO MEDTRONIC CARELINK® Hoja descriptiva Acerca de su monitor Medtronic CareLink®

¿En qué consiste el monitor Medtronic CareLink?

El monitor Medtronic CareLink (ilustrado a la derecha) le permite enviar datos a través de una línea telefónica normal desde su dispositivo cardíaco hasta su médico o clínica para su revisión. La unidad es pequeña, portátil y muy fácil de usar.

¿Para qué me servirá el monitor?

La atención de seguimiento permite que su médico tenga acceso a la información más reciente de su dispositivo para garantizar que este último continúe ofreciéndole el mejor tratamiento para su afección cardíaca. El seguimiento remoto con el servicio Medtronic CareLink puede facilitar la atención que usted necesita. Para algunas personas esto significa menos visitas a la consulta y menos desplazamientos de ida y vuelta a la clínica; tiempo que se puede aprovechar para ¡VIVIR LA VIDA! El envío de información desde el dispositivo a la clínica es rápido, cómodo y se puede hacer a través de una línea telefónica normal desde cualquier lugar del territorio continental de Estados Unidos, Alaska o Hawai.

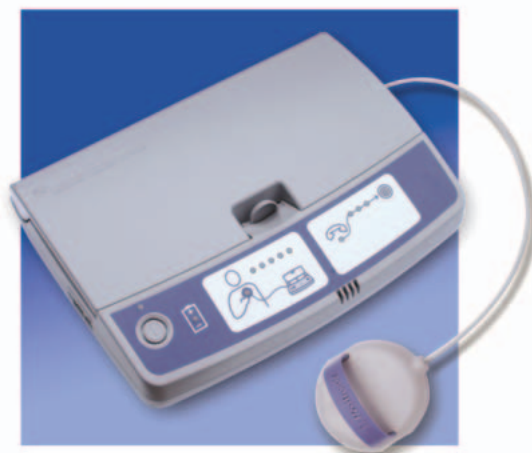

Monitor Medtronic CareLink y antena

¿Cómo funciona?

El monitor Medtronic CareLink ha sido concebido como un medio cómodo para enviar información desde su dispositivo cardíaco a su médico. El uso del monitor es fácil:

1. A la hora programada por su clínica, conecte el monitor Medtronic CareLink a una línea telefónica normal y pulse el botón de encendido. (El monitor funciona con una línea telefónica normal dentro del territorio continental de Estados Unidos, Alaska y Hawai.)
2. Después colocará la "antena" del monitor sobre su dispositivo implantado. El monitor leerá y almacenará la información de su dispositivo. El proceso de lectura suele durar menos de tres minutos, pero podría llevar hasta 12 minutos.
3. El monitor enseguida marca automáticamente un número gratuito preprogramado y envía los datos a un servidor seguro. Cuando el monitor empiece a marcar, retire la antena de su dispositivo implantado. El proceso de envío de información suele durar menos de tres minutos, pero podría llevar hasta 60 minutos, en función de la cantidad de información transferida y del tipo de línea telefónica.

Su clínica utilizará Internet para ver y analizar los datos de su dispositivo. Es posible que se pongan en contacto con usted, dependiendo de sus procedimientos y de su situación en particular. Su médico también puede instruirle para que transmita la información a una hora no programada en caso de experimentar síntomas médicos.

Consulte a su clínica para obtener más información. No deje de leer los datos completos de funcionamiento en el manual del paciente del monitor Medtronic CareLink.



Le ofrece la libertad de **VIVIR**

LA VIDA



Le ofrece la libertad de **VIVIR**

LA VIDA

¿Cuándo recibiré el monitor?

Debe recibir el monitor un par de semanas después de que el médico lo pida. El monitor será enviado en una caja marrón sencilla para su privacidad. Tal vez tenga que firmar para confirmar la recepción. Si no recibe el monitor en el plazo de 30 días, le recomendamos que consulte a su clínica.

¿Cómo se usa?

En la caja encontrará materiales e información acerca del modo de empleo del monitor. Le pedimos que examine estos materiales antes de usar el monitor.

¿Cuándo lo utilizo?

Su clínica le indicará cuándo debe transmitir la información del dispositivo a través del monitor. No utilice el monitor a menos que la clínica le indique que lo haga.

¿Qué debo hacer si tengo dudas?

Si tiene dudas acerca del monitor o de su salud, comuníquese con su clínica.

¿Puedo utilizar el monitor cuando viajo?

Sí. El monitor pesa aproximadamente medio kilo, cabe en una maleta y debe pasar fácilmente a través de la seguridad del aeropuerto. El monitor funciona con una línea telefónica normal en cualquier lugar de Estados Unidos continental, Alaska y Hawai. (No deje de llevar consigo su tarjeta de identificación del dispositivo Medtronic en caso de que le interroguen la seguridad del aeropuerto, ya que su dispositivo médico podrá activar la alarma del detector de metales.)


¿Puedo utilizar este monitor si recibo un nuevo dispositivo implantado?

Consulte a su clínica sobre el uso del monitor si su dispositivo se sustituye por uno nuevo. No utilice el monitor con su nuevo dispositivo a menos que su clínica le indique que lo haga.

Buenas noticias en Internet para los pacientes con DAI de Medtronic

Tener un DAI (desfibrilador automático implantable) puede cambiarle la vida, pero el sitio web para pacientes que usan el monitor Medtronic CareLink puede ayudarle a VIVIR LA VIDA.

Visite www.medtroniccarelink.com: un sitio web exclusivamente para personas con DAI de Medtronic. Este sitio ofrece información fácil de entender acerca del DAI, su afección cardíaca, las descargas eléctricas del dispositivo y consejos prácticos para vivir la vida con un DAI. . . y mucho más.

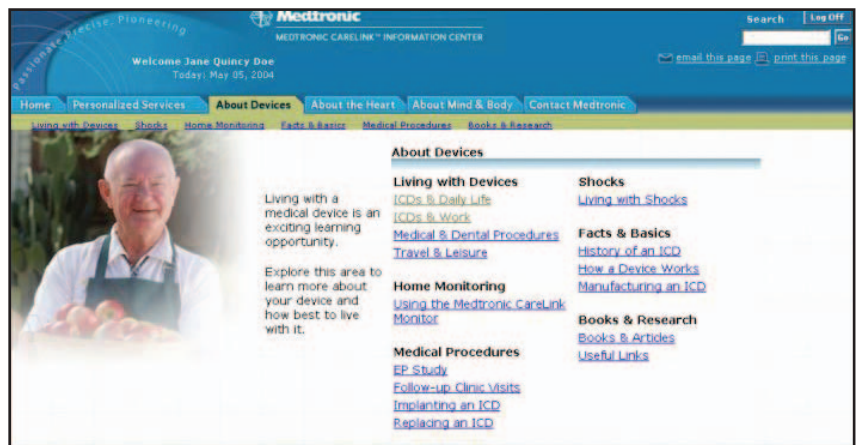

Medtronic

Aliviar el dolor • Devolver la salud • Alargar la vida

Sede mundial
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
Estados Unidos
Tel.: (763) 514-4000
Fax: (763) 514-4879
www.medtronic.com

Servicio al paciente de Medtronic
1 (800) 551-5544 de 7:00 a 18:00 h,
zona horaria central

Declaración: El monitor Medtronic CareLink® es un dispositivo de prescripción médica indicado para la transferencia de datos del paciente desde algunos dispositivos cardíacos implantables de Medtronic. Debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones del médico y como se describe en el manual del producto. Este producto no sustituye a la asistencia médica apropiada en casos de emergencia y sólo debe utilizarse siguiendo las indicaciones de un médico. El servicio Medtronic CareLink está disponible actualmente en el territorio continental de los Estados Unidos, Alaska y Hawai. Para más información, consulte a su médico.

UC200301743d SL
© Medtronic, Inc. 2006
Todos los derechos reservados
Impreso en Estados Unidos