

LADEGERÄT MODELL 37751 ANLEITUNG FÜR RESET

Medtronic

1 HILFSMITTEL


- kleiner Flachkopfschraubendreher
- Büroklammer



2 ENTFERNEN DER ABDECKUNG



3 AUFFINDEN DES RESET-KNOPFES

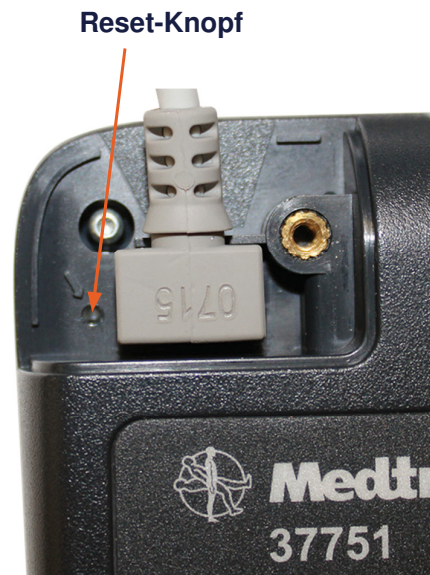

WARNUNG: Führen Sie keinen Reset durch, wenn das Ladegerät mit dem Netzteil verbunden ist.


Lösen Sie die Schraube mit dem Flachkopfschraubendreher und entfernen Sie die Abdeckung.

Suchen Sie den Reset-Knopf.

4 RESET



Biegen Sie die Büroklammer gerade und stecken Sie sie in die Vertiefung des Reset-Knopfes.

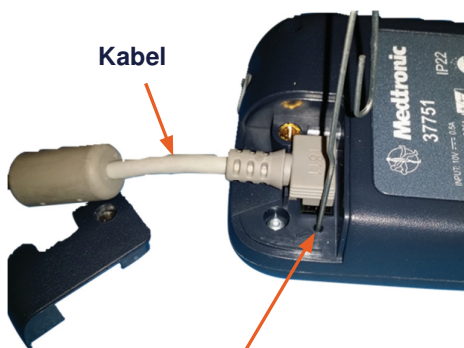

Drücken Sie den Reset-Knopf und halten Sie ihn 2 Sekunden gedrückt. Schrauben Sie anschließend die Abdeckung wieder fest.

Hinweis: Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Abdeckung, dass das Kabel fest eingesteckt ist.

5 BILDSCHIRM QUITTIEREN



Im Bildschirm erscheint die oben gezeigte Meldung. Drücken Sie die grüne Taste, um die Meldung zu quittieren.

6 RESET VORGANG ABSCHLIESSEN



Drücken Sie erneut die grüne Taste, um einen Ladevorgang des Neurostimulators zu starten. Sollte das Ladegerät nicht funktionieren kontaktieren Sie bitte Medtronic.