

Wichtige Information zu Ihrem Ladegerät Modell 37751 für Ihr Neurostimulationssystem

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen eine wichtige Information zu Ihrem Ladegerät Modell 37751 zur Kenntnis bringen. Der Hersteller des Geräts, die Firma Medtronic, hat uns kürzlich über die Möglichkeit informiert, dass es an Ihrem Ladegerät zu einer Fehlfunktion kommen kann. Das Ladegerät lädt den Neurostimulator dabei nicht mehr auf und piept alle fünf Sekunden. Das Ladegerät ist das Gerät, mit dem Sie Ihren wiederaufladbaren implantierten Neurostimulator (das Implantat) aufladen. Dieses Schreiben beinhaltet Informationen, wie Sie die Fehlfunktion vermeiden können bzw. wie Sie den Fehler beheben können falls er auftreten sollte.

Wie erkenne ich den Fehler?

Sie erkennen den Fehler daran, dass Ihr Ladegerät alle fünf Sekunden einen Piepton abgibt, der Bildschirm keine Anzeigen mehr darstellt und die Tasten nicht mehr auf Ihre Eingaben reagieren. Sollte diese Situation auftreten, kann Ihr Ladegerät Ihr Implantat nicht mehr aufladen.

Warum ist es wichtig das zu wissen?

Wenn der Fehler auftritt, kann Ihr Ladegerät das Implantat nicht mehr aufladen. Sollte die Batterie des Implantats leer sein, kann das zu einem Therapieverlust und zur Rückkehr Ihrer Krankheitssymptome führen.

Wie kann ich das Auftreten des Fehlers verhindern?

Um das Auftreten dieses Fehlers zu verhindern, befolgen Sie bitte bei jedem Aufladen Ihres Implantats die folgenden Schritte:

1. Verbinden Sie vor jedem Ladevorgang Ihres Implantats das Ladegerät mit dem Netzteil (Stecker mit weißem Dreieck) (siehe Abbildung 1).

Hinweis: Sofern das Ladegerät selbst ausreichend geladen ist, muss das Netzteil dabei nicht an das Stromnetz angeschlossen werden.

2. Lassen Sie das Ladegerät für die gesamte Dauer des Ladevorgangs mit dem Netzteil verbunden.

Hinweis: Behandeln Sie die Komponenten des Ladegeräts sorgsam und achten Sie auf stabile Steckverbindungen.



Abbildung 1

Wie behebe ich den Fehler wenn er auftritt?

Sollten Sie das Netzteil während des Ladevorgangs des Implantats nicht mit dem Ladegerät verbunden haben und der Fehler tritt auf, dann kontaktieren Sie bitte Ihren betreuenden Arzt in unserer Einrichtung oder wenden Sie sich an die Firma Medtronic unter der Rufnummer 02159/8149-171. Wir oder die Firma Medtronic können Ihnen dabei behilflich sein einen Neustart des Geräts durchzuführen, um ein Aufladen Ihres Neurostimulators wieder zu ermöglichen.

Auch nach einem Neustart kann der Fehler erneut auftreten, wenn die Empfehlungen für den Ladevorgang nicht beachtet werden. Denken Sie daran, dass das Verbinden von Ladegerät und Netzteil während des Ladevorgangs das Auftreten des Fehlers verhindert.

Kontaktieren Sie unverzüglich unsere Klinik wenn Sie eine Rückkehr Ihrer Krankheitssymptome verspüren, damit wir Sie in geeigneter Art und Weise behandeln können.

Wir bedauern jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Sachverhalt für Sie mit sich bringt und danken Ihnen für Ihre Zeit und die Aufmerksamkeit, die Sie dieser wichtigen Information entgegenbringen.

Mit freundlichen Grüßen

