

Laden beenden:



Der Ladevorgang endet automatisch, wenn der Neurostimulator voll geladen ist.

Ladegerät aufladen:



Verbinden Sie das Netzteil mit dem Ladegerät (Pfeil auf Pfeil) \blacktriangleright und stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose. Die Aufladung startet automatisch.



Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
40670 Meerbusch
Telefon: +49-2159-81 49-0
Telefax: +49-2159-81 49-100
deutschland@medtronic.com
www.medtronic.de



UC201601943 DEPDF © Medtronic, GmbH, 2015. Alle Rechte vorbehalten.



Das Ladegerät für Neurostimulatoren



Vollständige Informationen und Hinweise zum Gerät finden Sie im Patientenhandbuch. Bei Ausfall der Stimulation kontaktieren Sie bitte Ihren behandelnden Arzt.

Aufladen des Neurostimulators:



Schritt 1: Setzen Sie die Antenne in den Antennenhalter ein.



Schritt 2: Positionieren Sie den Antennenhalter über dem Neurostimulator und ziehen Sie den Gurt fest.



Schritt 3: Drücken Sie die grüne Taste, um den Ladevorgang zu starten.

Ladeeffizienz verbessern:



Schritt 4: Je mehr schwarze Kästchen angezeigt werden, desto schneller wird Ihr Neurostimulator aufgeladen.



Schritt 5: Positionieren Sie bei Bedarf die Antenne neu und drücken Sie erneut die grüne Taste, um eventuell schneller laden zu können.



Schritt 6: Drücken Sie die schwarze Taste, um den Ladevorgang abubrechen.