

DAS WICHTIGSTE ZUM PATIENTENGERÄT



DAS WICHTIGSTE ZUM PATIENTENGERÄT

TASTEN DES PATIENTENGERÄTS

A. Stimulation Ein/Aus

Ein-/Ausschalten der Stimulation

B. Akkuleuchte

Anzeige des Akkuladestatus (bei Verwendung wiederaufladbarer Neurostimulatoren)

C. Touchscreen

Der Bildschirm reagiert auf Berührungen, sodass Sie Schaltflächen und Funktionen auf dem Bildschirm betätigen können.

D. Taste Höher/Niedriger

- Aktivieren („Aufwecken“) des Patientengeräts
- Anpassen der Stimulation
- Auswahl und Navigation der Einstellungen auf dem Bildschirm

E. Ladebuchse

(bei Verwendung wiederaufladbarer Neurostimulatoren)

- Anschluss des Ladekabels
- Zum Aufladen des Patientengeräts
- Zum Aufladen des Neurostimulators

Hinweis: Für die meisten Funktionen des Patientengeräts muss dieses zunächst mit der Taste **Höher/Niedriger** aktiviert („geweckt“) werden.



B. Schloss-Taste

- Zum Sperren des Patientengeräts drücken

C. Menü-Taste

- Zum Aufrufen des **Menü**-Bildschirms drücken

D. Gruppen-Taste

- Zur Anzeige des aktuellen Gruppennamens (A, B oder C) drücken
- Die aktive Gruppe ist grün hervorgehoben.

Hinweis: Die **Gruppen-Taste** ist bei abgeschalteter Stimulation ausgegraut. Eine orangefarbene Meldung weist darauf hin, dass die Stimulation abgeschaltet ist.

E. Programm-Tasten

- Zur Anzeige von bis zu vier Programmen drücken, die von 1–4 nummeriert sind.
- Die **Programm-Taste** auf dem Home-Bildschirm drücken; dann erscheinen die verfügbaren Einstellungen für das Programm:



Intensität — steuert die Stärke der Stimulation



Stimulation — schaltet die Stimulation ein oder aus



Frequenz — bestimmt die Frequenz der Stimulationsimpulse



AdaptiveStim™ — schaltet AdaptiveStim™ ein oder aus (diese Funktion ist nur bei implantierten Neurostimulatoren vom Typ **Intellis™ mit AdaptiveStim™ Technologie** verfügbar)



Impulsdauer — gibt die Dauer der Stimulationsimpulse vor (dies beeinflusst Stärke und abgedeckten Bereich der Stimulation)



Zyklus — schaltet die Stimulation in regelmäßigen Abständen (wie vom Arzt programmiert) ein und aus




Tasten Auf/Ab — mit ihnen lassen sich zusätzliche Parameter und Stimulationseinstellungen in einem Programm anzeigen (je nach Programmierung Ihres Neurostimulators durch Ihren Arzt können diese Schaltflächen fehlen)

ÜBERBLICK ÜBER DEN THERAPIE-BILDSCHIRM


A. Taste Akkustatus


- Zum Anzeigen des Akkustatus drücken
- Symbol links: Akkustatus des Patientengeräts
- Symbol rechts: Akkustatus des Neurostimulators

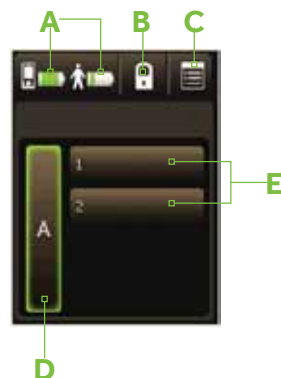

DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN DES PATIENTENGERÄTS

Patientengerät entsperren

- Die Taste **Höher/Niedriger** drücken, um das Patientengerät zu aktivieren („auf wecken“): Nun erscheint der Entsper-Bildschirm.
 - Auch bei gesperrtem Patientengerät kann die Taste Stimulation **Ein/Aus** gedrückt werden, um den **Entsperr-Bildschirm** zu umgehen und die Stimulation unmittelbar/direkt/sofort ein-oder auszuschalten.
- Die **Schloss**-Taste () auf dem Entsper-Bildschirm drücken und halten.
 - Während die **Schloss**-Taste gehalten wird, erscheinen auf dem Bildschirm Balken, die sich zur **Schloss**-Taste hin bewegen.
 - Die **Schloss**-Taste loslassen, sobald auf dem Bildschirm ein Kreis aus Punkten erscheint. Dies zeigt an, dass das Patientengerät nach Ihrem Neurostimulator sucht.

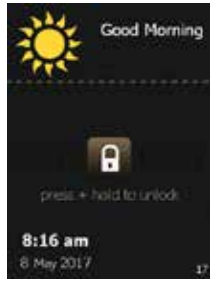

Stimulation für alle Programme einer Gruppe ein-/ausschalten

- Die Taste Stimulation **Ein oder Aus** drücken (oben am Patientengerät), um die Stimulation ein- oder auszuschalten.
 - Oder die **Schloss**-Taste drücken, wenn stattdessen der Home-Bildschirm geöffnet werden soll.
- Der Home-Bildschirm erscheint, um zu bestätigen, ob die Stimulation eingeschaltet ist.

Hinweis: Die aktive Gruppe ist grün hervorgehoben, wenn die Stimulation eingeschaltet ist.

Stimulation anpassen

- Eine **Programm**- HOME-BILDSCHIRM

Taste auf dem **Home**-Bildschirm drücken. Die verfügbare Einstellung für das Programm erscheint.

- Die Taste **Höher/Niedriger** verwenden, um die gewünschten Programmeinstellungen vorzunehmen.




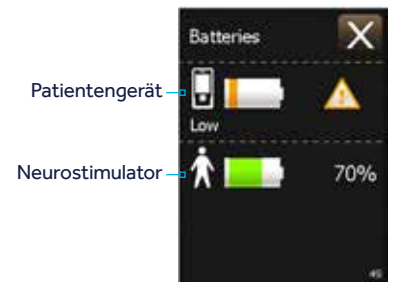
Hinweis: Je nach Programmierung Ihres Neurostimulators durch den Arzt können manche Einstellungen fehlen.

Gruppe wechseln

- Auf dem **Home**-Bildschirm die Gruppe links auf dem Bildschirm auswählen, um Zugriff auf die anderen verfügbaren Gruppen zu haben. Dann den Kreis neben der gewünschten Gruppe auswählen. Es kann jeweils nur eine Gruppe aktiviert werden.
- Es können bis zu 3 Gruppen verfügbar sein. Die Gruppen sind mit dem Buchstaben A, B und C gekennzeichnet.
- OK** drücken. Der **Home**-Bildschirm zeigt nun die gewählte Gruppe an.

Akkustatus des Patientengeräts überprüfen

- Auf dem **Home**-Bildschirm die **Akkustatus**-Taste drücken. Zwei Akkusymbole erscheinen.
- Die **X**-Taste () oben rechts auf dem Touchscreen drücken, um das Programm zu verlassen.



Ausführliche Informationen zur Verwendung (Implantationsverfahren) sowie zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und potenziellen unerwünschten Ereignissen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produkts. Bei Verwendung eines SureScan® MRI Geräts muss vor der MRT-Untersuchung das technische SureScan® MRI Handbuch herangezogen werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Medtronic Vertriebsmitarbeiter und/oder auf der Medtronic Website unter www.medtronic.de.

Medtronic

Europa
Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Telefon: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00




Österreich
Medtronic Österreich GmbH
Millennium Tower
Handelskai 94-96
AT-1200 Wien
vienna@medtronic.com
www.medtronic.at
Telefon: +43 (0)1 240 44 0
Telefax: +43 (0)1 240 44 100

Deutschland
Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
DE-40670 Meerbusch
deutschland@medtronic.com
www.medtronic.de
Telefon: +49 (0)2159 81 49 0
Telefax: +49 (0)2159 81 49 100

Schweiz
Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Telefon: +41 (0)31 868 01 00
Telefax: +41 (0)31 868 01 99

WARNUNGEN, ALARME UND MELDUNGEN

Warnbildschirme weisen auf Probleme mit Patientengerät, Ladegerät oder Neurostimulator hin. Siehe Abschnitt Warnbildschirme im Handbuch des Bediengeräts (Patientengeräts) mit genauen Informationen zu den einzelnen Meldungen.

Symbol	Beschreibung	Bildschirmtyp
	Rotes Dreieck mit Ausrufezeichen	Warnbildschirm
	Orangefarbenes Dreieck mit Ausrufezeichen	Alarmbildschirm
	Blauer Kreis mit dem Buchstaben „i“	Meldungsbildschirm

UC201800066DE © Medtronic 2017.
Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in Europa.
Nicht zur Verteilung in Frankreich bestimmt.