

CARELINK™ PERSONAL CHECKLISTE

Medtronic

Diese Checkliste dient der Unterstützung zur Interpretation von SmartGuard™ Auto-Modus-Daten der MiniMed™ 670G. Die CareLink Checkliste kann auch für die Dateninterpretation der MiniMed™ 640G und des Guardian Connect™ verwendet werden, jedoch treffen einige der hier aufgezeigten Informationen für diese Produkte nicht zu. Die ausgefüllte Checkliste gibt einen groben Überblick, bei welchen Punkten Ihrer Diabetestherapie Sie gemeinsam mit ihrem behandelnden Arzt besser noch einmal genau hinschauen sollten. Sollten Sie Rückfragen oder Unklarheiten haben, empfehlen wir Ihnen mit ihrem behandelnden Arzt in Kontakt zu treten.

BERICHT: BEURTEILUNG & FORTSCHRITT



Zeit im Zielbereich (70-180 mg/dl; 3,9 mmol/l-10 mmol/l)

	70 - 180 mg/dl oder 3,9 - 10,0 mmol/l (Ziel: > 70 % Erwachsene; >65% Kinder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	54-70 mg/dl oder 3,0 - 3,9 mmol/l (Ziel: ≤ 3 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	< 54 mg/dl oder 3,0 mmol/l (Ziel: ≤ 1%)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Statistik

	Auto-Modus (Ziel: > 80 % der Zeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sensortragedauer (Ziel: > 85 % der Zeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Anzahl Alarme – vgl. tägliche Übersicht (so viel wie nötig, so wenig wie möglich)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BZ / Kalibrierungen (Empfehlung 3-4 pro Tag)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Basal / Bolus Verhältnis (Ziel: 40/60 bis 50/50 bei Erwachsenen; Basalanteil kann geringer bei Kindern sein)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Set-Wechsel (alle 2-3 Tage - wird nur für Sets mit Kunststoffkanüle angezeigt)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hauptgründe beenden Auto-Modus (besonders wichtig, wenn Zeit im Auto-Modus <80%)



NOTIZEN

Glukoseprofil (Perzentilen Vergleich/Muster/KH-Faktoren)

	Interquartilsabstand (blauer Schlauch): Innerhalb des Zielbereichs? Verbessert gegenüber der Vergleichsperiode (oranger Schlauch)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hypoglykämien & Hyperglykämien: Gibt es Muster? Häufig, verlängert oder stark?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTIZEN





BERICHT: MAHLZEITEN

	Vor der Mahlzeit: Im Zielbereich? Steigend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nach der Mahlzeit (2 h): Variabilität? Anstieg > 60 mg/dl (3,3 mmol/l)? Hypoglykämien?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTIZEN

BERICHT: WÖCHENTLICHE & TÄGLICHE ÜBERSICHT

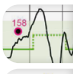

	Kalibrierungen: In der Glukosestabilität? Häufigkeit? Nachts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mahlzeitenbolus: KH-Faktor? KH-Berechnung? Zeitpunkt Bolus (& Bolus-Splitting)? Phantom-KH? Anzahl Mahlzeiten? Verpasster Bolus?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Korrekturbolus: Angemessene Korrektur? Zeit aktives Insulin?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nachtverlauf: Anzahl Alarme? Im Zielbereich? Stabil? Mahlzeitenboli/ KH-Faktor am Abend? Korrekturboli/ Zeit aktives Insulin am Abend?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Körperliche Betätigung: Temporäres Ziel bzw. Basalrate? Abgabeunterbrechung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

NOTIZEN



Alles in Ordnung



Nochmal genauer ansehen



Hinweis: Sprechen Sie immer erst mit Ihrem Arzt über Therapieänderungen bevor Sie diese vornehmen. Beachten Sie, dass alle Produkte und Therapien Risiken bergen und dies nur allgemeine Analysehinweise sind, die nicht auf Sie zutreffen müssen.

Medtronic

Medtronic GmbH
Geschäftsbereich Diabetes
Postfach 1441
40639 Meerbusch
deutschland@medtronic.com
Telefon: +49 (0)2159 81 49 370
Telefax: +49 (0)2159 81 49 110
24-Stunden-Hotline:
0800 6464633
www.minimed-fachkreise.de

www.medtronic.de

Ausführliche Informationen zur Verwendung sowie zu Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und potenziellen unerwünschten Ereignissen finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Produkts. Wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Medtronic, wenn Sie weitere Informationen wünschen.

© UC 202102089 DEPDF © Medtronic GmbH 06/2020. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic-Logo und „Further, Together“ sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Handelszeichen eines Medtronic-Unternehmens.