

Carelink[®] Personal Windows 10

Medtronic

Bitte Öffnen Sie Microsoft Edge und suchen Sie nach unserer Webseite:

<https://carelink.minimed.eu>

Sie bekommen dann folgende Fehlermeldung angezeigt:

Sie haben versucht, auf das CareLink Personal-System zuzugreifen.


Leider entspricht die Konfiguration Ihres PC oder Ihres Webbrowsers nicht unseren standardmäßigen Systemanforderungen. Nachfolgend wird die Konfiguration Ihres PC mit den Anforderungen des CareLink Personal-Systems verglichen. Lesen Sie diesen Vergleich durch und ändern Sie die Konfiguration Ihres PC bzw. Ihrer Browsersoftware, sofern möglich.

Sie können das CareLink Personal-System mit Ihrer aktuellen Konfiguration verwenden, indem Sie auf die unten stehende Schaltfläche „Weiter“ klicken. Medtronic kann den ordnungsgemäßen Betrieb dann aber nicht gewährleisten.

Ihre Einstellungen	Erforderliche Einstellungen
Plattform: ■ Windows NT	Windows 8/8.1-Benutzer: Schließen Sie alle über den Startbildschirm gestarteten Browser und öffnen Sie Ihren Browser vom Desktop aus. Windows XP/Vista/7, Windows 8/8.1 Desktop, MacOSX 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
Browser: ■ Chrome 42.0.2311.135	IE 7/8/9, IE 10/11 Desktop (Windows), Safari 5/6/7/8 (Mac OS), Firefox 24
Applets: unterstützt	unterstützt
JavaScript: aktiviert	aktiviert
SSL: 128-Bit-Schlüssel	128-Bit-Schlüssel
Auflösung: 1600x900	800 x 600 oder höher

Bitte klicken Sie dann:

- 1) Oben rechts auf das Menü und
- 2) Wählen Sie „Mit Internet Explorer öffnen“ aus

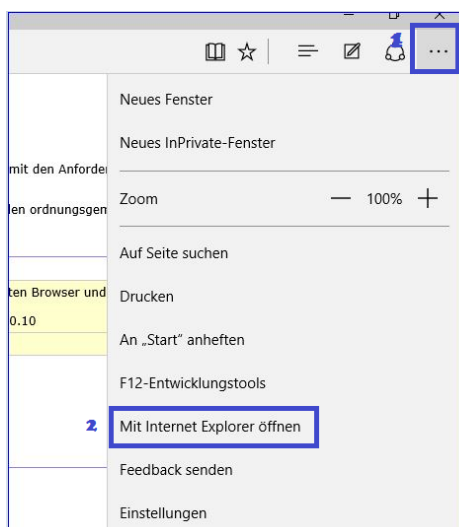

Sie bekommen dann wieder eine Fehlermeldung angezeigt, hier können Sie jedoch auf „weiter“ klicken.

Klicken. Medtronic kann den ordnungsgemäßen Betrieb dann aber nicht gewährleisten.

Ihre Einstellungen		Erforderliche Einstellungen
Plattform:	■ Windows NT	Windows 8/8.1-Benutzer: Schließen Sie alle über den Startbildschirm gestarteten Browser und öffnen Sie Ihren Browser vom Desktop aus. Windows XP/Vista/7, Windows 8/8.1 Desktop, MacOSX 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
Browser:	■ Mozilla 11.0	IE 7/8/9, IE 10/11 Desktop (Windows), Safari 5/6/7/8 (Mac OS), Firefox 24
Applets:	unterstützt	unterstützt
JavaScript:	aktiviert	aktiviert
SSL:	128-Bit-Schlüssel	128-Bit-Schlüssel
Auflösung:	1600x900	800 x 600 oder höher
Farbtiefe:	24-Bit-Farben	8-Bit-Farben oder höher

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte unter **+49 (0)800 6464633** an unseren Kundendienst.

Vielen Dank.



Die Webseite wird sich dann ganz normal öffnen und Sie können sich einloggen.