



WENIGER  
NADELSTICHE –  
**MEHR LEBENS-  
QUALITÄT**



**i-Port Advance™**

Injektionsport zur Verabreichung von Insulin

**Medtronic**  
Further. Together

# DIE UNTERSCHÄTZTE HERAUSFORDERUNG IN DER INSULIN- BEHANDLUNG

## I-PORT ADVANCE – FORTSCHRITT BEI DER INSULININJEKTION



# 47%

DER PATIENTEN  
EMPFINDEN DAS  
INSULINSPRITZEN  
ALS UNANGENEHM  
UND ENTWICKELN  
ÄNGSTE.<sup>1</sup>



# 63%


DER PATIENTEN LEIDEN  
UNTER HAUTLÄSIONEN,  
HÄMATOMEN UND  
SPRITZSTELLEN-  
VERÄNDERUNGEN.<sup>1</sup>



## I-PORT ADVANCE

**EINFACH GELEGT -  
SCHMERZFREI  
INJIZIERT**

# I-PORT ADVANCE – SO FUNKTIONIERT ES

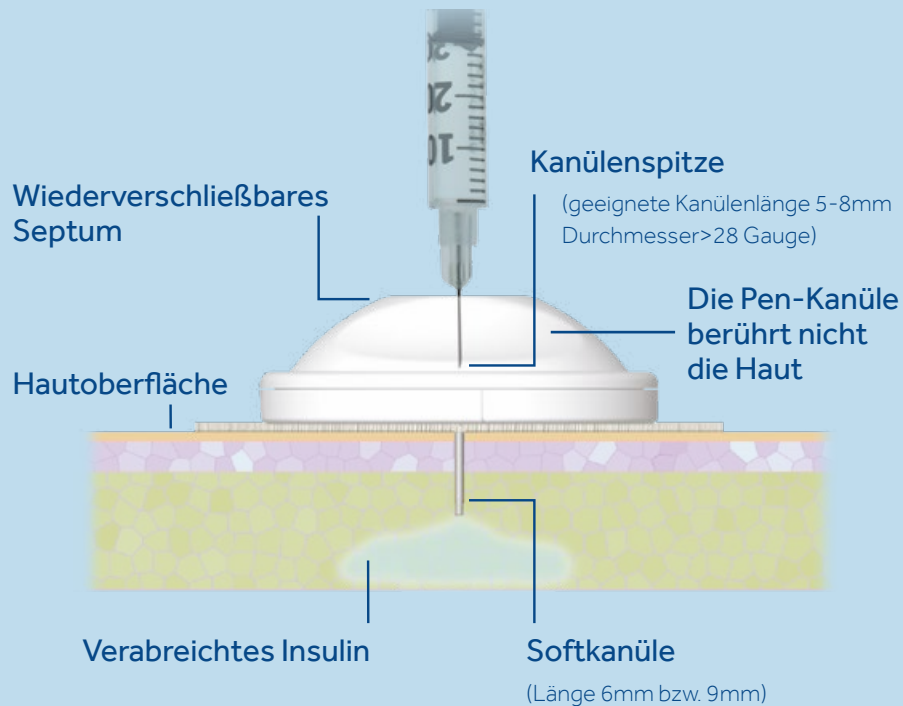

# IHRE INSULINTHERAPIE BLEIBT UNVERÄNDERT<sup>4</sup>

FÜR ALLE INSULINE  
GEEIGNET


FÜR ALLE INSULIN-  
PENS GEEIGNET

FÜR **BASAL- UND  
BOLUSGABEN**  
MÖGLICH



## GEEIGNETE EINFÜHRSTELLEN

- Fragen Sie Ihren Arzt, welche Einführstelle für Sie am besten in Frage kommt / geeignet ist.
- Bitte vor dem Anlegen desinfizieren und die Stelle gut abtrocknen lassen.

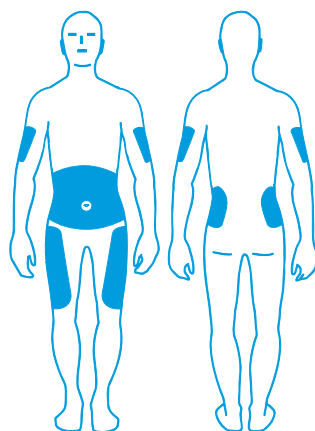

■ Einführstellen

## DAS MÜSSEN SIE BEACHTEN

- Zwischen den Insulinabgaben verschiedener Insuline (Bolus / Basal) müssen 60 Minuten Abstand liegen
- Das Bolusinsulin sollte immer zuerst injiziert werden
- Die Pen-Nadel berührt **nicht** die Haut



KURZWIRKENDES  
INSULIN



LANGWIRKENDES  
INSULIN



# I-PORT ADVANCE – ERLEICHTERT DEN ALLTAG

# I-PORT ADVANCE – SCHMERZFREI UND BEQUEM

## BEQUEM

Der i-Port Advance kann im Alltag bei allen Aktivitäten getragen werden – auch beim Sport, beim Schlafen oder beim Baden. So bleiben Sie im Alltag flexibel.<sup>2</sup>



SPORT



SCHLAFEN



SCHWIMMEN/  
BADEN



# 98%

DER ANWENDER  
FANDEN, DASS DER  
I-PORT ADVANCE  
BEQUEM ZU  
TRAGEN IST.<sup>1</sup>




# 100%

DER ANWENDER GABEN  
AN, DASS IHNEN DER  
I-PORT ADVANCE BEI  
DER BEWÄLTIGUNG  
IHRER SPRITZENANGST  
GEHOLFEN HAT.<sup>1</sup>

## SCHMERZFREI

Anstelle von durchschnittlich 15 Nadelstichen (Bolos- und Basalgaben) in drei Tagen, wird der i-Port Advance nur alle drei Tage gelegt.<sup>3</sup>

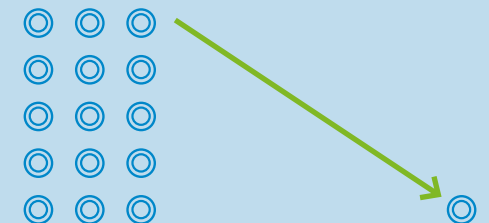

STANDARDMÄSSIGE  
INJEKTIONEN

MIT I-PORT  
ADVANCE

# MEHR LEBENSQUALITÄT MIT I-PORT ADVANCE

▪ **Erhältlich bei Medtronic, fragen Sie Ihren Arzt!**

▪ **Im 10er-Pack erhältlich!**

Artikelnummern i-Port Advance:

- 6mm Kanüle: MMT-100, PZN14017702
- 9mm Kanüle: MMT-101, PZN 14017725

▪ **Für mehr Information: [www.medtronic-diabetes.de](http://www.medtronic-diabetes.de)**



## Quellen:

- 1 Riley D, Raup G. Impact of a subcutaneous injection device on improving patient care. Nurs Manage. 2010;41(6):49–50
- 2 Rabbone I, Bobbio A, Di Gianni V, Sacchetti C, Cerutti F. Intensive insulin therapy in preschool-aged diabetic children from multiple daily injections to continuous subcutaneous insulin infusion through indwelling catheters. J Endocrinol Invest. 2008;3 (3):193-195
- 3 Hanas R, Adolfsson P, Elfvin-Akesson K et al. Indwelling catheters used from the onset of diabetes decrease injection pain and pre-injection anxiety. J Pediatr. 2002;140(3):315-320
- 4 Blevins T, Shwartz SL, Bode B et al. A study assessing an injection port for administration of insulin. Diabetes Spectr. 2008;21(3):197–202

Hergestellt von:



## Medtronic

### Deutschland

Medtronic GmbH  
Geschäftsbereich Diabetes  
Postfach 1441  
40639 Meerbusch  
Telefon: +49 (0)2159 81 49 -370  
Telefax: +49 (0)2159 81 49 -110  
24-Stunden-Hotline: 0800 6464633  
[www.medtronic-diabetes.de](http://www.medtronic-diabetes.de)  
[www.medtronic.de](http://www.medtronic.de)

### Österreich

Medtronic Österreich GmbH  
Handelskai 94–96  
1200 Wien  
Telefon: +43 (0)1 24044 -190  
Telefax: +43 (0)1 24044 -199  
Hotline: +43 (0)820 820190  
[info.diabetes-austria@medtronic.com](mailto:info.diabetes-austria@medtronic.com)  
[www.medtronic-diabetes.at](http://www.medtronic-diabetes.at)  
[www.medtronic.at](http://www.medtronic.at)

### Schweiz

Medtronic (Schweiz) AG  
Talstr. 9  
Postfach 449  
3053 Münchenbuchsee  
24-Stunden-Hotline: 0800 633 333  
Telefon: +41 (0)31 8680160  
[diabetes.schweiz@medtronic.com](mailto:diabetes.schweiz@medtronic.com)  
[www.medtronic-diabetes.ch](http://www.medtronic-diabetes.ch)  
[www.medtronic.ch](http://www.medtronic.ch)

[www.medtronic-diabetes.de](http://www.medtronic-diabetes.de)