

SYSTÈME DE RECHARGE DE VOTRE NEUROSTIMULATEUR STIMULATION CÉRÉBRALE

GUIDE SIMPLIFIÉ
D'UTILISATION



Si votre médecin et vous décidez qu'un neurostimulateur rechargeable constitue la meilleure solution pour vous, **vous devrez recharger votre neurostimulateur régulièrement.**

Ce document explique comment recharger votre neurostimulateur.

Pour plus de détails, veuillez-vous référer au manuel d'utilisation du système de recharge ou contacter votre médecin.



Chargeur

Remarque : Avant la première utilisation du chargeur, vous devez placer celui-ci sur le socle. L'idéal est de charger complètement le chargeur.

Pour préparer l'utilisation du chargeur, procédez comme suit :

1. Branchez le câble USB sur le socle.
2. Branchez le câble USB sur l'adaptateur secteur, puis l'adaptateur sur une prise murale. Lorsque le socle est branché, il doit être placé sur une surface plane.

Remarque : Un témoin lumineux vert sur le socle à proximité du câble USB, indique que le socle est alimenté.

3. Placez le chargeur, côté bleu orienté vers le bas, sur le socle. Le témoin ① indique l'état de chargement de votre chargeur.

En cours de Chargement	Complètement chargé

4. Une fois que le chargeur est complètement chargé, suivez les étapes de la page 4 pour effectuer la recharge de votre neurostimulateur.

CONSEIL : Branchez toujours votre socle de recharge à une prise de courant, et laissez votre chargeur sur le socle lorsque vous ne l'utilisez pas.

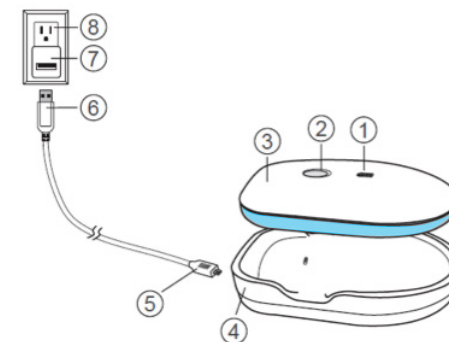



Figure 1. Charge du chargeur

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Témoin de charge du chargeur | micro-USB) |
| 2. Bouton d'alimentation | 6. Câble USB (embout USB-A) |
| 3. Chargeur | 7. Adaptateur secteur |
| 4. Socle | 8. Prise murale (à titre d'exemple) |
| 5. Câble USB (embout | |

DÉMARRAGE RAPIDE & RECHARGE DE VOTRE NEUROSTIMULATEUR

1. Localisez votre neurostimulateur sous la peau.
2. Placez le chargeur dans l'écharpe sans oublier le contre-poids et placez l'écharpe ou la ceinture sur vous, de manière à ce que le chargeur soit en regard de votre neurostimulateur (voir page 5 pour la mise en place de votre matériel).
3. Allumez le chargeur en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation.  Le chargeur se mettra en recherche du neurostimulateur.



4. Ajustez la position du chargeur selon les besoins jusqu'à entendre 2 tonalités croissantes, signifiant que votre neurostimulateur est en charge. Lorsque le chargeur est connecté au neurostimulateur, le témoin lumineux est vert fixe.




5. Dès que le chargeur est connecté, il démarre automatiquement la charge. Durant la charge, le témoin lumineux sur le chargeur clignote lentement.




6. Une fois la charge terminée, vous entendrez une série de tonalités croissantes, et le témoin lumineux sera vert et fixe à nouveau.



7. Quand le cycle de charge est terminé, éteignez le chargeur en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. 
8. N'oubliez pas de remettre votre chargeur sur son socle de recharge.

Signaux d'alertes

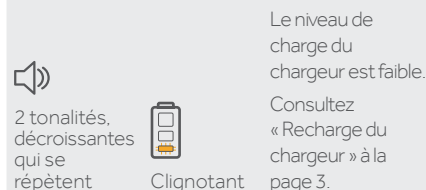


QUESTIONS FRÉQUENTES & RAPPELS

MISE EN PLACE DE VOTRE MATERIEL

1. Placez votre chargeur dans la poche de la ceinture ou de l'écharpe. Les 2 cercles du chargeur doivent s'aligner sur les 2 cercles de la ceinture/écharpe afin de garantir le maintien de la connexion.
2. Enroulez la ceinture autour de la taille et attachez-la, ou bien placez votre écharpe autour du cou en ajoutant le contre-poids de l'autre côté de l'écharpe.
3. Ajustez la ceinture ou l'écharpe de sorte que le chargeur soit parfaitement au-dessus du site du neurostimulateur. Les 2 cercles doivent être orientés vers vous, et non vers l'extérieur.



ATTENTION : Bien placer le côté bleu du chargeur face contre corps et non vers l'extérieur !

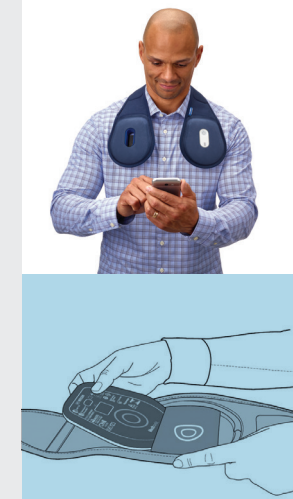

PUIS-JE INTERROMPRE LA CHARGE ?

Il est recommandé de recharger entièrement votre neurostimulateur; cependant il est possible d'interrompre la charge même si le neurostimulateur n'est pas entièrement chargé. Dans ce cas, vous devez néanmoins recharger votre neurostimulateur à 25 % minimum. Pour interrompre la charge, éteignez votre chargeur en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation, puis reposez-le sur le socle.



NE JAMAIS ATTENDRE QUE VOTRE NEUROSTIMULATEUR SOIT ENTIÈREMENT DÉCHARGÉ POUR LE RECHARGER

Ce chargeur peut être utilisé avec ou sans télécommande, bien que celle-ci soit fortement recommandée.



UNE QUESTION ? UNE INFORMATION ?

Medtronic Assistance est un service de professionnels de santé pour les patients implantés d'un neurostimulateur Medtronic.

À votre écoute, les équipes vous aident à répondre aux questions techniques relatives à votre dispositif médical implanté.

N'hésitez pas à les solliciter.

UN SERVICE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ À VOTRE ÉCOUTE

0 800 38 17 00

Service & appel
gratuits

Du lundi au vendredi 9h - 18h

Medtronic

Medtronic France S.A.S.

27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001

92513 Boulogne-Billancourt Cedex

Tél. : 01 55 38 17 00

Fax : 01 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

UC202107454FF © Medtronic France 2020.

Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.

Production : PARAGON CC. Création août 2020.