

医療関係者各位

日本メドトロニック株式会社  
ダイアビータイス

## 「ケアリンク™システム」、「ケアリンク™パーソナル」アップデートのご案内

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、格別のご高配を賜り、御礼申し上げます。さてこの度、ご愛顧頂いておりますケアリンク システムならびにケアリンク パーソナルにつきまして、下記の通り出力可能なレポートの種類の変更およびシステムのアップデートをいたしましたので、ご案内申し上げます。今後とも弊社ダイアビータイス製品をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

### 【対象製品】

ケアリンク システム および ケアリンク パーソナル

### 【アップデート内容】

- ① ミニメド 640G インスリンポンプにおいて出力可能なレポートの変更
- ・出力可能となったレポート: 評価と進捗状況 (ケアリンク パーソナル画面上の表記は評価およびプログレス)
  - ・出力不可となったレポート: ダッシュボード、エピソードサマリ

当変更により、ミニメド 640G インスリンポンプにおいて出力可能なレポートは下表のとおり変更となりました

レポート名	旧	新
評価と進捗状況	×	○
ダッシュボード	○	×
食事ボーラスウィザード	×	×
エピソードサマリ	○	×
アドヒアランス	○	○
センサと血糖自己測定器の概要	○	○
ログブック	○	○
機器設定	○	○
1日の詳細	○	○

※上表の青枠箇所が変更点となります。詳細は別紙 1、2 をご参照下さい。

- ② 新たな国・言語への対応(アップローダ)
- ・国: アゼルバイジャンをはじめ、新たに 13 か国でのサービスを開始しました
  - ・言語: 中国語(簡体字)をはじめ、新たに 9 つの言語に対応しました

### 【お願い事項】

今回のアップデートに伴い、PC にインストールされているアップローダについてもアップデートが必要となります。アップローダをご使用のお客様は、画面の表示に従い、アップデート作業を行って頂けますようお願い致します。

以上

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。


販売名: メドトロニック ミニメド 600 シリーズ 医療機器承認番号: 22500BZX00369000

販売名: メドトロニック ガーディアン コネクト 医療機器承認番号: 22900BZX00321000

DIB2103-38 © 2021 Medtronic.

ミニメド 640G インスリンポンプにおいて出力可能となった「評価と進捗状況」レポート

※ミニメド 620G インスリンポンプでは出力できません。

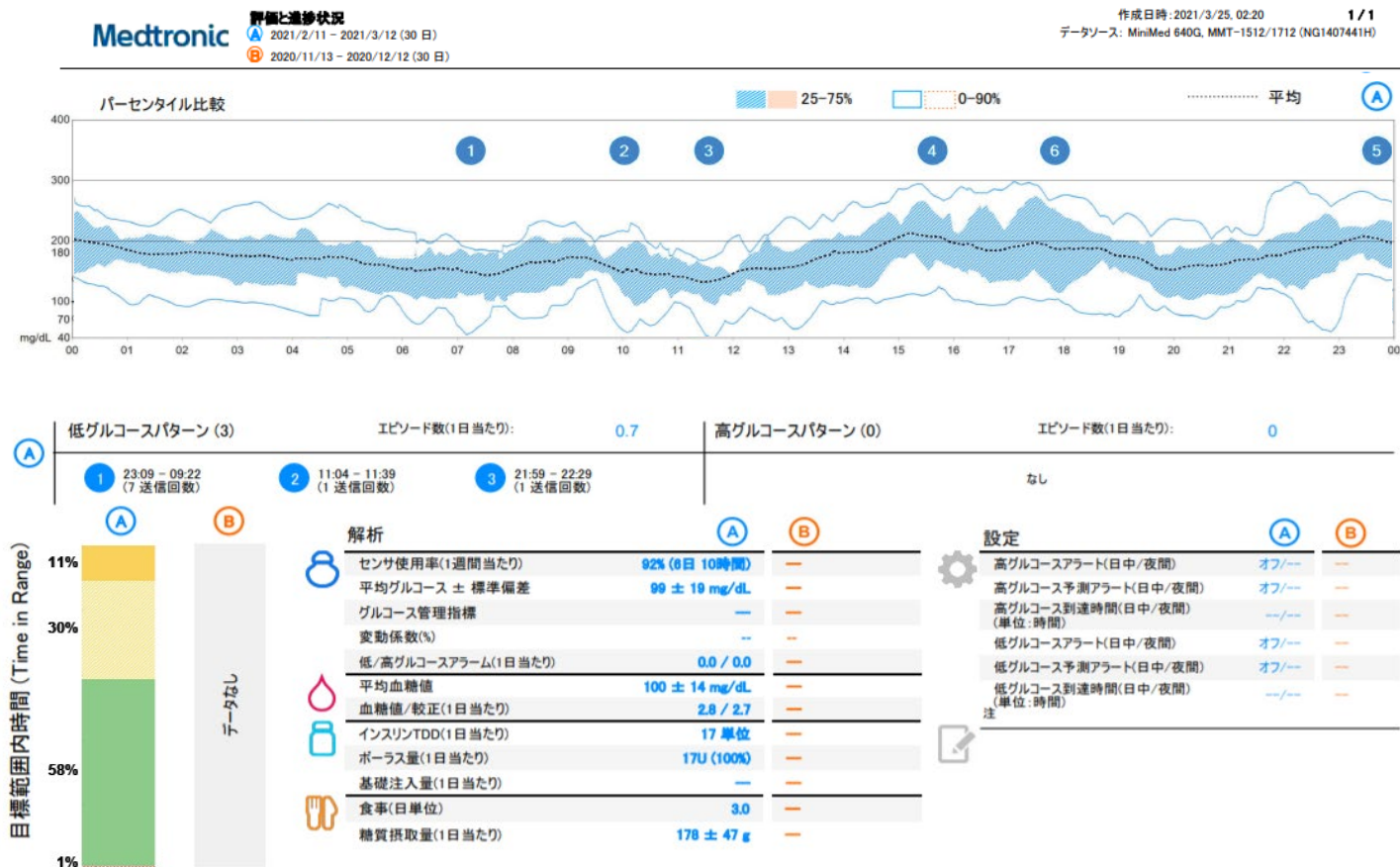

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。



販売名: メドトロニック ミニメド 600 シリーズ 医療機器承認番号: 22500BZX00369000

販売名: メドトロニック ガーディアン コネクト 医療機器承認番号: 22900BZX00321000

DIB2103-38 © 2021 Medtronic.

ミニメド 640G インスリンポンプにおいて出力不可となった「ダッシュボード」、「エピソードサマリ」レポート

※ミニメド 620G インスリンポンプは出力可能です。

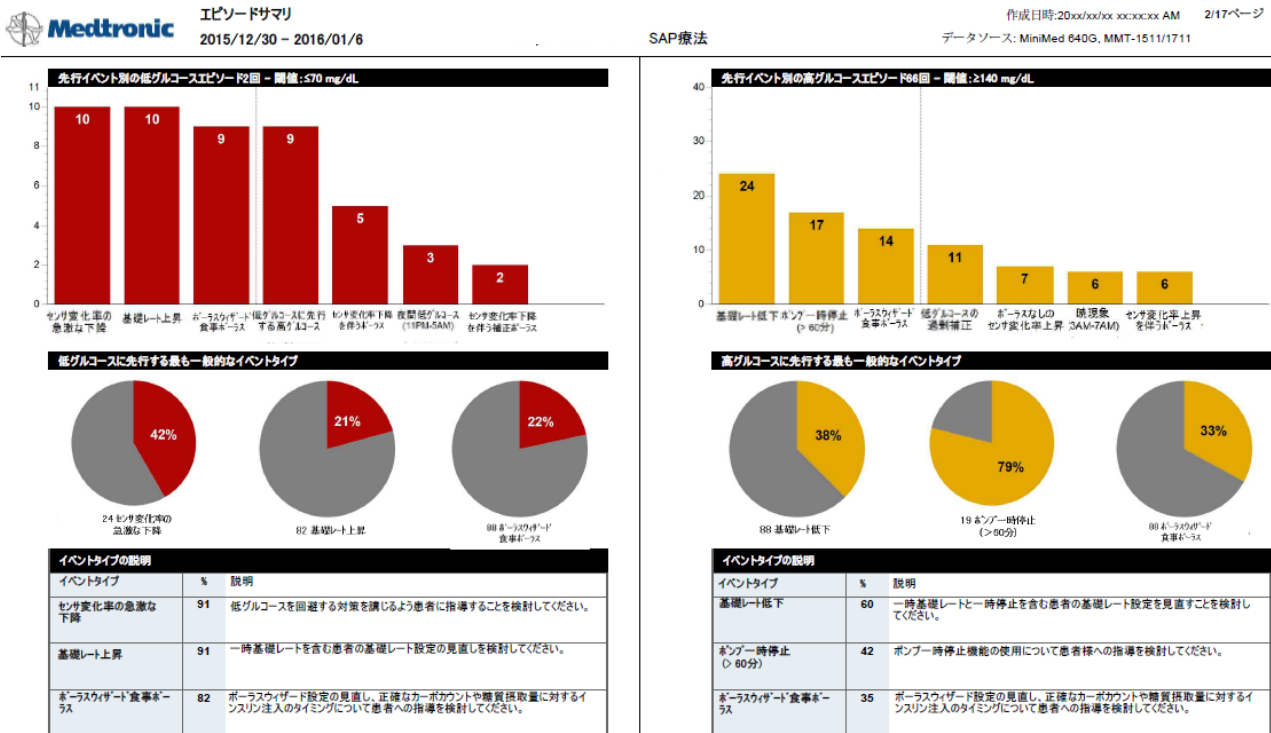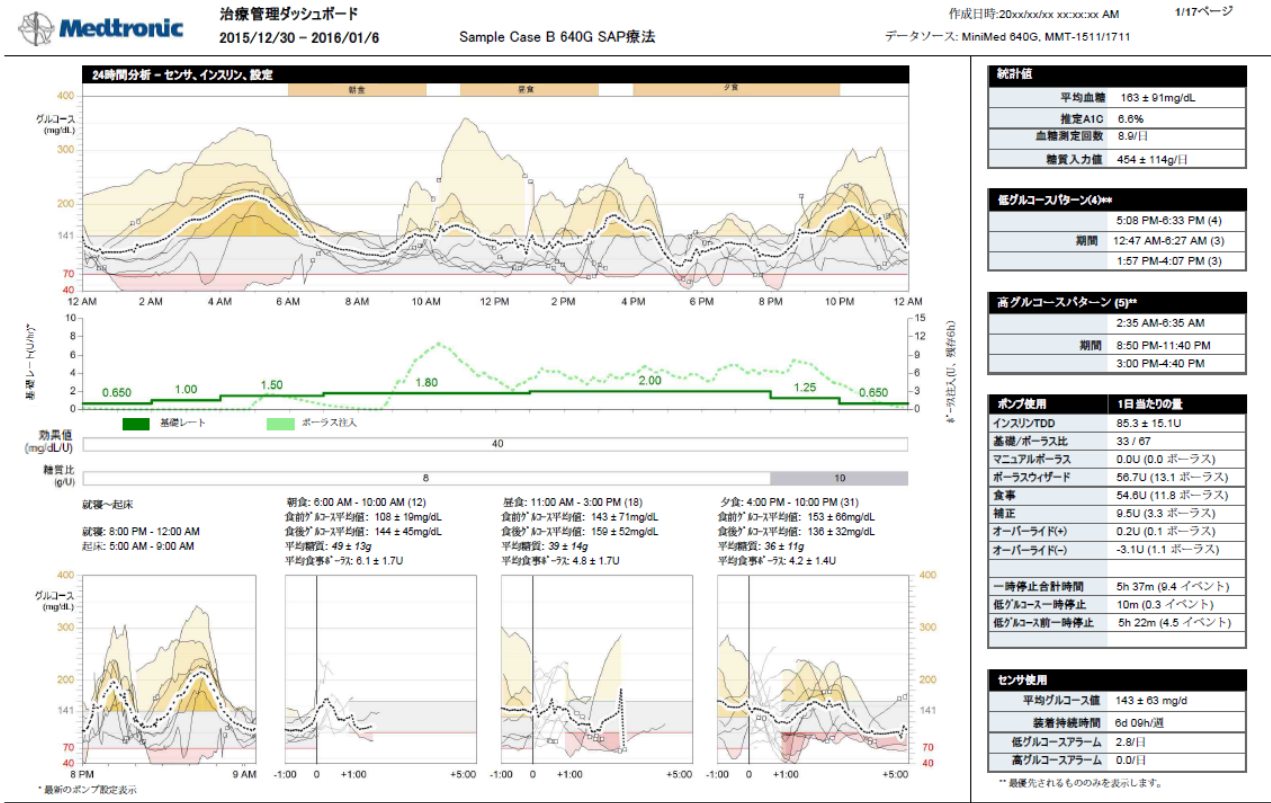

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。

販売名: メドトロニック ミニメド 600 シリーズ 医療機器承認番号: 22500BZX00369000

販売名: メドトロニック ガーディアン コネクト 医療機器承認番号: 22900BZX00321000

DIB2103-38 © 2021 Medtronic.