

Medtronic

Zie de handleiding van het implantaat voor gedetailleerde informatie over de gebruiksinstructies, de implantatieprocedure, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem voor verdere informatie contact op met uw contactpersoon van Medtronic of via de contactgegevens hieronder en/of bezoek een van de websites van Medtronic.

Europa

Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Zwitserland
www.medtronic.eu
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

[medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)

België

Medtronic Belgium N.V.
Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5
BE-1090 Brussel
België
www.medtronic.be
Tel. +32 (0)2 456 09 00
Fax +32 (0)2 460 26 67

Nederland

Medtronic Trading NL BV
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
www.medtronic.nl
Tel. +31 (0)40 711 75 55
Fax +31 (0)40 711 75 22

UC202008002NL © Medtronic 2020.
Alle rechten voorbehouden.

PATIËNTEN- PROGRAMMEER- APPARAAT DBS-THERAPIE VAN MEDTRONIC

SAMSUNG-MODEL TH91 VOOR PERCEPT™ PC- NEUROSTIMULATOR

Beknopte gids

Deze brochure is uitsluitend voor patiënten die reeds een geïmplanteed DBS-systeem hebben, en is dus niet bestemd voor het algehele publiek.



Medtronic
Further Together

PATIËNTENPROGRAMMEERAPPARAAT DBS-THERAPIE VAN MEDTRONIC


SAMSUNG-MODEL TH91 VOOR PERCEPT™ PC-NEUROSTIMULATOR

Beknopte gids

Uw therapie bekijken



1 Zet de handset en communicator aan.
Controleer of ze zijn opgeladen.

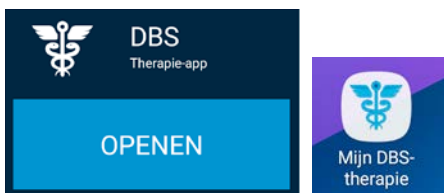

2 Als de app nog niet is geopend, tikt u op **OPENEN** of op het pictogram **Mijn DBS-therapie** op de handset.



3 Zorg ervoor dat de communicator zich binnen 1 meter van de neurostimulator bevindt en tik op **VERBINDEN** op de handset.



4 Wanneer de DBS-therapie app is geopend en verbinding gemaakt heeft met de neurostimulator, is het **BEGINSCHERM** zichtbaar.

MENUKNOP

Tik voor extra app-functies.

DE NEUROSTIMULATOR DIE IS VERBONDEN MET UW AFSTANDSBEDIENING

Tik om van neurostimulator te wisselen (wordt alleen weergegeven als u twee neurostimulatoren hebt).

MIJN BATTERIJ

Tik om de status van alle batterijen weer te geven.

MIJN THERAPIE IN-/UITSCHAKELEN

Tik om uw therapie in- of uit te schakelen.

THERAPIEKNOP

Tik om uw therapie te bekijken of aan te passen (wordt alleen weergegeven als dit door uw arts is ingesteld).

GEBEURTENISSENKNOP

Om gebeurtenissen bij te houden (wordt alleen weergegeven als dit door uw arts is ingesteld)

Voor videotutorials opent u het tabblad Tutorial via de menuknop

Zie de achterkant voor aanvullende instructies >

**PATIËNTENPRO-
GRAMMER
DBS-THERAPIE
VAN MEDTRONIC**

**MODEL TH91 VOOR
PERCEPT™ PC-
NEUROSTIMULATOR**

Beknopte gids

Deze brochure is uitsluitend voor patiënten die reeds een geïmplanteerd DBS-systeem hebben, en is dus niet bestemd voor het algemene publiek.

Medtronic
Further Together


Nederland
Medtronic Trading NL BV
Lampden 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
www.medtronic.nl
Tel: +31 (0)40 711 75 55
Fax: +31 (0)40 711 75 22

LUMZONE

medtronic.eu

Europa
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliat 51
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Zwitserland
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 79 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00

België
Medtronic Belgium NV
Burgemeester Etienne
Demutlaan 5
BE-1090 Brussel
België
www.medtronic.be
Tel: +32 (0)2 456 09 00
Fax: +32 (0)2 460 26 67

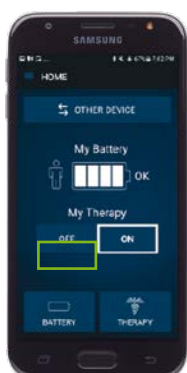


A



B



C

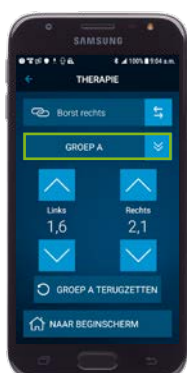

D



E



F



G

THERAPIE IN- OF UITSCHAKELEN

Opmerkingen:

- U moet uw communicator mogelijk boven uw neurostimulator houden om de stimulatie uit te schakelen.

- Therapie uitschakelen: Tik in het **BEGINSCHERM** op de knop **UIT**. Tik in het pop-upbericht om te bevestigen dat u de therapie wilt uitschakelen. **Afbeelding A**
- Therapie inschakelen: Tik in het **BEGINSCHERM** op de knop **Therapie aanzetten**. **Afbeelding B**

DE BATTERIJSTATUS CONTROLEREN

- Tik in het **BEGINSCHERM** op het pictogram **Mijn batterij**. **Afbeelding A**
- Het scherm **BATTERIJ** toont de status van drie verschillende batterijen: **Afbeelding C**
 - Mijn batterij: laat het batterijniveau van de neurostimulator zien, het apparaatje dat in uw lichaam is geïmplant. Als u twee neurostimulatoren hebt, kunt u het batterijniveau van het andere implantaat bekijken door over te schakelen naar de andere neurostimulator.
 - Batterij communicator: laat het batterijniveau van de communicator zien.
 - Batterij handset: laat het batterijniveau van de handset zien, het mobiele apparaat waar de DBS-app op staat.

Opmerkingen:

- U kunt ook op de menuknop (≡) tikken en vervolgens op **Batterij**.

GROEPEN WIJZIGEN

Opmerkingen:

- Uw arts heeft mogelijk groepen (stimulatiebereiken) ingesteld. Dit zijn vooraf ingestelde therapieopties waaruit u kunt kiezen. Indien beschikbaar kunt u via het wijzigen van de groep snel uw therapie aanpassen.

- Tik in het **BEGINSCHERM** op de knop **THERAPIE**.
- Tik op de knop **GROEP** (☑) in het scherm **THERAPIE**. **Afbeelding D**
- Tik op de groep die u wilt selecteren. **Afbeelding E**

Nadat u een groep hebt gekozen, wordt het **therapiescherm** voor die groep weergegeven. Dit betekent dat u uw stimulatiegroep hebt aangepast.

STIMULATIE AANPASSEN

Opmerkingen:

- Indien beschikbaar kunt u het stimulatie niveau verhogen en verlagen. Maar mogelijk kunt u de therapie niet aanpassen. Uw DBS-arts bepaalt of deze optie voor u beschikbaar is.

- Tik in het **BEGINSCHERM** op de knop **THERAPIE**.
- Verhoog of verlaag uw stimulatie niveau met de pijltoetsen. **Afbeelding D**
 - Als een pijl grijs wordt weergegeven, kunt u de therapie niet verder in die richting aanpassen.
 - Voor de pijltoetsen geldt dat Links de linkerkant van uw lichaam betreft en Rechts de rechterkant.

GEBEURTENISSEN

Opmerking:

- Uw arts kan de optie Gebeurtenissen instellen; u kunt dan bepaalde gebeurtenissen in de app bijhouden (bijv. medicatie ingenomen). Als u op een bepaald moment een gebeurtenis vastlegt, registreert de app automatisch andere informatie die nuttig kan zijn voor uw behandelend arts, zoals uw huidige therapie-instellingen. Uw arts kan de optie Gebeurtenissen ook zo programmeren dat de stimulatiecyclus aan de hand van een bepaalde gebeurtenis wordt aangepast.

Een gebeurtenis vastleggen:

- Tik in het **BEGINSCHERM** op de knop **GEBEURTENISSEN**. **Afbeelding F**
- Tik in het scherm **Gebeurtenissen** op het type gebeurtenis die u wilt vastleggen (bijv. Medicatie ingenomen) en tik vervolgens op **GEREED** op het bevestigingsscherm **GEBEURTENIS GEREESTREED**. **Afbeelding G**

Opmerking:

De gebeurtenissen die door uw behandelend arts zijn ingesteld, kunnen afwijken van de getoonde gebeurtenissen in afbeelding G.

- Als uw arts meer dan vier gebeurtenissen heeft ingesteld, kunt u meer gebeurtenissen zien door op de pijltjes naar links of rechts te tikken.
- Als u de melding **GEBEURTENIS NIET GEREESTREED** ziet, is de geselecteerde gebeurtenis uit de app verwijderd door uw arts.

MRI-SCAN EN MRI-MODUS

Opmerkingen:

- Neem uw handset, communicator en patiëntenpasje mee naar de MRI-afspraak. **Neem de afstandsbediening of communicator niet mee naar binnen als u de MRI-ruimte betreedt.**
- Uw behandelend arts kan de MRI-modus voor u activeren voorafgaand aan uw MRI-scanafspraak, maar u kunt deze ook zelf instellen en laten controleren en bevestigen door uw arts.
- De MRI-modus mag alleen worden gebruikt voor een MRI-scan.

- Tik in het **BEGINSCHERM** op de menuknop (≡) en tik vervolgens op **MRI-modus** in het menu. **Afbeelding H**
- Als u geen **MRI-(compatibiliteits)rapport hebt - waarin staat dat uw neurostimulator geschikt is voor welk soort MRI-scan** - vraag uw MRI-technicus dan of deze een rapport heeft ontvangen. Uw behandelend arts heeft mogelijk al een **MRI-rapport** opgesteld en rechtstreeks naar de MRI-technicus verzonden. Als u of uw MRI-technicus een rapport heeft, tik dan op **JA** in het scherm **MRI-rapport**. Tik indien dit niet het geval is op **NEE** in het scherm **MRI-rapport**. **Afbeelding I**
 - Als u op **JA** hebt getikt in het scherm **MRI-rapport**, selecteer dan vervolgens het type scan (hele lichaam of alleen het hoofd) dat in uw rapport staat. Tik daarna op **DOORGAAN** in het scherm **Scancompatibiliteit (Geschikt voor welk type scan)** en ga verder naar stap 3. **Afbeelding J**
 - Als u op **NEE** hebt getikt in het scherm **MRI-rapport**, geeft de app een melding om de MRI-geschiktheid van uw systeem te testen. Tik op **TEST STARTEN** in het scherm **Systeem testen** om door te gaan met de test. Tik op **TERUG** om te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm. **Afbeelding K**
- Opmerking:**
 - Ga zitten tijdens de test. U kunt tijdens de test tijdelijk ongemak ervaren, omdat de gebruikte instellingen kunnen afwijken van uw normale therapie-instellingen. Zodra de test is gestart, kunt u de test op elk gewenst moment stoppen door op **TEST STOPPEN** te tikken in het scherm **Systeem wordt getest**. **Afbeelding L**
 - Raadpleeg uw behandelend arts als de test niet is geslaagd. Mogelijk komt u nog steeds in aanmerking voor een MRI-scan.

- U wordt gevraagd een therapie-instelling te kiezen die overeenkomt met de geschiktheid van uw neurostimulator voor een bepaald type MRI. U kunt altijd de veilige optie **Therapie uitgeschakeld** kiezen, maar dit kan ook een therapiegroepoptie zijn als uw arts een stimulatiegroep heeft ingesteld die geschikt is voor gebruik in een bepaalde MRI-omgeving.

- Als u slechts één neurostimulator heeft en de app gebruikt, ziet u het scherm **MRI-modus actief**, wat bevestigt dat uw neurostimulator zich in de MRI-modus bevindt. Dit DBS-systeem is nu gereed voor een MRI-scan. **Afbeelding M**

- Als de MRI-scan klaar is, tikt u op de knop **MRI-MODUS AFSLUITEN** om terug te gaan naar het beginscherm. Uw neurostimulator herstelt de oorspronkelijke instellingen.
Opmerking: Als u twee neurostimulatoren hebt, tikt u op de knop **DOORGAAN** om te controleren of ook de MRI-modus van de tweede neurostimulator is afgesloten. Als de MRI-modus nog steeds actief is, schakel deze dan uit. Controleer of uw oorspronkelijke therapie-instellingen worden hersteld.


Opmerking:

- Als u twee neurostimulatoren hebt, moeten beide neurostimulatoren worden getest op geschiktheid voor een bepaalde MRI-scan. Tik op de knop **DOORGAAN** om te controleren of de MRI-modus ook voor de tweede neurostimulator actief is. Als de MRI-modus niet actief is, activeert u deze door de voorgaande stappen te herhalen.

- Raadpleeg uw arts als u vragen hebt over uw therapie na uw MRI-scan.



H

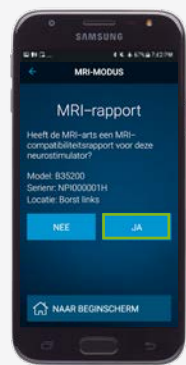


I



J



K

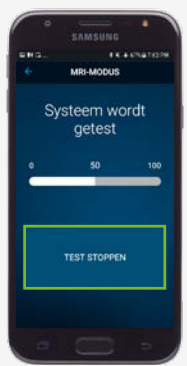

L



M