

## De vervolgcontrole

Na de plaatsing van de Reveal bespreekt uw arts het vervolgtraject met u. De Reveal kan op twee manieren worden uitgelezen: op afstand en met behulp van de MyCareLink-monitor — die u mee naar huis krijgt — via controles in het ziekenhuis, waar de Reveal wordt uitgelezen met een programmeerapparaat (soort computer).

Afhankelijk van wat de Reveal registreert, zal uw arts in overleg met u de verdere behandeling bespreken.

## Uw Patient Assistant gebruiken

Als u de symptomen voelt waarvoor uw arts de Reveal heeft ingebracht, dan kunt u de Patient Assistant gebruiken om gegevens over uw hart op te slaan. U drukt op het hartje van de Patient Assistant en houdt deze vervolgens boven de Reveal. U krijgt van uw technicus in het ziekenhuis een korte handleiding waarin deze handeling stapsgewijs wordt toegelicht.

### MRI

Reveal XT is veilig voor gebruik in een MRI-omgeving.\*

\*Er is aangetoond dat het blootstellen van een Reveal XT-hartritmemonitor aan een bepaalde MRI-omgeving onder bepaalde omstandigheden geen gevaar oplevert. Raadpleeg de arts voor meer details hierover.

De inhoud van deze brochure is uitsluitend informatief, en bevat en vervangt geen medische diagnose. Voor een medische diagnose dient u te allen tijde contact op te nemen met uw professionele zorgverlener. Voor informatie over uw diagnose en behandeling dient u altijd contact op te nemen met uw arts.

Alle producten, therapieën en procedures brengen risico's met zich mee. Dit product/deze therapie/procedure is niet geschikt voor iedereen. Neem daarom altijd contact op met uw arts om te bekijken of u hiervoor in aanmerking komt. Er is een doktersvoorschrift vereist.

## Veelgestelde vragen

### Hoe lang moet de Reveal XT geïmplantéerd blijven?

De arts bepaalt in overleg met u hoe lang de Reveal geïmplantéerd blijft; meestal is dit tot het moment dat er een diagnose is gesteld. In bepaalde gevallen kan uw arts samen met u besluiten dat de Reveal langer geïmplantéerd blijft. De Reveal heeft een batterijlevensduur van drie jaar en kan in ieder geval zolang in het lichaam blijven.

### Waarom heb ik een identificatiekaart voor de Reveal XT nodig?


Op deze identificatiekaart (ID-kaart) staat informatie over u, uw arts en over de Reveal. Dit is nodig in geval van nood, als u een medische vraag heeft of als u bijvoorbeeld door een metaaldetector moet. De ID-kaart wordt meegeleverd met een beknopte uitleg over de Patient Assistant. Deze kaart moet u altijd bij u dragen.

### Wat moet ik doen als ik een medische ingreep moet ondergaan?

Vóórdat u een medische ingreep ondergaat, moet u altijd uw ID-kaart tonen. Zo is het medisch personeel op de hoogte van het feit dat u een geïmplantéerd medisch apparaat draagt en kunnen er eventueel voorzorgsmaatregelen worden genomen.

### Kan ik een MRI-procedure ondergaan na implantatie van een Reveal XT?

Een MRI-procedure is toegestaan als u een Reveal heeft. Het is wel van belang om van tevoren overleg te hebben met uw arts, zodat de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen worden genomen.

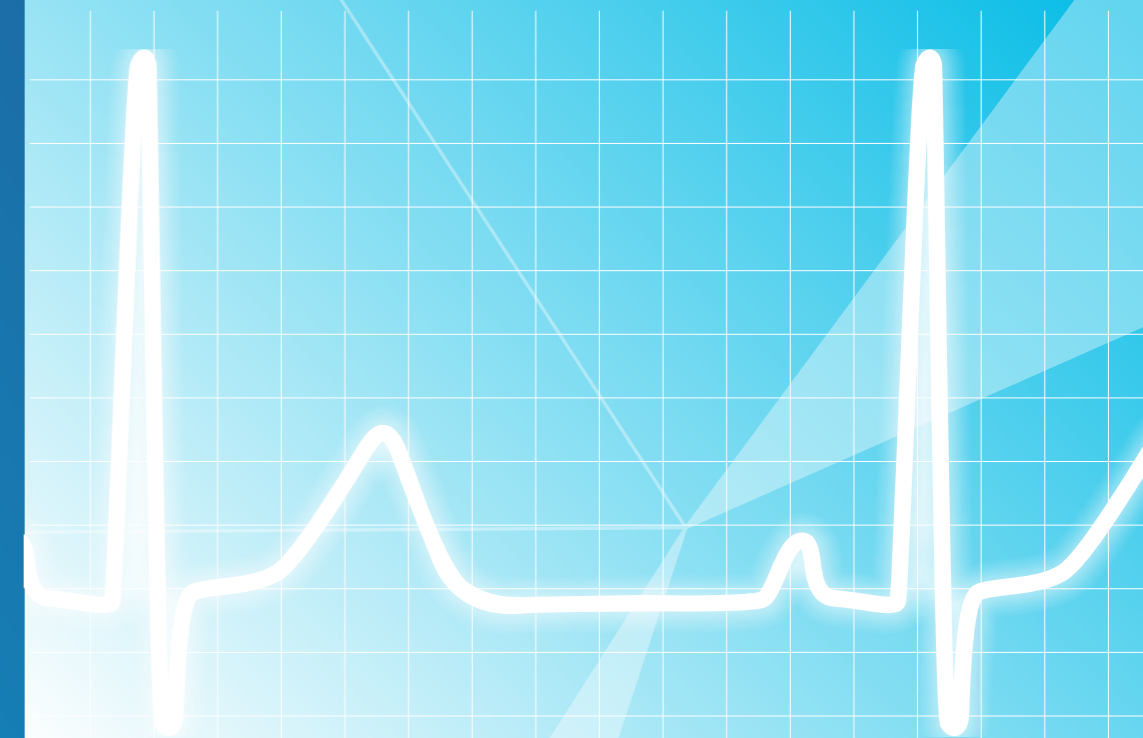

Reveal<sup>®</sup>XT-hartritmemonitor  
INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

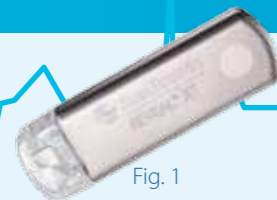


Fig. 1

## Wat is een Reveal XT?

Een Reveal® XT is een implanteerbare hartrimemonitor die informatie over de elektrische activiteit van het hart registreert. De Reveal bewaakt uw hartritme continu, ook als u zich niet in een ziekenhuis of kliniek bevindt. De Reveal registreert uw hartritme en slaat dit automatisch op als dit afwijkend is. 'Afwijkend' betekent dat u een te snelle of te langzame hartslag heeft, of dat uw hart onregelmatig klopt.

## Waarom heeft u een Reveal XT nodig?

U krijgt een Reveal XT geïmplanteerd als uw arts uw hartritme gedurende langere tijd wil controleren om een diagnose te kunnen stellen. Daarnaast kan uw arts eventuele symptomen of klachten in verband brengen met een mogelijke haritmestoornis. Deze symptomen of klachten kunnen zich voordoen op andere momenten dan wanneer u uw arts bezoekt of bepaalde onderzoeken ondergaat. De Reveal XT kan op elk moment gegevens opslaan, welke op een later tijdstip gecontroleerd kunnen worden.

## Reveal XT bij onverklaarbaar flauwvallen (syncope)

Klachten of symptomen waarbij een Reveal XT geïmplanteerd kan worden, zijn flauwvallen, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, warmte, zweterige handpalmen, misselijkheid, wazig zien, hartkloppingen, epilepsieachtige aanvallen. De oorzaak van deze klachten kan een stoornis in uw hartritme zijn, maar kan ook een andere reden hebben.



Fig. 2

## Reveal XT bij (mogelijk) boezemfibrilleren

Een andere reden waarvoor een Reveal XT geïmplanteerd kan worden, is (mogelijk) boezemfibrilleren. Boezemfibrilleren is een snelle hartslag in de bovenste kamers van uw hart. Hierdoor werken deze niet meer naar behoren, waardoor ze niet al het bloed rond kunnen pompen. Er blijft bloed in de boezems achter, waardoor stolsels kunnen ontstaan. Er zijn veel mogelijke oorzaken van boezemfibrilleren en niet iedereen heeft klachten.

Boezemfibrilleren kan gepaard gaan met hartkloppingen, vermoeidheid, pijn op de borst, kortademigheid of een licht gevoel in het hoofd. Het stellen van een diagnose kan lastig zijn, omdat niet iedereen klachten heeft op het moment van boezemfibrilleren. Dit kan een reden zijn waarom uw arts heeft besloten een Reveal XT bij u te implanteren.

## Het Reveal XT-systeem

Het Reveal-systeem bestaat uit een hartrimemonitor (Fig. 1) die onder de huid geplaatst wordt, een Patient Assistant-afstandsbediening (Fig. 2) en (eventueel) een MyCareLink™-monitor (Fig. 3).

De Patient Assistant is een persoonlijke afstandsbediening die werkt op batterijen; met behulp van deze afstandsbediening kunt u informatie over uw hart laten opslaan. Het is van belang om deze afstandsbediening altijd bij u te hebben. Met de MyCareLink-monitor kunt u de gegevens die opgeslagen zijn in uw Reveal doorsturen naar het ziekenhuis. De technicus van uw ziekenhuis zal u hierover meer informatie geven.



Fig. 3

## Hoe verloopt de implantatie van een Reveal XT?

De Reveal wordt tijdens een poliklinische procedure van ongeveer dertig minuten onder de huid geplaatst, in de buurt van uw hart. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving. De Reveal kan, indien nodig, drie jaar geïmplanteerd blijven. Het inbrengen van de Reveal verloopt in een aantal stappen, die hieronder worden beschreven:

1. **Plaatsbepaling van de Reveal:** Dit gebeurt met behulp van de zogenaamde Vector Check. De plaatsing van de Reveal wordt bepaald door de sterkte van de gemeten signalen.
2. **Een incisie maken:** Het gebied waar de Reveal wordt geïmplanteerd, wordt plaatselijk verdoofd. De arts maakt een incisie van een centimeter en maakt ruimte onder uw huid om de Reveal te plaatsen.
3. **De Reveal inbrengen:** De Reveal wordt onder de huid ingebracht en op de onderlaag vastgehecht.
4. **De incisie sluiten:** De arts sluit de incisie met hechtingen. Na de procedure krijgt u instructies over hoe u het operatiewondje moet verzorgen.