

## 遠隔モニタリングシステムに関する



Q

HeartアプリとRelayを両方使うことはできますか？

A

いいえ、できません。担当医師と相談し、いずれかのモニタをご選択ください。

Q

モニタの操作を間違った場合、  
植込み機器が異常を起こす可能性はありますか？

A

植込み型心臓デバイスはモニタの操作に関係なく正しく作動します。  
モニタの操作が植込み機器の設定を変えたり、  
動作に影響を与えることはありません。ご安心ください。



Q

メドトロニックのどの植込み型デバイスでもHeartアプリやRelayを使用できますか？

A

いいえ、Bluetoothが搭載されたデバイスのみ使用することが可能です。  
遠隔モニタリング導入時に担当医師にご確認ください。

Q

Heartアプリを本人の家族等のモバイル端末から使用することはできますか？

A

はい、小児患者さんの保護者など、最大5台のiPhoneまたはiPadで利用可能です。  
ただし、医療施設にデータ送信するためには、少なくとも3時間連続して  
モバイル端末が心臓用デバイスの1m以内にある必要があります。

ケアリンク専用コールセンターは、Heartアプリ、及びRelayに関するお問い合わせを受け付けております。  
iPhoneやiPadの端末に関しては各携帯電話会社へお問い合わせください。  
体調がすぐれない場合は医師または119番へご連絡ください。

## ケアリンク専用コールセンター

# 0120-360-553

受付時間：月～金（祝日除く）9時～17時

## Medtronic

日本メドトロニック株式会社  
カーディアックリズムマネジメント  
108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.com

販売名 / 医療機器承認番号  
Medtronic Azure MRIシリーズ / 23000BZX00027000  
Percepta MRI CRT-Pシリーズ / 23000BZX00230000  
Cobalt MRI ICDシリーズ / 30200BZX00097000  
Cobalt MRI CRT-Dシリーズ / 30200BZX00098000  
メドトロニック LINQ II / 30300BZX00278000

- 使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
- ご使用前に取扱説明書等をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 掲載の製品イメージは印刷条件等により、実物と印象が相違する場合があります。

「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。iPhone及びiPadは、Apple Inc. の商標です。  
iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。App Storeは、Apple Inc. のサービスマークです。  
遠隔モニタリングシステム「ケアリンク」(メドトロニックのサーバ)は医薬品医療機器等法非該当品です。

© 2025 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。  
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

A2416-2501DS2000a

FY25-CRM139\_Ver.1.0


## Medtronic

# 患者さんのための モニタ選択ガイド

ご自宅や外出先から  
データ送信



通信

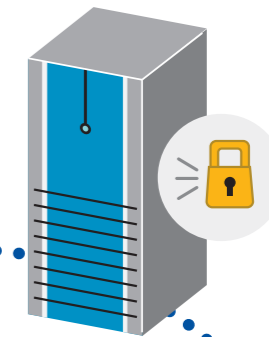

医療施設でデータ確認

遠隔モニタリングシステムは、  
植込み型心臓デバイスや心臓モニタの情報を、  
ご自宅にしながら医療施設へ  
送ることができるシステムです。  
早期診断や、デバイス検査のための  
通院回数を減らすことが期待できます。

Check!



# 遠隔モニタリング機器の選び方

～私に合ったモニタは？～

iPhone または iPad を持っている

いいえ

はい

アプリのダウンロードやiPhone または iPad の操作に慣れている ※または身近で操作を教えてくれる方がいる

いいえ

はい

iPhone または iPad をお持ちでない方、アプリの操作が不安な方は  
**MyCareLink Relay™ ホームコミュニケーター<sup>\*2</sup>**

- ご自宅の寝室に設置し、電源を挿すだけで使用できます。
- iPhone の使用が可能になった場合は、Heart アプリに変更することも可能です。




iPhone または iPad をお持ちで、その操作にも慣れている方は  
**MyCareLink Heart™ アプリ<sup>\*1</sup>**

こんな方はさらにおすすめです

- 外出頻度が高く外出先や旅行先でもデータ送信がしたい
- ご自身のスマホで植え込んだデバイスの情報を確認したい

iPhone  
または  
iPad 専用

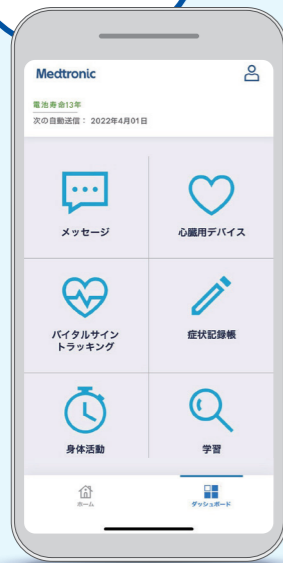

※Androidには非対応です。

- ご自身の心臓用デバイスの電池寿命や身体活動の状況をアプリ上で確認できます。  
※植込み型心臓モニタを除く
- めまいや息切れ等の症状や、体重、血圧等の情報をメモとして記録できます。  
※メモはスマホに記録され、医療施設へは送信されません。医師と健康情報を共有する際にご使用ください。
- ご自身の心臓用デバイスやモニタの製品情報、フォローアップ病院の情報について確認できます。



## Heart アプリの設定は 簡単4ステップ

### 1 アプリダウンロードと規約確認

App Store から「medtronic heart」と検索し、アプリをダウンロード。

### 2 登録と設定

名前とメールアドレスを入力し、パスワードを設定した上で、心臓用デバイスのシリアルナンバーを入力。

### 3 デバイスとアプリを接続

アプリを開いたまま心臓用デバイスの 15cm ～ 1m 以内に iPhone または iPad を保持し、アプリと接続。

### 4 設定完了

メールアドレスの認証を行い、設定内容を確認。



より詳しいHeartアプリの設定方法に関する動画や手引書は、上記ページよりご覧いただけます。