


# オクトパスNuvo セットアップガイド




## DEVICE SETUP

1. オクトパスNuvo把持のためのアームを手術台に取り付ける。アームの形状によって、付属のフレックスアームを用いる場合と、オクトパスNuvo本体を直接把持させる場合がある。
2. オクトパスNuvoの吸引ラインを清潔野に、無菌操作手順を用いて移す。
3. 吸引ラインをキャニスターチュービングセットに接続し、吸引圧 -53.3kPa (-400mmHg) に設定された吸引源に接続する。手術中の吸引 (オン/オフ) はストップコックで調節する。

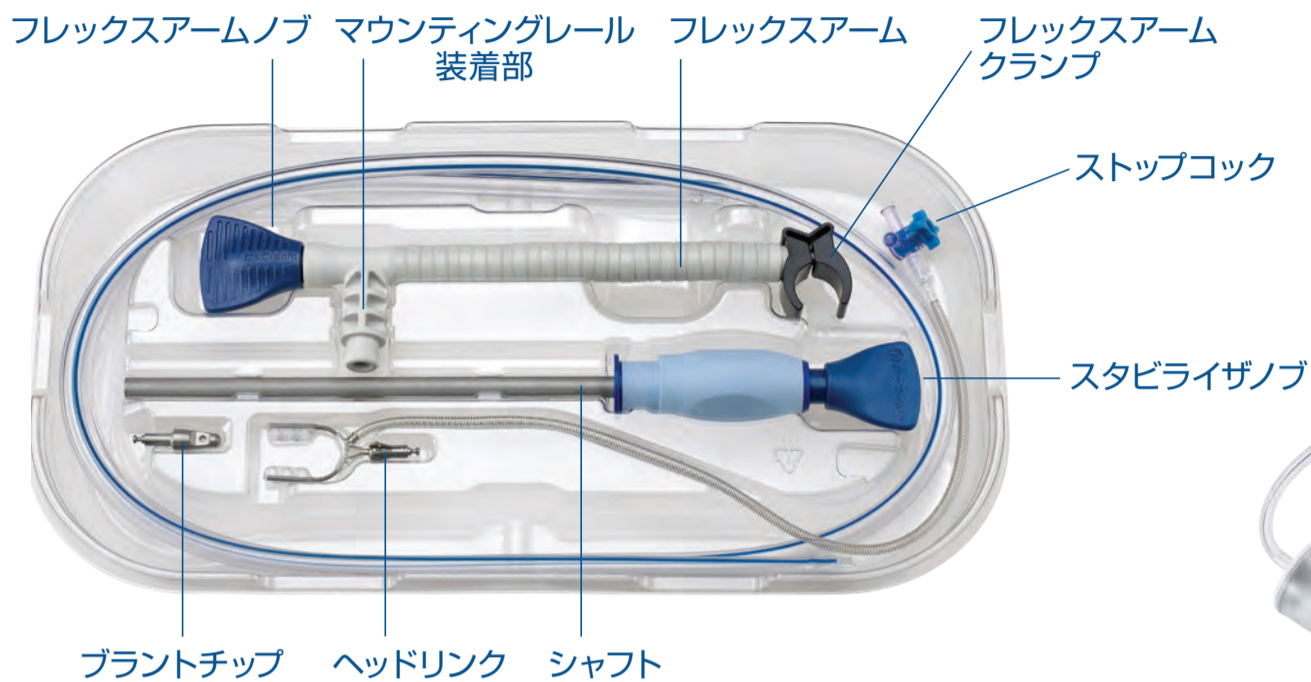

## PLACEMENT

1. スタビライザノブを反時計回りに回して、緩める (図1)。
2. 胸腔内への落下を防ぐため、プラントチップに糸を通しておく。
3. スタビライザノブをシャフト方向に押し、その状態を保持し、遠位側にプラントチップを挿入する。
4. スタビライザノブを元に戻し、時計回りに回転させ、締める。
5. ポートから胸腔内にシャフトを挿入する。
6. スタビライザノブを反時計回りに回転させ緩めたのち、プラントチップを掴む。スタビライザノブをシャフト方向に押し、プラントチップを取り外す。
7. ヘッドリンクを術野から胸腔内に入れ、吸引ラインを切開部から外に出す。
8. スタビライザノブをシャフト方向に押し、その状態を保持しながら、シャフトの遠位側にヘッドリンクを挿入する。スタビライザノブを元に戻し、2~3回時計回りに回転させる。ヘッドリンクが確実にシャフトに取り付けられていることを確認する (図2)。
9. ヘッドリンクを適切な位置に固定するため、アーム及びヘッドリンクを調節する。
10. 適切な位置に固定させたら、ストップコックを「ON」の位置に回し、スタビライザノブを時計回りに回転させて最後まで締める。
11. 本体を適切な位置に維持しながら、アームのノブを締め、吻合部を静止させる。

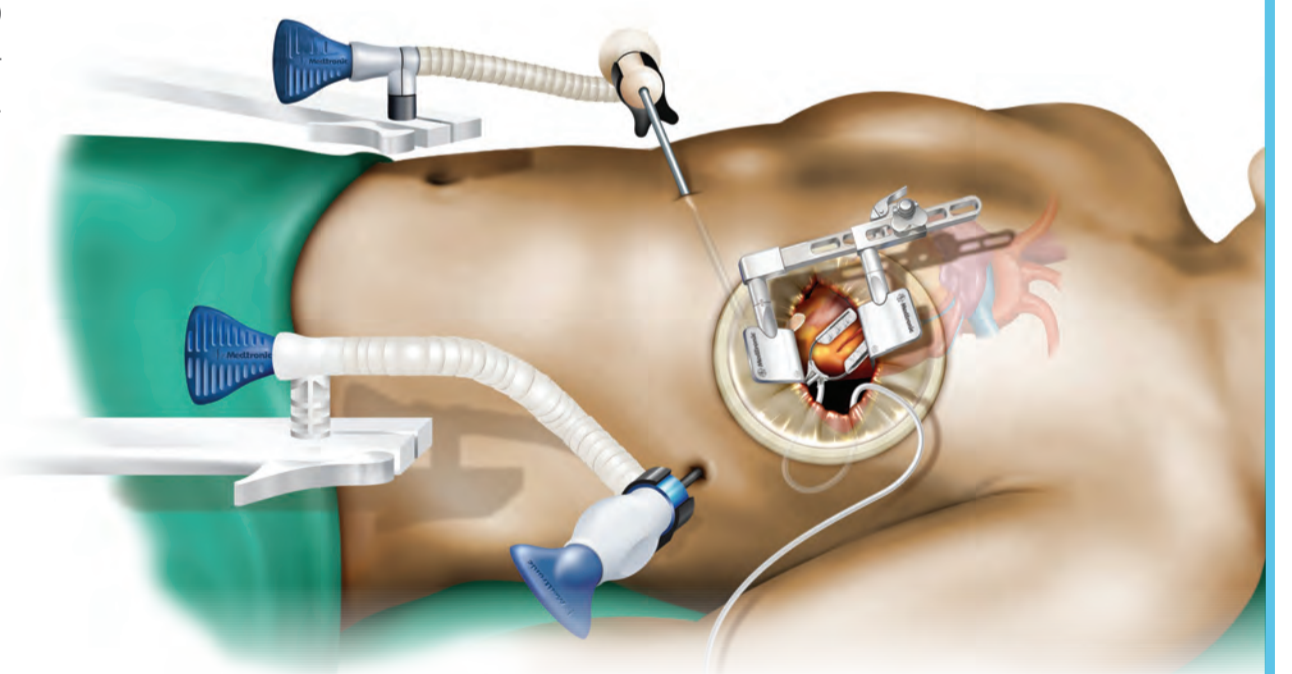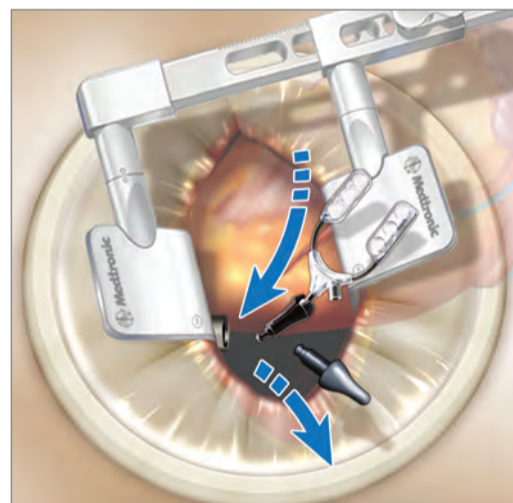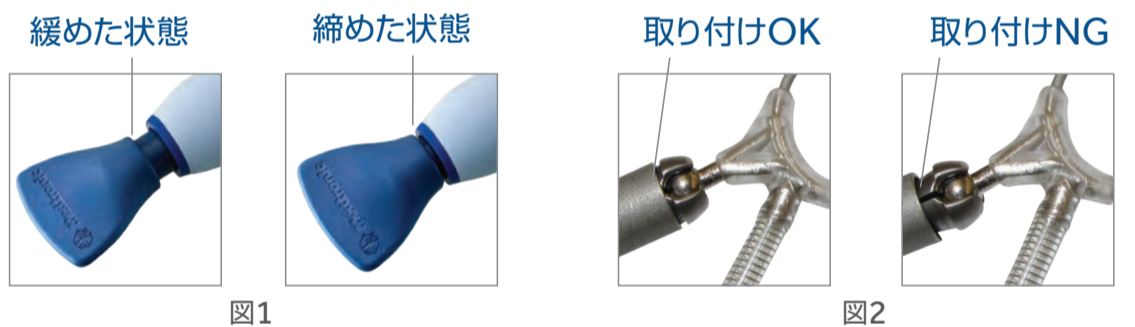

オクトパスNuvoならびにスターフィッシュNSの把持には、手術台に取り付けるアームを別途ご準備ください。(推奨製品: 独国ガイスター社製/29-1481G、Iron-Assistant™ Instrument Holderなど)

## ORDERING INFORMATION

型番号	品名	分類	梱包単位	承認・認証番号
TSMICS1	オクトパス Nuvo MICS スタビライザー	単回使用	1セット(キャニスター付)	224ACBZX00024000

※ 本体およびチュービングに加え、インラインキャニスター (150mL) を付属しています。

### 日本メドトロニック株式会社

ストラクチャルハート&エンドバスキュラー事業部  
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70  
Tel:03-6776-0015

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の添付文書をご参照ください。