

ケアリンク™コネクトアプリの セットアップ方法

2023年4月版



STEP 1

P1 はじめに

ケアリンク™コネクトアプリご登録・ご使用に際しての事前注意事項の説明します

STEP 2

P2-6 アプリを開き、説明を確認する

アプリの概要に関する説明を確認します

STEP 3

P7-39 アカунツの設定を行う

ケアリンク™コネクトアプリをご利用いただくために必要な、ケアリンクパーソナルのアカウントの作成方法や重要な注意事項・同意事項の説明します

STEP 4

P40-P42 ケアリンク™パーソナル登録とログインを行う

前のステップで作成したケアリンクパーソナルにログインします

STEP 5

P43-46 スマートフォンの設定をする

STEP 6

P47-61 データ共有を依頼する

STEP 7

P62-64 通知の設定をする

STEP 8

P65 完了

1

はじめに

- 保護者や家族としてケアリンク™コネクトアプリを使用する場合、ご登録者は18歳以上である必要があります。18歳未満の方は保護者・家族としてご登録いただけません
- データを共有してもらおう患者さんのケアリンク™パーソナルユーザIDが必要です。あらかじめ患者さんにユーザIDを聞き、お手元にご用意ください。また、データ共有を依頼した後、24時間以内に患者さんに承認してもらう必要がありますのでご注意ください
- ご登録に際し、メールアドレスの入力と、入力したメールアドレスに送信されたメールの確認が必要になります。登録予定のメールアドレスに届くメールの開封ができる状況でご登録をお願いいたします
- ご登録にはパソコンのメールアドレスが必要です。GmailやYahoo!メール、outlookメールなど、キャリアメール（@以下がdocomo/ezweb/softbank等）以外のメールアドレスのご用意をお願いいたします

2

アプリを開き、 説明を確認する


「CareLink™ Connect」アプリをタップし、
アプリを開きます。

レニーのワンポイントアドバイス

タップとは、画面を指先で軽く1回叩く操作です。
ちょん、と短くタッチするイメージで触れてください。
使用しているスマートフォンやOSのバージョンによって、
アプリの表示イメージは変わります。



アプリアイコンの一例：

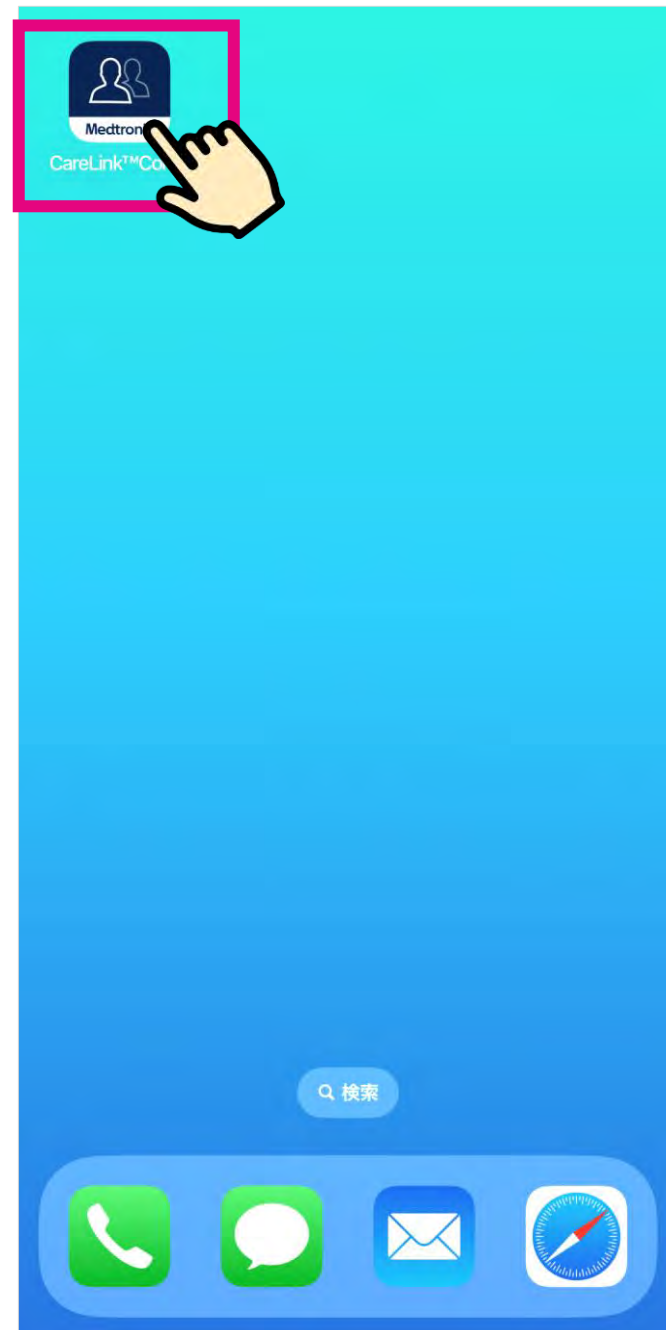


3

アプリを開き、 説明を確認する

右下の「次へ」をタップします。

※ミニメド™ 720G、740G、780Gは日本未発売製品です

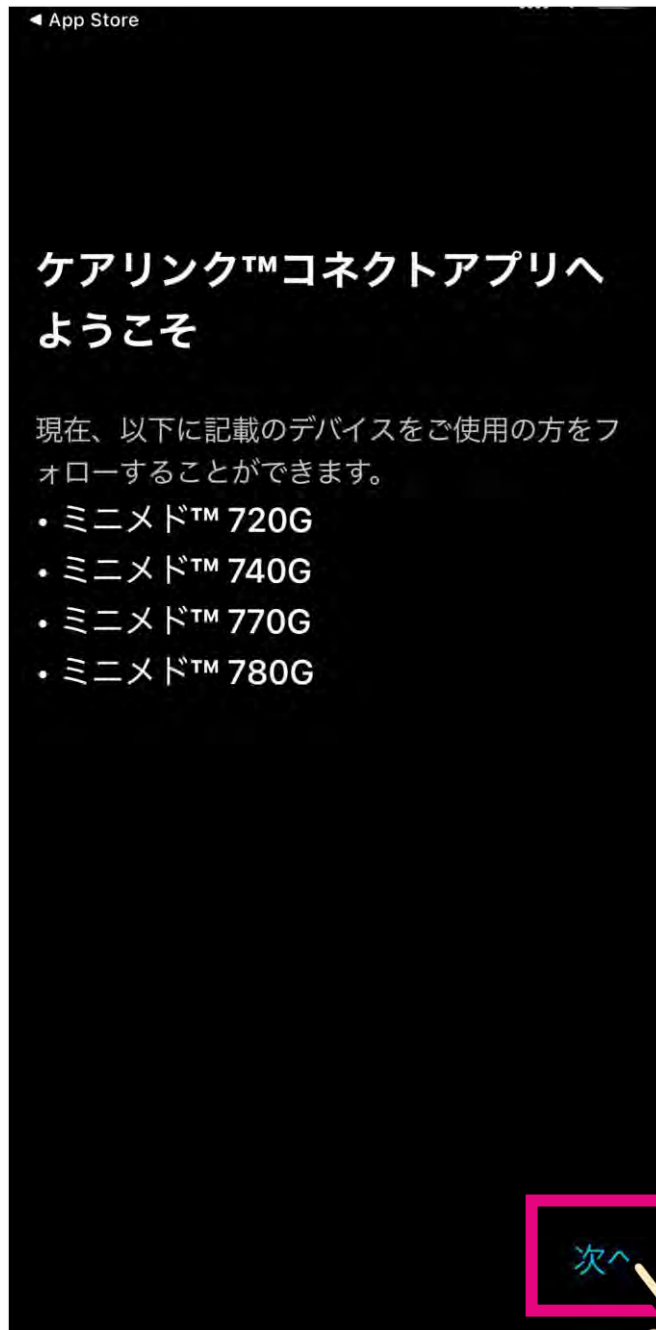

4

アプリを開き、 説明を確認する

アプリの主な機能の説明です。
右下の「次へ」をタップします。



5

アプリを開き、 説明を確認する

右下の「次へ」をタップします。



6


アプリを開き、 説明を確認する

アプリをご利用いただく際の「警告」です。

- アプリに基づきインスリン投与量の決定をしないこと
- アプリは血糖自己測定にとって代わるものではなく、あくまで患者さんの糖尿病と共にある生活をサポートするツールであること

などの重要事項が記載されています。

画面の内容をよく読み、「開始する」をタップします。

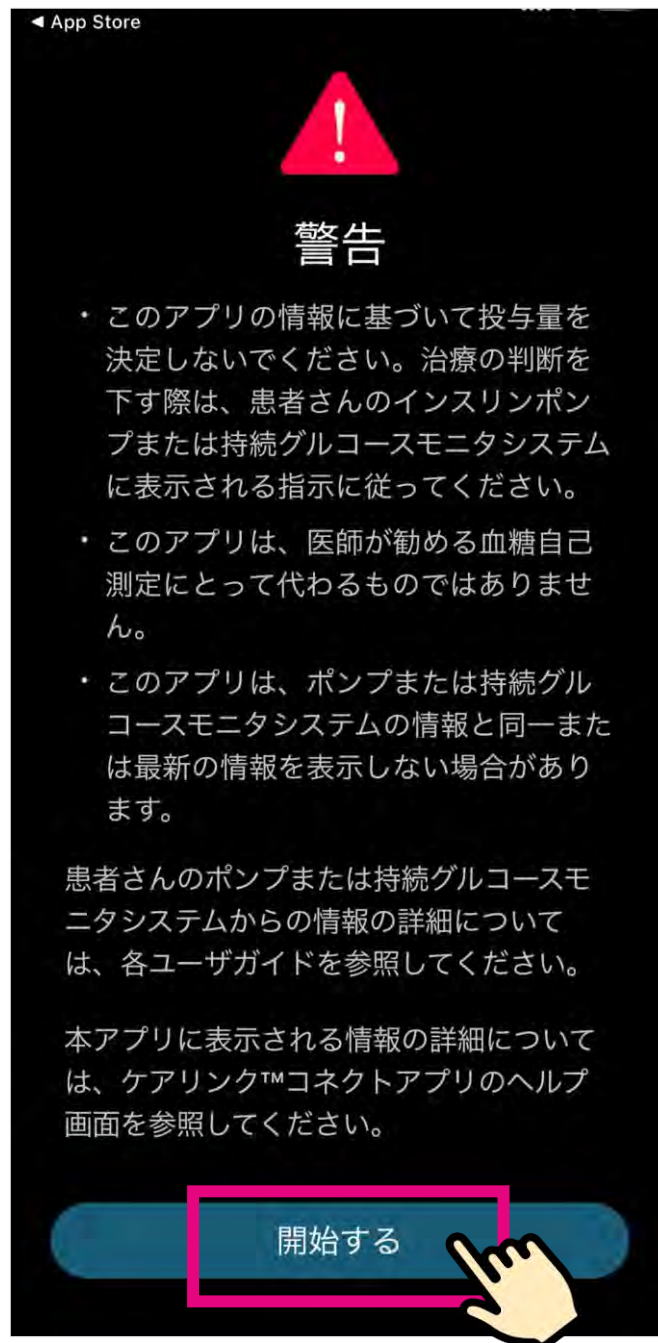

7

アカウントの設定を行う

画面に従って、家族や保護者などのアカウントの設定を行います。

まず、「1.国/地域を選択します。」の下に表示されている国名の右側の下矢印をタップします。



8

アカウントの設定を行う

国名が表示されます。

日本は下のほうにありますので、スクロールアップしてください。



9

アカウントの設定を行う

「日本」をタップします。




10

アカウントの設定を行う

「1.国/地域を選択します。」で日本が表示されていることを確認したら、「2.家族・保護者などのアカウントを作成します。」下の「新規登録アカウントの作成をタップします。

すでに家族・保護者などのアカウントをお持ちの場合は、そのアカウントを使用し、ログインすることができます。

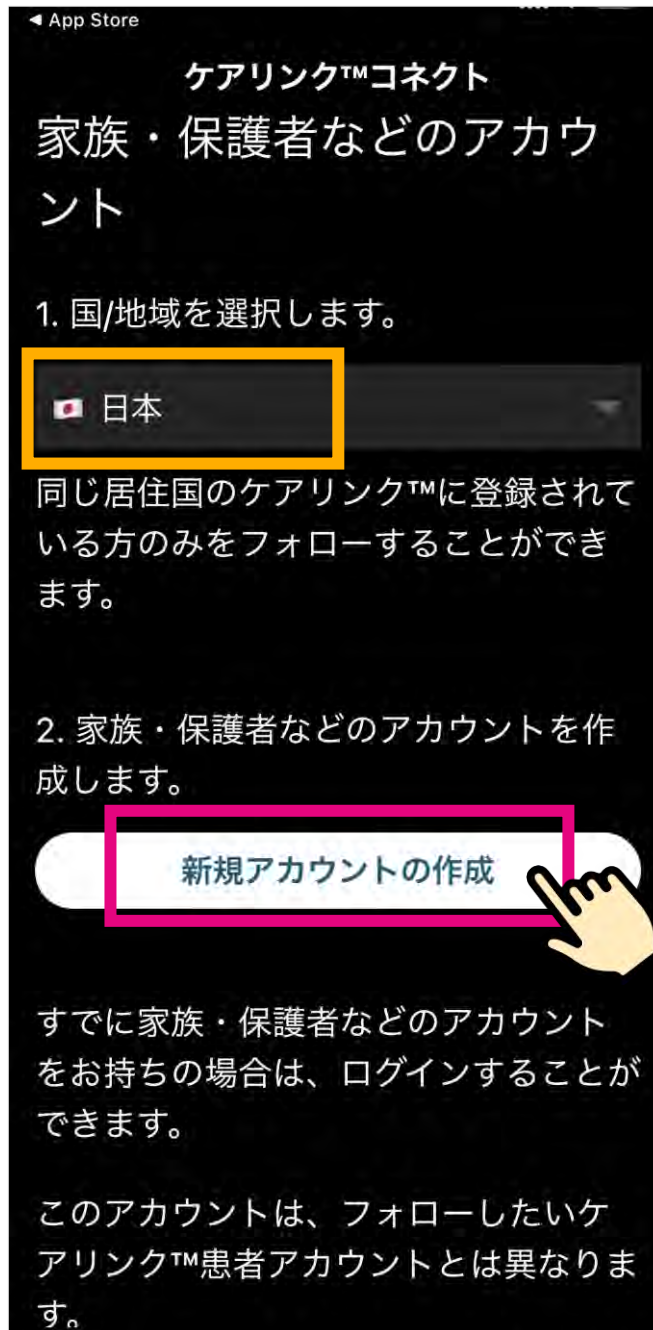


11

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

ケアリンク™パーソナルの利用規約の確認画面が表示されます。

画面に掲載された案内文をよく読み、内容を確認してください。

続きを読むためには、スクロールアップを行い、最下部まで表示します。

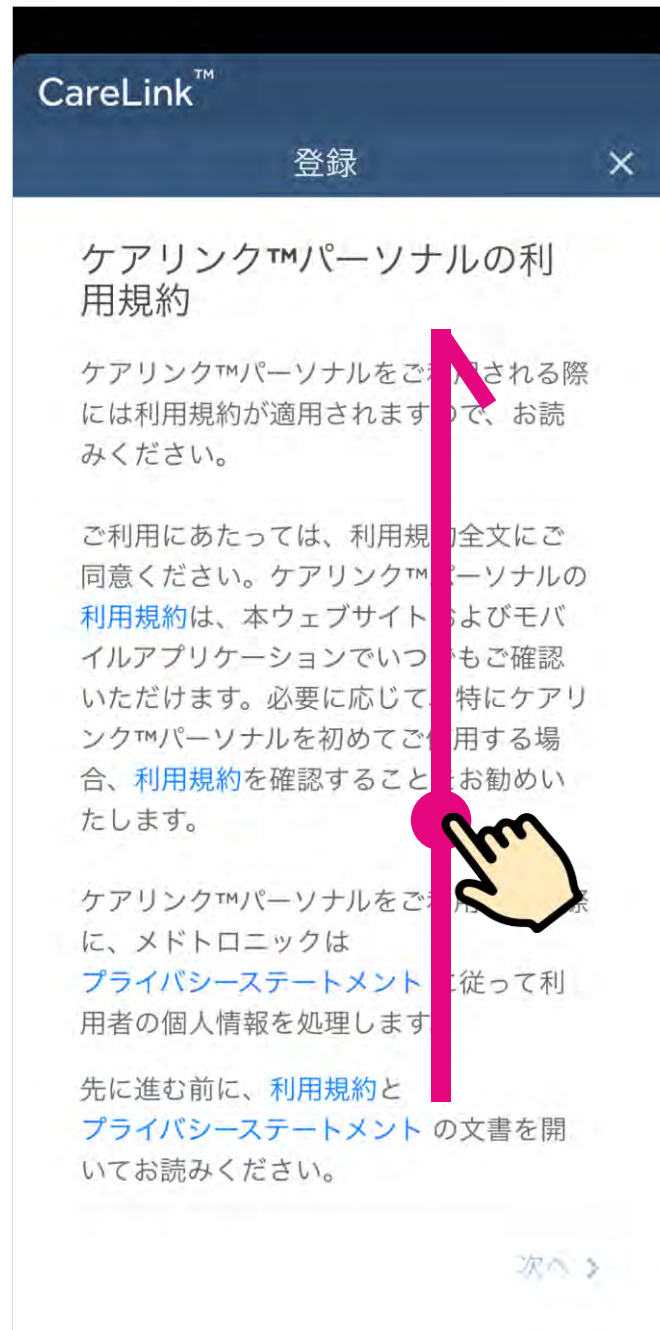

12

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

次のページに進むためには、利用規約及びプライバシーステートメントの確認が必要です。

最初に、青字の「利用規約」をタップしてください。

登録 ×

同意ください。ケアリンク™パーソナルの [利用規約](#)は、本ウェブサイトおよびモバイルアプリケーションでいつでもご確認いただけます。必要に応じて、特にケアリンク™パーソナルを初めてご使用する場合、[利用規約](#)を確認することをお勧めいたします。

ケアリンク™パーソナルをご利用される際に、メドトロニックは[プライバシーステートメント](#)に従って利用者の個人情報を処理します。

先に進む前に、[利用規約](#)と[プライバシーステートメント](#)の文書を開いてお読みください。

私は日本に居住しています。私はケアリンク™パーソナルの[利用規約](#)を読みました。利用規約に同意します。

はい

いいえ


次へ >

13

ケアリンク™パーソナル登録とログインを行う

別のウィンドウでブラウザ画面が開き、利用規約が表示されます。

こちらは、先ほどアプリでご確認いただいた利用規約の詳細を記載した、正規の利用規約です。ご一読いただき内容を確認してください。

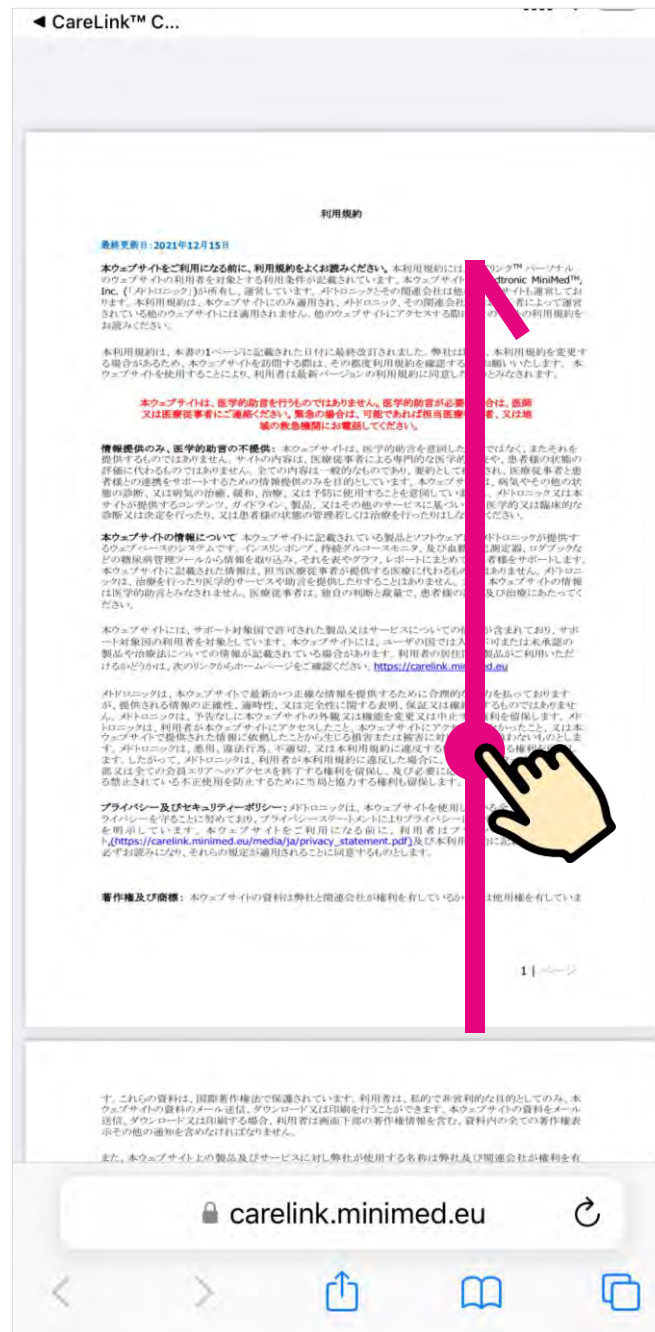

14

ケアリンク™パーソナル登録とログインを行う


利用規約の詳細を確認したら、もう一度アプリに戻ります。

現在表示されているブラウザ画面からケアリンク™コネクタアプリへの切り替え方法は機種によって異なりますが、多くの機種で画面下から上方向にスワイプすることで切り替えることが可能です。



レニーのワンポイントアドバイス

スワイプとは、スクロール同様指先で画面に触れ、その指先を触れたままスッと滑らせ移動させる操作です。

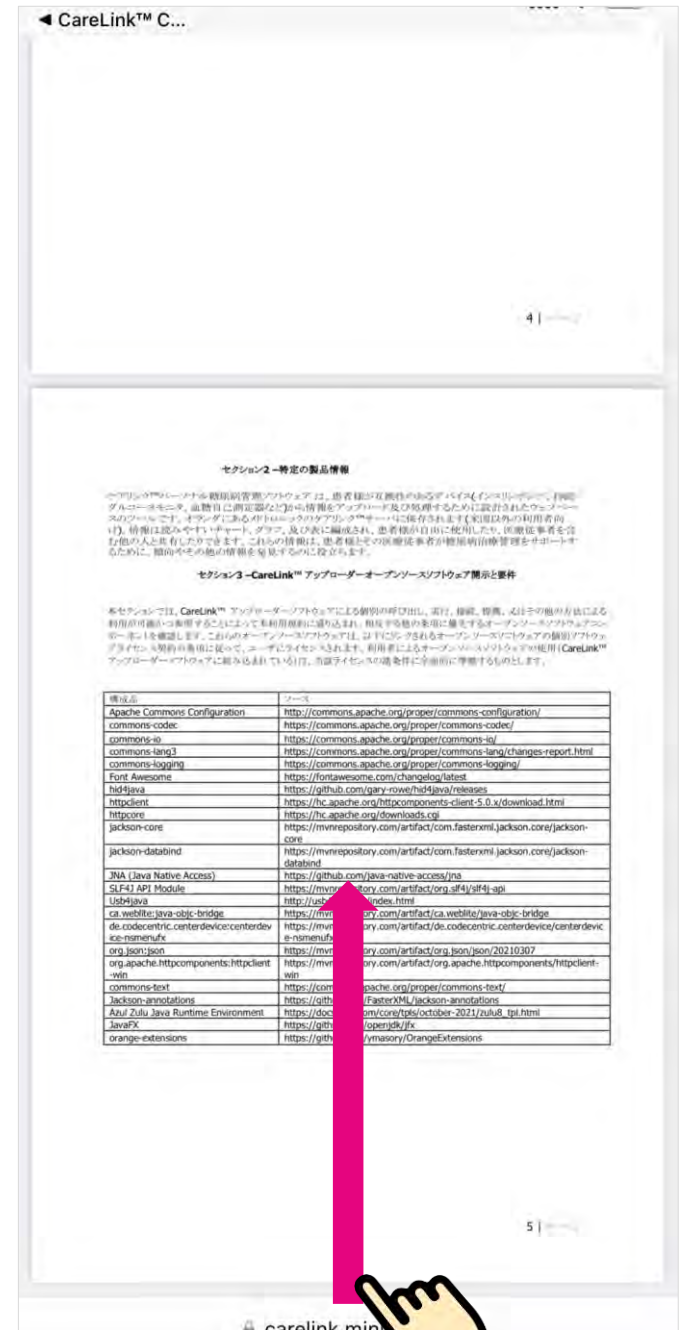

15

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う


「CareLink™ Connect」アプリをタップすると
「CareLink™ Connect」アプリに戻ります。

レニーのワンポイントアドバイス



画面の切り替え方法は機種によって異なります。

こちらの説明に当てはまらない場合はお使いのスマートフォンの取り扱い説明書をご確認ください。

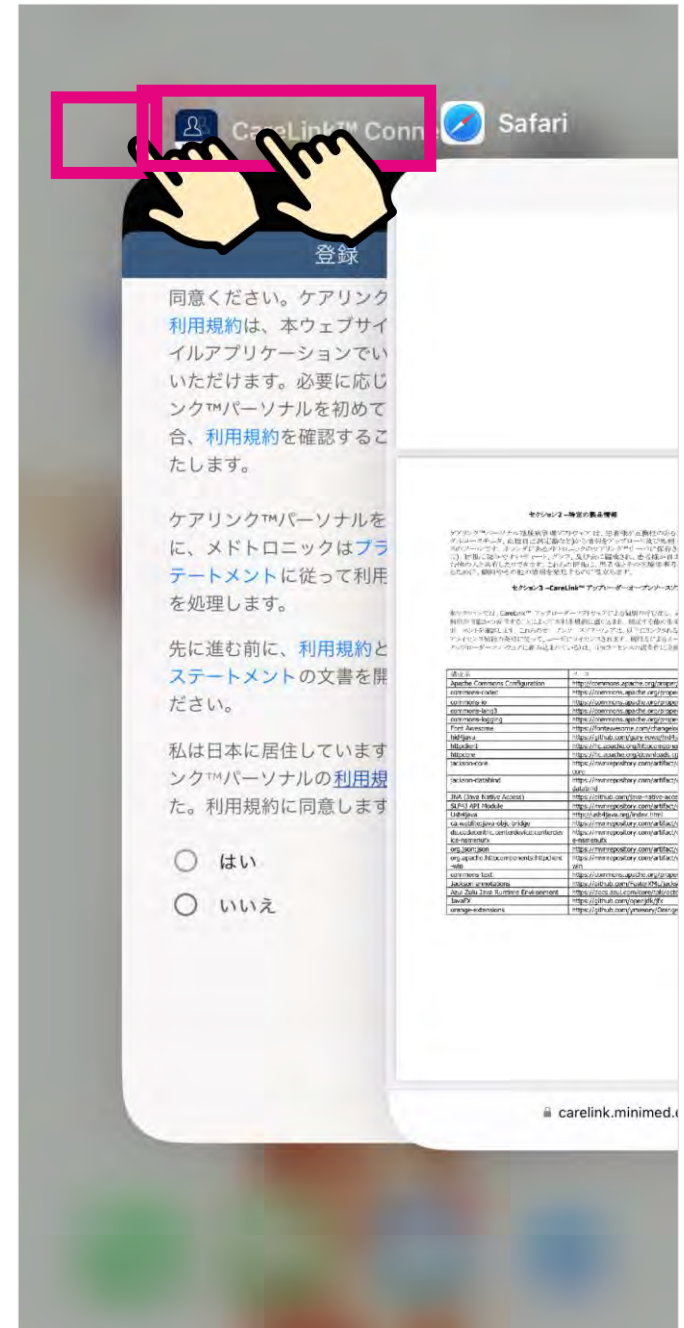


16

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

続いて、「プライバシーステートメント」の確認を行います。

青字の「プライバシーステートメント」をタップしてください。

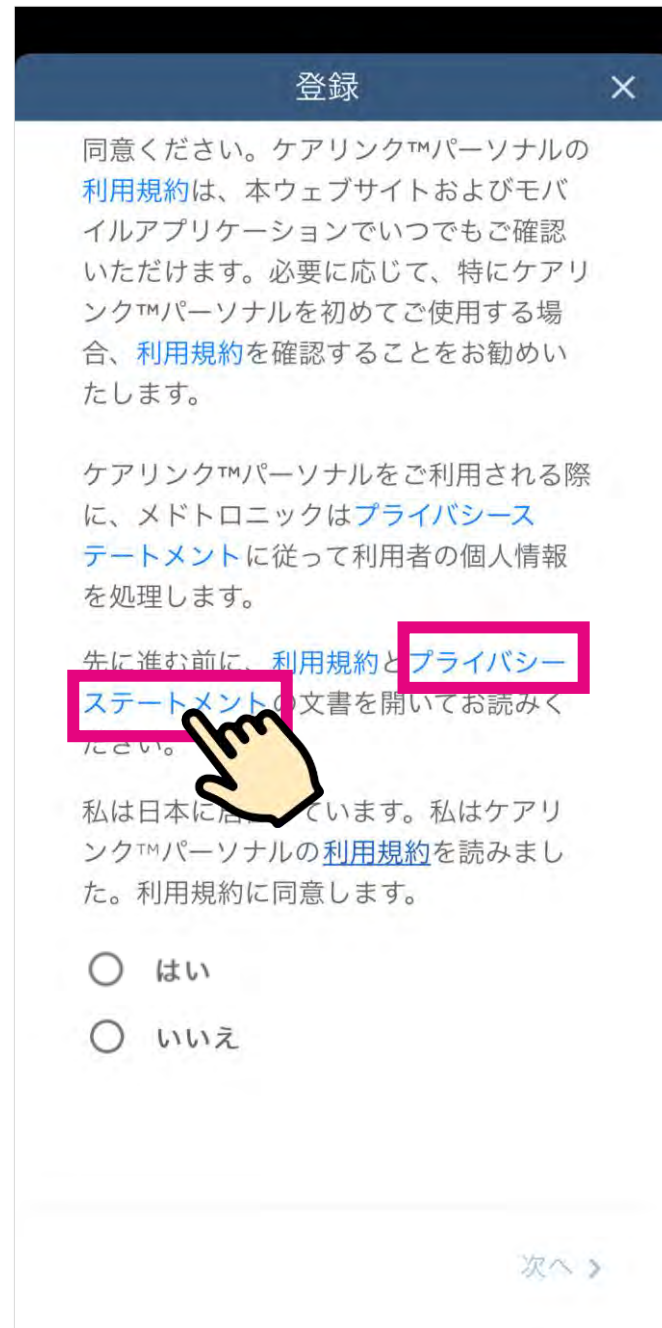


17

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

別のウィンドウでブラウザ画面が開き、

「CareLink™個人のプライバシーに関する声明」が表示されます。


利用規約同様、ご一読いただき内容を確認してください。

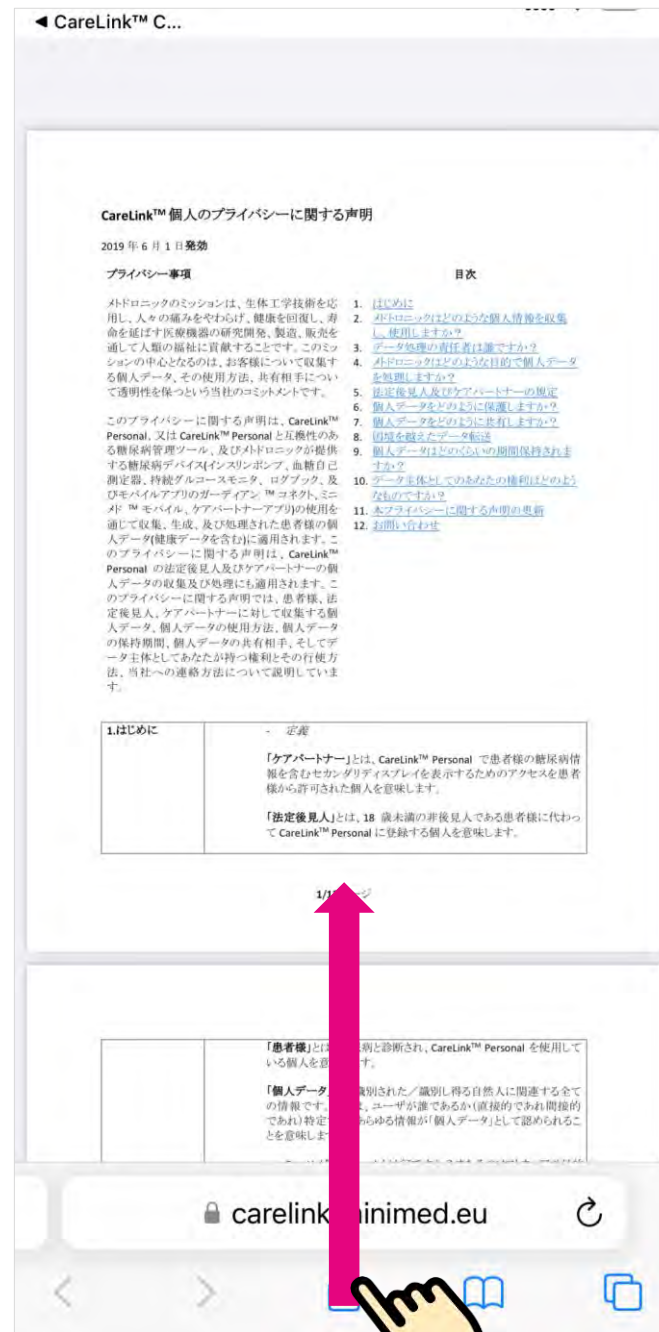

18

ケアリンク™パーソナル登録とログインを行う

「CareLink™個人のプライバシーに関する声明」を確認したら、先ほどの利用規約と同じ方法で、もう一度アプリに戻ります。

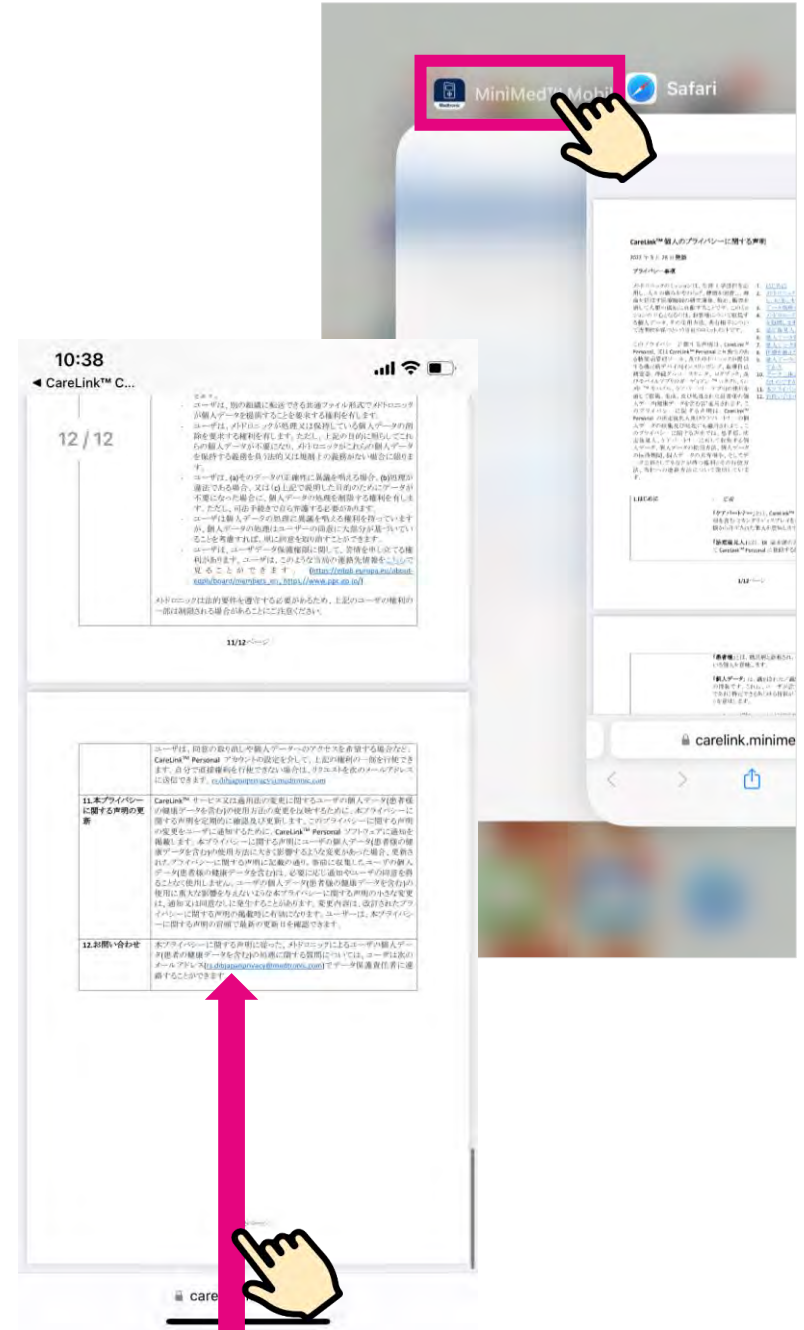

19

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

「はい」「次へ」の順にタップします。

レニーのワンポイントアドバイス

利用規約とプライバシーステートメントの確認を行っていない場合は「はい」を選択できません。必ず⑫～⑱でご案内した利用規約とプライバシーステートメントの確認を行ってください。

「いいえ」を選択される場合、利用規約に同意されないためケアリンクパーソナルをご利用できず、下記の案内が表示されます。



「いいえ」を選択したときの画面イメージ：

私は日本に居住しています。私はケアリンク™パーソナルの利用規約を読みました。利用規約に同意します。

- はい
- いいえ

「いいえ」を選択される場合、利用規約に同意されないため、ケアリンクパーソナルをご利用できませんのでご了承ください。

登録



同意ください。ケアリンク™パーソナルの**利用規約**は、本ウェブサイトおよびモバイルアプリケーションでいつでもご確認いただけます。必要に応じて、特にケアリンク™パーソナルを初めてご使用する場合、**利用規約**を確認することをお勧めいたします。

ケアリンク™パーソナルをご利用される際に、メドトロニックは**プライバシーステートメント**に従って利用者の個人情報を処理します。

先に進む前に、**利用規約**と**プライバシーステートメント**の文書を開いてお読みください。

私は日本に居住しています。私はケアリンク™パーソナルの**利用規約**を読みました。利用規約に同意します。

はい

いいえ

次へ >


20

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

ご登録者の年齢確認を行います。

家族・保護者としてご登録いただくには、18歳以上でなければなりません。

「はい」を選択し、「次へ」をタップします。

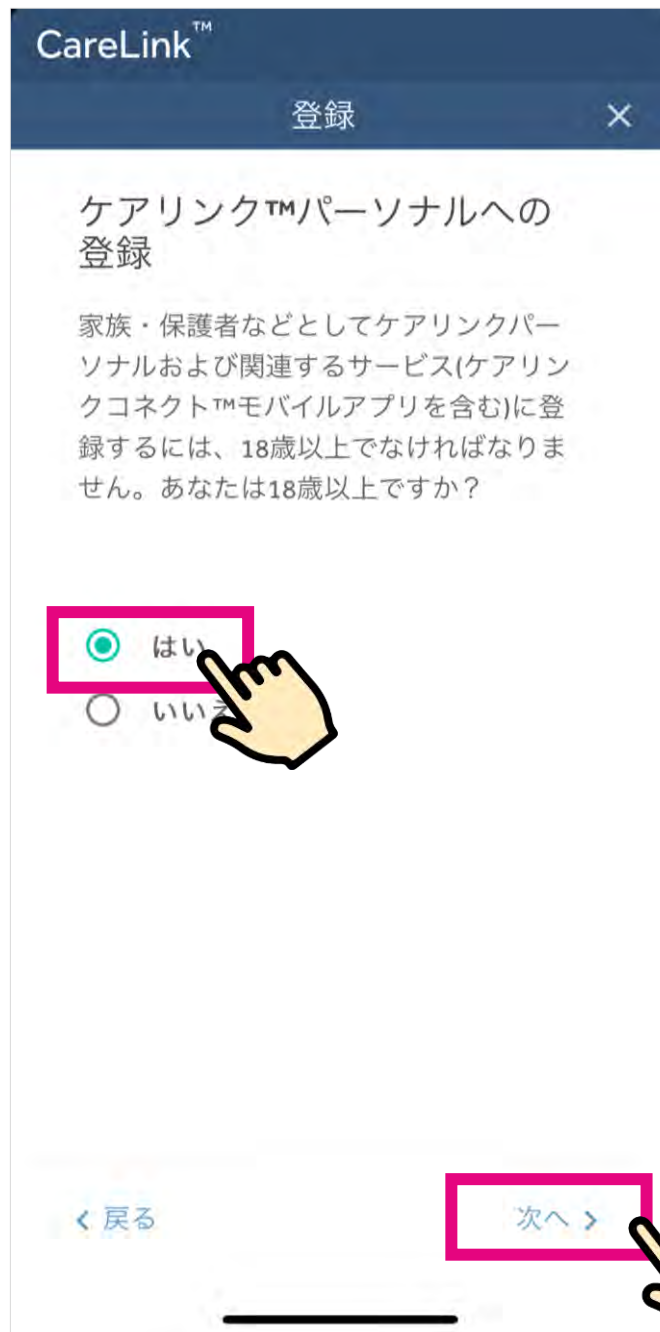


21

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

続いて、個人情報の処理に関する同意です。


スクロールアップし、最後まで記載内容をご確認ください。

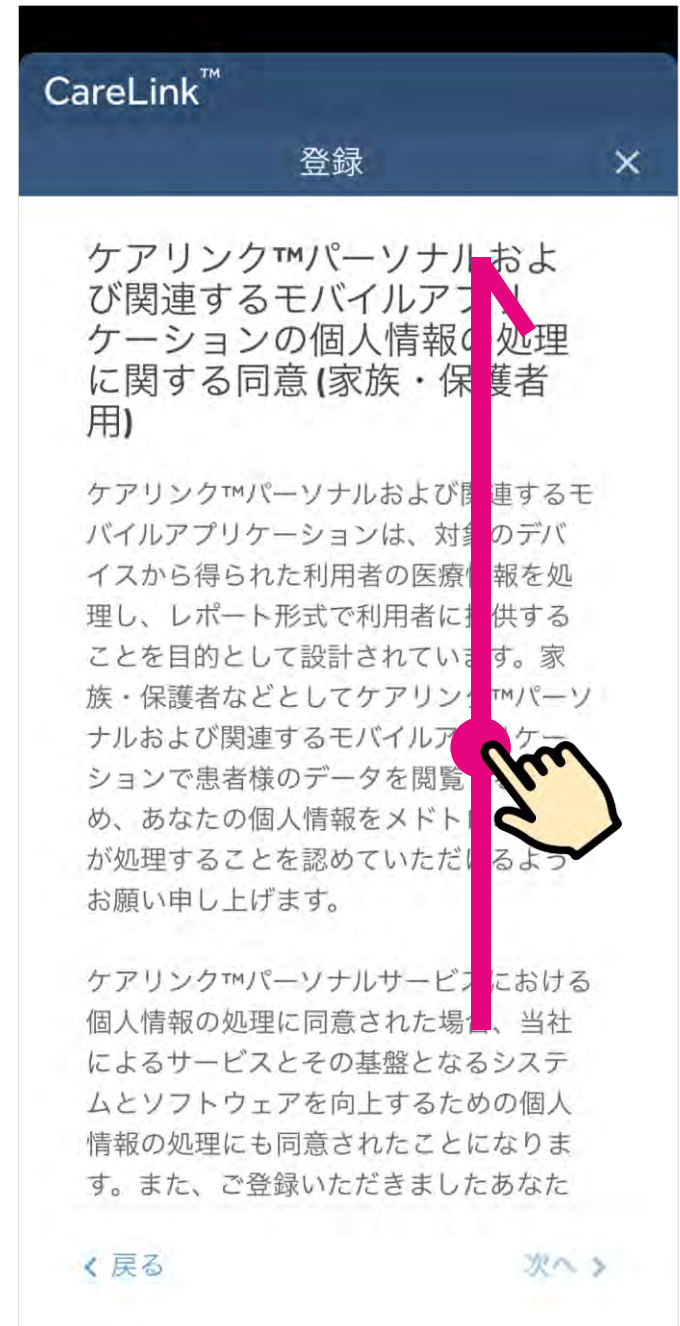

22

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

最後まで内容を確認し、同意したら「はい」
「次へ」の順でタップしてください。

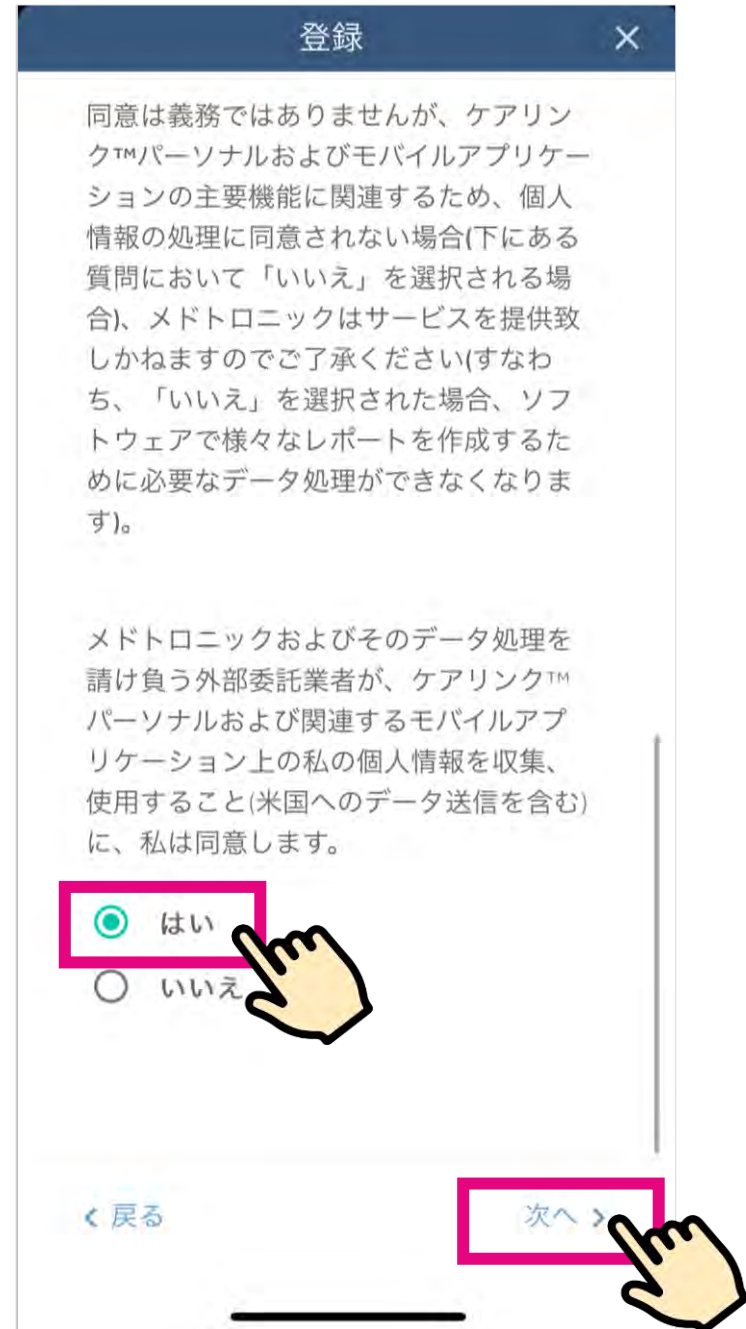

23

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

緊急な連絡の際のテキストメッセージ送信に関する説明です。

スクロールアップして、記載内容を最後までご確認ください。

CareLink™

登録 ×

ケアリンク™パーソナル | 緊急な連絡の際のテキストメッセージ

メドトロニックは、弊社製品の運営に関する緊急な連絡事項を現在電子メールで送信しています。これらの連絡事項は、テキストメッセージで送信する場合があります（アプリのユーザガイドをご覧ください）。一部の国や地域によっては、テキストメッセージに制限がかかる場合がございます。また、一部の国や地域によっては、テキストメッセージの受信に伴う料金が発生したり、このような連絡事項にテキストメッセージが利用できない場合もございます。テキストメッセージの受信に伴う料金はアカウント所有者の責任とさせていただきます。またメドトロニックは、これらのテキストメッセージの受信に伴う料金の払い戻しも補助も提供する予定はございません。

なお、こちらの同意は任意です。ケアリンク™パーソナルにログインし、アカウント


< 戻る

次へ >

24

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

最後まで確認したら、「はい」「次へ」の順に
タップします。

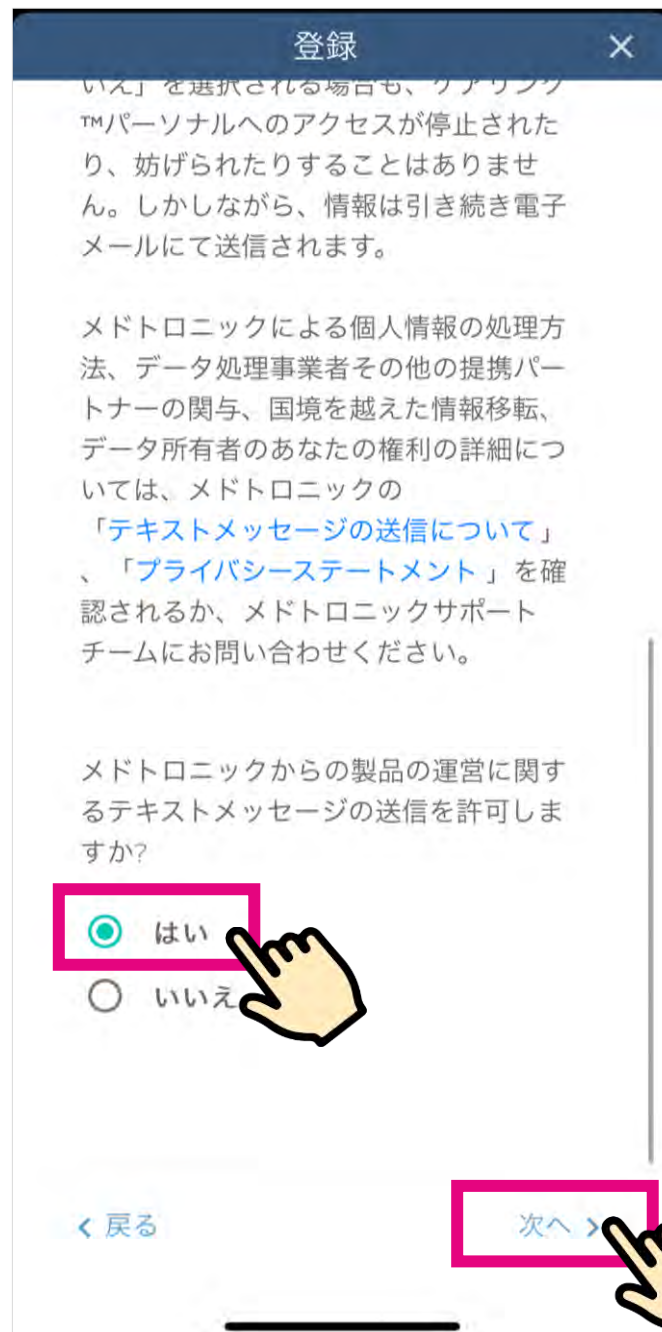


25

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

家族・保護者などへのテキストメッセージによる通知の説明です。


スクロールアップして、記載内容を最後までご確認ください。

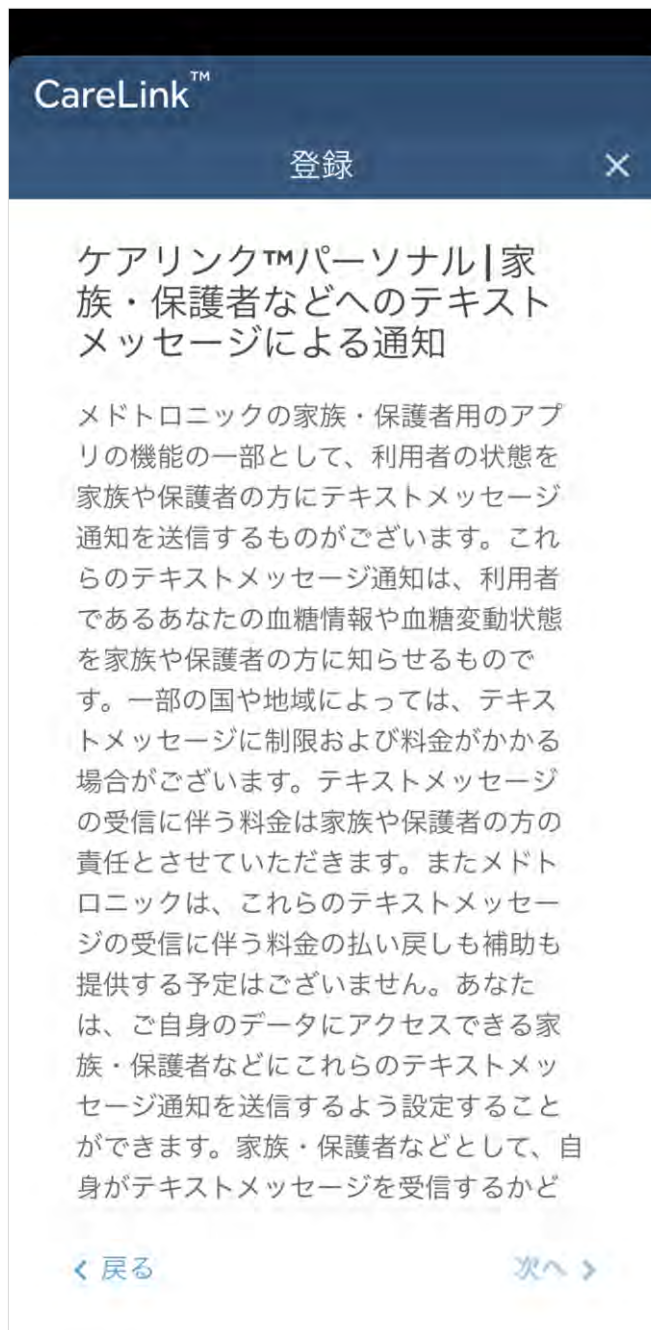

26

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

最後まで確認したら、「はい」「次へ」の順に
タップします。

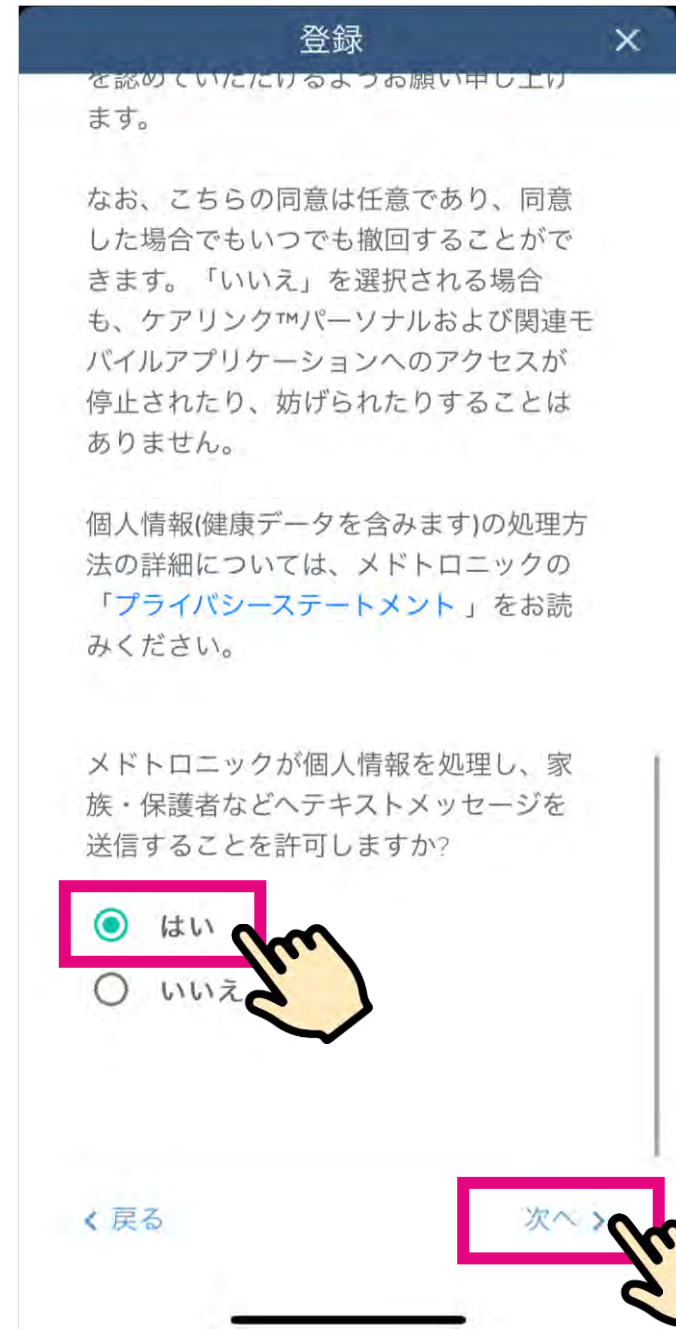

27

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

ケアリンク™パーソナルにログインする際のユーザIDとパスワード、メールアドレスを設定します。

[< 戻る](#)

CareLink™

登録 [×](#)

ログイン情報

ユーザID*

新しいパスワード* 

パスワードの強度：
8文字以上

新しいパスワードの確認* 

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

[< 戻る](#) [次へ >](#)

28

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

パスワード以下の8つの条件を満たす必要があります。

1. 長さが8文字以上
2. 小文字が1つ以上含まれている
3. 大文字が1つ以上含まれている
4. 特殊文字!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~が1つ以上含まれている
5. 数字が1つ以上含まれている
6. よく使用される用語やフレーズを含まない
7. 氏名やユーザIDを含まない
8. 最近使用されたパスワードでない

※「12345678」などパスワードとして弱すぎるものは設定できません。

メールアドレスはキャリアメールではなく、日常的に使用しているパソコンのメールアドレスを設定してください。

@以下が、以下で構成されるメールアドレスに代表されるキャリアメールのアドレスは製品を使用するための重要なお知らせを受け取れない可能性がありますので推奨されません。



キャリアメールの例：

- × xxxxxxx@docomo.ne.jp
- × xxxxxxx @ezweb.ne.jp
- × xxxxxxx @softbank.ne.jp

パソコンのメールアドレスをご設定ください。



推奨されるメールアドレスの例：

- xxxxxxx@gmail.com
- xxxxxxx@yahoo.co.jp など

29

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

ユーザIDを入力して下さい。

ユーザIDはご自身が覚えやすいものをご自由に設定いただけます。

すでにほかのユーザによって使用されているIDは設定できませんので、その場合はほかのIDをご検討ください。

CareLink™

登録 ×

ログイン情報

ユーザID*

新しいパスワード* 👁 i

パスワードの強度:

新しいパスワードの確認* 👁

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。


[< 戻る](#) [次へ >](#)

30-1

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

パスワードを設定します。

レニーのワンポイントアドバイス

パスワードは先ほどご紹介した8つの条件を満たす必要があります。8つの条件を再度確認する場合は、パスワード入力箇所の右側の「」のアイコンをタップすると確認することが可能です。

1. 長さが8文字以上
2. 小文字が1つ以上含まれている
3. 大文字が1つ以上含まれている
4. 特殊文字!"#\$%&'()*+,-./:;<=>@[¥]^_`{|}~が1つ以上含まれている
5. 数字が1つ以上含まれている
6. よく使用される用語やフレーズを含まない
7. 氏名やユーザIDを含まない
8. 最近使用されたパスワードでない



CareLink™

登録 ×

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic4567

新しいパスワード*  

パスワードの強度:

新しいパスワードの確認* 

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る 次へ >

30-2

ケアリンク™パーソナル 登録とログインを行う

パスワード入力中、入力されている文字数が8文字未満の場合は、入力欄が赤枠になり、「短すぎます。8文字以上必要です。」というメッセージが表示されます。

8文字以上入力したにもかかわらずパスワード入力欄が赤枠のままの場合は、先にお示しした8つの条件のいずれかが満たされていないことを表します。パスワード入力欄右の「**i**」をタップし、パスワードの8つの条件をご確認ください。

CareLink™ 登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●

短すぎます。8文字以上必要です*

パスワードの強度

新しいパスワード

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る

CareLink™ 登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic0123

新しいパスワード*
●●●●●●●●

パスワードの強度

新しいパスワード

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る




31

アカウントの設定とケアリンク™パーソナルへの登録を行う

パスワードの再入力を行います。

レニーのワンポイントアドバイス



パスワード入力欄右の目のアイコン「」をタップすると、アイコンが「」から「」に変わり、入力した文字列が表示され、同じパスワードが入力されているか確認することができます。

[< 戻る](#)

CareLink™

登録 [×](#)

ログイン情報

ユーザID*

新しいパスワード* 

パスワードの強度:  強い

新しいパスワードの確認* 

電子メールアドレス*

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

[< 戻る](#) [次へ >](#)

32

アカウントの設定とケアリンク™パーソナルへの登録を行う

メールアドレスを入力します。

メールアドレスはキャリアメールではなく、日常的に使用している**パソコンのメールアドレスを入力**してください。



@以下が、以下で構成されるメールアドレスに代表されるキャリアメールのアドレスは製品を使用するための重要なお知らせを受け取れない可能性がありますので推奨されません。

キャリアメールの一例：

- × xxxxxxxx@docomo.ne.jp
- × xxxxxxxx@ezweb.ne.jp
- × xxxxxxxx@softbank.ne.jp



パソコンのメールアドレスをご設定ください。
推奨されるメールアドレスの一例：

- xxxxxxxx@gmail.com
- xxxxxxxx@yahoo.co.jp など

CareLink™

登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic4567

新しいパスワード*
●●●●●●

パスワードの強度：
強い

新しいパスワードの確認*
●●●●●●

電子メールアドレス*
[Red box highlights this field]

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

< 戻る

次へ >

33

アカウントの設定とケアリンク™パーソナルへの登録を行う

すべての項目の入力が終わったら、「次へ」をタップします。

戻る

CareLink™

登録

ログイン情報

ユーザID*
Medtronic4567

新しいパスワード*
●●●●●●

パスワードの強度:
強い

新しいパスワードの確認*
●●●●●●

電子メールアドレス*
xxxxxxxx@gmail.com

2段階検証のためのコードを電子メールアドレスに送信します。

戻る

次へ

34

アカウントの設定とケアリンク™パーソナルへの登録を行う

続いて、家族・保護者などの情報の入力です。

必須項目の「名」「姓」を入力します。

ミドルネームまたはイニシャルの欄は入力しなくても問題ありません。

入力したら「送信」をタップします。



レニーのワンポイントアドバイス

「名」「姓」の順番にご注意ください。

例えばメドトロ太郎さんの場合、「太郎」「メドトロ」の順に入力します。

CareLink™

登録 ×

家族・保護者などの情報

名*
次郎

姓*
メドトロ

ミドルネームまたはイニシャル

< 戻る 送信 >



アカウントの設定とケアリンク™パーソナルへの登録を行う

登録したメールアドレスに「ケアリンク™パーソナル 検証コード」という件名のメールが届いています。


開封し、6桁の検証コードを確認してください。

レニーのワンポイントアドバイス



メールで送信された検証コードの検証時間（有効期限）は15分です。15分以内にアプリへの入力と送信（③⑥～③⑦）を完了させて下さい。

検証時間を越えた場合は一旦アプリに戻り、「検証コードが届かない場合」よりコードの再発行を行います。

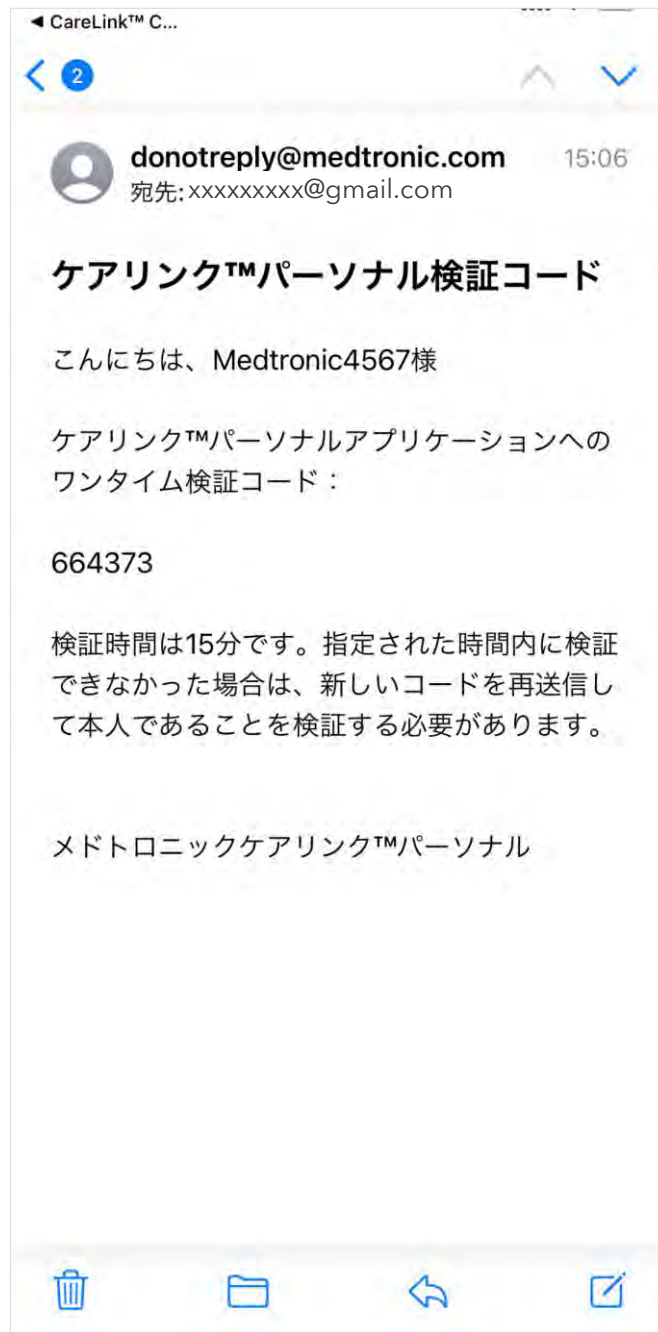

36

アカウントの設定とケアリンク™パーソナルへの登録を行う

6桁の検証コードを入力します。

(3桁ー3桁の形に自動で変換されます。)

入力した検証コードが正しいことを確認したら、「私はロボットではありません」の左の□をタップしてください。



37

アカウントの設定とケアリンク™パーソナルへの登録を行う

Google reCAPCHAが作動します。

画面の指示に従って、クイズに回答してください。

これは登録作業をしているのがロボットではないことを確認するためのステップです。

※右の例は表示された写真の中から自転車の写真を探すというものですが、クイズの内容や形式は都度変わります。



38

アカウントの設定とケアリンク™パーソナルへの登録を行う

ケアリンク™パーソナルの登録が完了しました。

「続行」をタップします。




39

ケアリンクパーソナルに ログインする

「ログインに進む」をタップします。

ント

1. 国/地域を選択します。

 日本

同じ居住国のケアリンク™に登録されている方のみをフォローすることができます。

2. 家族・保護者などのアカウントを作成します。

新規アカウントの作成

すでに家族・保護者などのアカウントをお持ちの場合は、ログインすることができます。

このアカウントは、フォローしたいケアリンク™患者アカウントとは異なります。


ログインに進む



40

ケアリンクパーソナルに ログインする

登録したユーザIDとパスワードを入力します。
入力後、「ログイン」をタップします。



CareLink™

ログイン先
CareLink™

ユーザID

パスワード

ログイン

パスワードを忘れた

41

ケアリンクパーソナルに ログインする

エンドユーザライセンス契約が表示されます。
スクロールアップして最後までご確認ください。

最後までご確認ください同意いただけたら、「同意
する」をタップします。

エンドユーザライセンス契 約

エンドユーザライセンス契約

ユーザ向けの通知：本契約は、CareLink™コネクタアプリに加え、関連文書、更新およびアップグレード(以下総括して「本ソフトウェア」という)に関して、ユーザ(個人または法人、以下「ユーザ」という)と Medtronic MiniMed, Inc. (「Medtronic」との間で締結される法的契約です。本ソフトウェアは適切な互換性のあるハードウェア(例：一部のMedtronic社製インスリンポンプ及びMedtronic社製持続グルコースモニタリング(CGM)デバイス)およびソフトウェア(例：Medtronic社製の患者治療管理ソフトウェア)(「本製品」)でのみ使用するためにMedtronicおよびその供給業者により提供されます。本ソフトウェアを使用する前に、本契約の条件を確認し、それに同意する必要があります。本契約の規定に同意しない場合は、本ソフトウェアを使用することはできませんので、直ちに使用を中止してください。

1. **ライセンスの付与** Medtronicは、本ソフトウェアおよび本製品が有効に取得され、本ソフトウェアと本製品のユーザガイドに記載されている方法で使用されている場合、ユーザに本製品と本ソフトウェアを使用するための限定的、非独占的、取消可能な、譲渡禁止、移転禁止のライセンスを付与します。

2. **その他の権利および制限** ユーザは、本ソフトウェアの複製、改造、構成品の分離、翻案、もしくは翻訳、またはその他の方法で派生物の作成を行わないこと、およびリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の方法で本ソフトウェアのソースコード特定を試みないことに同意します。ユーザは、第三者に本ソフトウェアの貸与、リース、頒布、または賃貸を行うことはできません。ユーザは、個人または組織を傷つけたり脅迫したり嫌がらせをしたりするために本ソフトウェアまたは本製品を使用しないことに同意します。また、Medtronicサービス(またはMedtronicサービスに接続されたネットワークあるいはデバイス)に損傷、過重負担、干渉を与えたり、使用不能にしたりしないことに同意します。さらに、**付属書A**に記載されるオープンソースソフトウェアの要件を遵守することに同意します。

3. **権利の帰属** 本ソフトウェアの権原、所有権、および知的財産権は、Medtronicまたはその供給業者が有するものとします。本ソフトウェアは米国の著作権法および国際著作権条約に加え、知的財産に関する法律および条約によって保護されています。本ソフトウェアの権原または所有権はユーザには譲渡されず、本ライセンスは本ソフトウェアに関する何らかの権利の販売とはみなされないものとします。ユーザは、本ソフトウェアのいかなるコピーにも、著作権、商標、登録商標、またはその他の所有権に関する表示を削除あるいは変更しないことに同意します。Medtronicとその供給業者は、ユーザに付与されないすべての権利を保持します。

4. **データプライバシー** 本ソフトウェアを使用することにより、個人情報がアップロード、保存、維持、および/または共有されますが、これには、指定された個人の糖尿病管理データおよび診断データに関する通知およびパーソナライズ設定が含まれる場合があります。ユーザは、Medtronic に対し、https://carelink.minimed.eu/crs/ocj/14.04/media/ja/privacy_statement.pdf にある

同意する




42

ケアリンクパーソナルに ログインする

ケアリンク™コネクトの本契約の条件に同意します
という内容のポップアップが表示されます。

「同意する」をタップします。

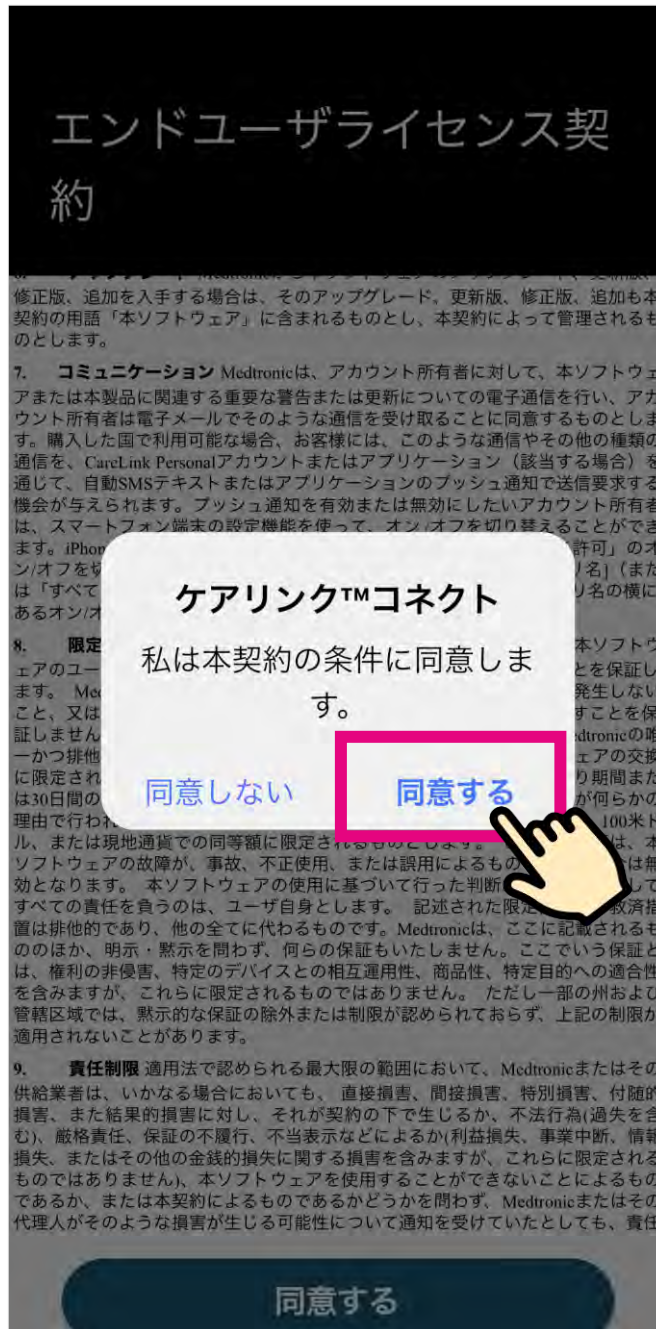

43

スマートフォンの設定をする

続いて、スマートフォンの設定です。
画面右下の「次へ」をタップします。



スマートフォンの設定

ケアリンク™コネクトアプリが意図したとおりに動作するには、特定のスマートフォンの設定が必要です。

次へ



44

スマートフォンの設定をする

通知に関する説明です。

「次へ」をタップします。



通知

次の画面でメッセージが表示されたら、通知を許可してください。

通知には、アラートメッセージとアラート音が含まれる場合があります。通知を許可しない場合、ポンプアラートまたはセンサアラートは送信されません。

前へ

次へ




45

スマートフォンの設定をする

通知の送信に関する確認メッセージが表示されます。
「許可」をタップします。

通知の方法はお使いのスマートフォンの“設定”より
後ほど変更可能です。

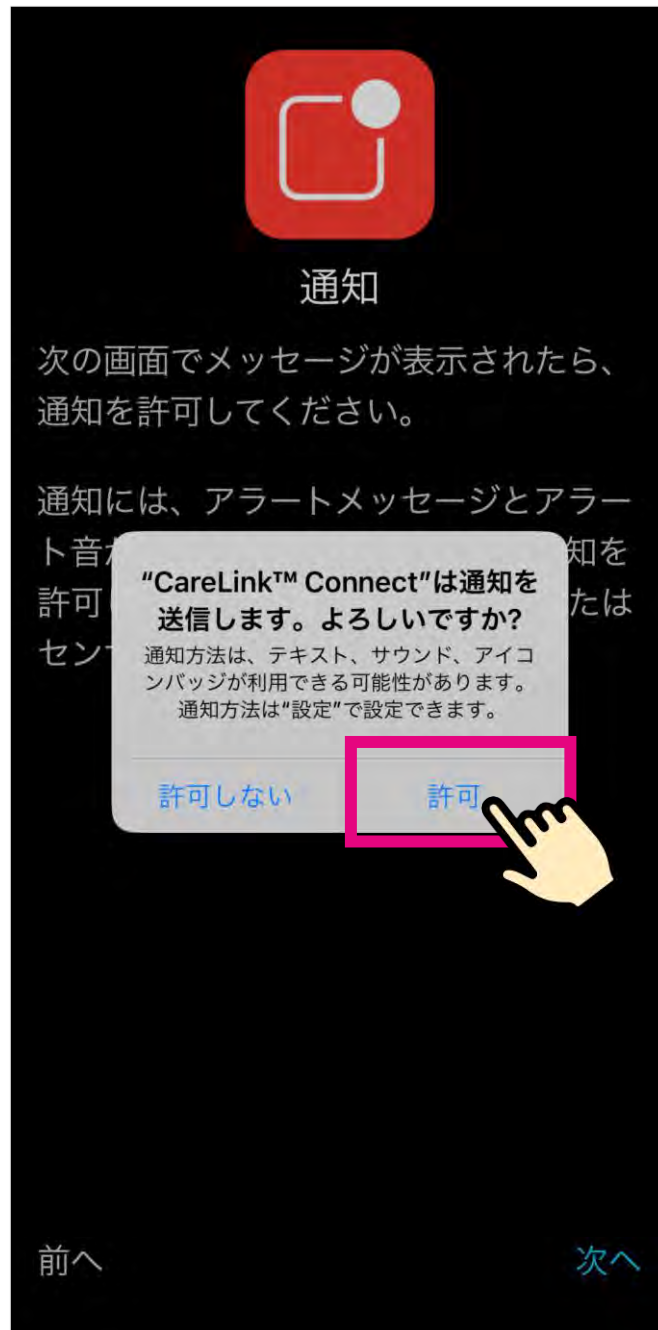

46

スマートフォンの設定をする

ケアリンク™コネクトアプリ使用上の注意事項として警告の説明が表示されます。

記載内容を確認し「次へ」をタップします。



警告

次の条件下では、ケアリンク™コネクトアプリから音声通知/ポップアップ通知を受信できない場合があります。

- ・ **プッシュ通知** がオフになっている
- ・ **おやすみモード** がオンになっている
- ・ **通知音** がオフになっている
- ・ ケアリンク™サーバへの携帯電話接続または無線接続がない

通知およびリアルタイムの情報については、必ず患者さんのポンプまたは持続グルコースモニタシステムを参照してください。家族・保護者などのモバイル機器および患者さんのモバイル機器はいずれも、どんな時にも接続が切断する可能性があります。

前へ

次へ




47

データ共有を依頼する

フォローのリクエストをタップします。


フォローのリクエストとは、指定した方にケアリンク™パーソナルのデータ共有を依頼することを意味します。

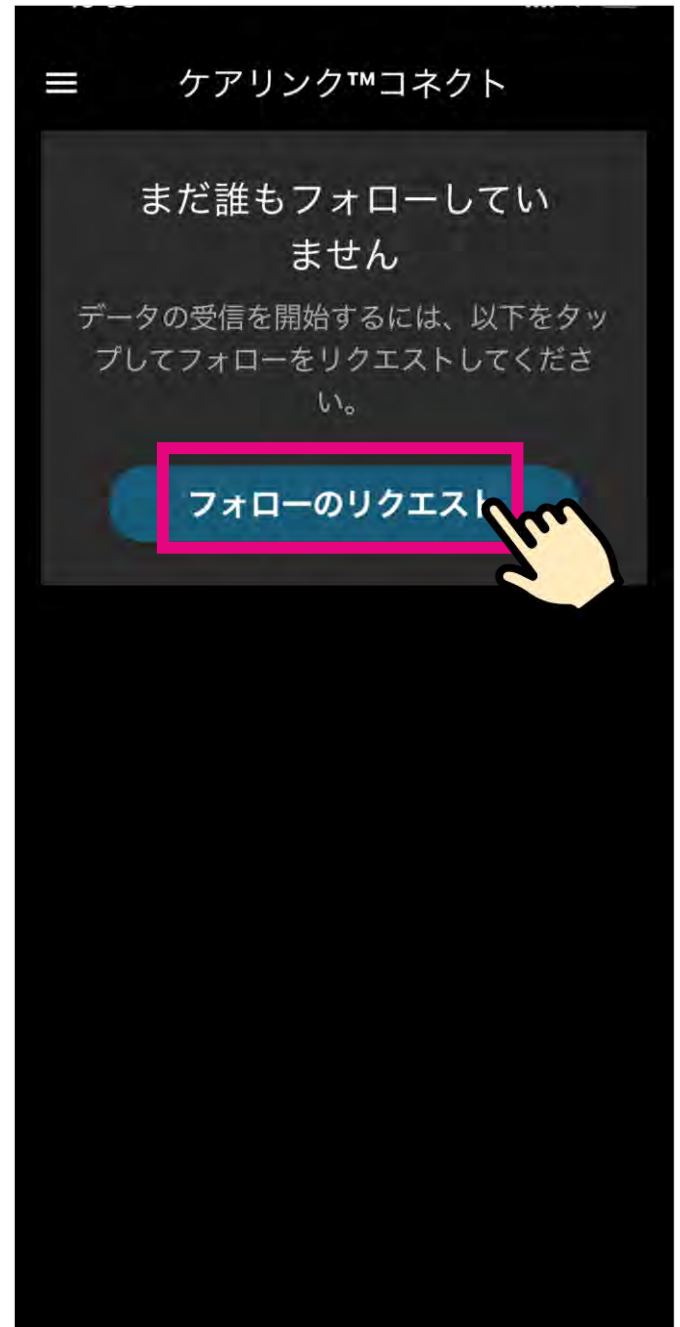

48

データ共有を依頼する

フォローしたい方のケアリンク™パーソナル患者アカウントのユーザIDを入力し、「リクエストを送信する」をタップします。

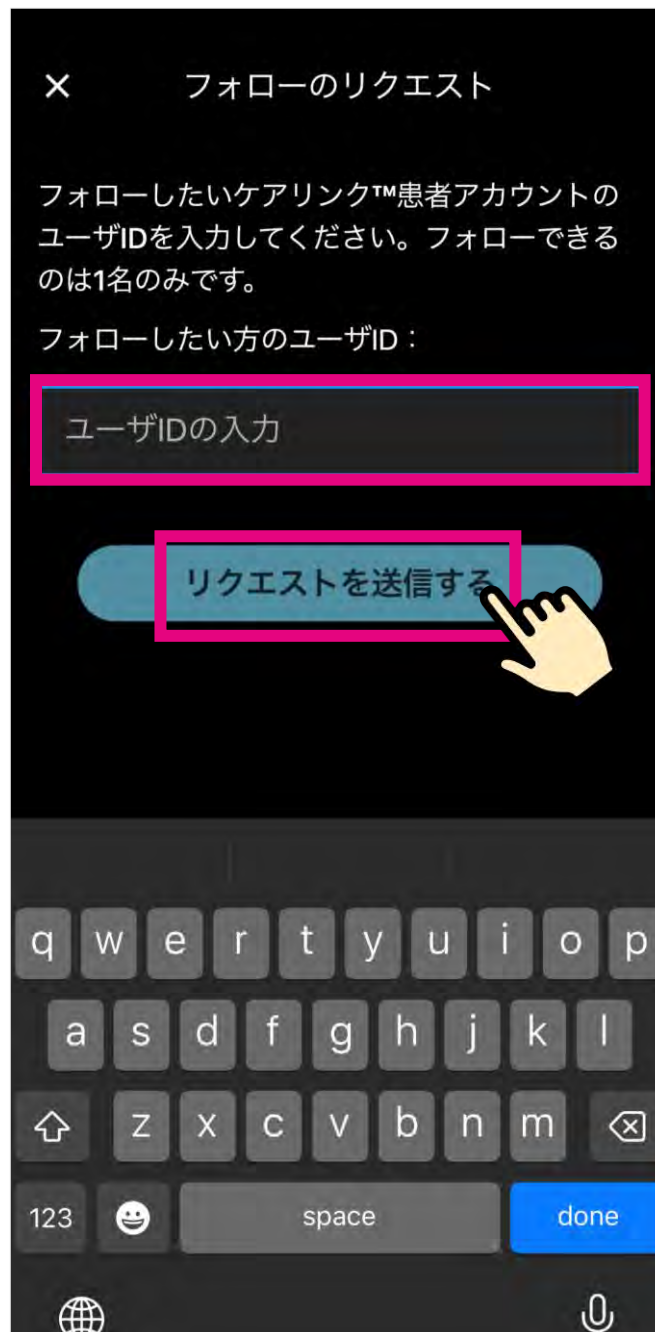

49

データ共有を依頼する

リクエストが送信されました。

24時間以内にリクエストした患者さんに承諾してもらう必要があります。

「OK」をタップします。



50

データ共有を依頼する

今送信したリクエストの情報が表示されます。




51

データ共有を依頼する

リクエストされた患者さんは、メールで通知を受け取ります。

患者さんにケアリンク™パーソナルにログインし、リクエストの承諾を行ってもらってください。

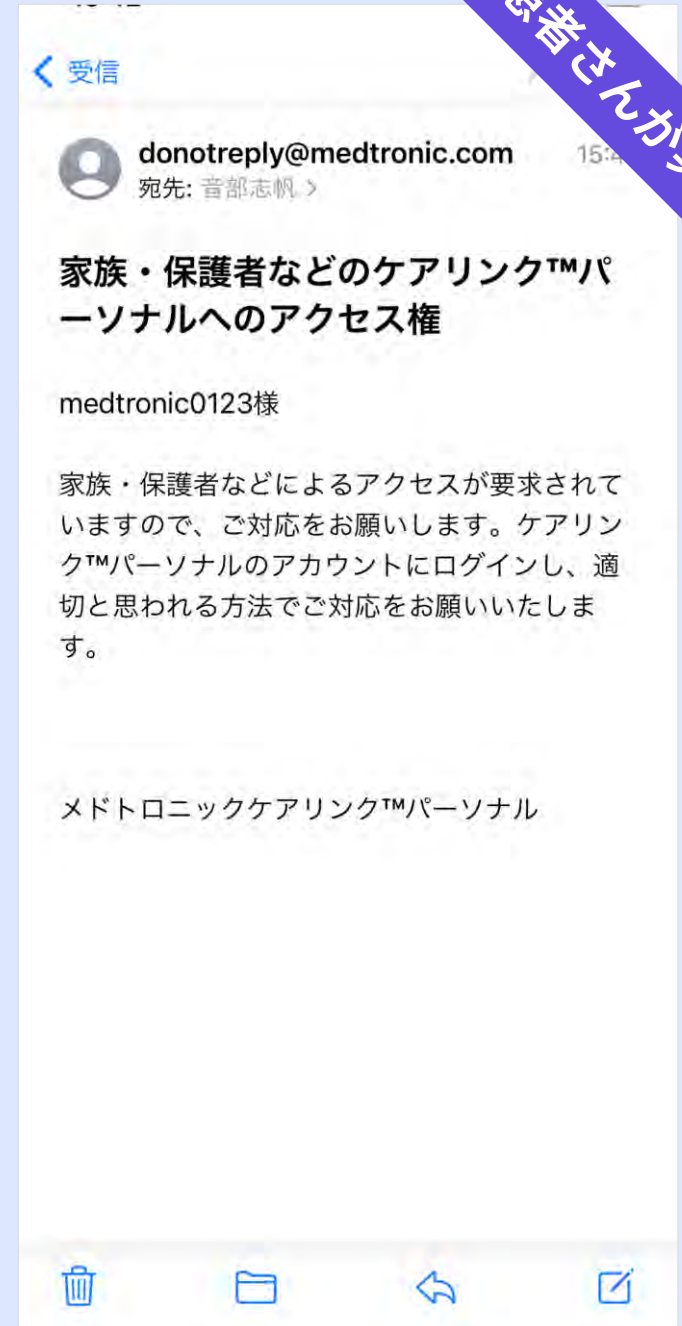

52

データ共有を依頼する

ケアリンク™パーソナルにログインすると、通知アイコンに緑マークが点灯し、お知らせが届いていることを示しています。

通知アイコンをタップします。



53

データ共有を依頼する

通知アイコンをタップすると、通知の内容が表示されます。

リクエストを受け取っている場合は、画像のようなメッセージが表示されますので、水色の「リクエストの表示」をタップします。



患者さんが実施

54

データ共有を依頼する

リクエストが患者さんご自身が把握している方からのものであることを確認したら、「承諾」をタップしてください。

リクエストに覚え場ない場合、または共有しない場合、「拒否」をタップするとデータ共有はされません。



患者さんが実施

55

データ共有を依頼する

「承諾」をタップすると、リクエストのステータスが「アクティブ」になります。

共有先のアカウントの右側の下向きの矢印をタップすると、テキスト通知送信設定を変更することができます。



準備さんが実施

56

データ共有を依頼する

ショートメッセージで通知を共有したい場合は、「テキスト通知」のスライダーをタップし、オンにしてください。



準備さんが実施

57

データ共有を依頼する

テキスト通知をオンにすると、変更内容が表示され、画像のような表示に代わります。



準備さんが実施

58

データ共有を依頼する

承諾が完了すると、リクエストを送信した方に、リクエストが承諾されたことを通知するメールが送信されます。



59

データ共有を依頼する

ケアリンク™コネクトアプリを開き、説明を確認すると、リクエストが承諾されたことを知らせるポップアップが開きます。

通知内容を設定する場合は、「通知設定」をタップします。通知設定は後から設定することも可能ですので、その場合は「現時点ではスキップする」をタップします。




60

データ共有を依頼する

「通知設定」をタップすると、患者設定画面が開きます。

通知設定の項目は下のほうに記載されていますので、スクロールアップして画面下部を表示します。

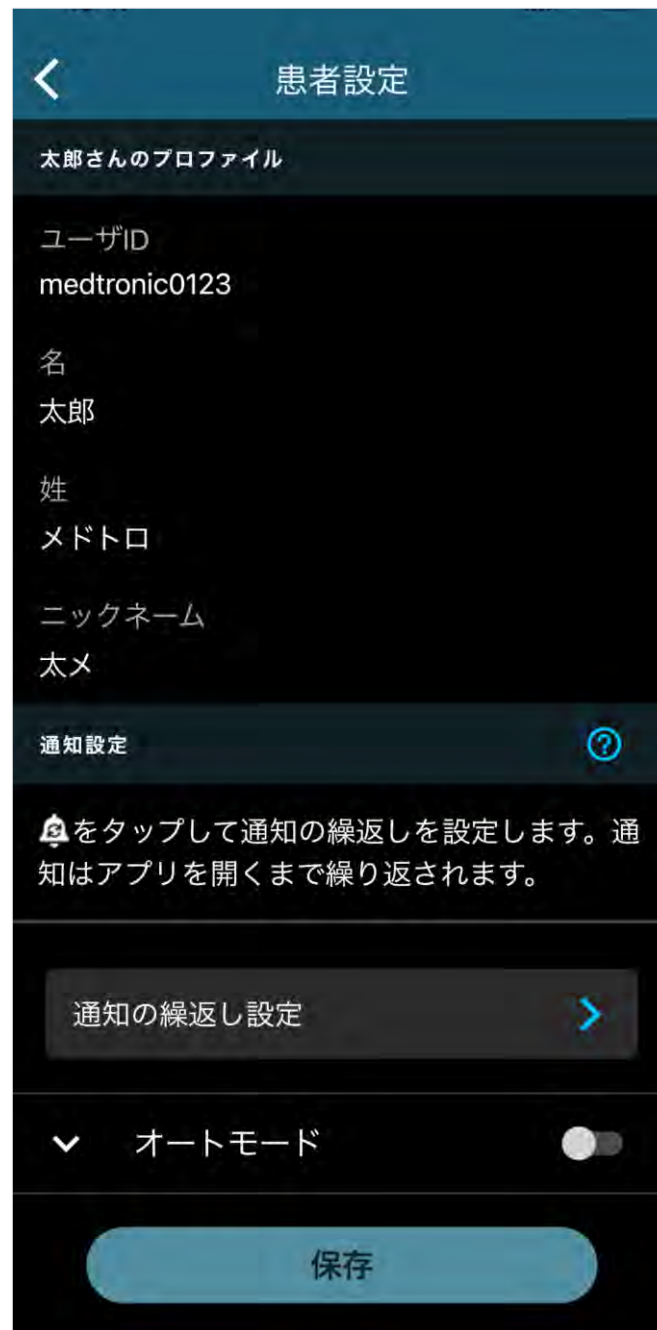

61

通知の設定をする

それぞれの通知のオン/オフを設定します。

スクロールバーが青になっているアラートはオンになっており、通知を受け取ります。

通知を繰り返し受け取りたい場合は「通知の繰り返し設定」で設定が可能です。



62


通知の設定をする

希望する場合は「通知の繰り返し設定」を開き、通知音の設定を行います。

通知の繰り返し設定をオンにしている場合、通知はアプリを開き、説明を確認するまで繰り返されますのでご注意ください。

設定が完了したら、画面左上の左向き矢印をタップします。

通知の繰り返し設定を希望しない場合は設定の必要がありませんので、この手順をスキップして下さい。

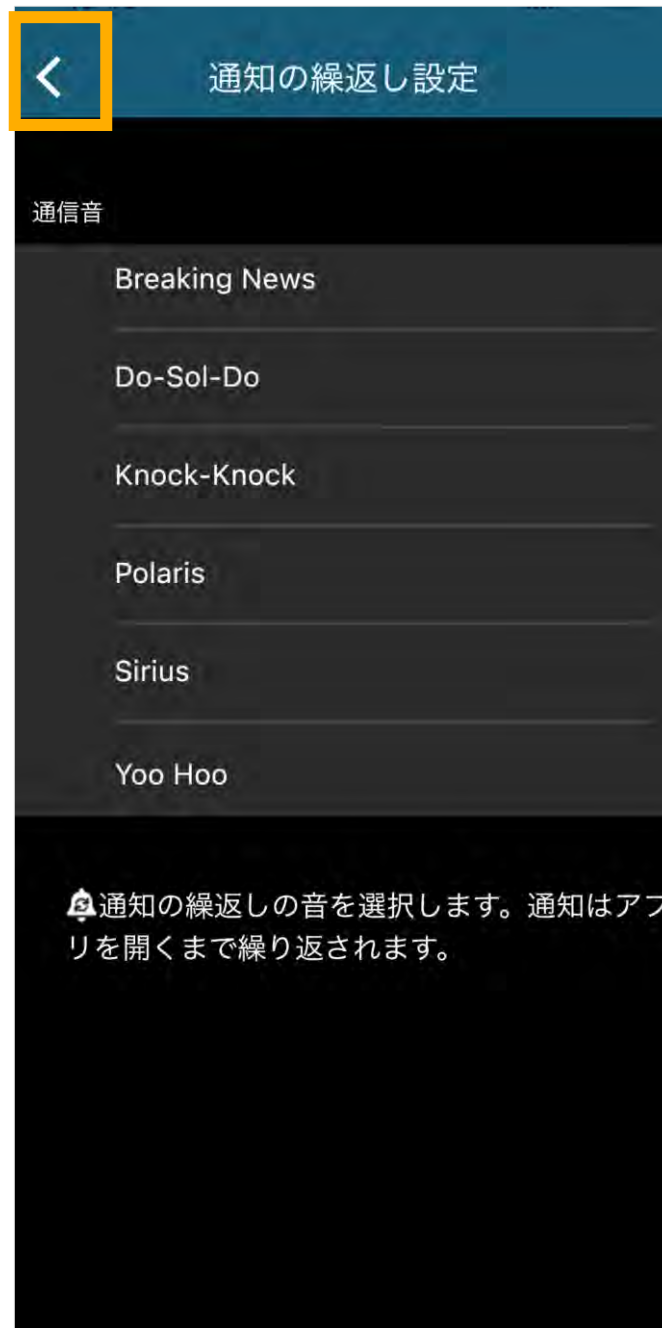

63

通知の設定をする

設定した内容を確認し、「保存」をタップします。



64


完了

以上でケアリンクコネクトアプリのセットアップは完了です。

レニーのワンポイントアドバイス

患者さん側でデータの同期がされていない時は、「データなし」の表示が現れます。

インターネット接続がない、ケアリンク™にログインしていない、などの理由が考えられますので、患者さんにケアリンク™パーソナルへのデータ同期を依頼してください。

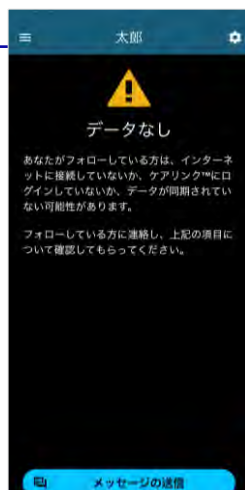

LINE 公式アカウント ユーザー用メドトロニックダイアビータイス



タイムリーな
製品・安全情報

メニューで
簡単操作

電話サポート

友達登録はこちらから！



本サービスの利用は、弊社の糖尿病関連製品を使用中の患者さん又はそのご家族の方に限りです。それ以外の方は利用できません。必ず本サービスの利用規約を確認の上、利用をお願い致します。

お困りの時は—————



日本メドトロニック24時間サポートライン

0120-56-32-56 (24時間365日)

- インスリンポンプやCGM、アプリの使用方法でお困りの場合
- ミニメド™モバイルアプリの設定方法についてお問い合わせの際は、本資料をお手元にご用意の上お電話をお願い致します



Club Lennyとハロー！レニーに登録しましょう



www.medtronic.com/clublenny

- 製品をより安全に、安心してお使いいただくためのメール配信サービスです
- 製品の使用を開始する際、できるだけ速やかにご登録をお願い致します
- すでに使用を開始されている方も、同様にご登録をお願い致します

Medtronic

日本メドトロニック株式会社
ダイアビータイス
〒108-0075 東京都品川区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名：メドトロニックミニメド700シリーズ 医療機器承認番号：30300BZX00256000
© 2022 Medtronic.

Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。

TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

DIAB2212-08