

はじめてみよう！ エクステンデッド 切替えガイド

ミニメド™780G 6.7バージョン (従来のソフトウェア) ユーザー用
ミニメド™770Gユーザー用




必ず担当の医療従事者から説明を受けてから使用してください。
必要に応じ、いつもお使いの「はじめてみよう！インスリンポンプ」をご用意ください。



製品ウェブサイト：


www.medtronic.com/minimed780g

製品の使用方法やよくある質問などをご紹介します。

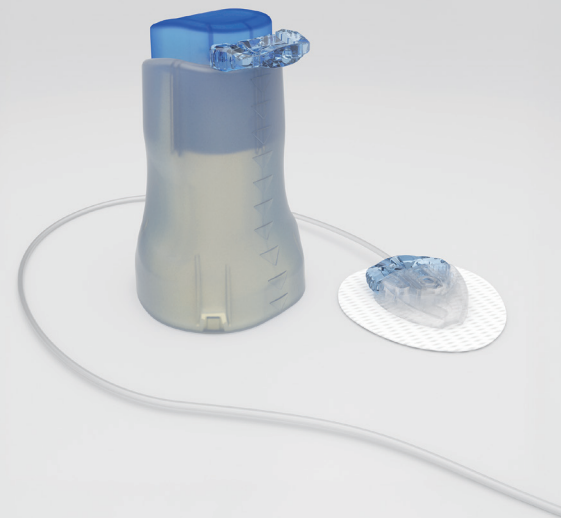


 **minimed**

注入セット交換に必要なもの

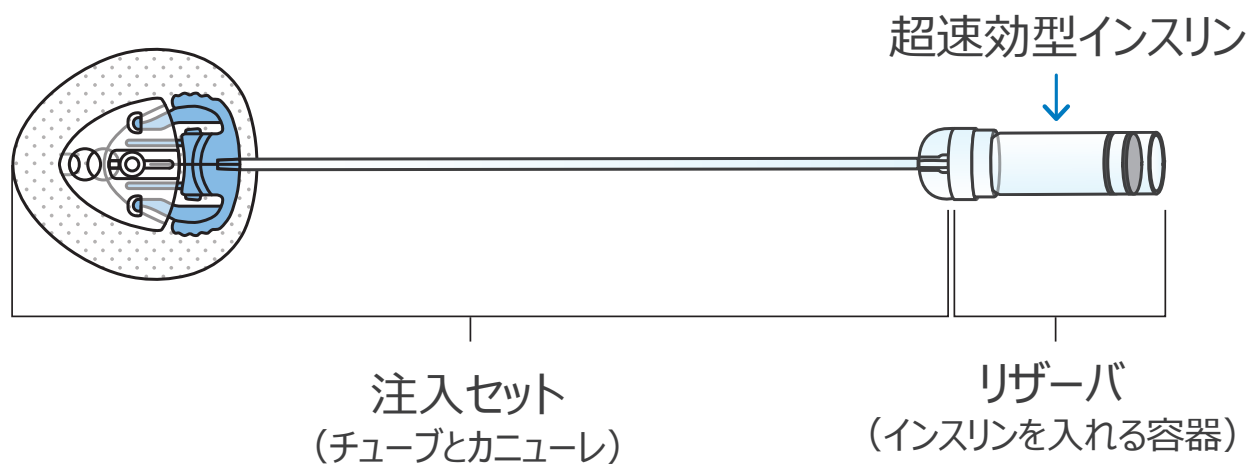


エクステンデッド注入セットとエクステンデッドリザーバーは、7日に1度交換します


準備物

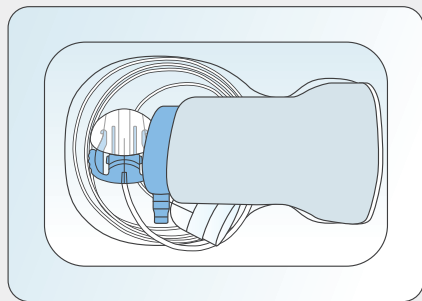

エクステンデッド注入セット
ポンプと体をつなぐチューブ

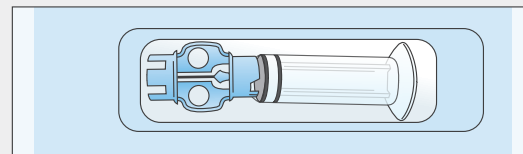


エクステンデッドリザーバー
※従来のリザーバは使用できません

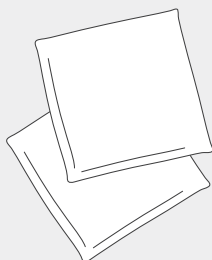

アルコール綿



インスリン

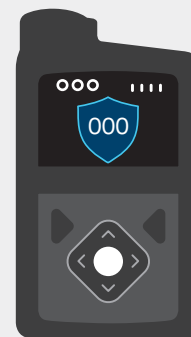

バイアルは常温に戻してね



注入セット交換の流れ

ステップ5の「装着する」以外は、これまでの注入セット/リザーバと同様の手順です。




古いセットを取り外す

P.4



ポンプを巻き戻す

P.5

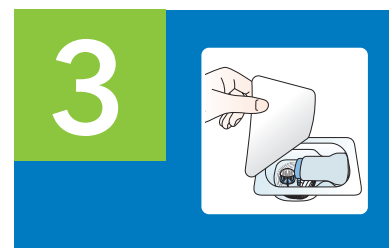

新しいセットを準備する

P.6




ポンプにセットする

P.7



装着する

P.8~10

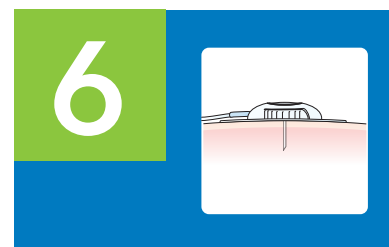

カニューレ充填


P.11



古いセットを取り外す


1

カニューレから
注入セットを取り外す

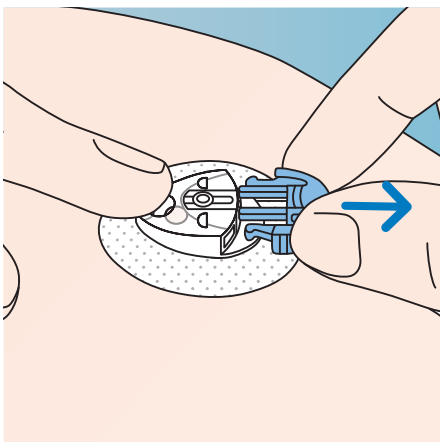

2

ポンプから古いリザーバを
取り外す

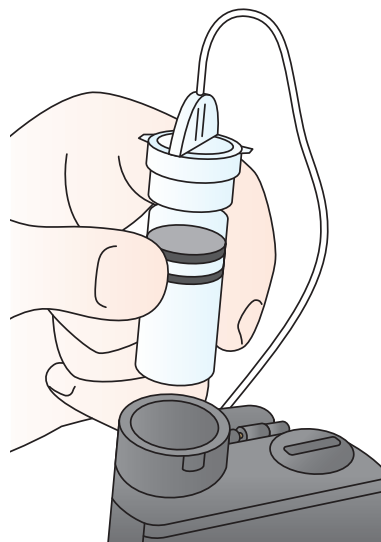

\ 外して〜! /



重要!
チェック



交換の際は、まずは必ず身体から
チューブを外してね

1

古いセットを
取り外す

2

ポンプを
巻き戻す

3

新しいセットを
準備する

4

ポンプに
セットする

5

装着する


6

カニューレ充填



ポンプを巻き戻す

「リザーバとチューブ」（ミニメド770G）または、「リザーバと注入セット」（ミニメド780G）のメニューから、これまでと同じ手順で、ポンプの巻き戻しを行ってください。

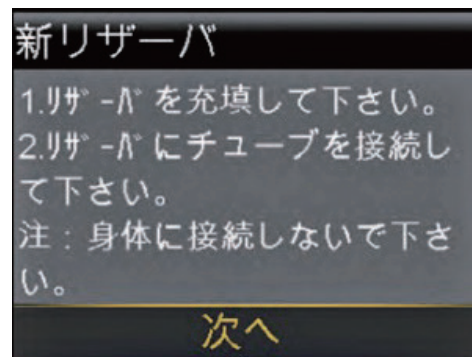

この画面で「次へ」を選択せず **3** へ

1

古いセットを
取り外す

2

ポンプを
巻き戻す

3

新しいセットを
準備する

4

ポンプに
セットする

5

装着する

6


カニューレ充填



新しいセットを準備する

エクステンデッド注入セットとエクステンデッドリザーバーをご使用ください。

リザーバへのインスリン充填やセットの組み合わせ方などは、これまでと同じ手順です。

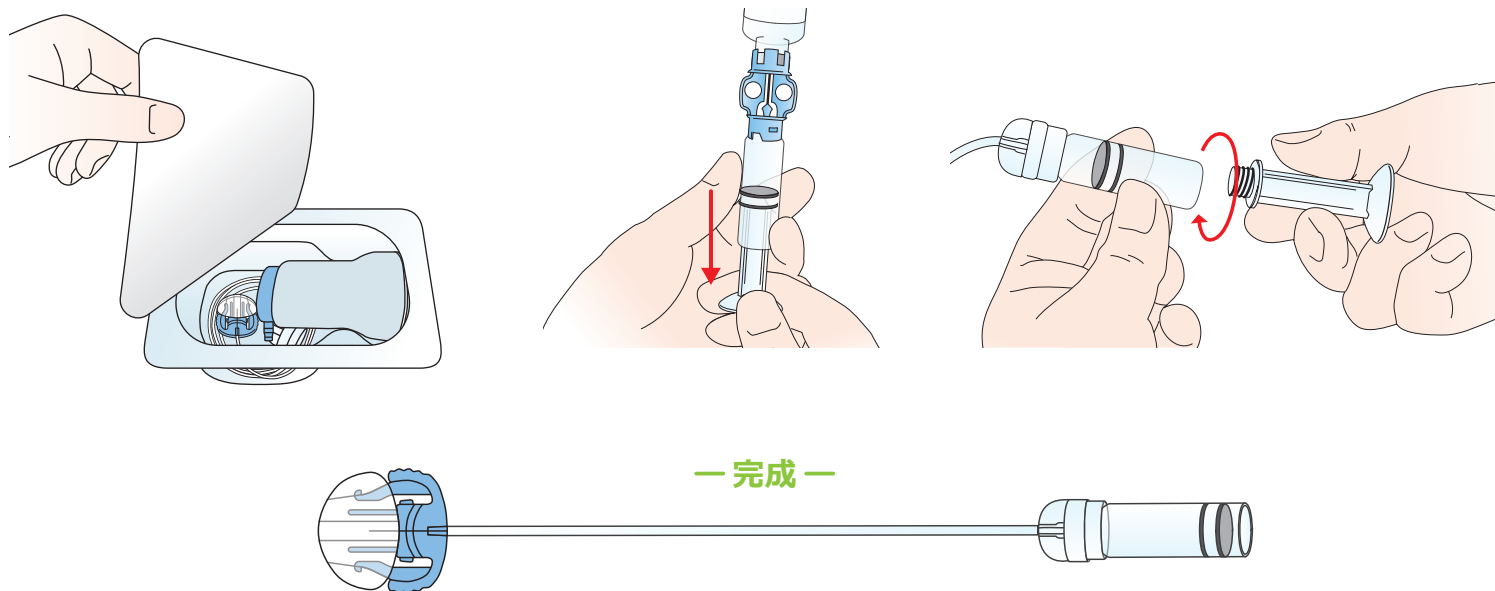

1 古いセットを
取り外す

2 ポンプを
巻き戻す

3 新しいセットを
準備する

4 ポンプに
セットする

5 装着する

6 カニューレ充填



ポンプにセットする

これまでと同じ手順で、リザーバをポンプにセットし、「リザーバの取付」、「チューブ充填」を行います。「チューブ充填」の前に白キャップを外して、針先からインスリンが出るのを確認します。

リザーバの取付

完了するまで「取付」を長押ししてください。
注：身体に接続しないでください。



取付 次へ

チューブ充填

注：身体に接続しないでください。先端に液が見えるまで「充填」を長押しし、その後「次へ」を選択して下さい。

0.0



充填 次へ

カニューレ充填？

1. 注入セットを身体に取り付けて下さい。2. カニューレを充填するには「充填」を、充填の必要がなければ「完了」を選択して下さい。

充填

完了

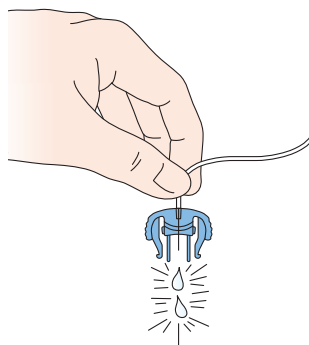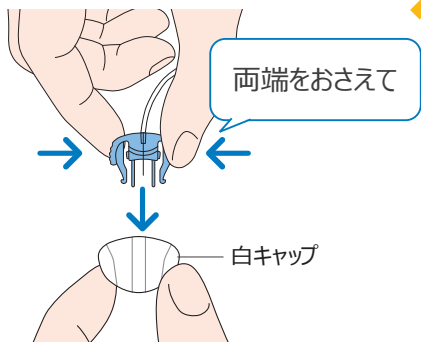

この画面で「充填」を選択せず **5** へ

1

古いセットを取り外す

2

ポンプを巻き戻す

3

新しいセットを準備する

4

ポンプにセットする

5

装着する


6

カニューレ充填




装着する

1 装着部をアルコール消毒する

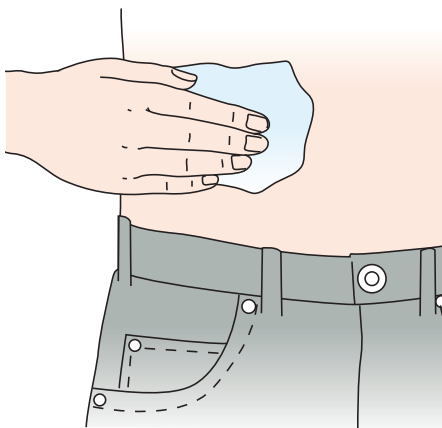

2 テープから紙をはがす

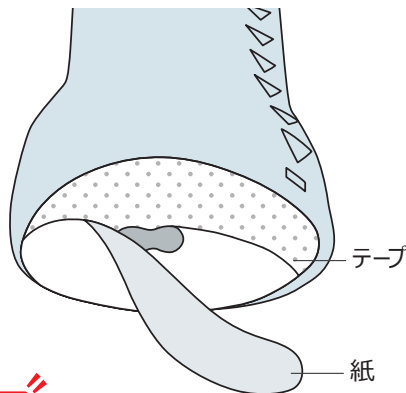

テープにさわらないでね!

3 保護キャップを取り外す



保護キャップはお風呂のとき使うよ

1 古いセットを取り外す

2 ポンプを巻き戻す

3 新しいセットを準備する

4 ポンプにセットする

5 装着する


6 カニユレ充填



装着する

4


装着部位にあて、トップボタンを
下まで押し下げて装着する

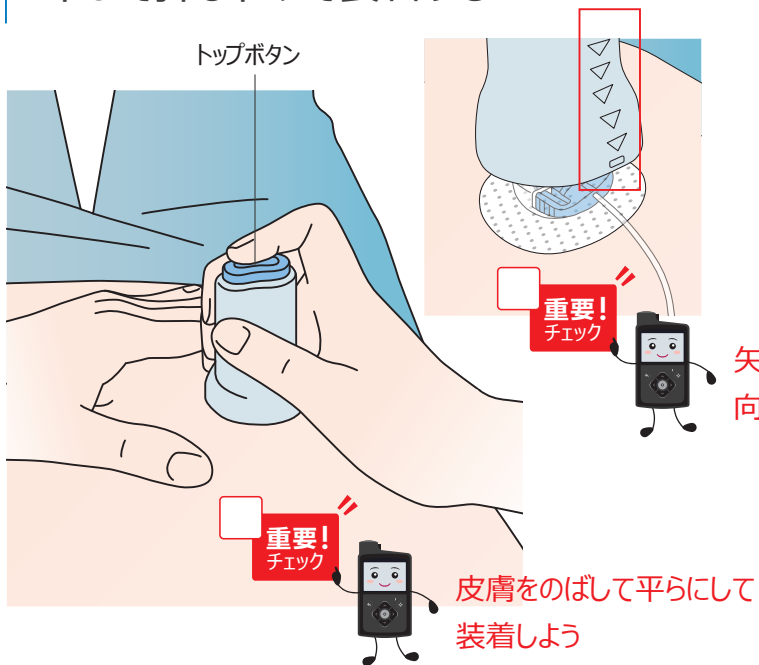

矢印はチューブの
向きだよ

5

体からゆっくり、
まっすぐ離す

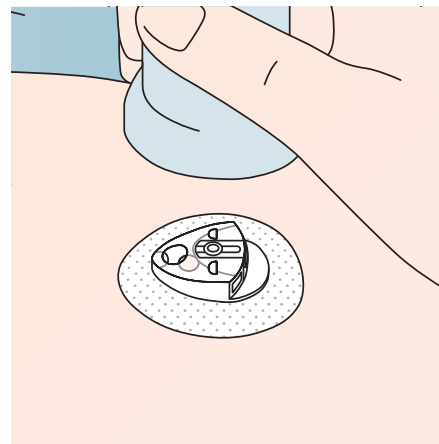

1

古いセットを
取り外す

2

ポンプを
巻き戻す

3

新しいセットを
準備する

4

ポンプに
セットする

5

装着する

6

カニューレ充填


5




装着する

6

テープをなでる

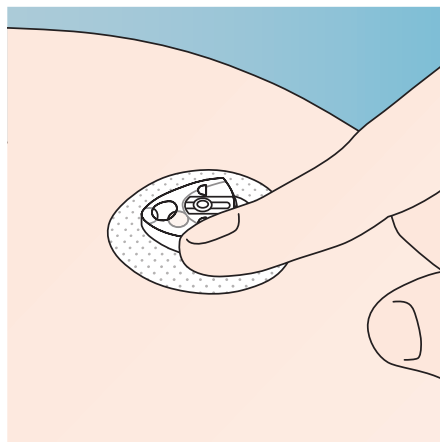

7

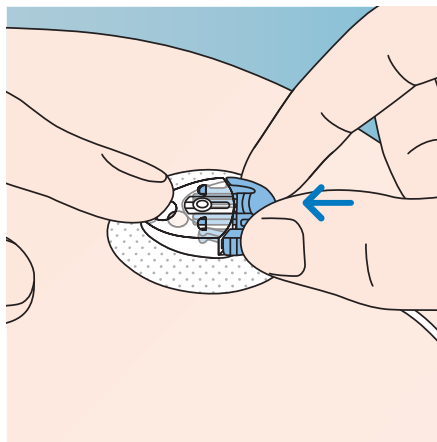チューブを
まっすぐ取り付ける

指でおさえながら、
カチッという音を確認してね!

1

古いセットを
取り外す

2

ポンプを
巻き戻す

3

新しいセットを
準備する

4


ポンプに
セットする

5

装着する

6

カニユーレ充填

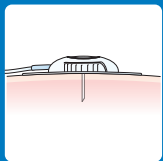

カニューレ充填

これまでと同じ手順で、カニューレ充填を行います。エクステンデッド注入セットのカニューレ充填量は0.6Uです。

1

「充填」を選択

2

充填量を0.6Uに
設定し「今すぐ充填」を選択

3

セット交換
完了

カニューレ充填？

1.注入セットを身体に取り付けて下さい。2.カニューレを充填するには「充填」を、充填の必要がなければ「完了」を選択して下さい。

充填

完了

カニューレ充填

1.充填量を確認します。2.充填には「今すぐ充填」を、戻るには戻るボタンを押します。

充填量 0.600 U

今すぐ充填

設定された基礎注入が
再開されました。



カニューレ充填した量は、
次回はポンプに保存されているよ

1

古いセットを
取り外す

2

ポンプを
巻き戻す

3

新しいセットを
準備する

4

ポンプに
セットする

5

装着する

6

カニューレ充填

1回の使用でインスリン量が300単位を超えるユーザー用



1回の使用でインスリン量が300単位では足りない場合は、エクステンデッドリザーバーのみ、またはエクステンデッド注入セットのみを交換して使用できます。

1回の使用でインスリン量が300単位以内でご使用いただけるユーザーは、リザーバと注入セットは同時に交換してください。

交換手順



エクステンデッドリザーバーのみ交換する場合 P13



エクステンデッド注入セットのみを交換する場合 P14


リザーバのみ交換する手順

- 必ず注入セットを身体から取り外してから交換してください。
- リザーバのみ交換の際はカニューレ充填は不要です。




交換の際は、まずは必ず身体からチューブを外してね

1 身体から注入セットを取り外す

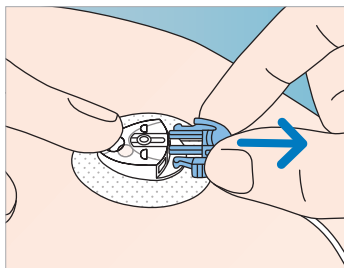


2 古いリザーバをポンプから取り外す

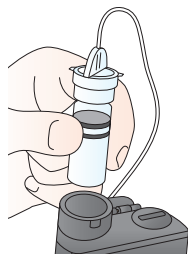


3 ポンプを巻き戻す




4 新リザーバにインスリンを入れる

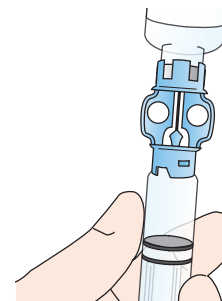


5 既存注入セットと接続し、セットを準備する

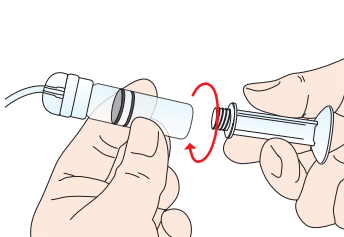

6 リザーバをポンプにセットし、チューブを充填する

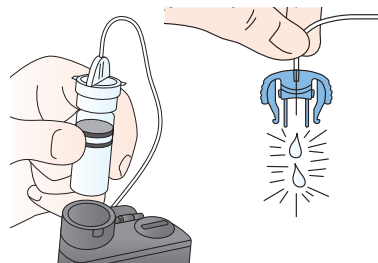

7 チューブを体に接続する

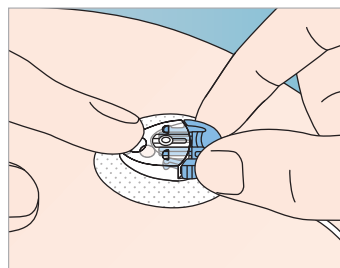

8 基礎注入を再開する

カニューレ充填？

1. 注入セットを身体に取り付けて下さい。2. カニューレを充填するには「充填」を、充填の必要がなければ「完了」を選択して下さい。

充填

完了

注入が再開されました。



カニューレ充填をせず
完了してね


注入セットのみ交換する手順

- 必ず古いセットを身体から取り外してから交換してください。
- 注入セットのみ交換の際は、カニューレ充填が必要です。




交換の際は、まずは必ず身体からチューブを外してね

1 身体から注入セットを取り外す

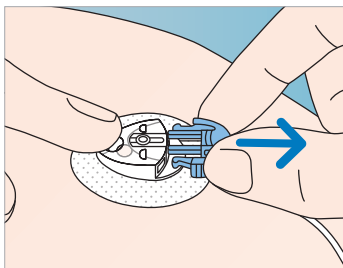


2 既存リザーバをポンプから取り外す

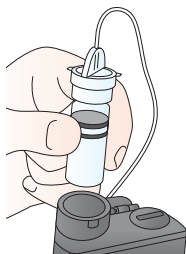


3 ポンプを巻き戻す




4 新注入セットを既存リザーバに接続する

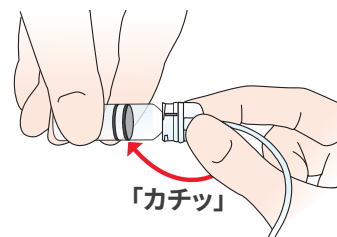

5 リザーバをポンプにセットしチューブを充填する

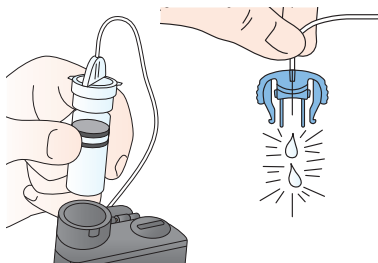

6 注入セットを身体に装着する

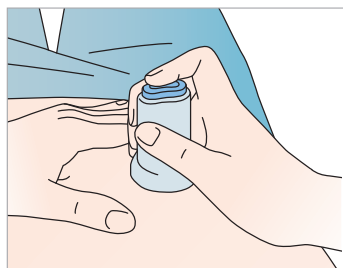

7 カニューレを充填する

カニューレ充填
1. 充填量を確認します。2. 充填には「今すぐ充填」を、戻るには戻るボタンを押します。

充填量 0.600 μl

今すぐ充填



カニューレ充填を忘れないでね!

注入が再開されました。

使用上の注意



エクステンデッドリザーバーのみ/エクステンデッド注入セットのみの交換方法について、主治医の許可がないままに、本マニュアルのみで交換を行わないでください。必ず取扱い方法について、医療従事者よりトレーニングを受けてください。



エクステンデッドリザーバー/エクステンデッド注入セットの使用期間は、いずれも最大7日間です。必ず、それぞれの使用期限を守りご使用ください。注入セット交換タイマーをご使用の場合は、3日までしか設定できません。ポンプのタイマーではなく、カレンダーやスマートフォンのリマインダー機能などを利用して管理してください。



1回の使用でインスリン量が300単位を超えるユーザーは、リザーバーと注入セットの交換日がばらばらになり、管理が複雑にならないように、以下の例のような交換方法があります。エクステンデッド注入セットを7日に1度、エクステンデッドリザーバーの交換を7日に2度行うことで、シンプルで分かりやすい管理を行うことができます。



医療機関連絡先

- ・高血糖や低血糖など体調に異変がある場合
- ・インスリン量の調整など治療に関する相談が必要な場合
- ・ユーザー本人やご家族による対処が困難な場合
- ・故障や破損、付属品が足りなくなった場合（ご注文や発送依頼）



24時間サポートライン

0120-56-32-56 (24時間365日)


- ・ポンプの使用手法や、アラート、アラーム対応などでお困りの場合

【製造販売元】日本メドトロニック株式会社
販売名：メドトロニック ミニメド 700シリーズ
販売名：インスリンポンプ 注入セット
販売名：エクステンデッドリザーバー

医療機器承認番号：30300BZX00256000
医療機器認証番号：225ACBZX00013000
医療機器製造販売届出番号：13B1X00261D00002

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2024 Medtronic MiniMed, Inc. MiniMed、ミニメドおよびMiniMedロゴマークは、Medtronic MiniMed, Inc.の商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic MiniMed, Inc.の商標です。TM*を付記した商標は、各社の商標です。
MM2607-28 rev.1

エクステンデッドリザーバー/エクステンデッド注入セットの交換例

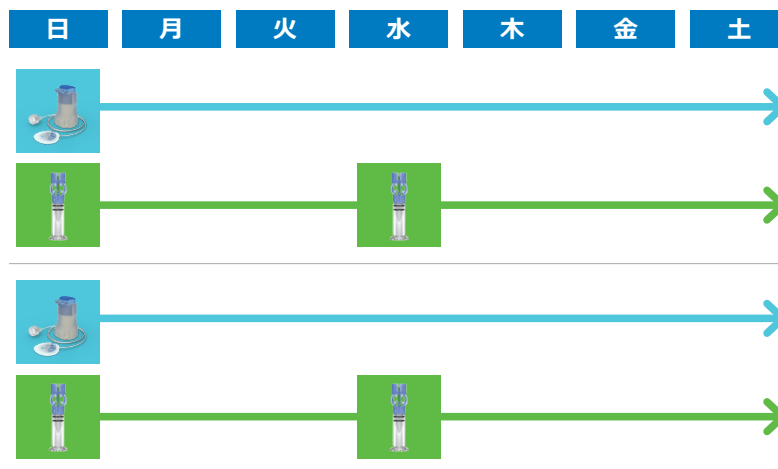

 minimed

ミニメドジャパン合同会社