

Club Lenny for Patients



クラブレニーご登録のお願い

- ミニメド™700シリーズやガーディアン™コネクトをより安全に、安心してお使いいただくためのメール配信サービスです。
- 製品の使用を開始する際、できるだけ速やかにご登録をお願い致します。また、すでに使用を開始されている方も、同様に登録をお願い致します。



ご登録はこちら

www.medtronic.com/clublenny



スマートフォンからお申し込みの場合はQRコードをご利用いただくと便利です

メール受信イメージ



登録に関するご注意事項

- 対象製品をご使用の患者さん以外の方はお申し込みができませんのでご注意ください。
- 登録には製品のシリアル番号が必要です。シリアル番号はインスリンポンプの場合ポンプの裏面に、ガーディアン™コネクトの場合はトランスミッタの裏面に記載されています。
- キャリアメールは対応しておりません。キャリアメールとは、通信事業者が自社ドメイン度提供する電子メールサービスのことで、@以下が「docomo.ne.jp」、「ezweb.ne.jp (au.com)」、「softbank.ne.jp」などを指します。
- 製品のご使用を中止された際は、ご自身で退会手続きをお願い致します。ご使用の製品の種類またはシリアル番号が変更になった際は、一度退会し、再登録をお願い致します。

サービス内容

ご使用中の製品に関する情報配信

- 安全使用・適正使用に関する情報、お役立ちコンテンツ(例)



選べるサービス

ハローレニー！
はじめてすぐの患者さん向け電話サポート
希望日にサポートラインからお電話し、一緒に使用方法を確認



クラブレニーに登録 → 電話希望日を登録 → サポートラインから受電

ポンプの使用方法や、アラート、アラーム対応などでお困りの場合はいつでも24時間サポートラインへご相談ください。



日本メドトロニック
24時間サポートライン **0120-56-32-56**

ミニメド™770Gシステム はじめてみよう！

インスリンポンプ 確認シート ポイントをもう一度確認しましょう

監修

神戸大学医学部附属病院
糖尿病・内分泌内科 医師

廣田 勇士 先生

糖尿病看護
認定看護師

松田 季代子 先生



日本メドトロニック株式会社
ダイアビータイス
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2021 Medtronic. Medtronic, Mドトロニック, Medtronicロゴマーク及びFurther, Togetherは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

販売名：メドトロニック ミニメド 700シリーズ 医療機器承認番号：30300BZX00256000
販売名：インスリンポンプ 注入セット 医療機器承認番号：225ACBZX00013000
販売名：パラダイム リザーバー 医療機器製造販売届出番号：13B1X00261D00001

Medtronic
Further. Together



安全かつ快適にCGMをお使いいただけるよう、
こちらのポイントをよく確認しましょう。

※本冊子は使用開始時に必要な知識と基本操作のポイントをまとめたものです。
必ず電子添文、ユーザガイド、別冊ミニメド™770G版、「はじめてみよう！インスリンポンプ」、
「インスリンポンプサークル」シリーズを併せてご確認ください。

START 注入セットとリザーバの交換

前回の装着から
2～3日以内に
行っていますか？
→「はじめてみよう！」P23

冷たいままだと
気泡が発生
しやすくなっ
てしまいます。

バイアルは使用前
に**冷蔵庫から
出して常温に
戻していますか？**
→「はじめてみよう！」P15

それ以上長く装着
すると、インスリンの
吸収が悪くなったり、
皮膚トラブルの原因
になります。

リザーバに
直径1mm以上
の気泡は残って
いませんか？
→「はじめてみよう！」P17

気泡が残っていると
思わぬ高血糖の原因になる
場合があります。

別の場所で
ローテーションを
しないと、皮膚トラブルの
原因になる場合が
あります。

注入セットの装着

新しく注入セットを
装着する部位は、
前回の部位と重なら
ないように、
ローテーションを
していますか？
→「はじめてみよう！」P23

装着部位は**皮膚が
硬くなった部位や
ベルトラインを
避けて**選ん
でいますか？
→「はじめてみよう！」P23

インスリンの
吸収が悪くなったり、
カニューレの抜けや閉塞
が起こり、インスリンの
注入が妨げられる
場合があります。

装着を行う前に、
装着部位の皮膚を
しっかり伸ばしてい
ますか？
→「はじめてみよう！」P25

皮膚がたるんでいると
うまく装着されず、
うまくいかない原因
になります。

クイックサーターの
**2つのサイドボタン
は同時に一気に
押していますか？**
→「はじめてみよう！」P25

タイミングがずれると
装着がうまくいかない
原因になります。

安全に使用するために

注入セットの交換
**2時間後に血糖
自己測定**を行っ
ていますか？
→「はじめてみよう！」P31

装着がうまくいっ
ていない場合、思わぬ高血糖の
原因になる場合が
あります。

ポンプを一時的に
外し再度接続する
ときも、**注入セットの
先端やチューブ内に
気泡が残っていない
かを確認**して
いますか？
→「インスリンポンプサークル
No.2」

気泡が残っていると
思わぬ高血糖の原因に
なる場合があります。

体調が悪い場合や
高血糖・低血糖の
対処方法は予め
主治医と相談して
決めていますか？
→「はじめてみよう！」P30

上記に加え、
インスリンポンプ以外
の注射手段などについて
医療機関へご相談ください。

ペン型注入器など
の**緊急セット**を常に
携帯していますか？
→「はじめてみよう！」P31

詰まりによる
注入セットトラブルの他、
水没・落下などによる
故障や災害時のためにも
備えてください。

はじめてすぐの！ハローレニー

(困ったときの電話サポート)

マニュアルだけではわかりづらいという方へ、
希望日にサポートラインからお電話し、ポンプ
の使用方法について理解を深めていただく
サービスがごございます。
クラブレニーにお申込みの
際に、こちらから併せて
ご登録いただけます。



GOAL