


はじめてみよう！インスリンポンプ エクステンデッド版別冊

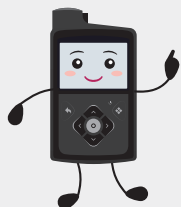

1回の使用でインスリン量が
300単位を超えるユーザー用

手順ガイド

- ・ エクステンデッドリザーバーのみ交換する場合
- ・ エクステンデッド注入セットのみを交換する場合



こちらの冊子と併せてご確認ください

はじめに、以下をご確認の上、本資材をご使用ください

- ・ 本資材は、エクステンデッドリザーバーのみ、またはエクステンデッド注入セットのみを交換する手順を簡易的にまとめたマニュアルです。
- ・ 1回の使用でインスリン量が300単位以内でご使用いただけるユーザーは、リザーバーと注入セットは同時に交換してください。
- ・ 1回の使用でインスリン量が300単位では足りない場合は、エクステンデッドリザーバーのみ、またはエクステンデッド注入セットのみを交換して使用できます。


リザーバのみ交換する手順




交換の際は、まずは必ず身体からチューブを外してね

- 必ず注入セットを身体から取り外してから交換してください。
- リザーバのみ交換の際はカニューレ充填は不要です。

1 身体から注入セットを取り外す

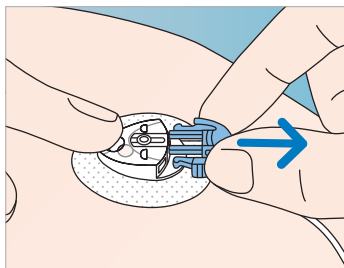

2 古いリザーバをポンプから取り外す

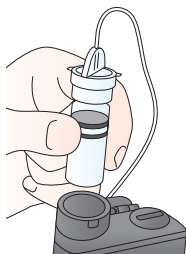

3 ポンプを巻き戻す


リザーバと注入セット
新リザーバと注入セット
新リザーバのみ
新注入セットのみ
カニューレ充填

「新リザーバのみ」を選択




はじめてみよう！ P16、17の手順を参考に

4 新リザーバにインスリンを入れる

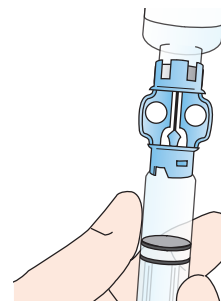


はじめてみよう！ P18～21の手順を参考に

5 既存注入セットと接続し、セットを準備する

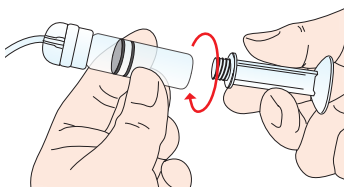


はじめてみよう！ P22、23の手順を参考に

6 リザーバをポンプにセットし、チューブを充填する

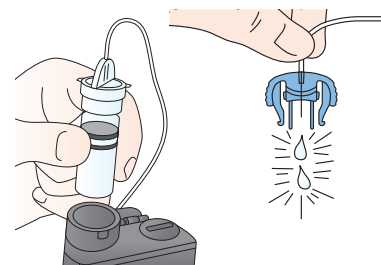

はじめてみよう！ P24～28の手順を参考に

7 チューブを体に接続する

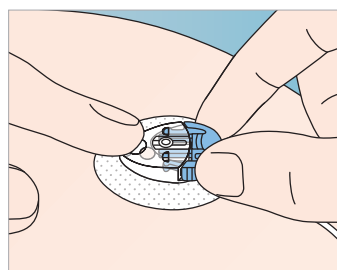

8 基礎注入を再開する

チューブの再接続

1. チューブを注入部位に接続します。
2. 「基礎レート再開」を選択します。

基礎注入再開

注入が再開されました。




注入セットのみ交換する手順




交換の際は、まずは必ず身体からチューブを外してね

- 必ず古いセットを身体から取り外してから交換してください。
- 注入セットのみ交換の際は、カニューレ充填が必要です。

1 身体から注入セットを取り外す

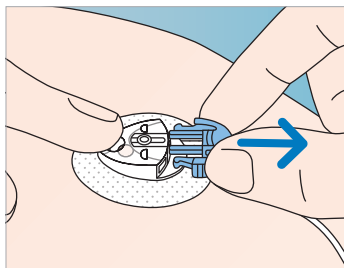

2 既存リザーバをポンプから取り外す

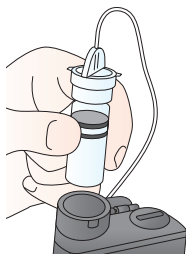


3 ポンプを巻き戻す

リザーバと注入セット
新リザーバと注入セット
新リザーバのみ
新注入セットのみ
カニューレ充填

「新注入セットのみ」を選択




4 新注入セットを既存リザーバに接続する

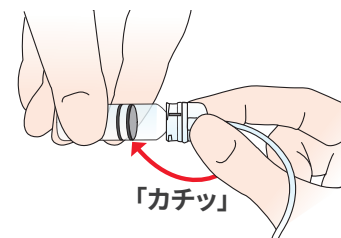


はじめてみよう! P16、17の手順を参考に

5 リザーバをポンプにセットしチューブを充填する

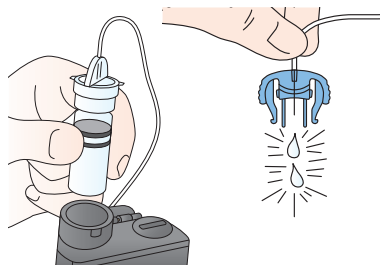

はじめてみよう! P24～28の手順を参考に

6 注入セットを身体に装着する

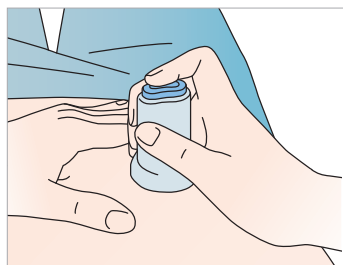

はじめてみよう! P29～32の手順を参考に

7 カニューレを充填する

カニューレ充填
1. 充填量を確認します。2. 充填には「今すぐ充填」を、戻るには戻るボタンを押します。

充填量 0.600 μl
今すぐ充填



はじめてみよう! P33の手順を参考に



カニューレ充填を忘れないでね!



使用上の注意



エクステンデッドリザーバーのみ/エクステンデッド注入セットのみの交換方法について、主治医の許可がないままに、本マニュアルのみで交換を行わないでください。必ず取扱い方法について、医療従事者よりトレーニングを受けてください。



エクステンデッドリザーバー/エクステンデッド注入セットの使用期間は、いずれも最大7日間です。必ず、それぞれの使用期限を守りご使用ください。注入セット交換タイマーをご使用の場合は、3日までしか設定できません。ポンプのタイマーではなく、カレンダーやスマートフォンのリマインダー機能などを利用して管理してください。



それぞれの交換日がばらばらになり、管理が複雑にならないように、以下の例のような交換方法があります。エクステンデッド注入セットを7日に1度、エクステンデッドリザーバーの交換を7日に2度行うことで、シンプルで分かりやすい管理を行うことができます。



医療機関連絡先

- ・高血糖や低血糖など体調に異変がある場合
- ・インスリン量の調整など治療に関する相談が必要な場合
- ・ユーザー本人やご家族による対処が困難な場合
- ・故障や破損、付属品が足りなくなった場合（ご注文や発送依頼）




24時間サポートライン

コール ミニ コール
0120-56-32-56 (24時間365日)

- ・ポンプの使用手法や、アラート、アラーム対応などでお困りの場合

エクステンデッドリザーバー/エクステンデッド注入セットの交換例

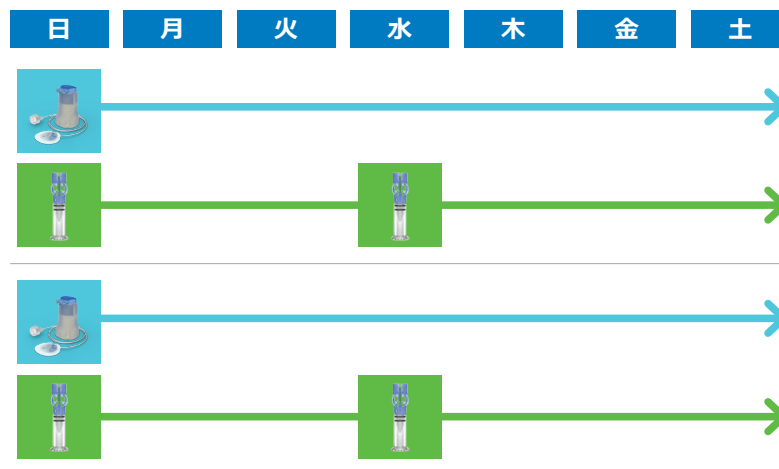

【製造販売元】日本メドトロニック株式会社
販売名：メドトロニック ミニメド 700シリーズ
販売名：インスリンポンプ 注入セット
販売名：エクステンデッドリザーバー

医療機器承認番号：30300BZX00256000
医療機器認証番号：225ACBZX00013000
医療機器製造販売届出番号：13B1X00261D00002

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2024 Medtronic MiniMed, Inc. MiniMed、ミニメドおよびMiniMedロゴマークは、Medtronic MiniMed, Inc.の商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic MiniMed, Inc.の商標です。TM*を付記した商標は、各社の商標です。
MM2607-27 rev.1

 **minimed**

ミニメドジャパン合同会社