

Club Lenny for Patients



クラブレニーご登録のお願い

- ミニメド™700シリーズやガーディアン™コネクトをより安全に、安心してお使いいただくためのメール配信サービスです。
- 製品の使用を開始する際、できるだけ速やかにご登録をお願い致します。また、すでに使用を開始されている方も、同様に登録をお願い致します。



ご登録はこちら

www.medtronic.com/clublenny



スマートフォンからお申し込みの場合はQRコードをご利用いただくと便利です

メール受信イメージ



登録に関するご注意事項

- 対象製品をご使用の患者さん以外の方はお申し込みができませんのでご注意ください。
- 登録には製品のシリアル番号が必要です。シリアル番号はインスリンポンプの場合ポンプの裏面に、ガーディアン™コネクトの場合はトランスミッタの裏面に記載されています。
- キャリアメールは対応しておりません。キャリアメールとは、通信事業者が自社ドメイン度提供する電子メールサービスのことです。@以下が「docomo.ne.jp」、「ezweb.ne.jp (au.com)」、「softbank.ne.jp」などを指します。
- 製品のご使用を中止された際は、ご自身で退会手続きをお願い致します。ご使用の製品の種類またはシリアル番号が変更になった際は、一度退会し、再登録をお願い致します。

サービス内容

ご使用中の製品に関する情報配信

- 安全使用・適正使用に関する情報、お役立ちコンテンツ(例)



トラブルシューティング動画



新しい動画・PDFコンテンツ



カーボカウント等のイベント情報

選べるサービス

ハローレニー！
はじめてすぐの患者さん向け電話サポート
希望日にサポートラインからお電話し、一緒に使用方法を確認



クラブレニーに登録

電話希望日を登録

サポートラインから受電

ポンプの使用方法や、アラート、アラーム対応などでお困りの場合はいつでも24時間サポートラインへご相談ください。



日本メドトロニック
24時間サポートライン **0120-56-32-56**

ミニメド™770Gシステム

はじめてみよう！ リアルタイムCGM 確認シート

ポイントをもう一度確認しましょう

監修

神戸大学医学部附属病院
糖尿病・内分泌内科 医師

廣田 勇士 先生

糖尿病看護
認定看護師

松田 季代子 先生



日本メドトロニック株式会社
ダイアビータイス
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2021 Medtronic. Medtronic, メドトロニック, Medtronicロゴマーク及びFurther, Togetherは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

販売名:メドトロニック ミニメド 700シリーズ 医療機器承認番号:30300BZX00256000
販売名:メドトロニック ガーディアン コネクト 医療機器承認番号:22900BZX00321000

Medtronic
Further. Together

安全かつ快適にCGMをお使いいただけるよう、
こちらのポイントをよく確認しましょう。

※本冊子は使用開始時に必要な知識と基本操作のポイントをまとめたものです。
必ず電子添文、ユーザガイド、別冊ミニメド™770G版、「はじめてみよう！リアルタイムCGM」、
「インスリンポンプサークル」シリーズを併せてご確認ください。

START

較正

血糖自己測定は
正しく行って
いますか？

→「はじめてみよう！」P20

CGMの
適切な使用には、
正しく測定した血糖値で
較正を行うことが
重要です。

較正

1日3～4回の
較正のタイミング
は適切でしたか？

→「はじめてみよう！」P19-20

血糖の安定している
時間帯に較正を行う
ことはCGM成功の
重要なポイントです。

センサ使用中

「血糖値との乖離」が起こったら

血糖自己測定の方法、較正のタイ
ミング、センサの装着部位は適切
でしたか？

→「はじめてみよう！」P11, P19-20
【インスリンポンプサークル】No.7

手技や使用方法が
適切だったか確認し、血糖値と
センサグルコース値の乖離と
上手に付き合しましょう。

「較正許容範囲外アラート」が発生したら

再度較正をするときは、**血糖値が
安定するまで**しばらく時間を置いて
から行っていますか？

→「はじめてみよう！」P20
【インスリンポンプサークル】No.6

再度較正を行う
場合には、血糖値が
安定していることを
確認してから行って
ください。

「センサ更新中」または「グルコース値なし」が発生したら

センサを正しく装着できて
いましたか？

→「はじめてみよう！」P11-17
【インスリンポンプサークル】No.5

センサ装着の際に
センサが損傷したり
抜けてしまっていないか、
確認しましょう。

センサの装着

装着部位

センサの装着部位
は適切ですか？

→「はじめてみよう！」P11

皮膚が硬くなって
いる部分等は避け
毎回ローテーション
を行ってください。

センサの装着

ニードルハブを引き抜くとき、
センサベースとセンサコネクタを
押さえながら、**まっすぐに
ねじらずに抜いていますか？**

→「はじめてみよう！」P15
【インスリンポンプサークル】No.4

斜めに引き抜いて
しまうと、うまくいかない
原因になります。

正しくテープが貼れて
いない場合、センサが脱落
したり、正しくセンサの
測定ができないおそれが
あります。

テープを貼る

1枚目のテープは、テープの広い
部分がセンサベースの半分を覆う
ように、2枚目のテープは、トランス
ミッタの端と皮膚の両方を覆う
ように貼っていますか？

→「はじめてみよう！」P16-17

センサの装着

センサをサータにセット
して装着する際、サータは
**皮膚に軽く押し当てて
いますか？**

→「はじめてみよう！」P14

強く押し付け
すぎると、うまく装着
ができません。

センサの装着

センサを装着した後、サータを
まっすぐ引き上げるとき、
ボタンを押さないよう注意して
いますか？

→「はじめてみよう！」P14

ボタンを押してしまうと、
うまくいかない原因
になります。

トランスミッタを接続する

トランスミッタをセンサに接続
するとき、センサベースの頭頂部
をおさえながら接続し、カチッ
という音を確認していますか？

→「はじめてみよう！」P16

センサベースの両端は
リリースボタンのため、
ここを押さえてしまうと
接続不良になる可能性が
あります。

はじめてすぐの！ハローレニー
(困ったときの電話サポート)

マニュアルだけではわかりづらいという方へ、
希望日にサポートラインからお電話し、ポンプ
の使用方法について理解を深めていただく
サービスがございます。
クラブレニーにお申込みの
際に、こちらから併せて
ご登録いただけます。



GOAL