



レニーと学ぼう!

ミニメド™700シリーズ
インスリンポンプサークル

Insulin pump Circle

ポンプ編

No. 3

「注入セットの装着による皮膚トラブルや血糖コントロール不良を防ぐために」の巻



Q

なぜ、注入セットは2～3日以内の交換と、装着部位を毎回変えることが必要なの？

A

注入セットを長期間装着したり、継続して同じ部位に装着したりすると、皮膚がかたくなり、血糖コントロール不良の原因となるんじゃ。そうすると、高血糖につながる恐れもあるから要注意なんじゃよ!


※注入セットの長期間の装着や、同じ部位への継続的な装着は、感染、皮膚のかゆみ、痛み、炎症の原因となる場合もあります。



注入セットの装着部位を毎回変えるポイントとは？


お腹の上に時計や文字を思い浮かべて装着部位を順番に変更します。

時計まわり

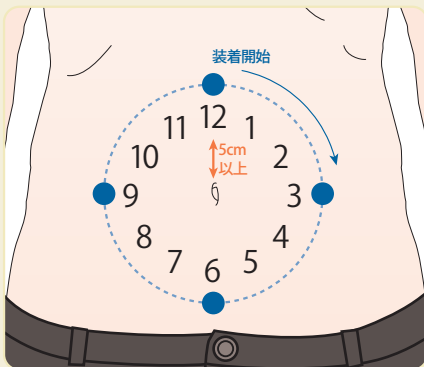

12時の位置から装着を開始。
3時→6時→9時と時計まわりに装着部位を変更。

M字やW字

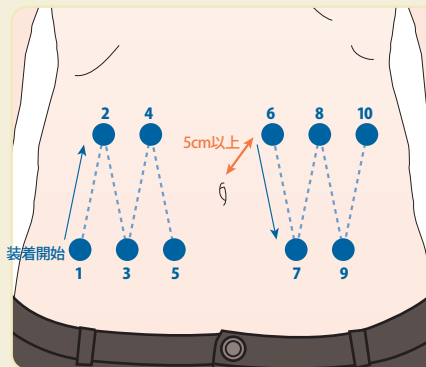

MやWの書き出し部分から装着を開始。
文字をなぞるように順番に装着部位を変更。

- 装着部位
- 時計や文字のイメージ

注入セットは必ず
3日以内に交換してください。



インスリンと注入セットは2～3日以内に交換することが推奨されています

注意 注入セットの装着は必ずへそから5cm以上はなして行ってください。


注入セットは2～3日以内に交換すること、
装着部位は毎回変えることが大事なんじゃぞ!



Check point!

注入セットの**長期間**の装着や、**同じ部位**への**継続的な**装着によるトラブルを防ぐために、下記内容について十分ご注意ください。

1 注入セットは**十分な皮下脂肪がある部位**を選んで装着する。

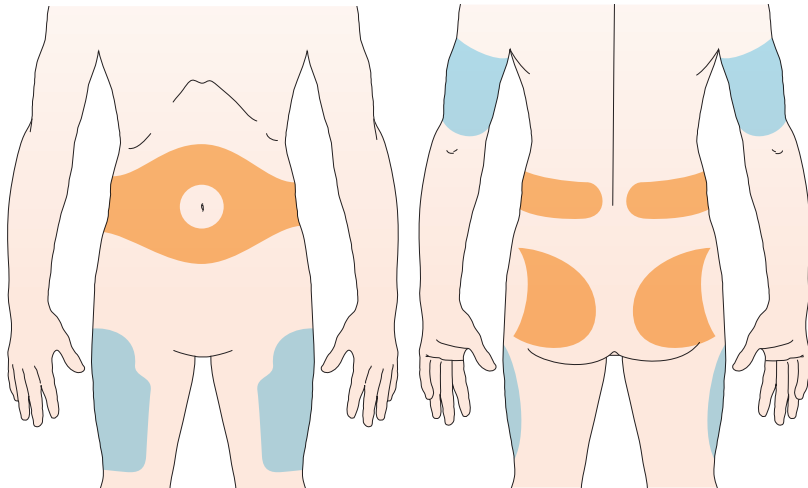

- 十分な皮下脂肪があり、装着に適している部位
- 装着が可能なその他の部位

装着を避ける部位

- 傷がある部位
- 皮膚がかたくなっている部位
- ベルトがあたる部位
- 皮下にしこりがある(かたくなった)部位
- へそから5cm以内の部位
- CGM装着部位から2.5cm以内の部位

注意 皮下脂肪の分布は年齢や性別などによって個人差があるため、適切な装着部位については主治医や看護師に相談してください。

2 注入セットの装着部位はアルコール綿などで消毒し、**清潔**にする。

3 注入セットは必ず**へそから5cm以上はなして**装着する。

※持続グルコースモニター (CGM) を付けている場合、注入セットはグルコースセンサから7.5cm以上はなして装着してください。

4 注入セットは**傷がある部位や皮膚がかたくなっている部位、ベルトがあたる部位**を避けて装着する。

5 注入セットの装着部位は**毎回変える**。

6 注入セットは必ず**2~3日以内に交換する**。



製品を安全にご使用いただくため、必ず電子添文とユーザガイドを併せてご確認ください。

日本メドトロニック株式会社

ダイアピーティス
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名:メドトロニックミニメド700 シリーズ
医療機器承認番号:22500BZX00369000

販売名:パラタイムリザーバー
医療機器製造販売届出番号:13B1X00261D00001

販売名:インスリンポンプ 注入セット
医療機器承認番号:225ACBZX00013000

ポンプやリアルタイムCGMの使用方法、アラーム対処、ポンプアクセサリショップなどについてのご質問は、下記へご連絡ください



日本メドトロニック
24時間サポートライン **0120-56-32-56**

コール ミニ コール

製品の使用方法やよくある質問などをご紹介しています。



www.medtronic.com/minimed770g

パソコン、スマートフォンやタブレット端末からもアクセスできます。



ポンプアクセサリショップ
便利な商品を、ポンプの安全使用に
お役立てください。
<https://shop-lenny-medtronic-jp.com/>

Club Lennyとハローレニー!に登録しましょう

ご希望の患者さんはClub Lenny(メール配信サービスなど)やハローレニー!(はじめてすぐの患者さん向け電話サポートサービス)にお申し込みいただくことが可能です。登録は必須ではありません。詳細はこちらをご参照ください。 www.medtronic.com/clublenny

