

レニーと学ぼう!

ミニメド™700シリーズ インスリンポンプサークル

Insulin pump Circle

CGM編

No. 5

「『センサ更新中』が出たときの 原因と対策を理解しましょう」の巻

Q なぜ『センサ更新中』が起こるの?




A



測定値が安定しない場合や、測定ができていない場合に発生します。センサの性能を確認する機能のひとつですので、慌てずに対処すれば大丈夫ですよ!

『センサ更新中』の画面表示

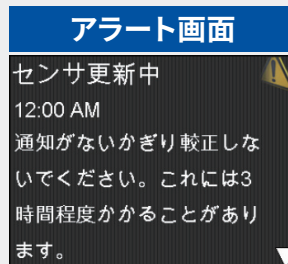

**対処
方法**

センサ装着初日に発生しやすいアラートです。ほとんどの場合、1時間以内でセンサグルコース値が表示されるため、何もする必要はありません。

- ポンプにセンサグルコース値が表示されるまで待ちましょう。
- 「要血糖値の入力」が表示される場合は、血糖値の入力をしましょう。それまでは血糖値入力はしないでください。

センサに損傷や抜けがある場合


- 「センサ更新中」が3時間以上継続する、または「要センサ交換」が表示されます。そのような場合は、センサを交換しましょう。

画面表示がある場合は、その指示に従いましょう。

それ以外は、何もせずに待ちましょう。

Check point!

- ほとんどの場合、1時間以内でセンサグルコース値が表示されるため、何もする必要はありません。画面表示がある場合は、その指示に従いましょう。
- センサ装着方法やオーバーテープの貼り方について、丁寧に確認しましょう。

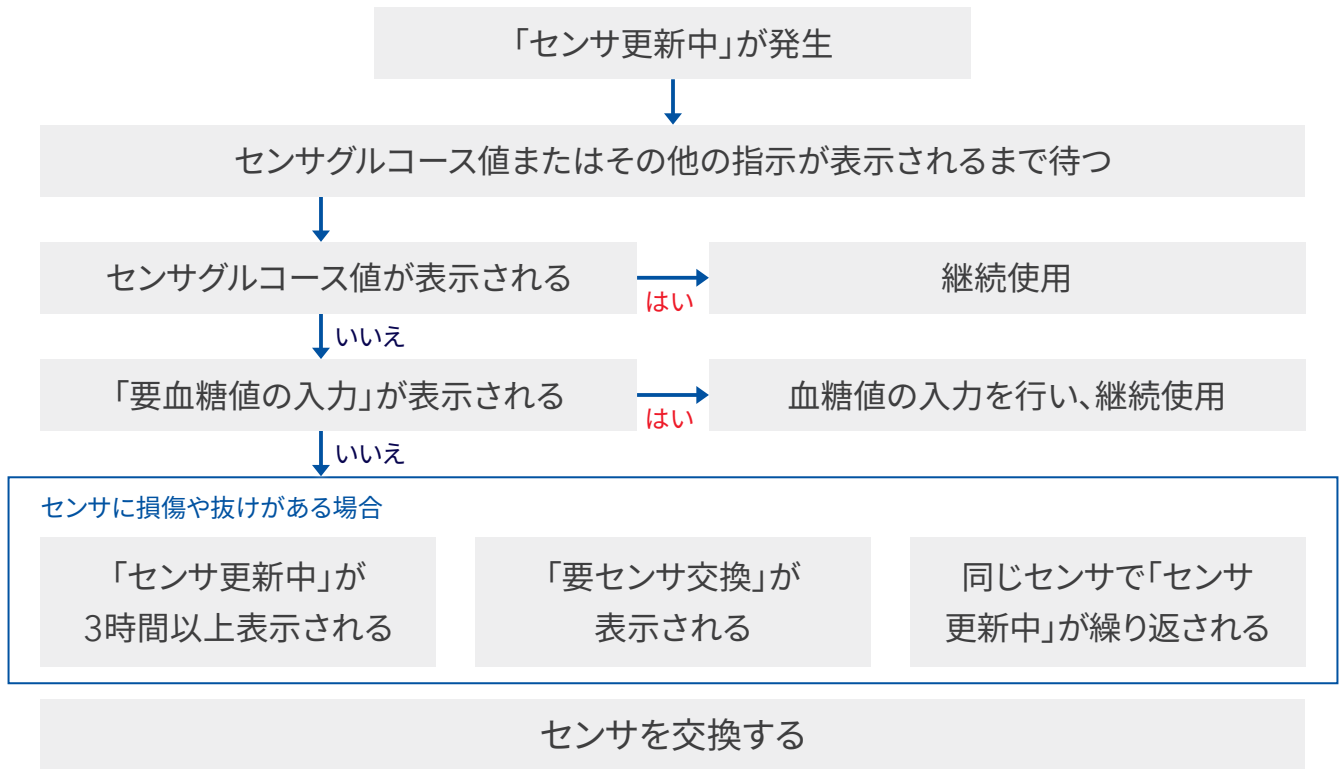

安定した測定のためのセンサ装着時のポイント

確認すること

- センサは緩みなく適切に固定されているか。
- オーバルテープは緩みなく適切に貼られているか。

センサ装着のTips

- センサ装着の前に手を洗い、装着部位をアルコール綿で拭く。(感染予防と接着剤が付着しやすくなります。)
- 装着部位の皮膚の表面の古い角質は入浴時に取り除いておく。
- 装着部位へのローションや制汗剤の使用は避ける。
- オーバルテープを貼った後、指でテープの端をなぞり、しっかりと皮膚に密着させる。

製品を安全にご使用いただくため、必ず電子添文とユーザガイドを併せてご確認ください。



マイポンプ
MyPUMPに必ずご登録ください

製品を安全にお使いいただくための情報提供を行うサービスです。



LINE公式アカウント



日本メドトロニック株式会社
ダイアビータイス
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
medtronic.co.jp

ポンプアクセサリショップ



販売名:メドトロニック ミニメド 700シリーズ
医療機器承認番号:30300BZX00256000
販売名:メドトロニック ガーディアンコネク
医療機器承認番号:22900BZX00321000

ポンプやリアルタイムCGMの使用方法、アラーム対処、ポンプアクセサリショップなどについてのご質問は、下記へご連絡ください

日本メドトロニック
24時間サポートライン **0120-56-32-56**

製品の使用方法やよくある質問などをご紹介します。

www.medtronic.com/minimed780g
パソコン、スマートフォンやタブレット端末からもアクセスできます。