

# ミニメド™700シリーズ

家族・保護者用

ケアリンク™コネクトアプリ  
クイックリファレンスガイド




ケアリンク™コネクトアプリは、ご家族や保護者の方が離れた場所からでも互換性のあるスマートフォンなどのモバイル機器でリアルタイムにポンプを使用している方のCGMデータや注入データを閲覧したり、設定によって通知を受け取ったりすることができます。



- ☑ アラート、アラーム通知
- ☑ インスリン注入情報
- ☑ CGMデータ
- ☑ 24時間Time in Range<sup>1)</sup>
- ☑ 履歴など

1) Time in Range (TIR)：目標範囲内の時間

## ● システムのイメージ

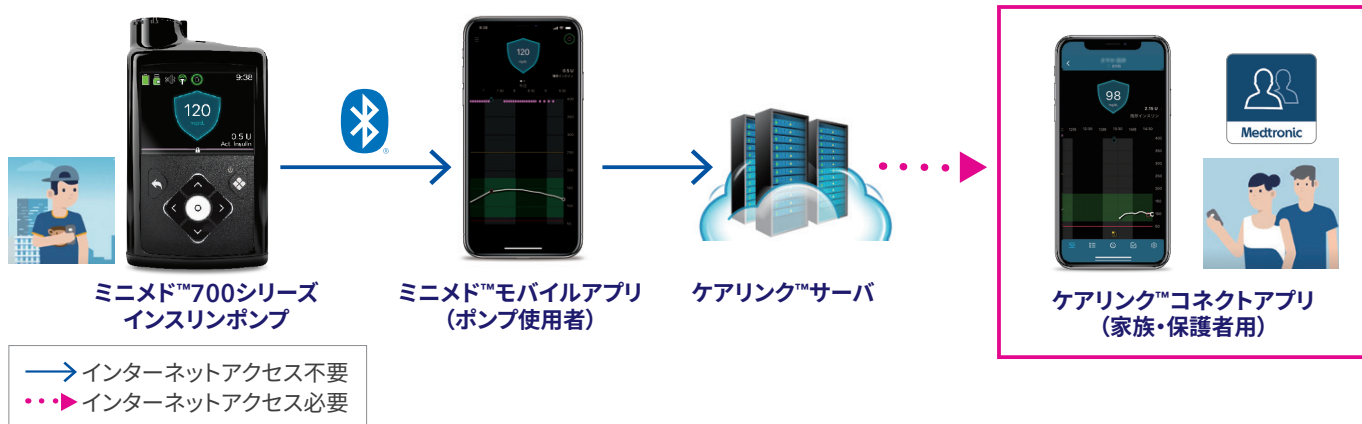

## はじめに

### 1 事前に準備する

ケアリンク™コネクトアプリが使用できることを確認してください。

- ポンプ使用者のミニメド™モバイルアプリ(ポンプ使用者向けアプリ)がご使用中のミニメド™770シリーズとペアリングされ使用中で、**ケアリンク™との同期**がオンになっている必要があります。
- 通知を受け取るには、ミニメド™モバイルアプリとケアリンク™コネクトアプリの両方がWi-Fiまたはインターネット接続されている必要があります。
- Google PlayストアやApple App Storeから、ケアリンク™コネクトアプリをご使用されるモバイル機器にインストールします。
- お使いのモバイル機器がケアリンク™コネクトアプリに対応しているか、対応機器・OSのリストを必ずご確認ください。

【アプリのダウンロード】 【対応機器・OSのリスト】




ケアリンク コネクト で検索

# セットアップ

## 2 セットアップの開始

アプリの情報画面の表示に従い確認をして次へ進みます。

アプリを正しく使用するため、警告事項をよくお読みください。アプリから求められた場合、画面ロックを設定します。

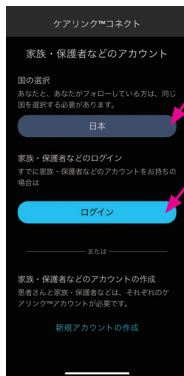

フォローするポンプ使用者アカウントと同じ国を選択します。

注) ポンプ使用者と同じ国設定になっていれば、海外からも情報を受け取ることができます。



ケアリンク™ウェブサイトですでに家族・保護者用アカウントを作成している場合は、ログインをタップし、IDとパスワードを入力してからログインし、**4**へ進みます。(アカウント作成をする場合は**3**へ)

※家族・保護者用のアカウントが必要です。ポンプ使用者用アカウントはご使用になれません。(フォローするポンプ使用者アカウントとは別に、家族・保護者用アカウントを作成します)

## 3 家族・保護者用ケアリンク™アカウントを作成する



新規アカウントの作成をタップし、画面のステップに従って情報入力し、家族・保護者用ケアリンク™アカウントを作成します。完了したら、ログインをタップします。

作成したアカウントにログインします。

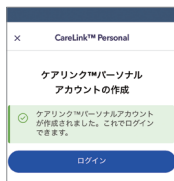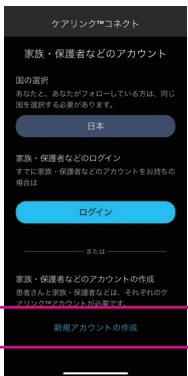

※セットアップの前にエンドユーザライセンス契約等、規約の同意の画面が表示されたら、内容を確認の上、画面に沿って進んでください。

## 4 セットアップを完了する

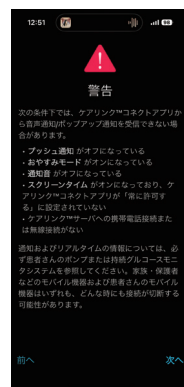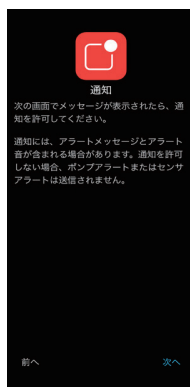

携帯電話の設定が正しいことを確認してください。

注) おやすみモードをオンにしたり、携帯電話を消音やバイブモードにしていると、通知が聞こえない場合があります。

ご使用されているモバイル機器の機種により、画面表示が少し異なる場合があります。

## フォロー

### 5 フォローをリクエストする


フォローのリクエスト画面が表示されたら、フォローするポンプ使用者のケアリンク™アカウントのユーザIDを入力しリクエストを送信します。



このリクエストは、24時間以内に承諾される必要があります。ポンプ使用者側のミニメド™ モバイルアプリで以下の操作を行ってまいります。

1. メニューから設定→ケアリンク™との同期→家族・保護者などの管理を選択します。
2. リクエストを承諾します。

リマインダの送信をタップして、フォローをリクエストした人にテキストまたは電子メールを送信することもできます。

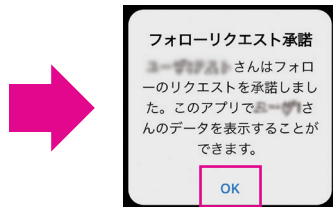


リクエストが承諾されたら、OKをタップします。

※リクエストが承諾されるまでこのメッセージ、およびデータは表示されません。

## 通知の設定

### 6 通知をセットアップする

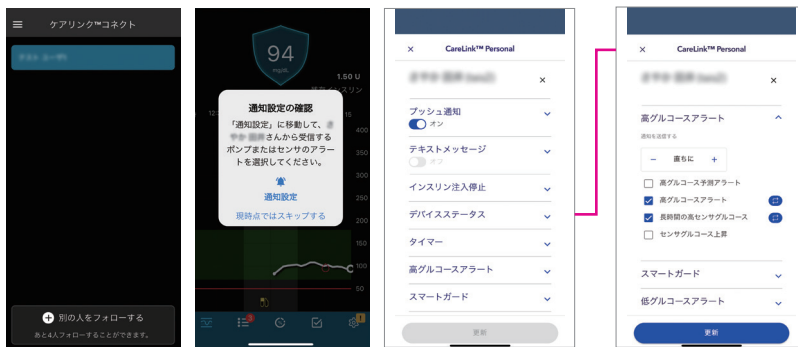

1. 設定したいポンプ使用者の名前を選択します。
2. 通知設定の確認メッセージが表示されたら、“通知設定”を選択します。
3. 各アラートカテゴリーをタップして、受信したいアラートを選択します。
4. 更新をタップします。

注) アプリで通知を受信するには、ポンプでもアラートをオンしておく必要があります。

注) 現時点ではスキップするを選択すると、通知設定のセットアップが完了するまで、希望するメッセージをすべて受信できない可能性があります。

## 画面の確認

デバイスに表示されるデータは、フォローしている人のものです。



画面下のアイコンをタップすると、詳細が表示されます。

## 24時間サポートライン

本品の使用方法に関するご質問や不安なことがありましたら、  
いつでも24時間サポートラインへご相談ください



日本メドトロニック  
24時間サポートライン

コール ミニ コール  
**0120-56-32-56**

## MyPUMP (マイポンプ)

日本メドトロニックのインスリンポンプをご使用中の  
全てのユーザーにご登録いただき、製品のアップ  
デート申し込みや安全にお使いいただくための  
情報提供を行うサービス

ご登録はこちら



## アクセサリショップ

インスリンポンプとCGM関連のアクセサリを  
患者さん向けにオンライン販売

アカウント作成はこちら



## LINE公式アカウント (ユーザー向け)

LINE公式アカウントから友達登録で、タイムリーな  
製品・安全情報を配信

友達登録はこちら



友だち  
募集中!



日本メドトロニック株式会社

ダイアビータイス

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名:メドトロニック ミニメド 700 シリーズ  
医療機器承認番号:30300BZX00256000

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2023, 2025 Medtronic. MiniMed, ミニメドおよびMiniMedロゴマークは、Medtronic MiniMed, Inc.の商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。TM\*を付記した商標は、各社の商標です。

Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google LLCの商標です。

DIAB2308-19 rev.2