


# ミニメド™700シリーズ

## ミニメド™モバイルアプリ クイックリファレンスガイド



ミニメド™モバイルアプリでは、ミニメド™700シリーズインスリンポンプをご使用中にご自身のモバイル機器でポンプやCGM情報の確認などができます。



インスリンポンプを取り出すことなく互換性のあるスマートフォンなどのモバイル機器でインスリンポンプのデータを閲覧できます。

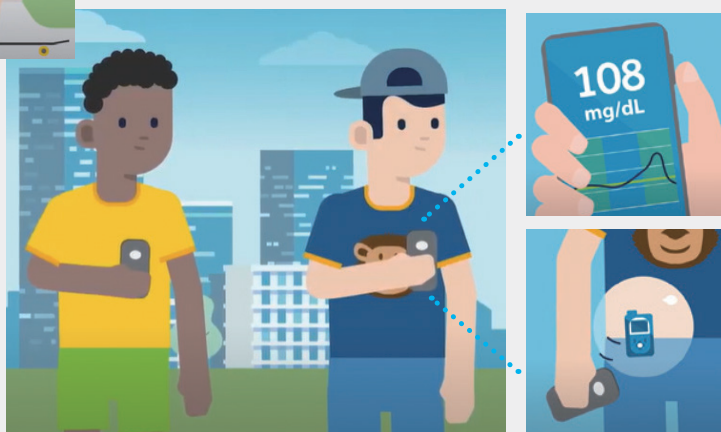

- ✓ アラート、アラーム通知
- ✓ インスリン注入情報
- ✓ CGMデータ
- ✓ 24時間Time in Range<sup>1)</sup>
- ✓ ケアリンク™との同期など

1) Time in Range (TIR) : 目標範囲内の時間

# システムのイメージ

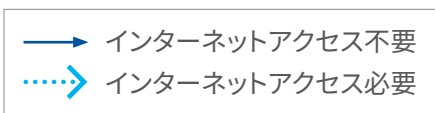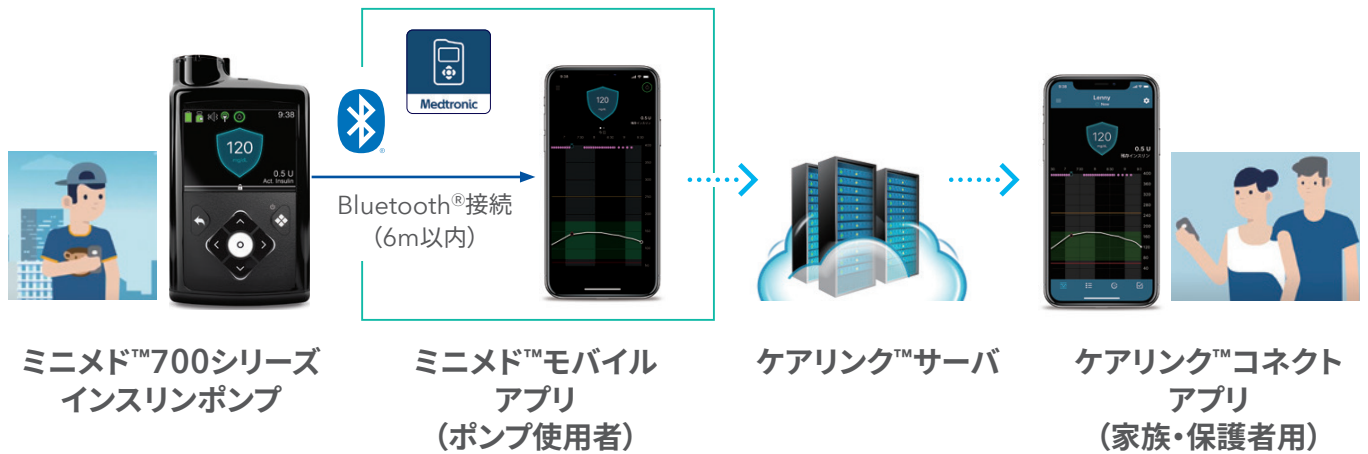

※ ご家族や保護者の方が遠隔でポンプ使用者のポンプ・CGM情報の閲覧や通知を受信したい場合は、ケアリンク™コネクトアプリ(家族・保護者用)をご使用ください。

## はじめに

### 1 事前に準備する

ミニメド™モバイルアプリをご使用されるモバイル機器にインストールします。

- まず、ご使用されるモバイル機器が対応機器、およびOSバージョンであることをご確認ください。
- Google PlayストアやApple App Storeから、ミニメド™モバイルアプリを使用するモバイル機器にインストールします。

※ インストールの際は、インターネット接続が必要です。

【アプリのダウンロード】



【対応機器・OSのリスト】



🔍 ミニメド モバイル で検索

# セットアップ

## ② セットアップの開始

アプリの情報画面の表示に従い確認して次へ進みます。



※ エンドユーザライセンス契約等の規約の同意画面が表示されたら、内容を確認の上、画面に沿って進んでください。

## ③ ケアリンク™アカウントへログインする



ケアリンク™アカウントを既にお持ちであれば、ログインしてください。

お持ちでない場合は“アカウントの作成”をタップし、画面に沿ってアカウント作成後、ログインしてください。

※ アカウントの作成手順について、詳しくはPage. 9を参照してください。

ご使用されているモバイル機器の機種により、画面表示が多少異なる場合があります。

# セットアップ

## 4 ポンプをミニメド™モバイルアプリにペアリングする

1) ペアリング設定の前に確認事項をご確認ください。

3つの記述が全て該当することを確認してください。

このマークがあることを確認してください。

780Gポンプは左側、770Gポンプは右側を選択してください。



このマークがない場合、アプリを使用することはできません。マークがあることを確認して、続行します。

**注)** このメッセージが表示された場合は、通知を許可する必要があります。

"MiniMed™ Mobile" は通知を送信します。よろしいですか？  
通知方法は、テキスト、サウンド、アイコンバッジが利用できる可能性があります。  
通知方法は「設定」で設定できます。


許可しない 許可

2) 次に、ペアリングの設定をします。

ポンプのペアリングを開始するには、表示される手順に従ってください。

警告情報をご確認の上、

通知の設定をする場合

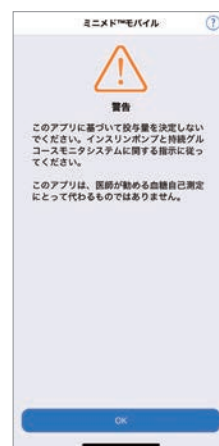

アプリで解除するまで、1分毎に通知を繰り返す設定にしたい場合はオンにします。

**注)** このメッセージが表示された場合は、「ペアリング」をタップしてください。

Bluetooth ペアリングの要求  
"Pump 2889743H" がお使いの iPhone へのペアリングを求めています。


キャンセル ペアリング

ポンプとアプリの両方で通知を受け取りたい場合はオンにします。

以上で、設定は終了です。

# ミニメド™モバイルアプリの画面イメージ

## ホーム画面

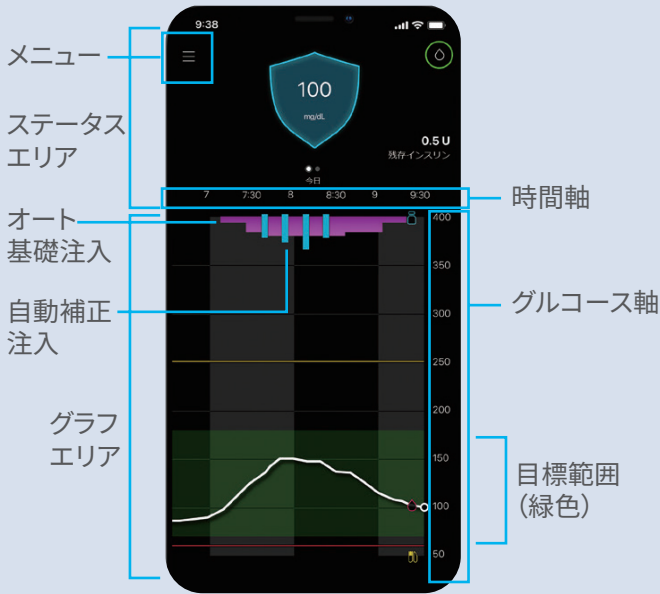


ミニメド™780Gインスリンポンプでは表示方法が少し異なります。  
 グラフ部分を指でピンチイン、ピンチアウト(つまんだり広げたり)すると、表示時間を変更して確認できます。  
 アイコンをタップすると情報が表示されます。

インスリン    食事    血糖値

## 目標範囲内の時間(TIR)

ホーム画面のステータスエリアを左にスワイプすると表示されます。

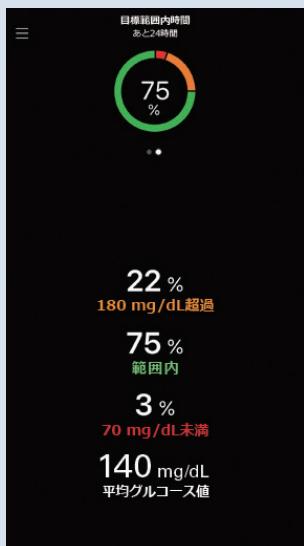

**緑色:**  
 過去24時間で  
 70-180mg/dLの範囲に  
 あった時間の割合


**オレンジ色:**  
 過去24時間で180mg/dLを  
 超過した時間の割合

**赤色:**  
 過去24時間で70mg/dLを  
 下回った時間の割合

※ 過去24時間のセンサデータがない場合は、データ不十分のメッセージが表示されます。

## メニュー表示

ポンプやCGMデバイスの状態を表示します。

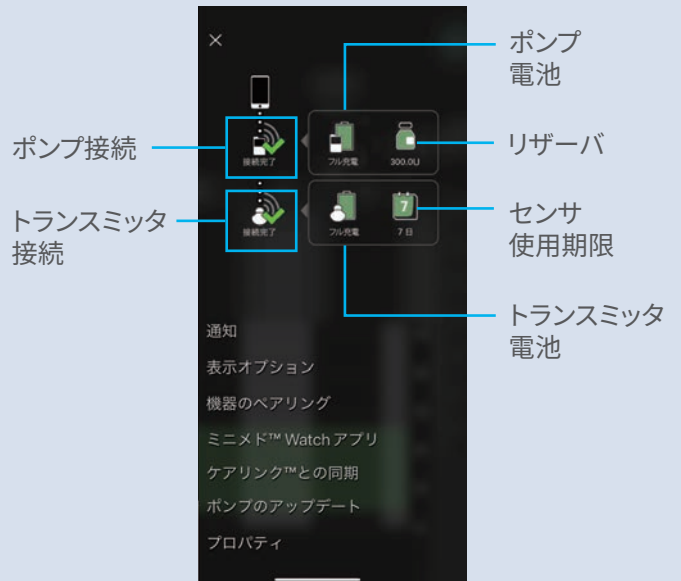

**通知:**通知設定の変更。  
**表示オプション:**糖質単位などの設定。  
**機器のペアリング:**ポンプとアプリのペアリング、再ペアリングする必要がある場合に使用。  
**ミニメド™ Watch アプリ:**Watchアプリの説明。  
 ※ミニメド™ 780G/Apple Watchにのみ対応。  
**ケアリンク™との同期:**自動/手動の設定。  
 レポートに現在のデータをアップロードするには、今すぐアップロードを使用。  
**ポンプのアップデート:**医師から指示があった場合のみ使用。

## 通知

通知内容によって画面上部の色が変わります。



**アラーム:** 赤色                      **リマインダ(タイマー):** 灰色  
**アラート:** 黄色                      **メッセージ:** 青色  
 画面表示に従い、確認をしてください。

**ご不明点がある場合、24時間サポートライン (0120-56-32-56) までご連絡ください。**

# Apple Watch連携方法 (ミニメド™780G限定)


「ミニメド™モバイルアプリ」を対応するiPhoneでご使用の場合は、Apple Watchでグルコース値などを確認することができます。

- ① Apple WatchとiPhoneがペアリングされていることを確認
- ② iPhoneに「ミニメド™モバイルアプリ」をインストールし、ポンプとペアリング
- ③ iPhoneのWatchアプリを開き、マイウォッチにある「MiniMed™ Mobile」をインストール(設定により自動インストールされている場合あり)
- ④ Apple Watchのアイコンより「ミニメド™モバイルアプリ」を選択


【Watchアプリ】




【対応機器・OSのリスト】

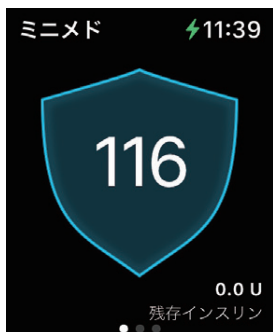

左へフリック

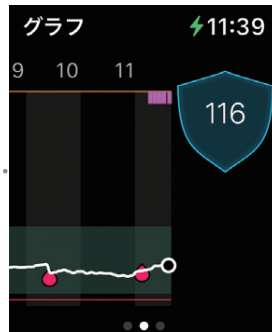


左へフリック

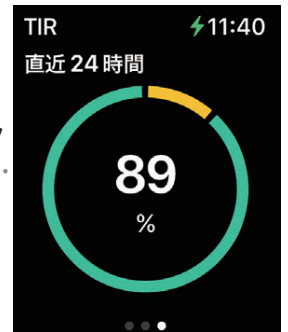

下へ  
スクロール



下へ  
スクロール

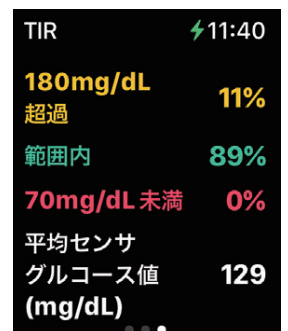

## ミニメド™モバイルアプリのご使用にあたって(重要)

- アプリが対応していない最新OSにアップデートした場合、正しく動作しない可能性があります。そのため、モバイル機器の設定で、OSの自動アップデート機能をオフにすることを推奨します。
- ケアリンク™コネクトでご家族や保護者の方などからフォローする許可を求められた場合は、メニューにある「ケアリンク™との同期」の「家族・保護者などの管理」からリクエストを承認することができます。
- ケアリンク™コネクトアプリに情報を送信するには、ミニメド™モバイルアプリで以下の条件が必要です：
  - ポンプが6メートル以内にあること
  - インターネットに接続していること
  - ケアリンク™パーソナルのアプリにログインしていること
  - ケアリンク™との同期がオンになっていること
- ケアリンク™にデータをアップロードする方法は2種類あります。以下の通り、「ケアリンク™との同期」をオンにしていると24時間に1度、自動的にアップロードを行います。または、同画面で「今すぐアップロード」で直近のデータをケアリンク™にアップロードする方法もあります。


ホーム画面左上のメニュー  より、ケアリンク™との同期を選択

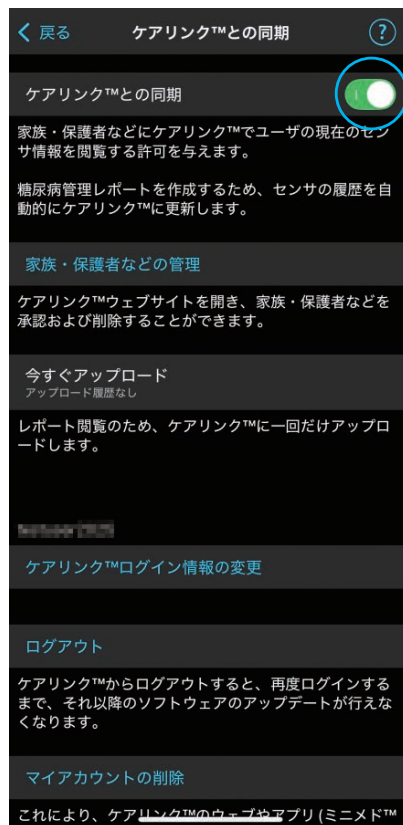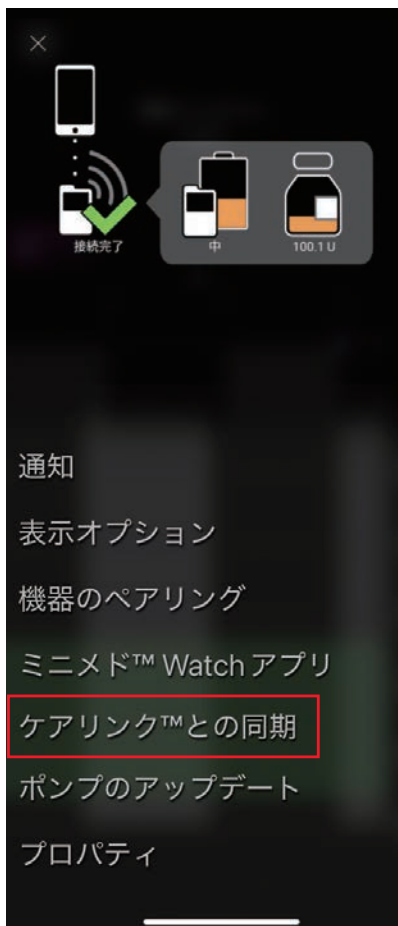

- 「ケアリンク™との同期」をオンにしていないと、ご家族・保護者などにポンプデータを共有できません。
- オンにすると1日に1度、自動的にケアリンク™にデータをアップロードします。(自動アップロードには、アプリは完全に閉じず、常にバックグラウンドに残しておく必要があります)

## ミニメド™モバイルアプリのご使用にあたって(重要)

ホーム画面の右上に以下のような **✖** マークが表示されている場合

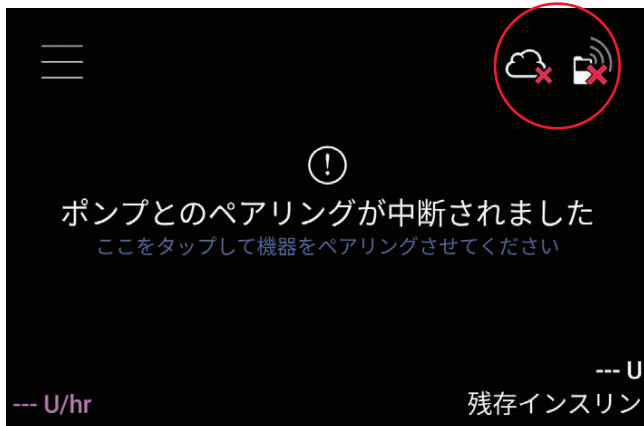


ケアリンク™がログアウトした状態です。ケアリンク™へのデータアップロードやケアリンク™コネクトへのデータ共有ができません。ケアリンク™にログインしてください。



ポンプとの接続が切れています。しばらく待って、接続しない場合は、再度、ペアリングしてください。

### ケアリンク™にログインする方法

 をタップすれば、下記のポップアップが表示されるので、そこからログインしてください。



### 再ペアリング方法

ホーム画面より、メニュー  をタップし、「機器のペアリング」より再度、ペアリングしてください。



### ペアリングが上手くできず、エラーとなる場合は、以下の項目をお試しください。

- ① モバイル機器の「設定」の「Bluetooth」に登録されているポンプ情報を削除する。  
(登録名例:Pump1234567H)
- ② ポンプの「接続機器オプション」メニューの「接続機器の管理」に登録されているモバイル機器を削除する。  
(登録名例:Mobile 123456)
- ③ モバイル機器側でBluetoothをオフにし、再度オンにする。
- ④ バックグラウンドで立ち上がっているミニメド™モバイルアプリ画面を全て削除する。
- ⑤ モバイル機器の電源を落とし再起動後にペアリングする。


上記でも、上手くペアリングできない場合は、

- ⑥ 時間を空けて、また場所を変えて、再度実施してください。

# ケアリンク™ パーソナル アカウント作成手順


## 1. 国の選択

必ず“日本”を選択してから、“アカウントの作成”をタップします。

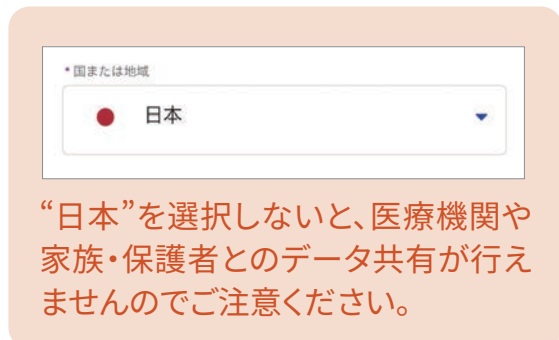

## 2. アカウントの作成①

“アカウントの種類”は、18歳以上の場合は“患者”、18歳未満の場合は“患者の親権者”を選択してください。

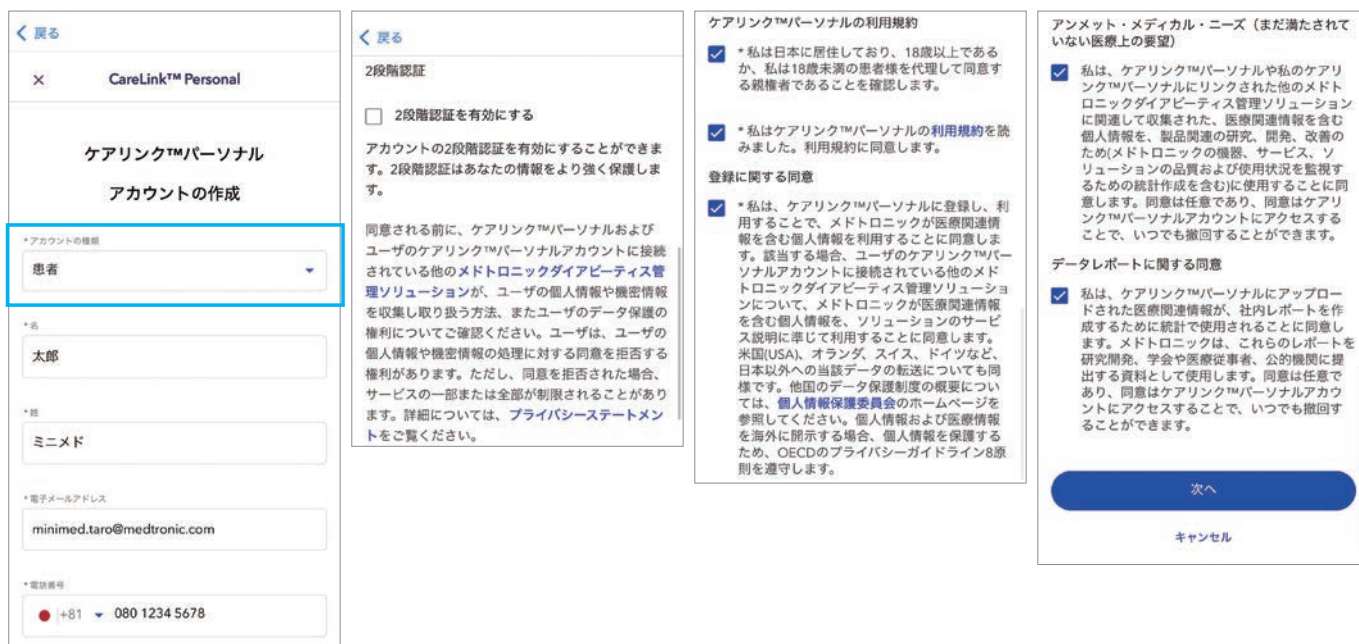

# ケアリンク™ パーソナル アカウント作成手順

## 3. アカウントの作成②

18歳以上  
郵便番号のみ  
必須入力です

ケアリンク™パーソナル  
アカウントの作成

\* 郵便番号  
108-0075

以下の情報は任意であり、臨床および統計解析に使用されます。

糖尿病の型  
1型

治療法  
ポンプ療法

出生年と出生月  
11月, 1980

性別  
男性

次へ  
キャンセル

18歳未満  
親権者姓名と郵便番号  
が必須入力です

ケアリンク™パーソナル  
患者の扶養家族の追加

\* 名  
一郎

\* 姓  
ミニモト

\* 郵便番号  
108-0075

以下の情報は任意であり、臨床および統計解析に使用されます。

糖尿病の型  
1型

治療法  
ポンプ療法

出生年と出生月  
11月, 1980

性別  
男性

次へ  
キャンセル

## 4. アカウントの作成③

ユーザID・パスワードは条件を満たすものを設定してください

ケアリンク™パーソナル  
アカウントの作成

\* ユーザID

ユーザIDは以下の条件を満たす必要があります

- 4~16文字
- スペースまたは特殊文字は使用しないでください
- 文字、数字、およびアンダーバーを含めることができます

\* パスワード

\* パスワード(確認)

パスワードの強度 強い

パスワードは以下の条件を満たす必要があります

- 8文字以上
- 1文字以上の小文字を含む
- 1文字以上の大文字を含む
- 1つ以上の特殊文字または記号を含む
- 1つ以上の数字を含む
- よく用いられる単語やフレーズを含めないでください
- 氏名やユーザIDを含めないでください

送信  
キャンセル

パスワードの強度 弱い

パスワードは以下の条件を満たす必要があります

- 8文字以上
- 1文字以上の小文字を含む
- 1文字以上の大文字を含む
- 1つ以上の特殊文字または記号を含む
- 1つ以上の数字を含む
- よく用いられる単語やフレーズを含めないでください
- 氏名やユーザIDを含めないでください

送信

※ パスワードの条件を満たしていない場合は、その項目が赤く表示されます

## 5. 本人確認

入力したメールアドレス宛に6桁の認証コードが送信されるので、本人確認画面に入力すればアカウント作成は完了です

The image displays three screenshots from a mobile application. The top-left screenshot shows the '本人確認' (Verification) screen with a text input field containing '707-532'. The top-right screenshot shows the 'ケアリンク™パーソナル アカウントの作成' (CareLink™ Personal Account Creation) screen with a green confirmation message and a 'ログイン' (Login) button. The bottom screenshot is an email interface showing the received verification code '707532' in a blue box, with a blue arrow pointing from this box to the input field in the top-left screenshot. The email content includes a confirmation message and a confidentiality notice.

**本人確認画面**

ケアリンク™パーソナル

本人確認

送信された認証コードを入力してください。

\* 認証コード

707-532

私はロボットではありません

reCAPTCHA  
プライバシー - 利用規約

検証コードが届かない場合

コードの再送  
新しい検証コードを発行する

サポートが必要ですか?  
サポートチームにお問い合わせください

電子メールアドレスの変更  
電子メールアドレスの変更

**アカウント作成画面**

ケアリンク™パーソナル  
アカウントの作成

ケアリンク™パーソナルアカウントが作成されました。これでログインできます。

ログイン

**メール画面**

To: [redacted]  
From: [redacted]  
Sending IP: [redacted]  
Received: [redacted]

HTML

ケアリンク™パーソナルアプリケーションへのワンタイム認証コード：  
707532

認証時間は15分です。指定された時間内に認証できなかった場合は、新しいコードを再送信して本人であることを認証する必要があります。

メドトロニックケアリンク™パーソナル

[CONFIDENTIALITY AND PRIVACY NOTICE] Information transmitted by this email is proprietary to Medtronic and is intended for use only by the individual or entity to which it is addressed, and may contain information that is private, privileged, confidential or exempt from disclosure under applicable law. If you are not the intended recipient or it appears that this mail has been forwarded to you without proper authority, you are notified that any use or dissemination of this information in any manner is strictly prohibited. In such cases, please delete this mail from your records. To view this notice in other languages you can either select the following link or manually copy and paste the link into the address bar of a web browser:  
<http://emaildisclaimer.medtronic.com>

## 24時間サポートライン

本品の使用方法に関するご質問や不安なことがありましたら、  
いつでも24時間サポートラインへご相談ください



日本メドトロニック  
24時間サポートライン

コール ミニ コール  
**0120-56-32-56**

## MyPUMP (マイポンプ)

日本メドトロニックのインスリンポンプをご使用中の  
全てのユーザーにご登録いただき、製品のアップ  
デート申し込みや安全にお使いいただくための  
情報提供を行うサービス

ご登録はこちら



## アクセサリショップ

インスリンポンプとCGM関連のアクセサリを  
患者さん向けにオンライン販売

アカウント作成はこちら



## LINE公式アカウント (ユーザー向け)

LINE公式アカウントから友達登録で、タイムリーな  
製品・安全情報を配信

友達登録はこちら



友だち  
募集中!

## Medtronic

日本メドトロニック株式会社

ダイアビータイス

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

[medtronic.co.jp](http://medtronic.co.jp)

販売名:メドトロニック ミニメド 700 シリーズ  
医療機器承認番号:30300BZX00256000

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2023, 2025 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。Apple Watchは、Apple Inc.の商標です。

App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google LLCの商標です。

DIAB2308-01 rev.4