

ミニメド™770Gシステム

家族・保護者用

ケアリンク™コネクトアプリ
クイックリファレンスガイド



ケアリンク™コネクトアプリは、ご家族や保護者の方が離れた場所からでも互換性のあるスマートフォンなどのモバイル機器でリアルタイムにポンプを使用している方のCGMデータや注入データを閲覧したり、設定によって通知を受け取ったりすることができます。



- アラート、アラーム通知
- インスリン注入情報
- CGMデータ
- 24時間Time in Range¹⁾
- 履歴など

1) Time in Range (TIR): 目標範囲内の時間

■ システムのイメージ



はじめに

1 事前に確認する

ケアリンク™コネクトアプリが使用できることを確認してください。

- ポンプ使用者のミニメド™モバイルアプリ (ポンプ使用者向けアプリ) がご使用中のミニメド™770G インスリンポンプとペアリングされ使用中で、**CareLink™**との同期がオンになっている必要があります。
- 通知を受け取るには、ミニメド™モバイルアプリとケアリンク™コネクトアプリの両方がWi-Fiまたはインターネット接続されている必要があります。
- Google PlayストアやApple App Storeから、ケアリンク™コネクトアプリをご使用されるモバイル機器にインストールします。
- モバイル機器をご使用の際は、対応モバイル機器、およびOSバージョンを必ずご確認ください。

【アプリのダウンロード】 【対応機器・OSのリスト】



🔍 ケアリンク コネクト で検索

セットアップ

2 セットアップの開始

アプリの情報画面の表示に従い確認をして次へ進みます。

アプリを正しく使用するため、警告事項をよくお読みください。アプリから求められた場合、画面ロックを設定します。



フォローするポンプ使用者アカウントと同じ国を選択します。
注) ポンプ使用者と同じ国設定になっていれば、海外からも情報を受け取ることができます。

ケアリンク™ウェブサイトですでに家族・保護者用アカウントを作成している場合は、ログインに進むをタップし、IDとパスワードを入力してからログインし、**4**へ進みます。

(アカウント作成をする場合は**3**へ)

※家族・保護者用のアカウントが必要です。
(フォローするポンプ使用者アカウントとは別です。)

3 家族・保護者用ケアリンク™アカウントを作成する





新規アカウントの作成をタップし、画面のステップに従って情報入力し、家族・保護者用ケアリンク™アカウントを作成します。完了したら、続行をタップします。



作成したアカウントにログインします。

※セットアップの前にエンドユーザライセンス契約等、規約の同意の画面がたたら、内容を確認の上、画面に沿って進んでください。

4 セットアップを完了する

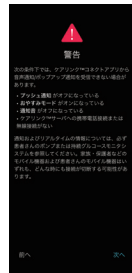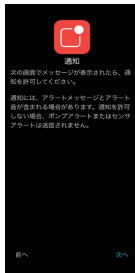

携帯電話の設定が正しいことを確認してください。

注) おやすみモードをオンにしたり、携帯電話を消音やバイブモードにしていると、通知が聞こえない場合があります。

ご使用されているモバイル機器の機種により、画面表示が少し異なる場合があります。

ケアリンク™コネクトアプリのご使用にあたって

重要

- アプリを前面に表示する場合、データが更新されるまで少なくとも20秒間待ってください。
- アプリがバックグラウンドにある場合、通知が受信されます。
- 通知を受け取るには、ミニメド™モバイルとケアリンク™コネクト両方のアプリがWi-Fiまたはインターネット接続されている必要があります。
- ご不明点がある場合は、24時間サポートライン(0120-56-32-56)までお問い合わせください。

サポート

本品の使用方法に関するご質問や不安なことがありましたら、いつでも24時間サポートラインへご相談ください



日本メドトロニック
24時間サポートライン

0120-56-32-56
コール ミニ コール

製品の使用方法やよくある質問などをご紹介しています。



<https://www.medtronic.com/minimed770g>

パソコン、スマートフォンやタブレット端末からもアクセスできます。



クラブレニーご登録のお願い

- 製品をより安全に、安心してお使いいただくためのメール配信サービスです。
- 製品の使用を開始する際、できるだけ速やかにご登録をお願い致します。
- また、すでに使用を開始されている方も、同様にご登録をお願い致します。

www.medtronic.com/clublenny



Medtronic

日本メドトロニック株式会社
ダイアビータイス

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

販売名:メドトロニックミニメド700シリーズ
医療機器承認番号:30300BZX00256000

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2021, 2022 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。
Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google LLCの商標です。
D1AB2109-10 rev.3