

ミニメド™770Gシステム

ミニメド™モバイルアプリ クイックリファレンスガイド




ミニメド™モバイルアプリでは、ミニメド™770Gインスリンポンプをご使用中にご自身のモバイル機器でポンプやCGM情報の確認などができます。
インスリンポンプを取り出すことなく互換性のあるスマートフォンなどのモバイル機器でインスリンポンプのデータを閲覧できます。



- アラート、アラーム通知
- インスリン注入情報
- CGMデータ
- 24時間Time in Range¹⁾
- ケアリンク™との同期など

1) Time in Range (TIR): 目標範囲内の時間

■ システムのイメージ

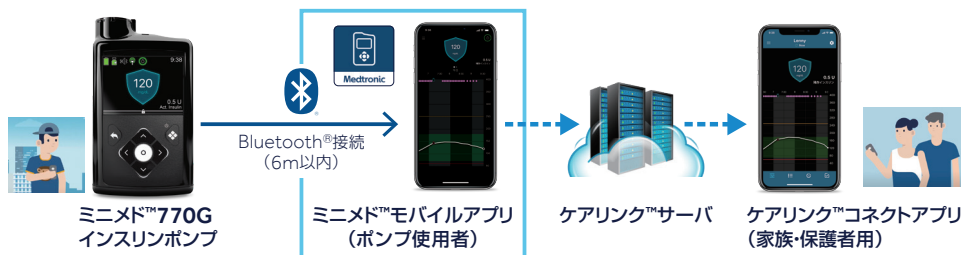

→ インターネットアクセス不要
--> インターネットアクセス必要

※ご家族や保護者の方が遠隔でポンプ使用者のポンプ・CGM情報の閲覧や通知を受信したい場合は、ケアリンク™コネクタアプリ（家族・保護者用）をご使用ください。

はじめに

1 事前に準備する

ミニメド™モバイルアプリをご使用されるモバイル機にインストールします。

- まず、ご使用されるモバイル機器が対応機器、およびOSバージョンであることをご確認ください。
- Google PlayストアやApple App Storeから、ミニメド™モバイルアプリを使用するモバイル機器にインストールします。
※インストールの際は、Wi-Fiまたはインターネット接続が必要です。

【アプリのダウンロード】 【対応機器・OSのリスト】



🔍 ミニメド モバイル で検索

セットアップ

2 セットアップの開始

アプリの情報画面の表示に従い確認をして次へ進みます。



3 ケアリンク™アカウントへログインする

ケアリンク™アカウントを既にお持ちであれば、ログインしてください。

お持ちでない場合は登録をタップし、画面に沿ってアカウント作成後、ログインしてください。



※エンドユーザライセンス契約等の規約の同意の画面がでたら、内容を確認の上、画面に沿って進んでください。

4 ポンプをミニメド™アプリにペアリングする

1) ペアリング設定の前に確認事項をご確認ください。

3つの記述が全て該当することを確認してください。

このマークであることを確認してください。



このマークがない場合、アプリを使用することはできません。マークがあることを確認して、続行します。

使用しているポンプを選択します。




注) 通知がでた場合、通知を許可して、データを利用可能にする必要があります。

2) 次に、ペアリングの設定をします。

ポンプのペアリングを開始するには、表示される手順に従ってください。

警告情報をご確認の上、同意してください。

通知の設定をする場合

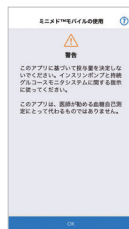

ポンプとアプリの両方で通知を受け取りたい場合はオンにします。

アプリで解除するまで、1分毎に通知を繰り返す設定にしたい場合はオンにします。

注) 通知がでた場合、アプリ上で「ペアリング」をタップしてください。


以上で、設定は終了です。

ご使用されているモバイル機器の機種により、画面表示が少し異なる場合があります。

ミニメド™モバイルアプリの画面イメージ

■ ホーム画面

アイコンをタップすると情報が表示されます。

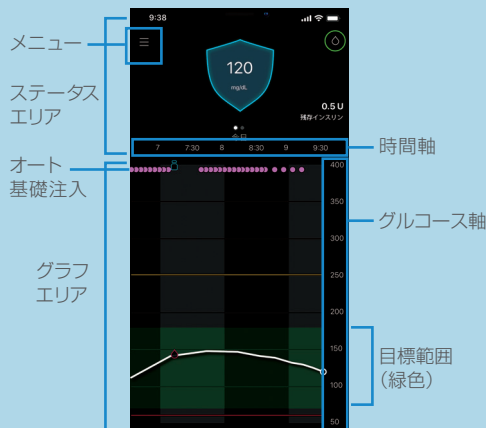


グラフ部分を指でピンチイン、ピンチアウト(つまんだり広げたり)すると、表示時間を変更して確認できます。

アイコンをタップすると情報が表示されます

インスリン 食事 血糖値

■ 目標範囲内の時間 (TIR)

ホーム画面のステータスエリアを左にスワイプすると表示されます。

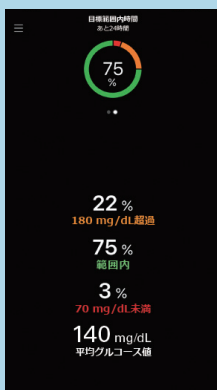

緑色：
過去24時間で
70-180mg/dLの範囲に
あった時間の割合


オレンジ色：
過去24時間で180mg/dL
を超過した時間の割合

赤色：
過去24時間で70mg/dLを
下回った時間の割合

※過去24時間のセンサーデータがない場合は、データ不十分のメッセージが表示されます。

■ メニュー表示

ポンプやCGMデバイスの状態を表示します。

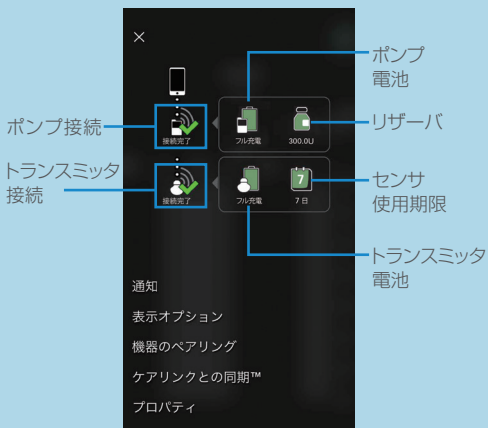

通知：通知設定の変更。

表示オプション：糖質単位などの設定。

機器のペアリング：ポンプとアプリのペアリング、再ペアリングする必要がある場合に使用。

ケアリンク™との同期：自動/手動の設定。
レポートに現在のデータをアップロードするには、
今すぐアップロードを使用。

■ 通知

通知内容によって画面上部の色が変わります。



アラーム：赤色
アラート：黄色

リマインダ(タイマー)：灰色
メッセージ：青色

画面表示に従い、確認をしてください。

ご不明点がある場合、24時間サポートライン
(0120-56-32-56) までご連絡ください。

ミニメド™モバイルアプリのご使用にあたって

重要

- ご家族や保護者の方などからフォローする許可を求められた場合は、メニューにある**ケアリンクとの同期と家族・保護者などの管理**からリクエストを受け付けることができます。
- ケアリンク™コネクトアプリに情報を送信するには、ミニメド™モバイルアプリで以下の条件が必要になります：
 - ポンプが6メートル以内にあること
 - Wi-Fiまたはインターネット接続していること
 - ケアリンク™パーソナルのアプリにログインしていること
 - **ケアリンク™との同期**がオンになっていること
- ご不明点がある場合は、24時間サポートライン(0120-56-32-56)までお問い合わせください。

サポート

本品の使用方法に関するご質問や不安なことがありましたら、いつでも24時間サポートラインへご相談ください



日本メドトロニック
24時間サポートライン

コール ミニ コール
0120-56-32-56

製品の使用方法やよくある質問などをご紹介しています。



<https://www.medtronic.com/minimed770g>

パソコン、スマートフォンやタブレット端末からもアクセスできます。



クラブレニーで登録のお願い

- 製品をより安全に、安心してお使いいただくためのメール配信サービスです。
- 製品の使用を開始する際、できるだけ速やかにご登録をお願い致します。
また、すでに使用を開始されている方も、同様にご登録をお願い致します。

www.medtronic.com/clublenny



Medtronic

日本メドトロニック株式会社
ダイアビータイス

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

販売名:メドトロニック ミニメド 700 シリーズ
医療機器承認番号:30300BZX00256000

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2021, 2022 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。
Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。Google Playは、Google LLCの商標です。
DIAB2109-09 rev. 2