


Medtronic

Now with
oxidized cellulose,
Absorbent sponge

Merocel hemoX

メロセルヘモックス サージカルスポンジ

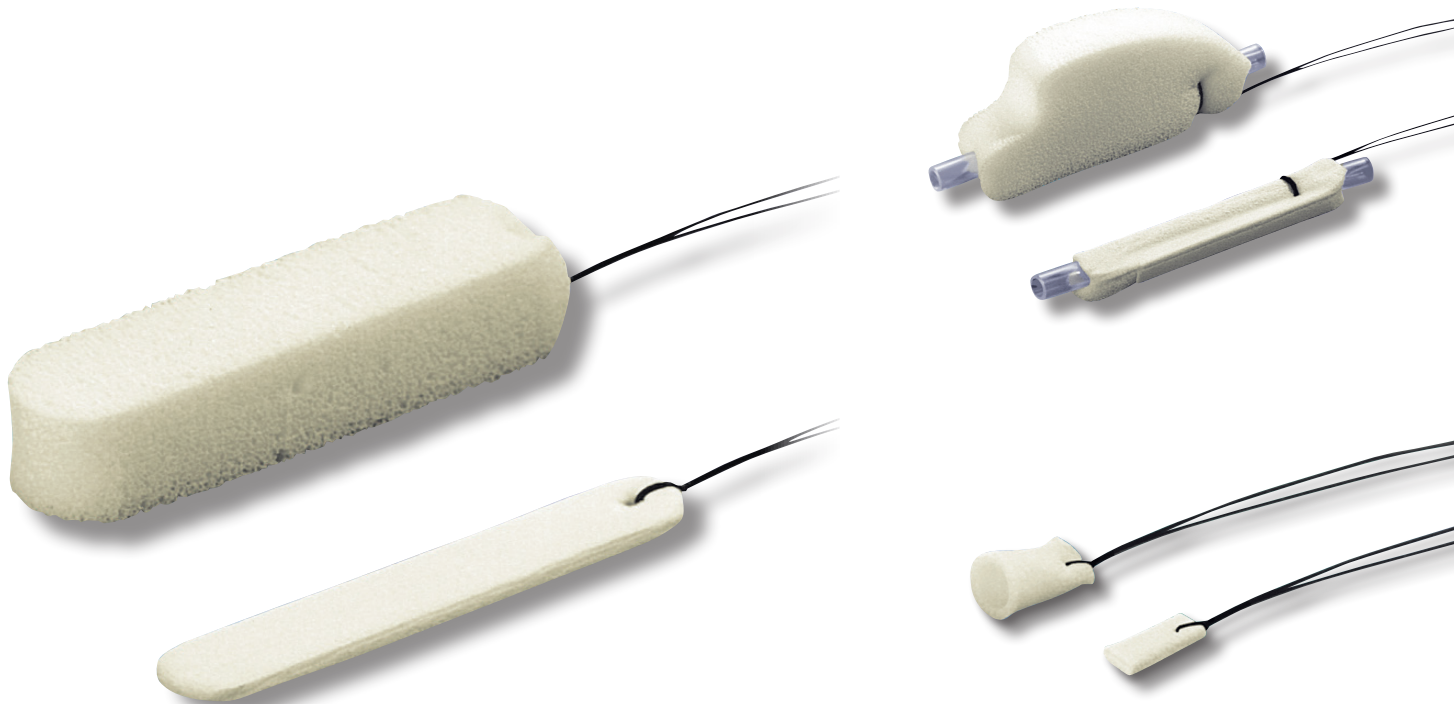

Feel the difference with Merocel hemoX

メロセルヘモックスはマイクロ分散した酸化セルロースを含有する吸収性のあるパッキング材です。創部をやさしく圧迫することができ、周辺の血液や体液を吸収します。


メロセルヘモックスの材質にはマイクロ分散した酸化セルロースを均一に染み込ませてあります。それにより滑らかな表面となり、容易な抜去をアシストします。試験では従来のメロセル製品と比べ、抜去後の再出血を防ぎ、挿入時および抜去時における潤滑性の向上を示しました。

組織を傷つせず再出血を防止するために、抜去前に水和することをお勧めします。通常10ccの生理食塩水が必要です。再び水和されると、メロセルは鉗子等でゆっくりと引き抜くことができます。

- 非繊維素材で丈夫です。
スムーズな抜去をアシストします。
- PVA素材（ポリビニールアルコール）
で滑らかな表面です。
- 酸化セルロースを含有しています。



Figure A. 抜去に必要な力 (単位：ポンド)

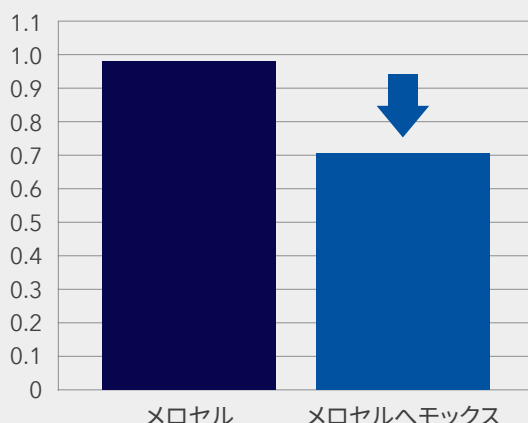

弊社のメロセルに比べ、抜去に必要な力が30%減少しています。そのため抜去時における患者さんへの負担が軽減されます。

サイナスパック、エピスタクシスパッキング、ネイザルドレッシングの使用方法

挿入



- 処置に合わせて種類をお選びください。
- 適宜、メロセルヘモックスをトリミングしてください。
- 必要に応じて抗生剤等を塗布してください。
- フォーセプスで把持し、丁寧に鼻腔内に完全に隠れるよう挿入してください。
- ひも付の場合は、留置位置を固定した後、頬にひもを貼り付け固定してください。

留置

- 挿入後、メロセルヘモックスの拡張が不十分な場合は、5～10ccの生理食塩水を注入し拡張させてください。
- 臨床症状に応じて、適宜取り出してください。

抜去

- 生理食塩水を浸し10分ほど経ってからフォーセプス等でメロセルヘモックスを把持しゆっくり抜き去ってください。

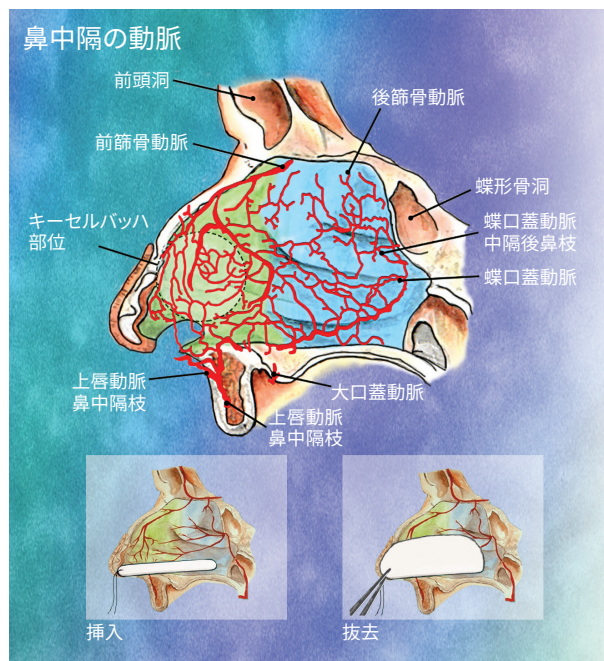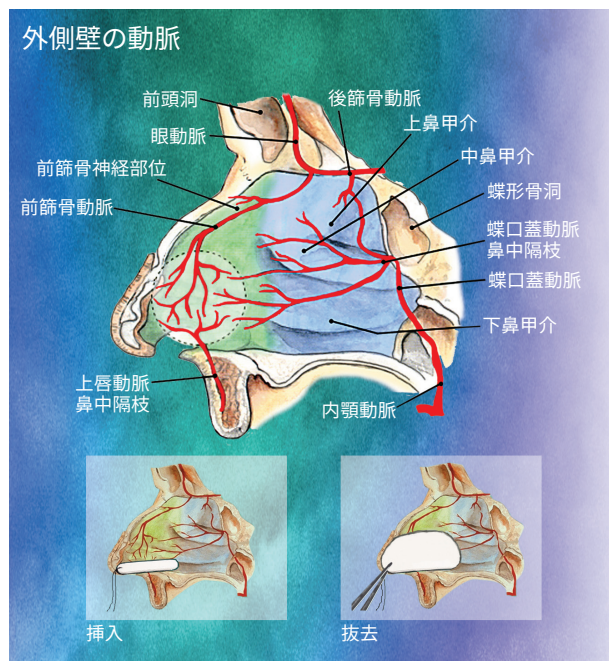

イヤerpacking、イヤウィックの使用方法

挿入


- 耳鏡とフォーセプスを用い、メロセルヘモックスを外耳道に挿入させてください。
- 必要に応じて抗生剤等を塗布してください。

留置

- 膨張後の留置期間中も抗生剤の投与は可能です。
- 臨床症状に応じて、適宜取り出してください。
- イヤウィックは耳科手術後のパッキング材には適しません。

抜去


- 生理食塩水を浸し10分ほど経ってからフォーセプス等でメロセルヘモックスを把持しゆっくり抜き去ってください。

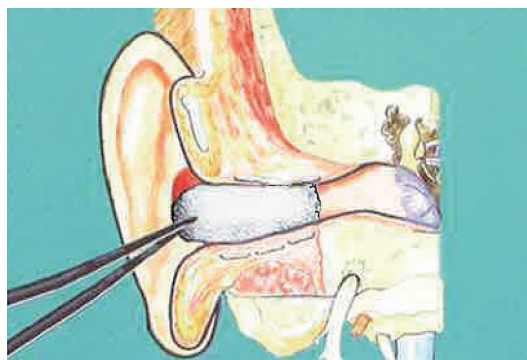

Nasal dressings

高分子素材により表面が非常に滑らかにできており、術後、抜去する際に患部との癒着のリスクを低減できます。

- 実験結果では、他の鼻用スポンジに比べ、抜去にかかる力が30%少なくて済みます。(当社比) Figure A.参照
スムーズな抜去を行うには、一度メロセルヘモックスを水和していただく事をお勧めします。(生理食塩水10ccほど)

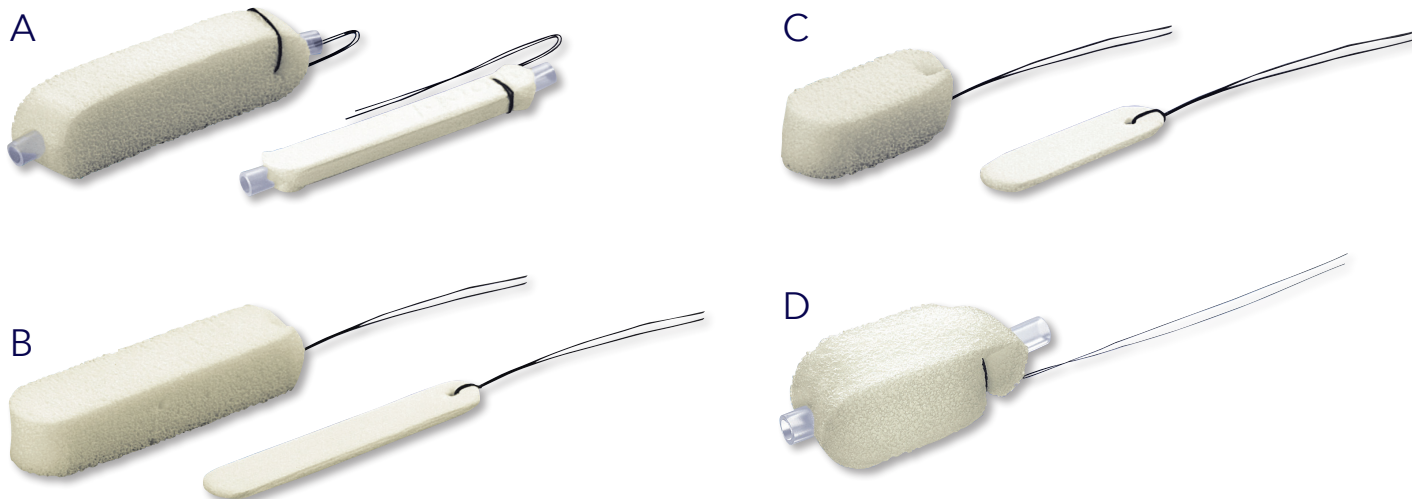


A	450410	ヘモックス ネイザルドレッシング	ひも付 エアーウェイチューブ
B	450402	ヘモックス ネイザルドレッシング	ひも付
C	450400	ヘモックス ネイザルドレッシング	ひも付
D	450409	ヘモックス ネイザルドレッシング	ひも付 エアーウェイチューブ

Doyle nasal dressings

メロセルヘモックスは様々な種類の中からお選び頂けます。(サイズ／形状／ひも付／エアーウェイチューブ)

- 鼻中隔形成、鼻形成、鼻甲介切除ほか鼻内手術後の使用に適しています。

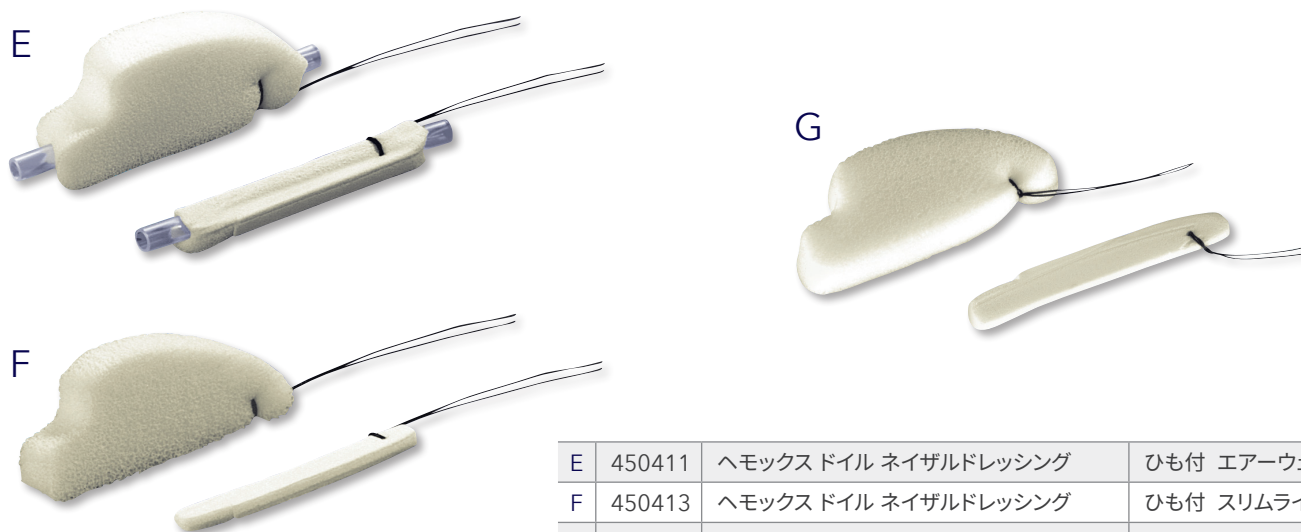


E	450411	ヘモックス ドイル ネイザルドレッシング	ひも付 エアーウェイチューブ
F	450413	ヘモックス ドイル ネイザルドレッシング	ひも付 スリムライン
G	450424	ヘモックス ドイル ネイザルドレッシング	ひも付

Epistaxis products

メロセルヘモックスには、鼻出血用もございます。

孔が大きく低密度で、吸収力が高く、また抜去の際の疼痛を軽減し再出血のリスクを低減できます。


- 適切に鼻出血への処置を行う事が可能です。
- 粘膜に対し、適切に圧迫を加える事で出血をコントロールし、凝固を促します。
- 救急診療部での使用に適しています。

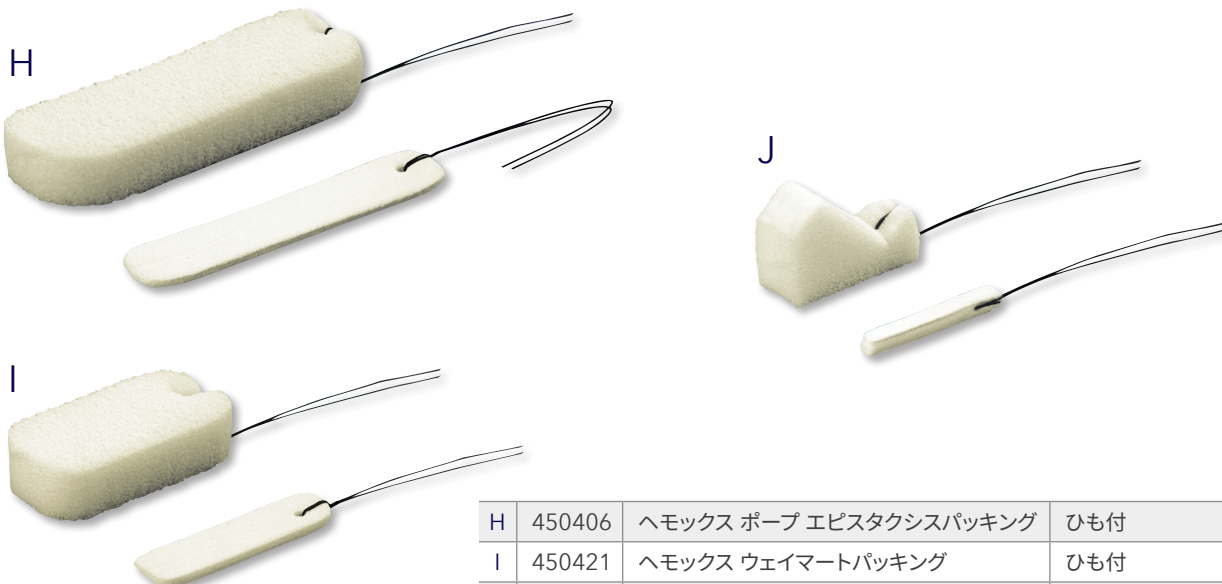

H	450406	ヘモックス ポープ エピスタクシスパッキング	ひも付
I	450421	ヘモックス ウェイマートパッキング	ひも付
J	450416	ヘモックス スタクシースタット	ひも付

Post-op sinus dressings

- 個体重比、20倍もの流体を吸収できます。

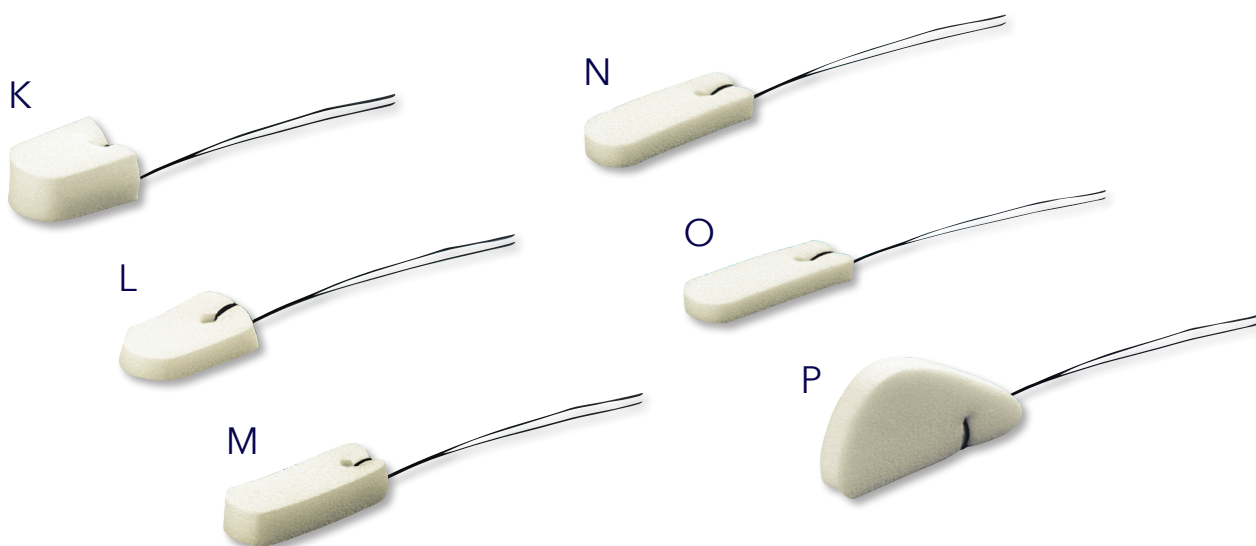

K	450407	ヘモックス バロン サイナスパック	ひも付
L	450531	ヘモックス バロン サイナスパック	ひも付 スリムタイプ
M	450422	ヘモックス ケネディー サイナスパック	ひも付
N	450426	ヘモックス ケネディー サイナスパック	ひも付 スリムタイプ
O	450530	ヘモックス ケネディー サイナスパック	ひも付 ウルトラスリム
P	450428	ヘモックス トーフィル サイナスパック	ひも付 スリムタイプ

Ear wicks and packs

- イヤーウィックは柔らかい吸収性スポンジが洞内で膨張しますので、外耳道炎治療の抗生剤の投与にお使いいただけます。
- イヤーパックはミクロ分散した酸化セルロースを含む高密度圧迫スポンジですので、中耳手術や外耳道の手術後にお使いいただけます。



Q	450355	ヘモックス シンドラー イヤーパッキング
R	450356	ヘモックス シンドラー イヤーパッキング
S	450146	ヘモックス ポープライヤーウィック
T	450141	ヘモックス ポープライヤーウィック

Ordering information

	カタログ 番号	製品名	規格		包装単位
A	450410	ヘモックス ネイザルドレッシング	8cm(長)×1.5cm(幅)×2cm(高)	ひも付 エアーウェイチューブ	10入／箱
B	450402	ヘモックス ネイザルドレッシング	8cm(長)×1.5cm(幅)×2cm(高)	ひも付	10入／箱
C	450400	ヘモックス ネイザルドレッシング	4.5cm(長)×1.5cm(幅)×2cm(高)	ひも付	10入／箱
D	450409	ヘモックス ネイザルドレッシング	4.5cm(長)×1.2cm(幅)×2cm(高)	ひも付 エアーウェイチューブ	10入／箱
E	450411	ヘモックス ドイル ネイザルドレッシング	7.7cm(長)×1.5cm(幅)×3.3cm(高)	ひも付 エアーウェイチューブ	10入／箱
F	450413	ヘモックス ドイル ネイザルドレッシング	7.7cm(長)×1cm(幅)×3.3cm(高)	ひも付 スリムライン	10入／箱
G	450424	ヘモックス ドイル ネイザルドレッシング	7.7cm(長)×1.5cm(幅)×3.3cm(高)	ひも付	10入／箱
H	450406	ヘモックス ポープ エピスタクシスパッキング	10cm(長)×1.5cm(幅)×2.5cm(高)	ひも付	10入／箱
I	450421	ヘモックス ウェイマートパッキング	5.5cm(長)×1.5cm(幅)×2.5cm(高)	ひも付	10入／箱
J	450416	ヘモックス スタクシースタット		ひも付	10入／箱
K	450407	ヘモックス バロンサイナスパック	2.5cm(長)×1.2cm(幅)×2cm(高)	ひも付	10入／箱
L	450531	ヘモックス バロンサイナスパック	2.5cm(長)×0.6cm(幅)×2cm(高)	ひも付 スリムタイプ	10入／箱
M	450422	ヘモックス ケネディー サイナスパック	3.5cm(長)×1.2cm(幅)×1.2cm(高)	ひも付	10入／箱
N	450426	ヘモックス ケネディー サイナスパック	2.5cm(長)×0.9cm(幅)×1.2cm(高)	ひも付 スリムタイプ	10入／箱
O	450530	ヘモックス ケネディー サイナスパック	3.5cm(長)×0.6cm(幅)×1.2cm(高)	ひも付 ウルトラスリム	10入／箱
P	450428	ヘモックス トーフイル サイナスパック	4.5cm(長)×0.9cm(幅)×2cm(高)	ひも付 スリムタイプ	10入／箱
Q	450355	ヘモックス シンドラー イヤーパッキング	1.5cm(長)×1.2cm(幅)		10入／箱
R	450356	ヘモックス シンドラー イヤーパッキング	1.3cm(長)×0.9cm(幅)		10入／箱
S	450146	ヘモックス ポープ イヤーウィック	2.4cm(長)×0.9cm(幅)		10入／箱
T	450141	ヘモックス ポープ イヤーウィック	1.5cm(長)×0.9cm(幅)		50入／箱

Medtronic

製造販売業者
日本メドトロニック株式会社
ENT
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名：メロセル
医療機器届出番号：13B1X00261X00001

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
本書に記載の価格には消費税は含まれておりません。本書に記載の価格はメーカー希望小売価格です。
© 2022 Medtronic. Medtronic、メドトロニック、Medtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。
1394 ENT10242022A SHO-SHO