

TruClear™

System

HysteroLux™

Fluid Management System

硬性子宮鏡モルセレーションシステム
灌流マネジメントシステム
カタログ



HysteroLux™
Fluid Management System



TruClear™
System

Medtronic

硬性子宮鏡モルセレーションシステム TruClear™ ティッシュリムーバルシステム

組織に優しいデバイス

- 電気エネルギーを使用しないため、子宮内膜への焼灼によるダメージがなく、生理食塩水の使用が可能
- 細径スコープ（TruClear™ スコープ5C）を使用する場合は、拡張を最小限にすることが可能
- いずれのサイズのスコープも先端を斜めにデザインすることにより、愛護的に挿入可能



クリアな術野のための 持続的灌流フロー

- 常に持続的に灌流させるため、視野をクリアに保持
- 術野の組織片や気泡などの浮遊を低減

病変に応じたデバイス

- 3種類のスコープ径
- 4種類のシェーバー

効率の良いプロシーチャー


- 切除と吸引が同時に行われるため、器具の出し入れを行うことなく効率のよい手技をサポート
- 切除した組織を病理診断することも可能

TruClear™ システム使用例




Sabaguchi
2022©

術式の流れ

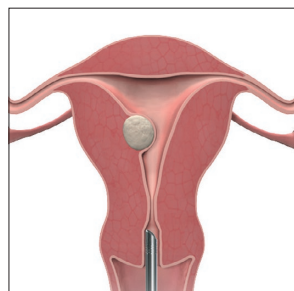


1. 子宮内にヒステロスコップを挿入する

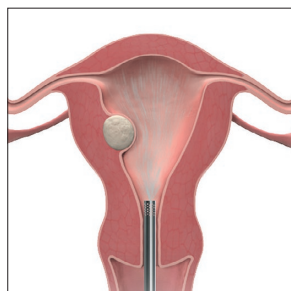


2. 生理食塩水等で子宮を拡張させる



3. 病変の位置を確認する

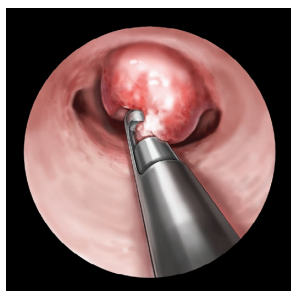

4. 病変をシェーバーで切除する

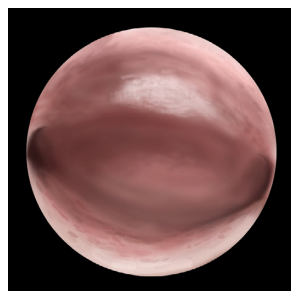

5. シェーバーとヒステロスコップを抜去する



製品動画はこちら

バリエーション豊富なデバイス

製品名	搭載レンズ	挿入部最大径	ワーキングチャネル 最小径	使用可能なシェーバー
TruClear™ スコープ 5C ※ 写真はシース装着時	ファイバー レンズ	シース非装着時 5.2mm シース装着時 5.7mm	3.1mm	TruClear™ ソフトシェーバー ミニ
TruClear™ エリート 6 スコープ		6.24mm		TruClear™ デンスシェーバー ミニ
TruClear™ エリート 8 スコープ	ロッドレンズ	7.43mm	4.2mm	TruClear™ ソフトシェーバー プラス TruClear™ デンスシェーバー プラス

組織に応じて使い分けできるシェーバー

ポリープなどの柔らかい組織にはソフトシェーバーを、
筋腫などの硬い組織にはデンスシェーバーを選択できます。



TruClear™
ソフトシェーバー ミニ・プラス

TruClear™
デンスシェーバー ミニ・プラス

ポリープ切除
(子宮内膜ポリープ)

D&C

RPOC
(Retained products of conception)

筋腫切除
(粘膜下筋腫)

製品コード一覧

TruClear™ ティッシュリムーバルシステム

コントロールユニット&スコープ

製品コード	製品名	入り数	
7209808	TruClear™ コントロールユニット	1	
7209820	TruClear™ フットスイッチ	1	
7209807	TruClear™ ハンドピース	1	
72204752	TruClear™ スコープ 5C	1	
72204753	TruClear™ シース 5C	1	
72204879	TruClear™ エリート8 スコープインサートセット	1	
72204878	TruClear™ エリート6 スコープインサートセット	1	

ディスポーザブルシェーバー

製品コード	製品名	入り数	
7209509	TruClear™ ソフトシェーバープラス	1	
72202536	TruClear™ ソフトシェーバーミニ	1	
72203012	TruClear™ デンスシェーバープラス	1	
72204064	TruClear™ デンスシェーバーミニ	1	

ディスポーザブルパーツ

製品コード	製品名	入り数	
72205051	TruClear™ エリート ディスポーザブルキャップ	5	
7209824	ジャンパーチューブ 4本回収バッグ付	1	
72203257	ジャンパーチューブ 1本回収バッグ付	1	
72200024	3000ccキャニスタ	36	

アクセサリ&スペアパーツ

製品コード	製品名	入り数	
72203004	TruClear™ 滅菌トレイ	1	
7207900	ストルツオリンパスライトポストアダプタ	1	
4347	WOLFライトポストアダプター	1	
7205561	ブルーシールキャップ	5	
90504964	オーリング5Cサイズ	1	
72205067	TruClear™ エリート8 インサート	1	
72205066	TruClear™ エリート6 インサート	1	
90505001	TruClear™ エリート リテイニングキャップ	1	
90505002	TruClear™ エリート Oリング	1	
90505000	TruClear™ エリート ストップコックセット	1	
72203618	TruClear™ 5C ストップコック	1	
7205548	スコープクリーナー 4ML	1	
72204861	TruClear™ スコープストップコック 潤滑剤	1	


HysteroLux™

灌流マネジメントシステム

硬性子宮鏡を用いた子宮鏡下手術・診断用 灌流装置

子宮腔内を一定の圧に保ちながらクリアな術野確保をサポート

- 専用スケールと併用することで、流入量と排出量の差（喪失量）をモニタリング
- 子宮内圧を、15~150mmHgの範囲で設定（安全閾値100mmHg）
- 最大流量を、30~800mL/分の範囲で設定
- 喪失量が300mL/分を超えると、ピープ音が鳴り、アラートメッセージが表示
- 喪失量が設定した閾値に達すると、ピープ音が鳴る

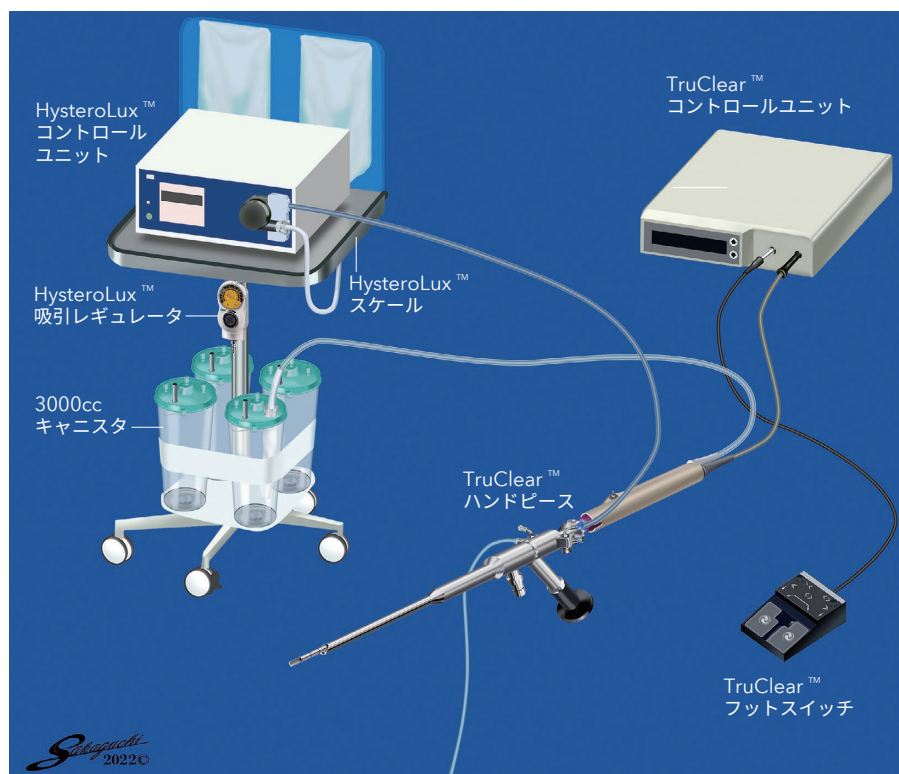

製品コード一覧

HysteroLux™ 灌流マネジメントシステム



製品コード	製品名	入り数	
72205000	HysteroLux™ コントロールユニット	1	
72205001	HysteroLux™ スケール	1	
72205013	HysteroLux™ 電源コード	1	
72205041	HysteroLux™ 吸引レギュレータ	1	
72205028	HysteroLux™ インフローチューブ	1	
7209823	HysteroLux™ アウトフローチューブセット	1	
72205027	HysteroLux™ 吸引チューブ	1	
7209824	ジャンパーチューブ4本 回収バッグ付	1	
72203257	ジャンパーチューブ1本 回収バッグ付	1	
72200024	3000CCキャニスタ	36	



Let's do better for women

メドトロニックが提供する
医療従事者向けサイトの製品情報ページです。
日本国内の医療従事者を対象に、
医療機器を適正にご使用いただくための
情報を提供しています。



製品情報はこちら

販売名：TruClear ティッシュリムーバルシステム
医療機器認証番号：301AABZX00026000

販売名：TruClear オペレーティブヒステロスコープ
医療機器認証番号：231AABZX00010000

販売名：TruClear インストルメント
医療機器届出番号：13B1X00069US024A

販売名：ハイフロー吸引キャニスタ
医療機器届出番号：13B1X00069US028A

販売名：HysteroLux 灌流マネジメントシステム
医療機器承認番号：30200BZX00157000

販売名：HysteroLux 灌流マネジメントシステムチューブセット
医療機器届出番号：13B1X00069US025A

販売名：ヒステロスコピック吸引レギュレータ
医療機器届出番号：13B1X00069US026A

Medtronic

コヴィディエンジャパン株式会社

サージカルイノベーション

Tel: 0120-998-971

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。
© 2022 Medtronic. Medtronic 及び Medtronic ロゴマークは、Medtronic の商標です。TM を付記した商標は、
Medtronic company の商標です。

2207.flk.SI-A790