


CELLO® Balloon Guide Catheter

製品番号	製品名称	適合カテーテル イントロデューサー (F)	バルーン注入量(mL)／ バルーン最大拡張径(mm)	先端部長 (mm)	バルーン マーカ―数	バルーン有効長 (mm)	内径 (mm)	カテーテル有効長 (mm)	カテーテル全長 (mm)
N5350053	セロ 5F	5	0.4／10	5	1	5	1.00 (0.039 inch)	1050	1135
N5350063	セロ 6F	7	1.0／11	3	2	7	1.30 (0.051 inch)	1020	1100
N5350073	セロ 7F	8	1.0／12		2	7	1.70 (0.067 inch)	1020	1100

販 売 名：テンポラリーオクリュージョンバルーンカテーテルII
承認番号：22100BZX00787000

※ 全長はハブ部分を含みます。
包装単位：1本／箱 滅菌済み 単回使用

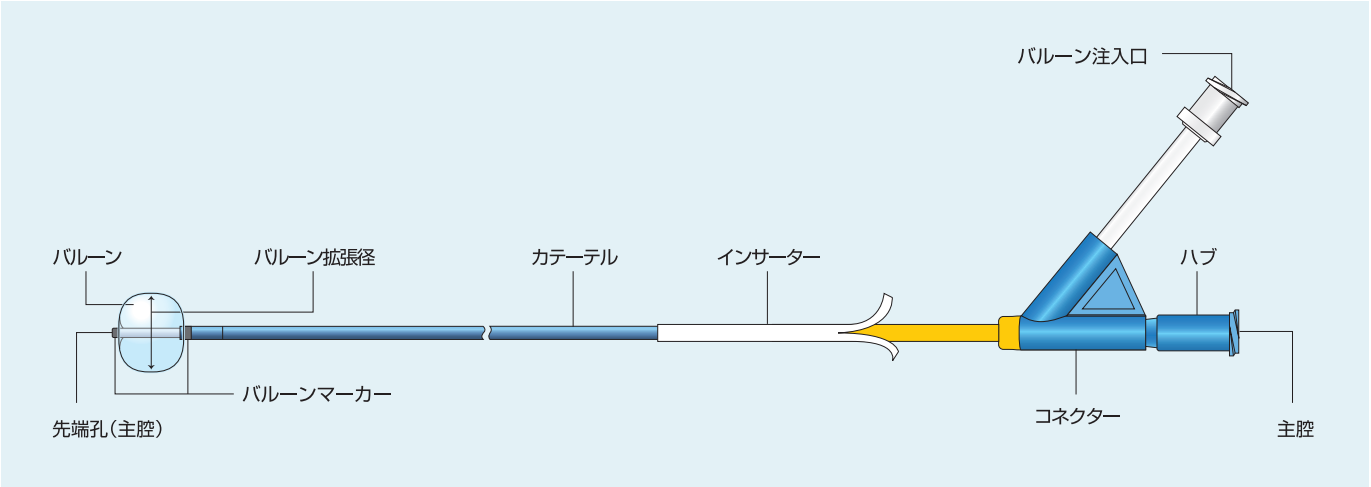

※ セロ 5Fは、カテーテル表面に親水性コーティングが施されています。

バルーンコンプライアンスチャート

注入量(mL)		0.2	0.4	0.6	0.8	1.0	1.5	2.0
バルーン拡張径 (mm)	セロ 5F	7.7	9.6	—	—	—	—	—
	セロ 6F	7.0	8.8	9.9	10.7	11.4	—	—
	セロ 7F	7.3	9.2	10.2	11.2	11.9	—	—

注入量 (mL 50%希釈造影剤)
■ 最大注入量

■ 附属品

- 

1. バルーン膨張用
シリンジ 6mL
- 

2. バルーン膨張用
シリンジ 3mL
- 

3. インサーター(2本)
※ 1本は予めカテーテルに
装着されています。
- 

4. 三方活栓

Medtronic

製造販売元：富士システムズ株式会社
販売元：日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー事業部
〒108-0075 東京都港区港南1-2-70
Tel: 03-6774-4617

medtronic.co.jp

©2018 Medtronic Japan Co., Ltd. All Rights Reserved.

EXPANDING
CHOICES
ENHANCING
FLOW
ARREST




CELLO®
Balloon Guide Catheter


Medtronic
Further, Together

NV-35
ct-bc-cell
v2.1812.4000.es

CELLO® Balloon Guide Catheter は、
一時的血流遮断及びデバイスデリバリーに必要な
操作性・柔軟性・視認性を兼ね備えた
バルーン付ガイディングカテーテルです。

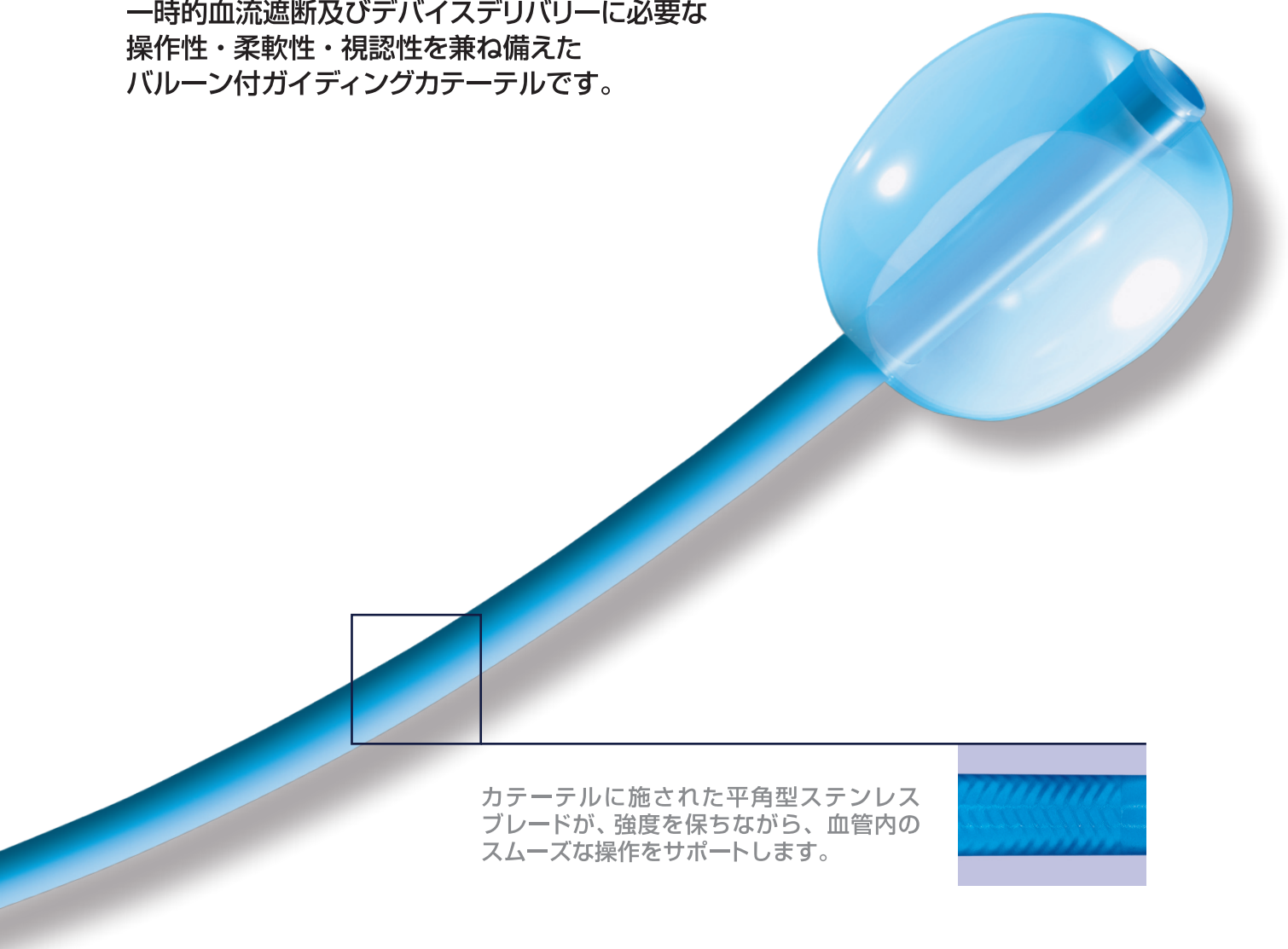


カテーテルに施された平角型ステンレス
ブレードが、強度を保ちながら、血管内の
スムーズな操作をサポートします。

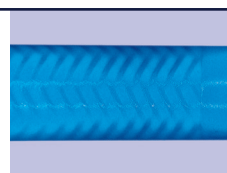


Navigability

- **Dual Braided Design**は、近位部の支持性と遠位部の柔軟性を兼ね備え、高いサポート力及びデバイスデリバリー性能を発揮します。

カテーテル断面図(縦)
遠位部

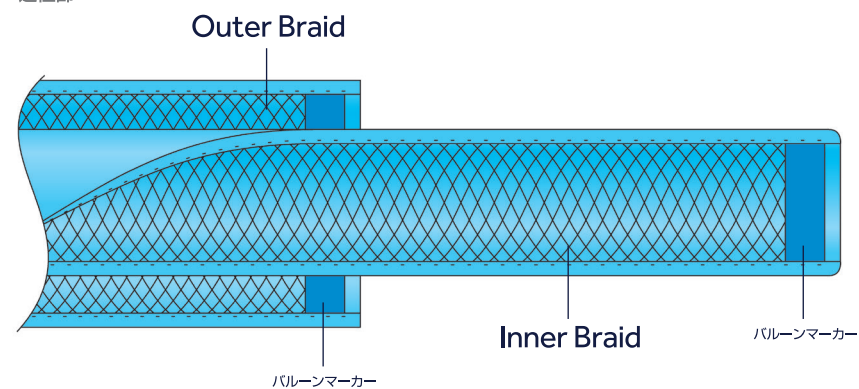


カテーテル断面図(横)

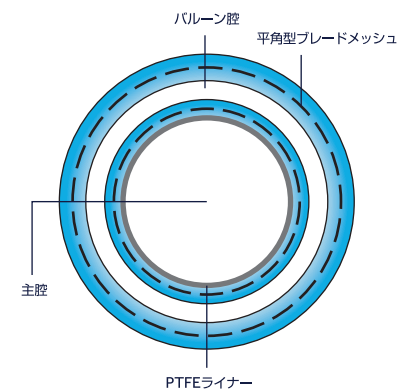


Color Code

- カラーコード化されたコネクタ部は、手技の際カテーテルサイズの識別を容易にします。

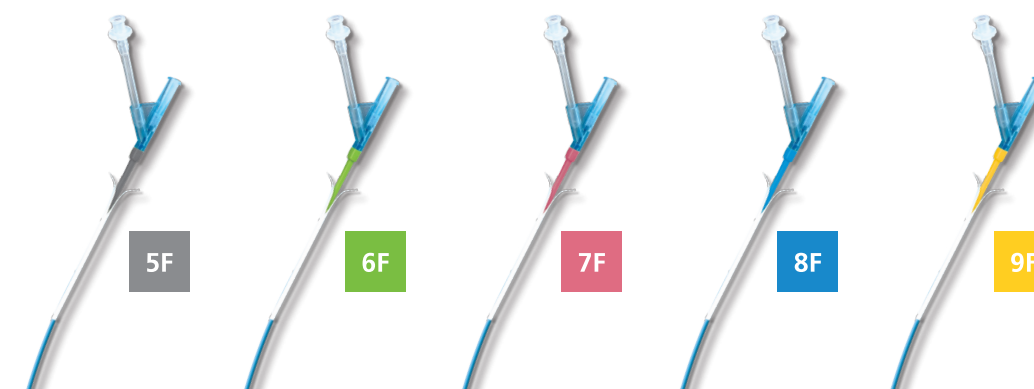

Balloon Softness

- 柔軟なシリコン製バルーンは、低圧で血管内壁にフィットし、安定した一時的血流遮断を可能にします。

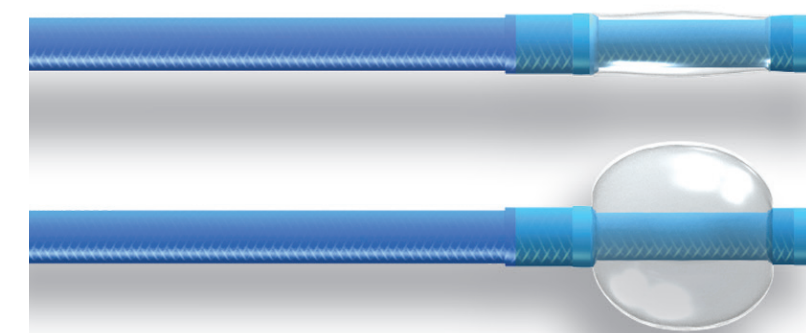

Visibility

- セロ 5F
セロ 5Fは、バルーンマーカーが先端部に1箇所のみとなっています。



- 2本のX線不透過バルーンマーカーは、正確な先端状態の把握をサポートします。

