



Medtronic

Access to success


Phenom™ Microcatheter Family catalog

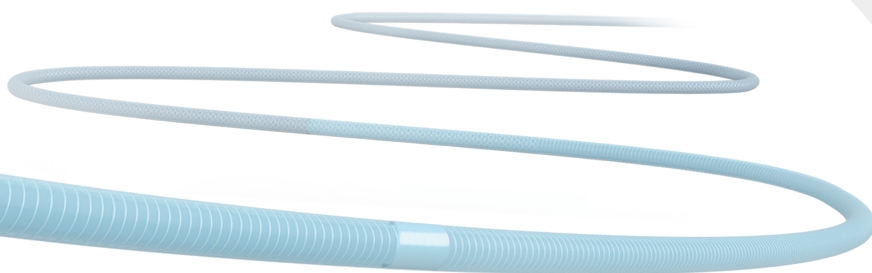


Phenom™ 17 for Coil

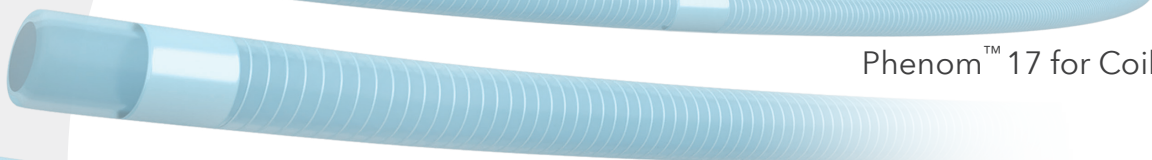

Phenom™ 27 for Pipeline

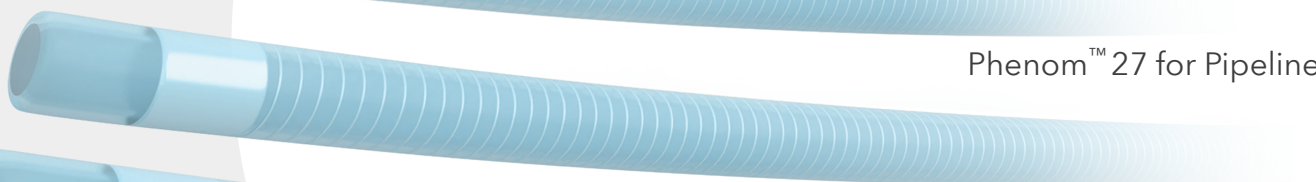

Phenom™ 21 160cm for AIS

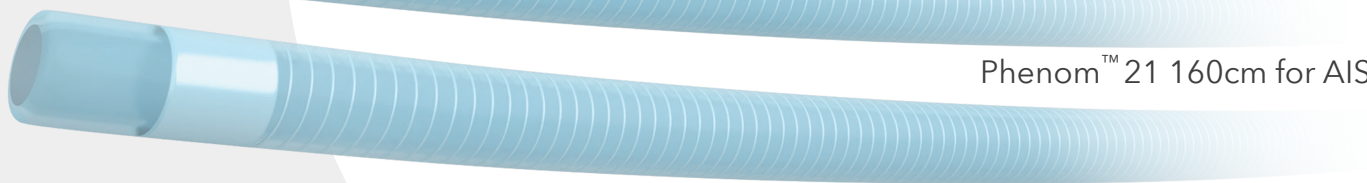

Phenom™ 27 160cm for AIS

Phenom™ Microcatheter

Access to success

シャフトの段階的变化

【近位部】:Double Braid構造

- Braidを採用し、良好なプッシュビリティーを実現
- ローププロフィール 2.2Fr (Phenom™ 17)

先端ラウンド加工




【遠位部】:Coil構造

- 柔軟性と安定性

Phenom™ 17
for Coil


Phenom™ 150cm for AN

Phenom™ 27
for Pipeline

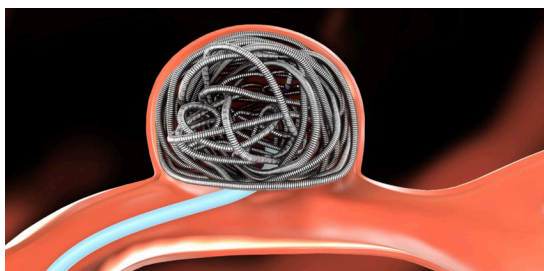

- Phenom™ 21 & 27に比べて先端を柔らかく設計
- コイル挿入時のサポートを期待
- Adjunctive techniqueを考慮した近位2.2Fr


※ STRAIGHT, 45°, 90°にはスプリットイントロデューサが付属しています。

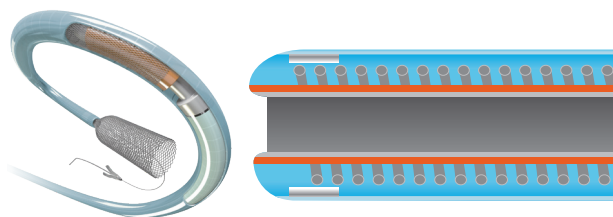

- 先端までインナーレイヤーを入れる事でPipelineの誘導性に寄与


ウィングレス・スティックハブ

- コイル挿入と操作性を考慮した設計

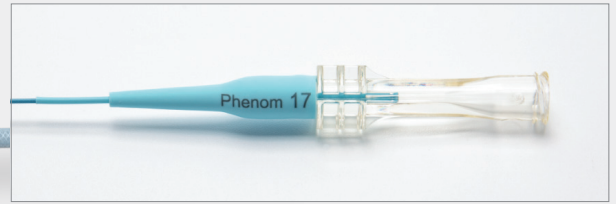


Phenom™ 17と Phenom™ 21 & 27の違い

～用途にあわせたインナーレイヤーの違い～

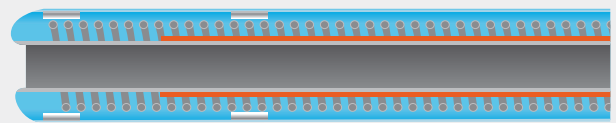

Phenom™ 17ではインナーレイヤー長が短く、
先端部のFlexibilityを持たせた設計

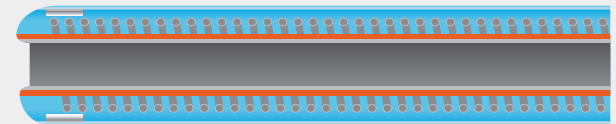

Phenom™ 21, 27はステント送達にも耐えうるDurability
を考慮し、カテーテル先端までインナーレイヤーを採用

【中央部】:Coil & Braid構造


- スムーズな力の伝達

Phenom™ 21
160cm
for AIS

Phenom™ 160cm for AIS
Which do you choose?

Phenom™ 27
160cm
for AIS

Lower profile for distal access
細いtortuousな血管にもご使用いただきやすいように設計

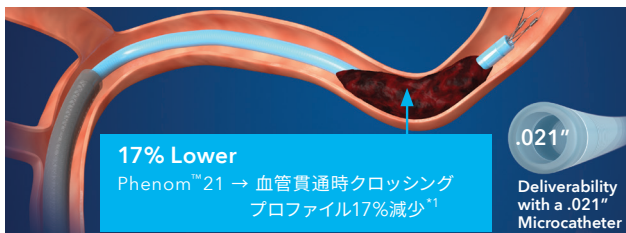


Solitaire™ Platinum 6-40-10
Phenom™ 27

Solitaire™ X 6-40-10
Phenom™ 21

47% Lower
delivery
force^{*2}
in a .021" Microcatheter

^{*1} DWGSFG13XXX-YYyy-Zz; DWGSFG15XXX-YYyy-Zz;
^{*2} TR-NV16168 Rev A; Compared to Solitaire™ Platinum

Larger profile for aspiration catheter
Reactとの併用時のレージの少なさ

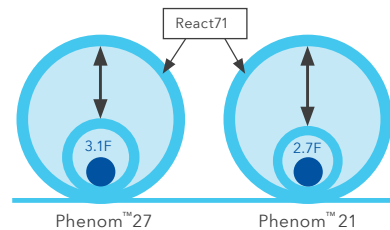

分岐部/屈曲部における
React誘導時のサポート力




Phenom™ Family

Access to success

Phenom™ 17



Phenom™ 21, 27

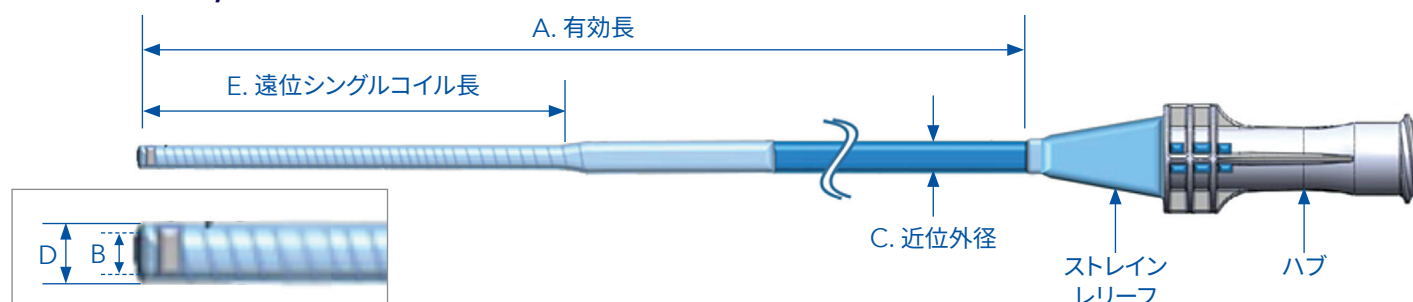

Phenom™ for AN

品名	品番	A. 有効長	B. カテーテル内径 (ID)	C. 近位外径 (OD)	D. 遠位外径 (OD)	E. 遠位シングルコイル長	先端形状
Phenom™ 17	FG11150-0615-2S	150 cm	0.017 inch	2.2 F	1.8 F	15 cm	ストレート
	FG11150-0615-2X						45°
	FG11150-0615-2R						90°
	FG11150-0615-2J						J
Phenom™ 27	FG15150-0615-1S		0.027 inch	3.1 F	2.8 F	30 cm	ストレート
	FG15150-0630-1S						

Phenom™ for AIS

品名	品番	A. 有効長	B. カテーテル内径 (ID)	C. 近位外径 (OD)	D. 遠位外径 (OD)	E. 遠位シングルコイル長	先端形状
Phenom™ 21	FG13160-0615-1S	160 cm	0.021 inch	2.6 F	2.3 F	15 cm	ストレート
Phenom™ 27	FG15160-0615-1S		0.027 inch	3.1 F	2.8 F		

Medtronic

製造販売元

日本メドトロニック株式会社

ニューロバスキュラー

〒108-0075 東京都港区港南1-2-70

medtronic.co.jp

販売名: Phenom カテーテル

販売名: Solitaire X 血栓回収デバイス

販売名: Solitaire FR 血栓除去デバイス

販売名: React カテーテル

販売名: Pipeline Flex フローダイバーターシステム

医療機器承認番号: 30100BZX00190000

医療機器承認番号: 30200BZX00148000

医療機器承認番号: 22500BZX00543000

医療機器承認番号: 30200BZX00056000

医療機器承認番号: 22700BZX00131000