

Medtronic

DAR

Breathing system





Made in Italyの
品質・性能を
お届けします。

1987年

DARは、世界で初めてフィルタと人工鼻がひとつになった
フィルタ付人工鼻を製造しました。

今日、DAR製品はフィルタとフィルタ付人工鼻の他、
麻酔・呼吸回路や関連アクセサリなど手術室、ICU、ERから在宅にいたるまで
様々なケア領域で使用される幅広い製品ラインナップを提供しています。

人工鼻 / フィルタ

フィルタ付人工鼻

人工鼻

フィルタ

シングルユース麻酔回路・アクセサリ

コアキシャル

スムーズ ボア

エクステンダブル

スタンダード

用手呼吸回路

麻酔用バッグ

カブノライン

呼吸回路・アクセサリ

シングルユース呼吸回路セット

シングルユース呼吸回路セット
ヒーターワイヤー入

シングルユース呼吸回路部品

カテーテルマウント

コネクタ・アクセサリ



DAR

人工鼻 / フィルタ

DARが誇るフィルタ付人工鼻は、種類やサイズを豊富に取りそろえており、患者さんの一回換気量や用途に合わせて使用いただけます。全モデル、EOG滅菌済です。

性能データは、記載する文献およびDAR社製品資料に基づきます。

ご使用上の注意

- 電子添文に記載されている頻度で交換をしてください。また、痰などが付着し、気道抵抗が増加した場合にはすみやかに交換してください。
- 人工鼻は、単独でご使用ください。ネブライザ、加温加湿器と併用しないでください。
- 他の呼吸回路との接続後、回路の閉塞や空気漏れがないことを必ず確認してください。
- 1回限り使用の製品ですので、再使用はできません。



フィルタ付人工鼻

ハイグロバックS

352/5877



ハイグロバックS (紐付キャップ)

352/5877TCZ



ハイグロバックS (アングル)

352/5996



ハイグロバックS エルボー付

352/5867



細菌除去率※1)	>99.99%
ウイルス除去率※1)	>99.99%
加湿性能※2) (24時間使用後)	31.3mg/L (V _T =250mL) 30.7mg/L (V _T =500mL) 29.2mg/L (V _T =1000mL)
加温性能※2) (24時間使用後)	31.0°C (V _T =250mL) 31.2°C (V _T =500mL) 30.1°C (V _T =1000mL)
流量抵抗※2) (24時間使用後)	max.1.0cmH ₂ O (30L/min) max.2.5cmH ₂ O (60L/min) max.4.7cmH ₂ O (90L/min)
死腔※2)	45mL
重さ	30g
適応	V _T =150~1200mL
フィルタタイプ	静電的 (疎水性)
コネクタサイズ：患者側	15F/22M (エルボー：15F/22M)
コネクタサイズ：回路側	15M/22F (エルボー：15M)
サンプルポート	ルアーロック
滅菌	EOG滅菌

※1) Nelson Laboratories Inc. Bacterial Filtration Efficiency TEST(BFE) at an Increased Challenge level. Lab. No. 416380. Mar. 2008

※2) ISO draft 9360 test method.

販売名 DARエア・フィルタ
医療機器承認番号 20400BZY00321000
販売単位 25個／箱

フィルタ付人工鼻

ハイグロボーイ

355/5430



ハイグロボーイ (紐付キャップ)

355/5430TCZ



ハイグロボーイ エルボー付

355/5884



細菌除去率 ^{※1)}	>99.99%
ウイルス除去率 ^{※2)}	>99.99%
加湿性能 (2時間使用後)	32.3mg/L (V _T =250mL)
加湿性能 (2時間使用後)	31.6°C (V _T =250mL)
流量抵抗	max.0.6cmH ₂ O (10L/min)
	max.1.0cmH ₂ O (15L/min)
	max.1.4cmH ₂ O (20L/min)
死腔 (ISO 9360)	26mL
重さ	21g
適応	V _T =75~300mL
フィルタタイプ	静電気の (疎水性)
コネクタサイズ：患者側	15F/22M (エルボー：15F/22M)
コネクタサイズ：回路側	15M/22F (エルボー：15M)
サンプルポート	ルアーロック
滅菌	EOG滅菌

※1) Institut Fresenius, Examination of the Breathing System Filter Hygroboy Concerning the Efficiency in Bacterial Retention, (Report 93/08696-00), 1993
 Borghi V. et al., Bacterial Removal Efficiency of Filters-HME for Anaesthesia and Intensive Care in 24-hrs Tests, Acta Anaesth. Italica, 43, Suppl. 1, 93-97, 1992
 Borghi V., Report on Tests on Bacteria and Virus Retention Capacity of the Hygroboy and Hygrobaby Filters, 1993
 ※2) Borghi V., Report on Tests on Bacteria and Virus Retention Capacity of the Hygroboy and Hygrobaby Filters, 1993

販売名 DARエア・フィルタ
 医療機器承認番号 20400BZY00321000
 販売単位 25個／箱

ハイグロベビー

355/5427



細菌除去率 ^{※1)}	>99.99%
ウイルス除去率 ^{※2)}	>99.99%
加湿性能	27.7mg/L (V _T =25mL)
	27.5mg/L (V _T =50mL)
加温性能	30.2°C
流量抵抗 ^{※3)}	max.0.7cmH ₂ O (5L/min)
	max.1.2cmH ₂ O (7.5L/min)
	max.1.9cmH ₂ O (10L/min)
死腔 (ISO 9360)	10mL
重さ	9g
適応	V _T =30~100mL
フィルタタイプ	静電氣的 (疎水性)
コネクタサイズ：患者側	15F
コネクタサイズ：回路側	15M
サンプルポート	ルアーロック
滅菌	EOG滅菌

- ※1) Dill/Fuhr - Institut Fresenius, Examination of the Breathing System Filter Hygrobaby Concerning the Efficiency in Bacterial Retention: November 12th, 1993.
Borghini V. et al., Bacterial Removal Efficiency of Filters/HME's for Anaesthesia and Intensive Care in 24 hrs Tests, Acta Anaesth. Italica, 43, Suppl. 1, 93-97, 1992.
- ※2) Borghi V., Report on Test on Bacteria and Virus Retention Capacity of the Hygroboy and Hygrobaby Filters, 1993.
- ※3) MDA, Evaluation No 276, Heat and Moisture Exchangers: DAR Hygrobaby, DAR Hygroboy and DAR Hygrobac, April 1996.

販売名 DARエア・フィルタ
医療機器承認番号 20400BZY00321000
販売単位 25個／箱

人工鼻

ハイグロライフ II

353S19007



加湿性能 (2時間使用後) (ISO 9360)	30.7mg/L (V _T =500mL)
水分損失 (ISO 9360-1)	7mgH ₂ O/L
加温性能 (2時間使用後) (ISO 9360)	30.2°C (V _T =500mL)
流量抵抗 (ISO 9360-1)	1.0cmH ₂ O (30L/min) 2.5cmH ₂ O (60L/min) 4.6cmH ₂ O (90L/min)
死腔 (ISO 9360-1)	29mL
重さ (ISO 9360-1)	約22g
適応	V _T =100~1000mL
コネクタサイズ：患者側	22M/15F
コネクタサイズ：回路側	22F/15M
サンプルポート	ルアーロック
滅菌	EOG滅菌

販売名 DAR人工鼻
医療機器認証番号 219AABZX00254000
販売単位 25個／箱

フレックスライフ

353P5908



加湿性能	30mg/L
加温性能	30°C
流量抵抗 (ISO 9360)	max.0.8cmH ₂ O (30L/min) max.2.4cmH ₂ O (60L/min) max.5.0cmH ₂ O (90L/min)
死腔 (ISO 9360)	60~75mL
重さ	12g
適応	V _T =200~1000mL
コネクタサイズ：患者側	15F
コネクタサイズ：回路側	22F

販売名 フレックスライフ
医療機器承認番号 22100BZX00148000
販売単位 25個／箱

トラキオライフ™ II

353/19004



加湿性能 ^{※)} (24時間使用後)	28.5mg/L (V _T =500mL)
加温性能 ^{※)} (24時間使用後)	29.0°C (V _T =500mL)
流量抵抗 ^{※)}	max.0.7cmH ₂ O (30L/min) max.1.8cmH ₂ O (60L/min) max.3.0cmH ₂ O (90L/min)
死腔 (ISO 9360)	16mL
重さ	8.5g
適応	自発呼吸用 体重15kgを超える
コネクタサイズ：患者側	15F
サンプルポート	O ₂ ポート付
滅菌	EOG滅菌

※) In-house tests

販売名 DARエア・フィルタ
医療機器承認番号 20400BZY00321000
販売単位 25個／箱

トラキオライフ™ JP

353S19046Z (成人用) 353S19047Z (小児用)



		成人用	小児用
流量抵抗 ^{※)} (ISO 9360-2)	使用前	0.6cmH ₂ O (30L/min)	1.1cmH ₂ O (30L/min)
		1.1cmH ₂ O (60L/min)	
		1.7cmH ₂ O (90L/min)	
	24時間 使用後	0.7cmH ₂ O (30L/min) 1.3cmH ₂ O (60L/min) 2.0cmH ₂ O (90L/min)	1.3cmH ₂ O (30L/min)
水分損失量 ^{※)} (ISO 9360-2) (24時間使用後)		10mgH ₂ O/L (V _T 250mL)	9mgH ₂ O/L (V _T 250mL)
		11mgH ₂ O/L (V _T 500mL)	
		12mgH ₂ O/L (V _T 750mL)	
		13mgH ₂ O/L (V _T 1000mL)	
死腔量 (コネクタ含む)		13mL	9mL
重さ		約8g	約5g
コネクタ		ISO15F	ISO15F
オーバーフロー／ サクシオンポートの流量抵抗		最小12.0cmH ₂ O (15L/min)	最小12.0cmH ₂ O (15L/min)
適応		自発呼吸用 体重15kg以上	自発呼吸用 5kg以上40kg未満
一回換気量		100mL以上	50mL以上300mL未満
滅菌		EOG滅菌	EOG滅菌

※) In-house tests

販売名 DAR自発呼吸用人工鼻
医療機器認証番号 226AABZX00134000
販売単位 25個／箱

トラキオライフ™ JP用 酸素チューブ

251P30582



- 未滅菌
- 長さ2m

販売名 DAR酸素チューブ
医療機器認証番号 230AABZX00041000
販売単位 25本／箱

フィルタ

ステリベント™ 351/5856 ステリベント™ 351/5410



	351/5856	351/5410
細菌除去率※1)	>99.9999%	
ウィルス除去率※2)	>99.9999%	
流量抵抗 (ISO 9360)	max.0.8cmH ₂ O (30L/min)	
	max.2.0cmH ₂ O (60L/min)	
	max.3.6cmH ₂ O (90L/min)	
死腔 (ISO 9360)	92mL	
重さ	47g	
適応	機械側	機械側／患者側
フィルタタイプ	機械的 (疎水性)	
コネクタサイズ：患者側	22M	15F/22M
コネクタサイズ：機械側	22F	15M/22F
サンプルポート	—	ルアーロック
滅菌	EOG滅菌	

※1) Nelson Laboratories Inc. Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level. Lab. No. 399950. Jan. 2008.
 ※2) Nelson Laboratories Inc. Virus Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level. Lab. No. 399952. Jan. 2008.

販売名 DARエア・フィルタ
 医療機器承認番号 20400BZY00321000
 販売単位 25個／箱

ステリベント™ S 351/5878



細菌除去率※1)	>99.9999%
ウィルス除去率※2)	>99.9999%
流量抵抗 (ISO 9360)	max.0.8cmH ₂ O (30L/min)
	max.1.9cmH ₂ O (60L/min)
	max.3.2cmH ₂ O (90L/min)
死腔 (ISO 9360)	66mL
重さ	39g
適応	機械側／患者側
フィルタタイプ	機械的 (疎水性)
コネクタサイズ：患者側	15F/22M
コネクタサイズ：機械側	15M/22F
サンプルポート	ルアーロック
滅菌	EOG滅菌

※1) Nelson Laboratories Inc. Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level. Lab. No. 406241. Jan. 2008.
 ※2) Nelson Laboratories Inc. Virus Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level. Lab. No. 406252. Jan. 2008.

販売名 DARエア・フィルタ
 医療機器承認番号 20400BZY00321000
 販売単位 25個／箱

バリアバック 350/5865



細菌除去率※1)	>99.9999%
ウィルス除去率※2)	>99.999%
流量抵抗 (ISO 9360)	max.0.6cmH ₂ O (30L/min)
	max.1.5cmH ₂ O (60L/min)
	max.2.6cmH ₂ O (90L/min)
死腔 (ISO 9360)	99mL
重さ	35g
適応	機械側
フィルタタイプ	静電氣的 (疎水性)
コネクタサイズ：患者側	22M/15F
コネクタサイズ：機械側	22F
滅菌	EOG滅菌

※1) Nelson Laboratories Inc. Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level. Lab. No. 416378B. March 2008.
 ※2) Nelson Laboratories Inc. Virus Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level. Lab. No. 416379. March 2008.

販売名 DARエア・フィルタ
 医療機器承認番号 20400BZY00321000
 販売単位 25個／箱

バリアバックS 350/5879Z



細菌除去率※1)	>99.9999%
ウィルス除去率※2)	>99.999%
流量抵抗 (ISO 9360)	max.0.8cmH ₂ O (30L/min)
	max.2.1cmH ₂ O (60L/min)
	max.3.7cmH ₂ O (90L/min)
死腔 (ISO 9360)	36mL
重さ	19g
適応	機械側／患者側
フィルタタイプ	静電氣的 (疎水性)
コネクタサイズ：患者側	15F/22M
コネクタサイズ：機械側	15M/22F
サンプルポート	ルアーロック
滅菌	EOG滅菌

※1) Nelson Laboratories Inc. Bacterial Filtration Efficiency Test (BFE) at an Increased Challenge Level. Lab. No. 399950. Jan. 2008.
 ※2) Nelson Laboratories Inc. Virus Filtration Efficiency Test (VFE) at an Increased Challenge Level. Lab. No. 399952. Jan. 2008.

販売名 DARエア・フィルタ
 医療機器承認番号 20400BZY00321000
 販売単位 25個／箱

DAR


シングルユース麻酔回路・
アクセサリ

様々な種類、サイズを取りそろえておりますので、
患者さんや症例に合わせて選択いただけます。
また、全てシングルユース製品のため、交差感染の予防に適しています。



シングルユース麻酔回路

コアキシャル

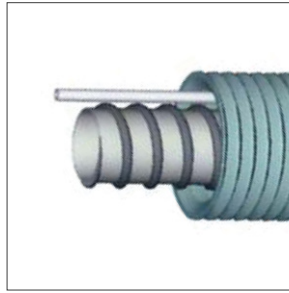

呼気蛇管と吸気蛇管が二重管構造で、またETCO₂ラインが蛇管内を通っているためY型回路に比べて患者さんの周辺がシンプルに保てます。

トリプレックス





カタログ番号	品名
285P25417	トリプレックス 200cm

販売名 DAR呼吸回路セット
医療機器承認番号 22100BZX00141000
販売単位 10セット／箱

- コアキシャル型麻酔回路
(外側チューブ内径25mm、内側チューブ内径15mm)
- 吸気側コネクタ：青色、呼気側コネクタ：白色
- ETCO₂測定ライン付（サンプリング部は、回路先端）
- 麻酔器側チューブは、エクステンダブルタイプ
(20～45cmの範囲で伸縮可能)
- 一回換気量V_t=150mL(体重約20kg)以上の患者さんに適応

シングルユース麻酔回路

■ スムースボア

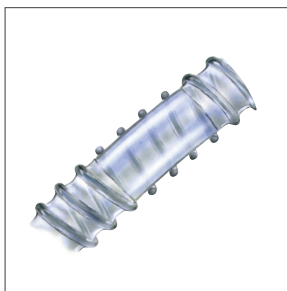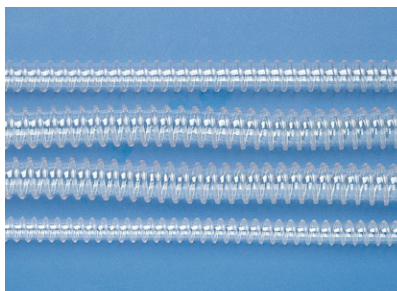

補強されているので
つぶれにくい構造になっています。

成人用麻酔回路セット

滅菌



カタログ番号	品名
300S6042Z	成人用麻酔回路セット 1.2m
300S6043Z	成人用麻酔回路セット 1.5m
300S6044Z	成人用麻酔回路セット 1.8m

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット／箱

- 透明・軽量・低コンプライアンス
- 人工呼吸器にも使用可能
- 内径 22mm



カタログ番号	品名
300P14147Z	成人用麻酔回路デタッチ 150cm

販売名 DAR呼吸回路セット
医療機器認証番号 22100BZX00141000
販売単位 10セット／箱

- 未滅菌
- Yコネクタと吸気・呼気チューブの取り外しが可能

小児用麻酔回路セット

滅菌




カタログ番号	品名
305/6712	小児用麻酔回路セット 1.2m
305/6713	小児用麻酔回路セット 1.5m

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット／箱

- 内径 15mm

■エクステンダブル

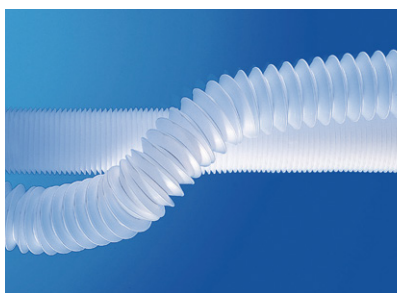

長さ・形状の変更が可能なので
様々なシチュエーションに対応できます。

エクステンダブル麻酔用蛇管



カタログ番号	品名
300/13315	エクステンダブル麻酔回路 60-180cm
300P16002	エクステンダブル麻酔回路 86-270cm

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット／箱

- ポリプロピレン製

エクステンダブル麻酔回路麻酔用バッグ付




カタログ番号	品名
300P14387	エクステンダブル麻酔回路3Lバッグ

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット／箱

- エクステンダブル麻酔回路60～180cmと
麻酔用バッグ(ラテックスフリー)のセット

シングルユース麻酔回路

スタンダード

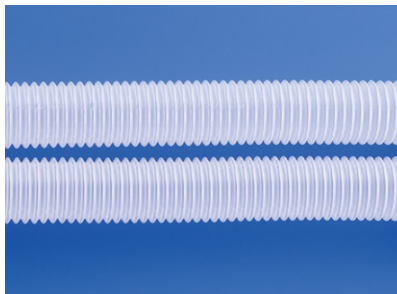

軽量なので、接続箇所への負担を軽減できます。

スタンダード麻酔回路



カタログ番号	品名
300P14347	スタンダード麻酔回路 1.5m
300P14348	スタンダード麻酔回路 1.9m

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット/箱

- ポリエチレン製
- 軽量で接続箇所への負担を軽減

スタンダード麻酔回路3Lバッグ付



カタログ番号	品名
300P14392	スタンダード麻酔回路 1.5m・3B
300P14393	スタンダード麻酔回路 1.9m・3B

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット/箱

- スタンダード麻酔回路と
麻酔用バッグ (ラテックスフリー) のセット

用手呼吸回路

用手呼吸回路



カタログ番号	品名
309/6612	用手呼吸回路 (滅菌)


販売名 DARディスプレイサブル呼吸回路部品
医療機器承認番号 20400BZY01269000
販売単位 10セット/箱

- APLバルブ付用手呼吸回路
- フレッシュエアライン接続部: 15Mコネクタとなっており、22Fアダプタ、5~8mm・8~11mm用スピゴット変換アダプタ付
- 排気部は、15Mコネクタとなっており、30M変換アダプタ付
- 2Lバッグ付

麻酔回路用アクセサリ

■ 麻酔用バッグ

麻酔用バッグ(ラテックスフリー)

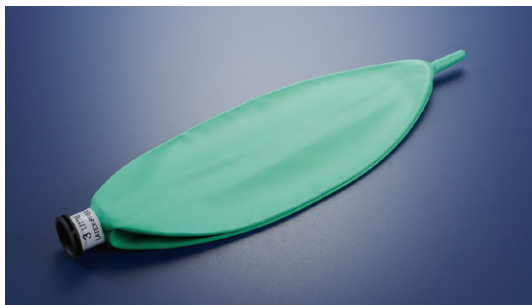

カタログ番号	品名
10908	麻酔用バッグ ラテックスフリー 0.5L
10909	麻酔用バッグ ラテックスフリー 1L
10910	麻酔用バッグ ラテックスフリー 2L
10911	麻酔用バッグ ラテックスフリー 3L

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット/箱

麻酔用バッグラテックスフリー 3Lコネクタ



カタログ番号	品名
10907	麻酔用バッグラテックスフリー 3Lコネクタ

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット/箱

■ カプノライン



滅菌

カタログ番号	品名
291/7731	DARカプノライン 300CM MM

販売名 DARフリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 25個/箱


DAR

呼吸回路・アクセサリ

幅広いラインナップから、患者さんや用途に合わせて使用いただけます。
チューブは外側がらせん状に強化されているため、
つぶれによる閉塞が起こりにくい構造となっております。
また、透明度が高く、チューブ内部の汚染や結露の状態を確認しやすい設計です。



シングルユース呼吸回路セット


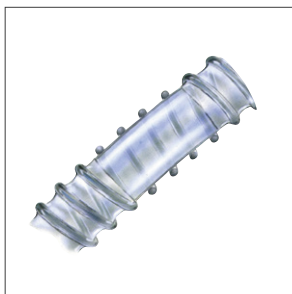


スムーズ・インターナル・サーフェイス
内側の凸凹をなくすことで水が溜まり
にくく、汚染のリスクを軽減します。

呼吸回路セット (ウォータートラップ・カテーテルマウント付)

303S14127Z

滅菌

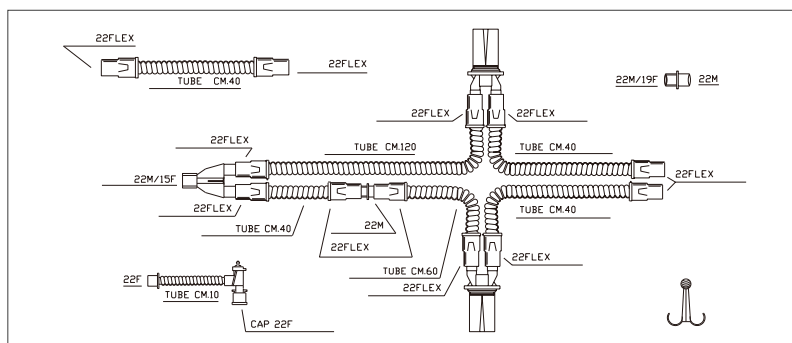
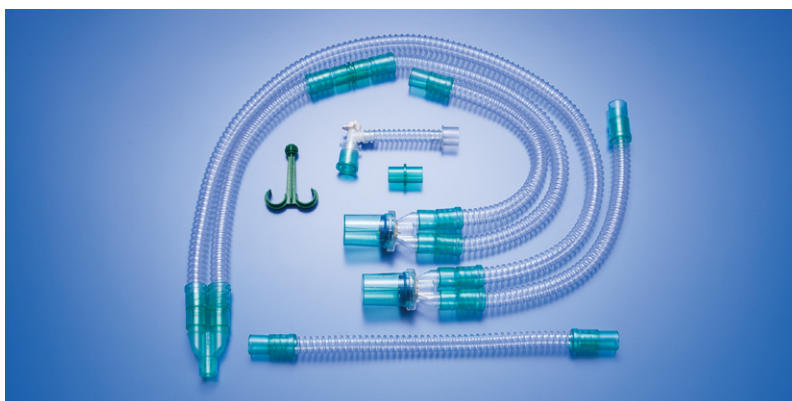


販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット/箱

シングルユース呼吸回路セット

呼吸回路セット (エア・フィルタ/カテーテルマウント付)


301S14401Z 滅菌

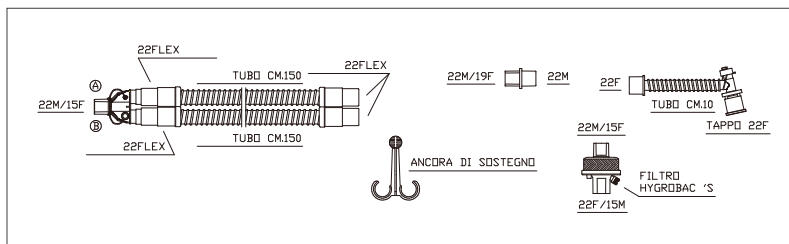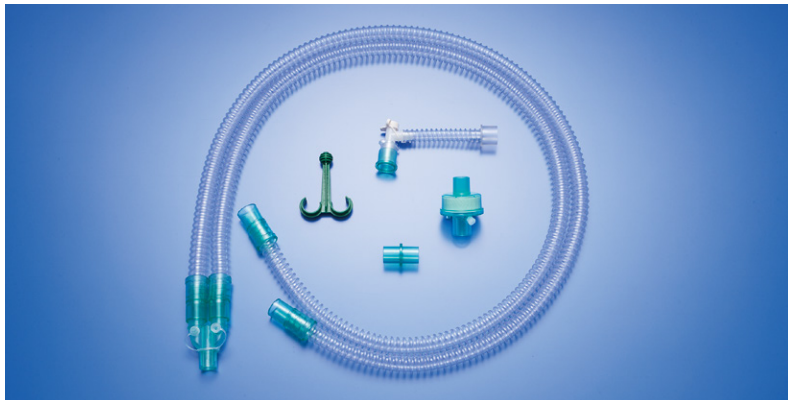

販売名 DARディスプレイザブル呼吸回路部品
 医療機器承認番号 20400BZY01269000
 販売単位 10セット/箱

成人用シングル回路


5093601

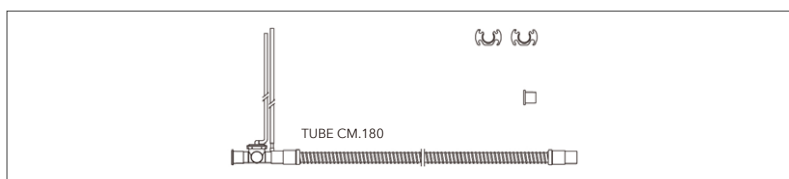

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 1セット/袋

小児用シングル回路


5093501

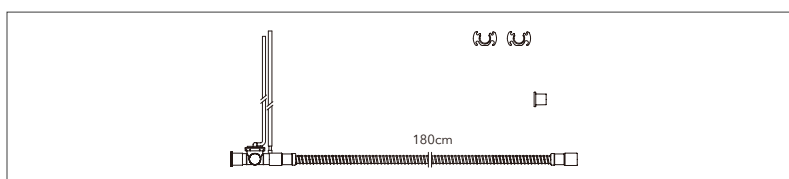

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 1セット/袋

呼吸弁単体 (ダブル2WAY)


111P1160

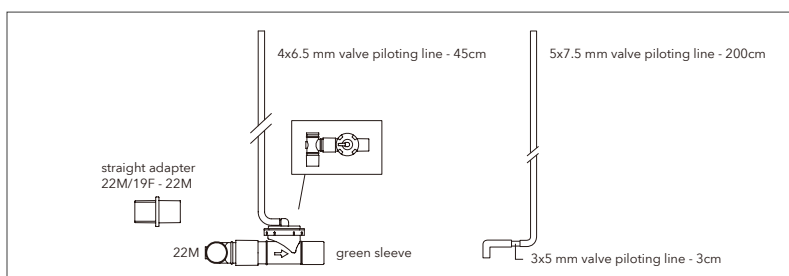

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 1セット/袋


呼吸弁単体 (シングル3WAY)

111P1161

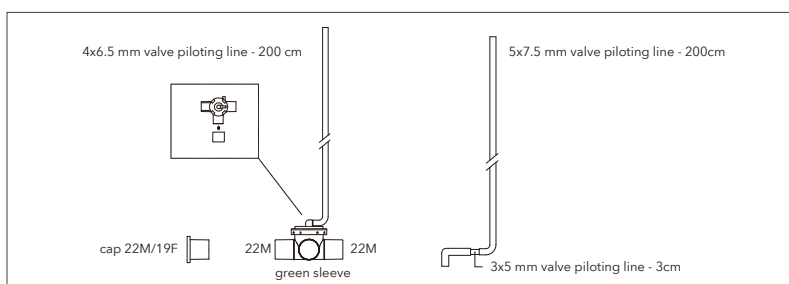

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 1セット/袋

シングルユース呼吸回路セット ヒーターワイヤー入


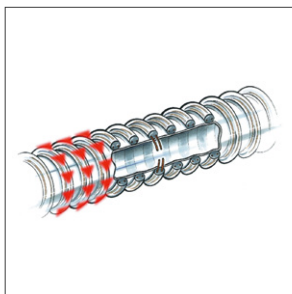


チューブの外側に均一に熱線を巻きつけることにより、むらなく均一に加熱されます。

ヒーターワイヤー入 成人用150cm MR850

304S14402Z

滅菌

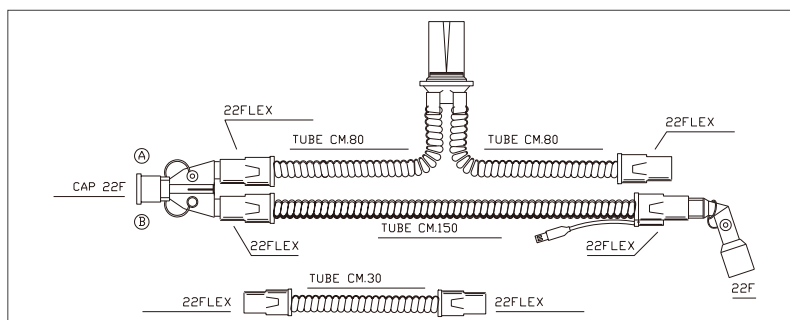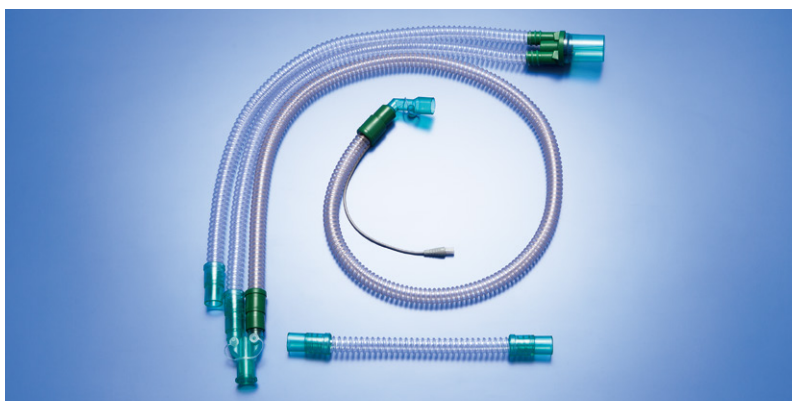


販売名	DARブリージングシステム
医療機器認証番号	220AABZX00156000
販売単位	10セット／箱

ヒーターワイヤー入 成人用120cm MR850

304S14292Z

滅菌

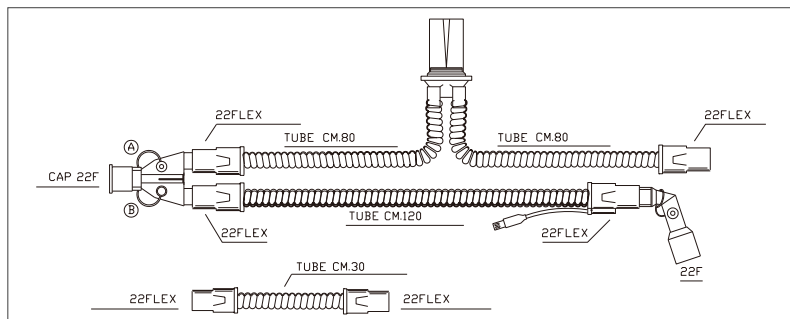


販売名	DARブリージングシステム
医療機器認証番号	220AABZX00156000
販売単位	10セット／箱

ヒーターワイヤー入 小児用 MR850

306S9904


滅菌

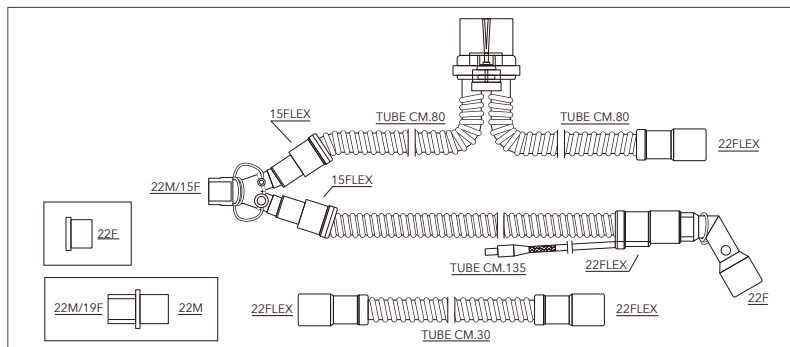

販売名	DARブリージングシステム
医療機器認証番号	220AABZX00156000
販売単位	10セット／箱

ヒーターワイヤー入 新生児用 MR850


307S9910 滅菌

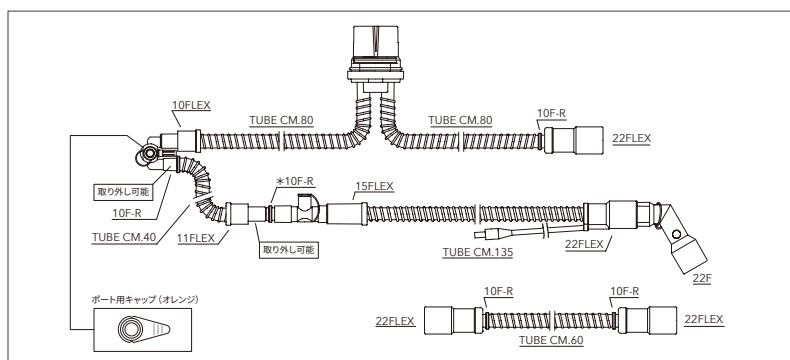

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット/箱



エレクトリカルアダプタ MR850用

111/1146

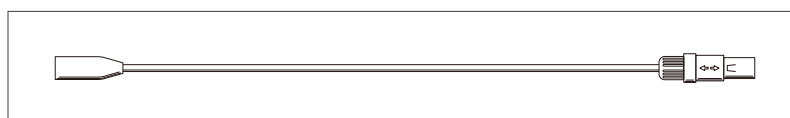

デュアルヒーターワイヤー入 成人用150cm MR850用


304S14300Z 滅菌

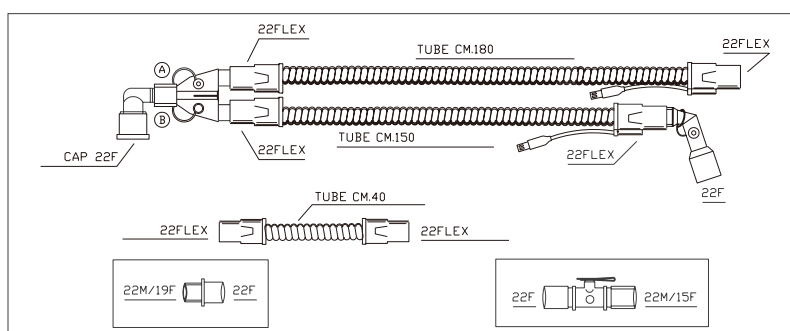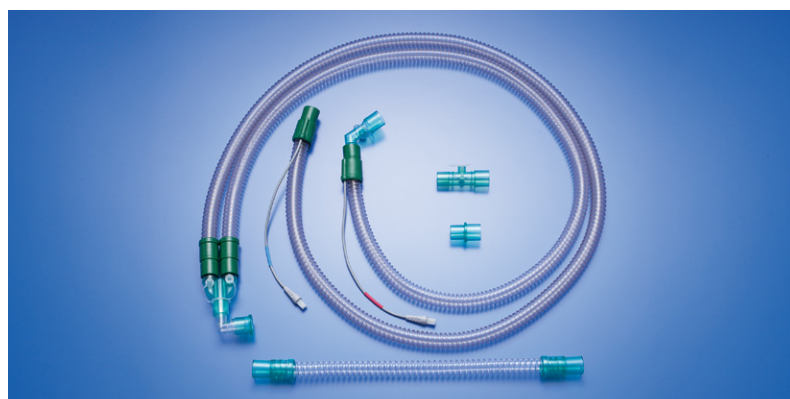

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10セット/箱

エレクトリカルアダプタ MR850用 Dual

111/1149

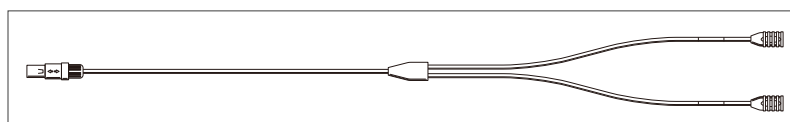

シングルユース呼吸回路部品

蛇管

滅菌



カタログ番号	品名
285S5059Z	ディスボ蛇管B 0.6m
285S5060Z	ディスボ蛇管B 0.8m
285S5062Z	ディスボ蛇管B 1.2m
285S5063Z	ディスボ蛇管B 1.5m
285S5064Z	ディスボ蛇管B 1.8m

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10本／箱

蛇管 小児用

滅菌



カタログ番号	品名
286/5068	ディスボ蛇管B 小児用 1.0m
286/5069	ディスボ蛇管B 小児用 1.2m
286/5070	ディスボ蛇管B 小児用 1.5m

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 5本／箱

成人用Yピース

600/5087 滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 2個／箱

ウォータートラップ

652/5406Z 滅菌




販売名 DARウォータートラップ
医療機器届出番号 13B1X00069DA001A
販売単位 2個／箱

カテーテルマウント

ダブルシーベル EXカテーテルマウント

滅菌

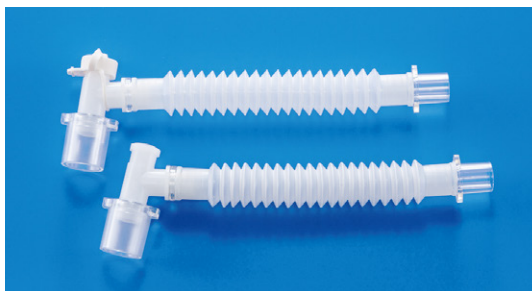


カタログ番号	患者側	機械側	
331/5661	22M/15F	15M	キャップ付
331/5665	22M/15F	15M	キャップなし

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 25個／箱

ダブルシーベル カテーテルマウント

滅菌

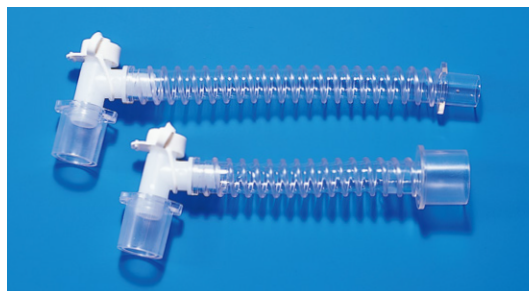


カタログ番号		患者側	機械側
331/5389	10cm	22M/15F	15M
331/5390	15cm		
331/5391	10cm	22M/15F	22F
331/5385	15cm		

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 25個／箱

コップ カテーテルマウント

滅菌

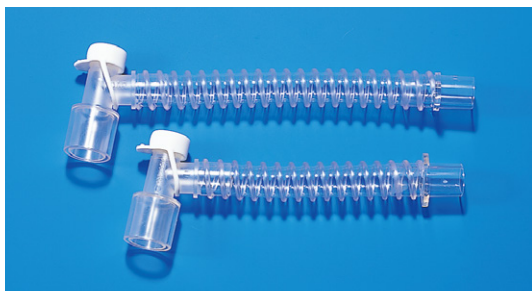


カタログ番号		患者側	機械側
331/5305	10cm	22M/15F	15M
331/5306	15cm	22M/15F	15M

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 25個／箱

カテーテルマウント

滅菌

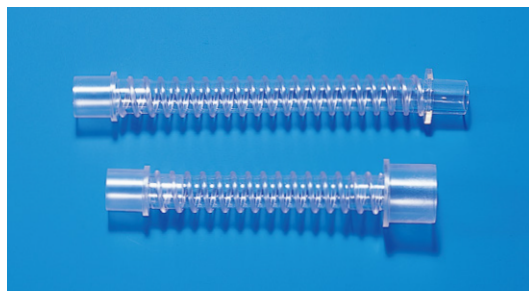

カタログ番号		患者側	機械側
332/5114	10cm	15F	15M
332/5115	15cm		
332/5309	10cm	15F	22F
332/5310	15cm		

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 25個／箱

エクステンダブル カテーテルマウント

滅菌



カタログ番号	患者側	機械側
332/5663	15F	15M
332/5666	15F	22F

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 25個／箱

ダブルシーベル回転コネクタ

610/5257

滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10個／箱

コネクタ・アクセサリ

ストレートコネクタ 22M-22M/19F

609/5176 滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10個／箱

ストレートコネクタ 22M/15F-15M

609/5248 滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10個／箱

エルボコネクタ

620/5173 滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 25個／箱

エルボコネクタ (サンプリングポート付)

620/9019TC 滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10個／箱

MR850用 コネクタ

620S9286 滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10個／箱

MDIアダプタ

608/5105



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10個／箱

22ミリ メスキャップ

608/9068-1 滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10個／箱

22ミリ オスキャップ


608/9138 滅菌



販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 10個／箱

蛇管ハンガー

111P1114

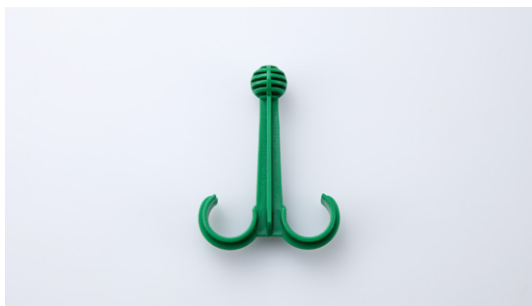

販売名 DARブリージングシステム
医療機器認証番号 220AABZX00156000
販売単位 50個／箱

Index

カタログ番号	ページ
10907	12
10908	12
10909	12
10910	12
10911	12
111/1146	18
111/1149	18
111P1114	22
111P1160	16
111P1161	16
251P30582	5
285P25417	8
285S5059Z	19
285S5060Z	19
285S5062Z	19
285S5063Z	19
285S5064Z	19
286/5068	19
286/5069	19
286/5070	19
291/7731	12
300/13315	10
300P14147Z	9
300P14347	11
300P14348	11
300P14387	10
300P14392	11
300P14393	11
300P16002	10
300S6042Z	9
300S6043Z	9
300S6044Z	9
301S14401Z	15
303S14127Z	14
304S14292Z	17
304S14300Z	18
304S14402Z	17
305/6712	9
305/6713	9
306S9904	17
307S9910	18
309/6612	11
331/5305	20
331/5306	20
331/5385	20
331/5389	20
331/5390	20
331/5391	20
331/5661	20
331/5665	20
332/5114	20
332/5115	20
332/5309	20
332/5310	20

カタログ番号	ページ
332/5663	20
332/5666	20
350/5865	6
350/5879Z	6
351/5410	6
351/5856	6
351/5878	6
352/5867	2
352/5877	2
352/5877TCZ	2
352/5996	2
353/19004	5
353P5908	5
353S19007	5
353S19046Z	5
353S19047Z	5
355/5427	4
355/5430	3
355/5430TCZ	3
355/5884	3
5093501	16
5093601	16
600/5087	19
608/5105	22
608/9068-1	22
608/9138	22
609/5176	21
609/5248	21
610/5257	20
620/5173	21
620/9019TC	21
620S9286	21
652/5406Z	19

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。

© 2016-2023 Medtronic. Medtronic及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。
TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

Medtronic

製造販売元
コヴィディエンジャパン株式会社
Tel : 0120-998-971

[medtronic.co.jp](https://www.medtronic.co.jp)

ct-br-darx(m7)2309
RMS_2023_1447-A