

Fiche-conseils du connecteur rotatif 5944RL

Le connecteur rotatif modèle 5944RL se compose d'une paire de câbles chirurgicaux jetables à usage unique avec deux adaptateurs qui se connectent à une sonde implantée par cathéter et à un instrument de stimulation cardiovasculaire (analyseur de système de stimulation) pour assurer le monitoring continu du signal électrique pendant la procédure d'implantation des dispositifs cardiaques. Le connecteur rotatif est compatible avec toutes les sondes IS-1, IS-4 et DF-4 implantées par cathéter.



Étapes de la procédure

- 1 Connecter l'adaptateur de l'analyseur à l'analyseur du système de stimulation.
- 2 Connecter le câble patient à l'adaptateur de l'analyseur.
- 3 Connecter les broches du connecteur rotatif au câble patient.
- 4 Connecter la sonde au câble cathodique noir (-) du connecteur rotatif.



a. D'une main, saisir et tenir le corps **bleu** et **noir** du câble cathodique du connecteur rotatif.



b. Ensuite, avec les doigts, rétracter l'extrémité distale **noire** du câble cathodique du connecteur rotatif pour exposer le réceptacle central.



c. Saisir et tenir fermement le connecteur de la sonde et l'insérer complètement dans le réceptacle central du câble cathodique du connecteur rotatif.



L'image montre l'insertion d'une sonde IS-1.




L'image montre l'insertion d'une sonde DF-4.


- 5 Relâcher les doigts de l'extrémité distale **noire** du connecteur rotatif et laisser la sonde insérée.



Sonde IS-1 insérée dans la cathode du connecteur rotatif.

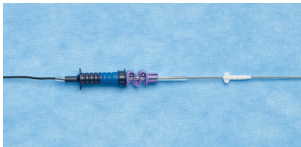


Sonde DF-4 insérée dans la cathode du connecteur rotatif.

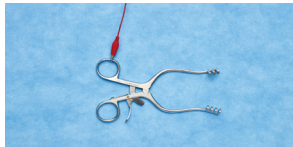


Connecter l'**anode rouge (+)** à la référence unipolaire en contact avec le tissu sous-cutané pour une surveillance électrique unipolaire continue pendant la fixation de la sonde.

- 6 Une fois les câbles du connecteur rotatif raccordés, il est possible de tourner et manipuler librement la sonde comme d'habitude.

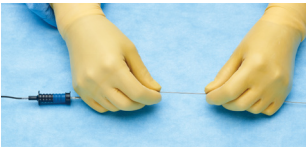

a. Les mains peuvent être placées directement sur le corps de la sonde, loin du connecteur rotatif.

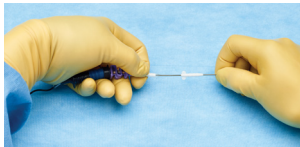


b. Unemain peut tenir le connecteur rotatif sans le serrer, tout en plaçant les doigts sur le connecteur de la sonde, tandis que l'autre main peut être placée sur le corps de la sonde.

- 7 Pour tester les mesures bipolaires, connecter la pince **anodique rouge (+)** du connecteur rotatif à la broche du connecteur de la sonde.



Sonde IS-1, pince **anodique rouge (+)** connectée à l'anneau anodique de la sonde pour une connexion bipolaire.

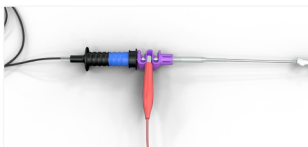

Sonde DF-4, pince **anodique rouge (+)** connectée à la bobine RV 2 pour une connexion bipolaire intégrée.

Attention : Retirer la pince **anodique rouge (+)** de la sonde de stimulation et la connecter à la référence unipolaire si des rotations supplémentaires de la sonde sont nécessaires.

- 8 Pour déconnecter le connecteur rotatif de la sonde.

a. Avec les doigts, rétracter l'extrémité distale **noire** du câble cathodique du connecteur rotatif pour exposer le réceptacle central et tirer la broche du connecteur de la sonde hors du réceptacle central du câble **cathodique noir (-)** du connecteur rotatif.
Caution : Ne pas tirer sur la broche du connecteur de la sonde sans rétracter l'extrémité distale noire du câble cathodique du connecteur rotatif.

Remarque : Inspecter périodiquement les câbles et les connexions pour vérifier qu'ils ne sont pas lâches, endommagés ou contaminés et qu'ils ne sont pas usés par les mouvements du patient ou d'autres causes. Cela risque de compromettre le fonctionnement des câbles.

Mise en garde : Respecter soigneusement la polarité et les désignations auriculaires et ventriculaires des sondes de stimulation et les connecteurs de câble lors de la connexion des sondes de stimulation aux câbles.

Pour obtenir une liste des indications, des contre-indications, des précautions, des mises en garde et des événements indésirables potentiels, veuillez consulter le mode d'emploi.

Medtronic

99 Hereford Street
Brampton, Ontario, L6Y 0R3
Sans frais : 800 268-5346
Tél. : 905 460-3800

[medtronic.ca](https://www.medtronic.ca)

Le connecteur rotatif 5944RL est fabriqué par Shenzhen Launch Electrical Co. et distribué par Medtronic.

©2025 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. ^{MC*}Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic.

UC202500362FC CA-CTL-0564-F Rév. 06/2025