


Démarrage : Application CareLink^{MC} Connect

Votre appareil est-il compatible? Vérifiez sa compatibilité à www.medtronicdiabetes.ca/compatibilite



1. Ouvrez l'application et [suivez les instructions à l'écran](#). Vous pourriez être informé que votre appareil est non vérifié, mais vous pouvez continuer.

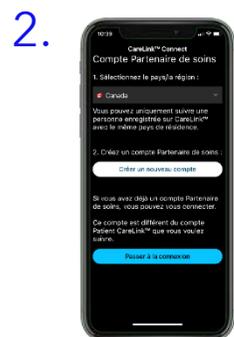

2. Connectez-vous à votre compte de partenaire de soins CareLink Personal. Inscrivez-vous si vous n'avez pas de compte.


www.carelink.minimed.eu

Remarque : votre pays doit être le même que celui de la personne que vous suivez.




3. Lisez l'écran d'avertissement et acceptez en appuyant sur **Suivant**.

4. Entrez le nom d'utilisateur CareLink^{MC} Personal de la personne que vous voulez suivre*.

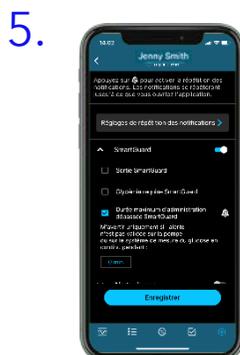

5. Une fois accepté, on vous demandera de configurer vos **Notifications**. Vous ne recevrez pas de notifications** tant qu'elles ne seront pas configurées.

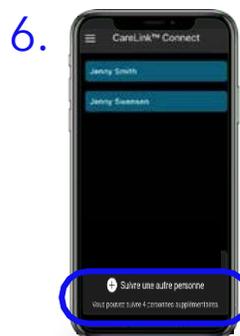

6. Appuyez sur **Suivre une autre personne** pour ajouter **jusqu'à 5** utilisateurs de MiniMed^{MC} Mobile à votre compte.

Chaque liaison nécessitera la configuration de notifications.

Elle doit accepter votre demande de connexion dans son compte CareLink^{MC} Personal dans les 24 heures.

Conseil : Pour une meilleure expérience, les mises à jour automatiques des systèmes d'exploitation d'appareils mobiles doivent être **désactivées** - si une mise à jour devient disponible, vérifiez votre site Web local pour vous assurer qu'elle est prise en charge avant d'installer.

Partenaires de soins multiples



Les utilisateurs de l'application CareLink^{MC} Connect peuvent suivre **jusqu'à 5** personnes utilisant MiniMed^{MC} Mobile. Vous pouvez passer d'une vue en direct à l'autre et recevoir de ces personnes des notifications poussées, comme configuré par vous.



Notifications




Les notifications sont classées par couleur :
Alarmes : rouge
Alertes : jaune
Rappels : gris
Messages : bleu

Pour chaque partenaire de soins que vous suivez, les notifications doivent être configurées individuellement.

Notifications répétées :

- Certaines notifications peuvent être configurées pour être répétées lorsque reçues au moment que vous spécifiez si elles ont ce symbole. 
- La tonalité de notification peut être personnalisée et se fera entendre pendant 30 secondes et se répètera toutes les 60 secondes jusqu'à ce que l'application soit visualisée.

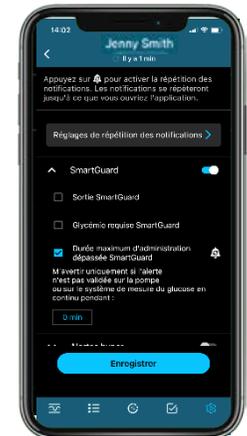

Information importante :

- Les notifications doivent être configurées dans le menu **Réglages** avant de pouvoir les recevoir.
- Si votre téléphone est sur **Ne pas déranger**, **Sourdine** ou **Vibration**, il se peut que vous manquiez des notifications.
- Prévoyez au moins 20 secondes pour actualiser les données lorsque vous ramenez l'application à l'avant-plan
- Si vous avez des questions, appuyez sur l'icône **Menu** et allez à Aide.