

Technologie éprouvée. Plus d'agrafes.



Explorez tous les avantages qu'offre l'agrafeuse circulaire EEA^{MC} dotée de la technologie Tri-Staple^{MC} – et la manière dont vous pouvez les intégrer à votre salle d'opération.

Les avantages de la technologie Tri-Staple^{MC}



Moins de tension sur les tissus pendant la compression et le serrage^{†,‡,§,¶}



Une meilleure perfusion dans la ligne d'agrafage^{¶,2}



Performance constante dans un large éventail d'épaisseurs de tissus^{†,3}

Agrafeuse circulaire EEA^{MC} dotée de la technologie Tri-Staple^{MC4}

	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm	33 mm
Lumière externe (mm) :	21,59	25,60	28,58	31,50	33,55
Lumière interne (mm) :	12,42	16,46	19,43	22,40	24,46
Lèvres de l'anastomose (mm) :	1,36	1,35	1,35	1,32	1,32
Nombre d'agrafes :	27	33	39	45	48

Chaque code est offert en version :

Couleur de cartouche :	Mauve (moyen/épais)	Noire (extra-épais)
Hauteurs des agrafes ouvertes :	3,0, 3,5, 4,0 mm	4,0, 4,5, 5,0 mm

Agrafeuse circulaire EEA^{MC} dotée de la technologie DST Series^{TM¶,4}

	21 mm	25 mm	28 mm	31 mm	33 mm
Lumière externe (mm) :	21,59	25,60	28,58	31,50	33,55
Lumière interne (mm) :	12,52	16,56	19,53	22,50	24,56
Lèvres de l'anastomose (mm) :	1,84	1,88	1,88	1,88	1,88
Nombre d'agrafes :	18	22	26	30	32

Hauteurs des agrafes ouvertes : Chaque code est offert en version 3,5 mm ou 4,8 mm

Agrafeuse motorisée Ethicon Echelon Circular^{MC*4}

	21 mm	25 mm	29 mm	31 mm	33 mm
Lumière externe (mm) :	23,73	25,61	29,70	31,60	–
Lumière interne (mm) :	14,00	16,00	20,00	22,00	–
Lèvres de l'anastomose (mm) :	2,38	2,27	2,21	2,18	–
Nombre d'agrafes :	20	22	26	30	–

Hauteurs des agrafes ouvertes : Chaque code est offert en version 5,2 mm

[†] Les résultats des essais en laboratoire ne sont pas forcément représentatifs des performances cliniques.

[‡] Une analyse par la méthode des éléments finis (MEF) a été utilisée pour déterminer les profils de pression de trois agrafeuses circulaires lors du pliage des agrafes. L'agrafeuse circulaire EEA^{MC} dotée de la technologie Tri-Staple^{MC} a fait la preuve de son profil progressif de compression lors du pliage des agrafes.

[§] Comparativement aux agrafeuses circulaires CDH d'Ethicon^{MC} et aux agrafeuses circulaires EEA^{MC} dotées de la technologie DST Series^{MC}.

[¶] Comparativement à l'agrafeuse motorisée Ethicon Circular^{MC}. D'après l'analyse de la vascularisation de la ligne d'agrafes par MicroCT dans un modèle canin in vivo (CDH31P : n = 13; TRIEEA31XT : n = 15. P = 0,007). Les résultats précliniques ne reflètent pas nécessairement les résultats cliniques chez l'humain.

⁴ TRIEEA31XT : n = 15. P = 0,007). Les résultats précliniques ne reflètent pas nécessairement les résultats cliniques chez l'humain.

[¶] Homologuée sous le nom d'EEA Autosuture Single Use Circular Stapler with DST Series.

Recommandations sur la hauteur des agrafes

Si vous utilisez habituellement une agrafeuse circulaire verte de 4,8 mm pour tissus épais pour les anastomoses, vous devriez envisager de passer à l'agrafeuse circulaire EEA^{MC} noire pour tissus extra-épais dotée de la technologie Tri-Staple^{MC}. L'agrafeuse noire permet d'obtenir des agrafes d'une hauteur approximative de 4,0 mm, 4,5 mm et 5,0 mm.



Si vous utilisez habituellement une agrafeuse circulaire verte de 4,8 mm pour tissus épais d'épaisseur pour les anastomoses, mais que les tissus du patient semblent plus minces que la plage indiquée, vous devriez envisager de passer à l'agrafeuse circulaire EEA^{MC} mauve pour tissus moyens/épais dotée de la technologie Tri-Staple^{MC}. L'agrafeuse mauve permet d'obtenir des agrafes d'une hauteur approximative de 3,0 mm, 3,5 mm et 4,0 mm.



Faites votre choix – ou optez pour le changement.

Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer quelle agrafeuse circulaire EEA^{MC} dotée de la technologie Tri-Staple^{MC} répond le mieux à vos besoins. Grâce à des codes de commande comparatifs pour chaque format et chaque épaisseur de tissus, nous pouvons vous aider à conserver les formats que vous préférez lorsque vous remplacez votre agrafeuse actuelle, tout en bénéficiant de tous les avantages de la technologie Tri-Staple^{MC}.

Dimensions des lumières des agrafeuses circulaires EEA ^{MC} et épaisseurs de tissus	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} dotée de la technologie Tri-Staple ^{MC} (codes de commande)	Agrafeuse circulaire EEA ^{MC} dotée de la technologie DST Series ^{MC} (codes de commande comparatifs)*	Agrafeuse motorisée Echelon Circular ^{MC} d'Ethicon (codes de commande comparatifs)
21 mm, mauve, tissus moyens/épais	TRIEEA21MT	EEA2135	CDH23P
21 mm, noir, tissus extra-épais	TRIEEA21XT	EEA21	CDH23P
21 mm, mauve, tissus moyens/épais, longueur XL	TRIEEAXL21MT	EEAXL2135	CDH23P
21 mm, noire, tissus extra-épais, longueur XL	TRIEEAXL21XT	EEAXL21	CDH23P
25 mm, mauve, tissus moyens/épais	TRIEEA25MT	EEA2535	CDH25P
25 mm, noire, tissus extra-épais	TRIEEA25XT	EEA25	CDH25P
25 mm, mauve, tissus moyens/épais, longueur XL	TRIEEAXL25MT	EEAXL2535	CDH25P
25 mm, noire, tissus extra-épais, longueur XL	TRIEEAXL25XT	EEAXL25	CDH25P
28 mm, mauve, tissus moyens/épais	TRIEEA28MT	EEA2835	CDH29P
28 mm, noire, tissus extra-épais	TRIEEA28XT	EEA28	CDH29P
28 mm, mauve, tissus moyens/épais, longueur XL	TRIEEAXL28MT	EEAXL2835	CDH29P
28 mm, noire, tissus extra-épais, longueur XL	TRIEEAXL28XT	EEAXL28	CDH29P
31 mm, mauve, tissus moyens/épais	TRIEEA31MT	Non disponible	CDH31P
31 mm, noire, tissus extra-épais	TRIEEA31XT	EEA31	CDH31P
31 mm, mauve, tissus moyens/épais, longueur XL	TRIEEAXL31MT	Non disponible	CDH31P
31 mm, noire, tissus extra-épais, longueur XL	TRIEEAXL31XT	EEAXL31	CDH31P
33 mm, mauve, tissus moyens/épais	TRIEEA33MT	Non disponible	Non disponible
33 mm, noire, tissus extra-épais	TRIEEA33XT	EEA33	Non disponible
33 mm, mauve, tissus moyens/épais, longueur XL	TRIEEAXL33MT	Non disponible	Non disponible
33 mm, noire, tissus extra-épais, longueur XL	TRIEEAXL33XT	EEAXL33	Non disponible
21 mm, mauve, tissus moyens/épais, longueur XL, et enclume pour agrafeuse circulaire transorale OrVil ^{MC}	TRIEEAXL21MTORVIL	EEAORVIL21A‡	Non disponible
21 mm, noire, tissus extra-épais, longueur XL, et enclume pour agrafeuse circulaire transorale OrVil ^{MC}	TRIEEAXL21XTORVIL	EEAORVIL21A‡	Non disponible
25 mm, mauve, tissus moyens/épais, longueur XL, et enclume pour agrafeuse circulaire transorale OrVil ^{MC}	TRIEEAXL25MTORVIL	EEAORVIL25A‡	Non disponible
25 mm, noire, tissus extra-épais, longueur XL, et enclume pour agrafeuse circulaire transorale OrVil ^{MC}	TRIEEAXL25XTORVIL	EEAORVIL25A‡	Non disponible

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec votre représentant de vente de Medtronic. Consultez notre site au [medtronic.ca](https://www.medtronic.ca).

† Homologué sous le nom d'EEA Autosuture Single Use Circular Stapler with DST Series. ‡ Homologué sous le nom d'EEA Orvil Auto Suture Transoral Circular Stapler Anvil. 1. Basé sur le rapport interne RE00200393 rev.2, « Comparison of circular staplers: tissue compression profiles as determined by 2-D static axisymmetric finite element analysis (FEA) ». 17 juin 2021. 2. Basé sur le rapport interne RE00330708 rev 1, « Perfusion analysis for circular staplers, comparing EEA™ circular stapler with Tri-Staple™ technology ». 13 mai 2021.3. Basé sur le rapport interne RE00069039 rev 5.1, « EEA™ circular stapler with Tri-Staple™ technology design verification report ». 29 septembre 2020. 4. Basé sur le rapport interne RE00348799 rev 1, « Echelon Circular™ Powered stapler benchmark measurements ». 6 mai 2022.

©2026 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et « Concevoir l'extraordinaire » sont des marques de commerce de Medtronic. ^{MC}*Les marques de tiers sont des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs. Toutes les autres marques sont des marques de commerce d'une société de Medtronic. US-ST-2200046FC CA-OR-0165-F Rév. 01/2026

Medtronic