

Medtronic

Obtenga tranquilidad a largo plazo

Disfrute de su vida mientras los
médicos controlan su corazón con
el sistema LINQ II™

Sistema de
monitoreo
cardíaco
insertable
LINQ II™

Medtronic LINQ II™





¿Por qué el monitoreo cardíaco a largo plazo puede ser adecuado para usted?

Si tiene síntomas que podrían deberse a la presencia de latidos cardíacos anómalos, es posible que su médico le recomiende un monitor cardíaco.

Sin embargo, estos latidos anómalos pueden ser difíciles de diagnosticar. Podrían no producirse de forma regular e incluso podría no percibirlos.

Ahora, hay una manera de hacerlo. Un monitor implantable puede controlar el corazón a fin de detectar irregularidades en los latidos cardíacos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de que modifique sus actividades diarias.

Esto le permitirá a su médico entender si el corazón es el causante de los síntomas, y poder avanzar hacia el tratamiento.

Afecciones que podrían beneficiarse del monitoreo cardíaco a largo plazo

Desvanecimiento sin explicación

Cuando tiene episodios de desvanecimiento reiteradas veces y no sabe por qué ocurren. También se conoce como "desmayo" o "síncope".

- **¿Por qué se debería monitorear?** El desvanecimiento puede deberse a causas graves, como anomalías en los latidos cardíacos.

Accidente cerebrovascular

El riesgo de padecer otro accidente cerebrovascular aumenta si tiene una afección caracterizada por latidos cardíacos anómalos, denominada fibrilación auricular.

- **¿Por qué se debería monitorear?** Los sobrevivientes de accidentes cerebrovasculares pueden padecer fibrilación auricular sin saberlo. Gracias al monitoreo cardíaco, es posible detectar esta afección, de modo que usted podría recibir tratamiento.

Fibrilación auricular

Una afección en la que el corazón late de forma muy rápida e irregular. También se denomina "FA" o "FibA".

- **¿Por qué se debería monitorear?** El monitoreo permanente del corazón sirve para comprobar si el tratamiento funciona.

Palpitaciones cardíacas

Una afección en la que siente que el corazón late con fuerza, se acelera o se agita.

- **¿Por qué se debería monitorear?** Las palpitaciones pueden ser un síntoma de los latidos cardíacos anómalos.

Conozca el monitor cardíaco insertable (MCI) LINQ II de Medtronic encargado del monitoreo cardíaco a largo plazo



Tamaño real

El MCI LINQ II es un dispositivo pequeño que se coloca justo debajo de la piel y que puede controlar el corazón durante un período máximo de 4,5 años.^{†1} No es visible en la mayoría de los pacientes.

[†]Ajustes nominales.

Confíe en el monitor cardíaco insertable más preciso del mundo²

Avanzado

Cierta información sobre el corazón solo se puede obtener gracias al monitoreo a lo largo del tiempo. El MCI LINQ II también es capaz de detectar latidos cardíacos anómalos que son difíciles de percibir con otros monitores.

Eficaz

Un único implante reemplaza el uso de docenas de monitores cardíacos a corto plazo. De esta forma, se acelera el diagnóstico y el tratamiento.[‡]

Siempre activado

Usted puede disfrutar de su vida mientras los médicos controlan su corazón.

Conveniente

Menos visitas al médico.[§] No más cables ni parches adhesivos. No más cambios en sus actividades diarias o en sus planes de viaje. El monitor cardíaco implantado lo acompaña dondequiera que vaya, lo que significa menos trabajo para usted y sus cuidadores.

Inteligente y personalizado


El MCI LINQ II le envía a su médico información automática sobre el corazón que se personaliza según su afección. Usted incluso puede marcar los síntomas para que su médico haga coincidir los latidos cardíacos con lo que siente en ese momento.

Hable con su médico para obtener más información sobre los riesgos y beneficios del monitoreo a largo plazo, y para determinar si el MCI LINQ II es adecuado para usted.

[‡]Un implante dura hasta 4,5 años; el monitoreo durante este período significaría el uso de 54 monitores de 30 días.

[§]En comparación con los monitores a corto plazo.

Un procedimiento seguro y rápido

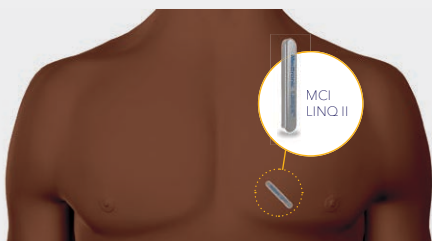

La inserción de un monitor cardíaco de Medtronic suele tardar menos de cinco minutos. No requiere anestesia general. El monitor se coloca justo debajo de la piel durante un procedimiento ambulatorio.

Luego, puede seguir con su día.

Conexión remota y personalizada con su médico

Tras el implante, regresará a su casa con una aplicación para teléfonos inteligentes o un transmisor de paciente, a fin de enviar la información relacionada con el corazón del MCI LINQ II a su médico.^Q



Aplicación para dispositivos móviles MyCareLink Heart™

○
BIEN




Comunicador de paciente MyCareLink Relay™ (unidad externa)

El MCI LINQ II controla y registra los latidos cardíacos anómalos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo que pueda seguir disfrutando de su vida.

Solo debe mantener la aplicación abierta en su teléfono o mantener la unidad externa conectada. Su médico accederá a la información relacionada con el corazón de forma remota desde su consultorio y se comunicará con usted si fuera necesario.

^QConsulte el manual del paciente para obtener más información sobre cómo configurar la aplicación para teléfonos móviles o el transmisor de paciente.

Cómo funciona

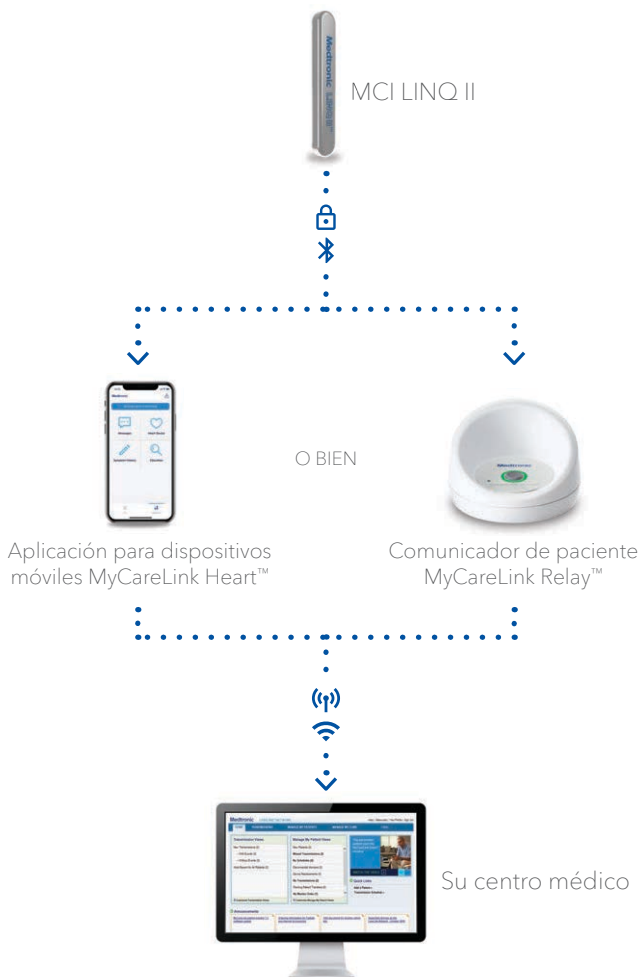

Escanee para comprobar si su teléfono es compatible con la aplicación para teléfonos móviles MyCareLink Heart o visite MCLHeart.com para comenzar.

Si tiene un dispositivo Apple®, abra la aplicación de cámara y apunte a la imagen.

Si tiene un dispositivo Android™, use la aplicación de lector de código QR o visite MCLHeart.com/download.

Seguridad

Descanse tranquilo al saber que su dispositivo...



Tiene evidencia clínica y un alto nivel de confiabilidad

Los monitores cardíacos de Medtronic son los dispositivos implantados más pequeños³ y con más estudios clínicos⁴ del mundo. Más de 1,5 millones de personas se han implantado y controlado con un monitor cardíaco implantable de Medtronic.⁵



Mantiene sus datos seguros

El monitor usa tecnología Bluetooth® de baja energía para enviar la información relacionada con el corazón a la aplicación de su teléfono. La seguridad de sus datos es una de las prioridades principales para Medtronic. La conectividad de este dispositivo se diseñó para proteger sus datos.



Puede usarse de forma segura en los entornos de RM^{††}

Presente la tarjeta de identificación del dispositivo al técnico de diagnóstico por imágenes para que pueda acceder a más información.



Es seguro para los sistemas de seguridad de los aeropuertos

Los procedimientos de seguridad o de escaneo no afectarán su monitor cardíaco.

^{††}Consulte el manual del paciente para obtener más información.

Costo y cobertura

Los monitores cardíacos insertables de Medtronic están ampliamente cubiertos por Medicare y las compañías de seguro privado. Hable con su compañía de seguro para conocer los costos que debería pagar por el implante o el monitoreo.



¿Tiene alguna pregunta?

Visite [MonitorYourHeart.com](https://www.monitoryourheart.com) si desea consultar las preguntas frecuentes y obtener más información.

Hable con su médico

El monitoreo cardíaco a largo plazo debe ser indicado por su médico; no todas las personas pueden realizarse este tratamiento. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del monitoreo a largo plazo, los resultados pueden variar.

Para obtener más información, llame al número gratuito de Medtronic

1-800-551-5544

(de 7:00 a 19:00 horas, hora del centro, de lunes a viernes) o visite la página de Internet de Medtronic en [Medtronic.com/HeartMonitorISI](https://www.Medtronic.com/HeartMonitorISI).



Referencias

- ¹ Manual para el médico del MCI LINQ II LNQ22. M974764A001D.
- ² MCI - Guía de comparación de precisión publicada. 2021.
- ³ Guía de comparación de tamaños de MCI. Datos de archivo de Medtronic. 2021.
- ⁴ Publicaciones sobre Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo de Medtronic. 2022.
- ⁵ Datos de la familia de MCI Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo. 2021.

Declaración resumida

Información importante de seguridad sobre el sistema del monitor cardíaco insertable (MCI) LINQ II™ de Medtronic y el monitoreo remoto

El monitor cardíaco insertable LINQ II es un sistema de monitoreo implantable, activado tanto por el paciente como de manera automática, que registra el electrocardiograma (ECG) subcutáneo y se indica en los siguientes casos:

- Pacientes con síndromes clínicos o situaciones de alto riesgo de arritmias cardíacas.
- Pacientes que experimentan síntomas temporales, como mareos, palpitaciones, síncope y dolores de pecho, que pueden sugerir la existencia de una arritmia cardíaca.

El dispositivo no ha sido probado específicamente para uso pediátrico.

Los posibles riesgos relacionados con la implantación del monitor cardíaco insertable LINQ II incluyen, entre otros, infección en la zona quirúrgica, desplazamiento del dispositivo, erosión del dispositivo a través de la piel o sensibilidad al material del dispositivo. Los accesorios disponibles para su uso con el MCI LINQ II podrían experimentar problemas de conexión o de funcionamiento. Consulte los manuales del producto para obtener más detalles y las instrucciones para la resolución de problemas.

Su médico es quien indica el uso del monitor cardíaco insertable LINQ II y no todas las personas pueden usarlo. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician con el uso de este producto, los resultados podrían variar. Para obtener más información, llame al número gratuito de Medtronic 1-800-551-5544 (de 7:00 a 19:00 horas, hora del centro, de lunes a viernes) o visite la página de Internet de Medtronic en medtronic.com.

Los logotipos y la marca denominativa Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Medtronic se realiza bajo licencia. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. La plataforma Android™ y Google Play™ Store son marcas comerciales de Google LLC. Android™ es una marca comercial de Google LLC.

©2022 Medtronic. Medtronic, el logotipo de Medtronic e Ingeniería para lo extraordinario son marcas comerciales de Medtronic. Las marcas de terceros con el símbolo ™* son marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una compañía de Medtronic.

Hable con su médico para determinar si el monitoreo a largo plazo es adecuado para usted y si está preparado para programar la inserción.

Obtenga más información en
[MonitorYourHeart.com](https://www.monitoryourheart.com).

Regístrese para saber si el MCI LINQ II es adecuado para usted.



Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Teléfono: +41 (0)21 802 70 00
Telefax: +41 (0)21 802 79 00

España

Medtronic Ibérica S.A.
Calle María de Portugal nº.11
ES-28050 Madrid
www.medtronic.es
Teléfono: +34 91 625 04 00
Telefax: +34 91 650 74 10