

# Medtronic

## ¿Cómo puedo manejar la fibrilación auricular?

Tome decisiones informadas  
con el monitoreo cardíaco  
a largo plazo

Familia de MCI  
LINQ™  
MCI Reveal LINQ™  
y LINQ II™



Saber si la fibrilación auricular (FA) está bajo control puede ser una tarea difícil y frustrante.

Un monitor cardíaco insertable (MCI) pequeño puede ser útil.

Si tiene FA, el monitoreo cardíaco a largo plazo puede ayudar a su médico a comprender con cuánta frecuencia y durante cuánto tiempo se produce. A veces, los episodios de FA son poco frecuentes y no presentan síntomas,<sup>1</sup> lo que dificulta aún más el manejo de la afección subyacente. Es posible que su médico también desee examinar cómo funcionan los diferentes tratamientos para mantener la FA bajo control.

Muchas personas que viven con FA han alcanzado la tranquilidad que necesitaban con el monitoreo cardíaco a largo plazo. Este tipo de monitoreo le permite a su médico saber si tiene un nuevo episodio de FA, qué tan bien funcionan sus tratamientos y si es necesario probar un nuevo método.



// Desde que me implantaron el [MCI] LINQ, los médicos han detectado cuando mi corazón no presenta un ritmo cardíaco normal... es un elemento de seguridad”.

— Josh, paciente al que le implantaron el MCI Reveal LINQ

Los resultados pueden variar.

Conozca el monitor cardíaco insertable (MCI) Reveal LINQ y el MCI LINQ II de Medtronic encargados del monitoreo cardíaco a largo plazo



Tamaños reales


Los monitores cardíacos insertables de Medtronic son dispositivos pequeños que envían información personalizada sobre el corazón a su médico. Existen dos monitores cardíacos de Medtronic disponibles. Su médico le recomendará la opción adecuada para usted.

## Confíe en el monitor cardíaco insertable más pequeño y preciso del mundo<sup>2</sup>

- **Está diseñado para brindar tranquilidad a largo plazo**  
No más cables ni parches adhesivos. El monitor cardíaco insertable de Medtronic, que se coloca justo debajo de la piel, no es visible en la mayoría de los pacientes y puede controlar la actividad cardíaca durante un máximo de 3 a 4,5 años.<sup>†</sup>
- **Envía alertas remotas y personalizadas a su médico**  
El monitor cardíaco de Medtronic está siempre activado, de modo que usted puede disfrutar de su vida mientras los médicos controlan su corazón.
- **Siga disfrutando de su vida**  
Viaje, dúchese y duerma de la forma habitual. No es necesario que cambie sus actividades cotidianas.
- **Evalúe su progreso**  
Marque los síntomas para que su médico sepa qué episodios siente y cuáles no.
- **Tiene evidencia clínica y un alto nivel de confiabilidad**  
Más de 1,5 millones de personas se han implantado y controlado con un monitor cardíaco insertable de Medtronic.<sup>3</sup>



## Un procedimiento seguro y rápido

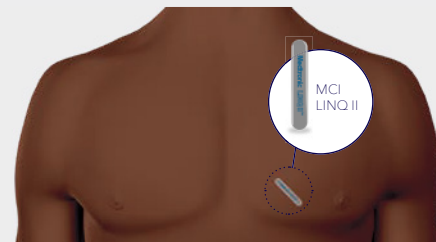

La inserción de un monitor cardíaco de Medtronic suele tardar menos de cinco minutos. No requiere anestesia general. El monitor se coloca justo debajo de la piel durante un procedimiento ambulatorio. Luego, puede seguir con su día.

Para el MCI Reveal LINQ



Monitor del paciente MyCareLink™ (unidad externa)

Para el MCI LINQ II



Aplicación para dispositivos móviles MyCareLink Heart™



Comunicador de paciente MyCareLink Relay™ (unidad externa)

Regresará a su casa con un transmisor de paciente, que se utiliza para enviar la información del monitor cardíaco de Medtronic a su médico. Su médico le recomendará un transmisor según su monitor cardíaco de Medtronic.

El personal del consultorio de su médico recibirá alertas personalizadas que incluirán el registro de cualquier latido cardíaco anómalo.

## Los monitores cardíacos insertables de Medtronic pueden brindarle a su médico información detallada sobre la FA

Una vez que le hayan diagnosticado FA, es posible que le resulte difícil a su médico obtener la información que necesita para comprender si está bajo control.

Gracias a los monitores cardíacos insertables de Medtronic, su médico puede recibir información valiosa, que le permitirá tomar decisiones sobre los medicamentos y tratamientos, como el uso de anticoagulantes o la ablación.<sup>1,4-7</sup>

### Los MCI de Medtronic pueden monitorear lo siguiente:

#

La cantidad de latidos cardíacos anómalos que tiene.

↔

La duración de los latidos cardíacos anómalos.

%

El tiempo en el que presenta FA en comparación con el tiempo en el que presenta un ritmo cardíaco normal, lo que se conoce como "carga de FA".

🚴

Su nivel de actividad.

👤

La variación entre los latidos cardíacos, también conocida como variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que puede mostrar qué tan bien el corazón responde a las necesidades de su cuerpo.

📄

Sus síntomas, siempre y cuando usted sienta las variaciones en los latidos cardíacos.



## Carga de FA

La carga de FA es la cantidad de tiempo en la que presenta episodios de FA durante un período.

- Cantidad de episodios (aquellos que siente y aquellos que no siente).
- Duración de los episodios de FA.

Usted y su médico pueden tomar decisiones respecto del tratamiento en función de los datos proporcionados por el monitor cardíaco de Medtronic. Puede seguir pendiente para ver si el tratamiento (cambio en los medicamentos, ablación u otro) está funcionando.

Su médico puede ofrecerle diferentes opciones de tratamiento en función de los datos proporcionados por el monitor cardíaco de Medtronic. Una vez que se haya determinado el tratamiento, su médico puede usar la información del monitor cardíaco para ver si el tratamiento (medicamentos, ablación u otro) está funcionando.



## Preguntas que quizás desee hacerle a su médico

- ¿Está empeorando mi FA?
- ¿Ha regresado mi FA después del tratamiento?
- ¿Qué monitor me recomienda para controlar mi carga de FA?
- ¿Qué cambios en la FA deberíamos observar para determinar si necesitamos ajustar el tratamiento?
- ¿Podría un monitor cardíaco insertable ayudarnos a comprender el estado de la FA?



## Costo y cobertura

Los monitores cardíacos insertables de Medtronic están ampliamente cubiertos por Medicare y las compañías de seguro privado. Hable con su compañía de seguro para conocer los costos que debería pagar por el implante o el monitoreo.

## Preguntas frecuentes

**¿Puedo pasar por un detector de metales o dispositivo de seguridad de los aeropuertos?**

Sí, puede pasar sin problema.

**¿Puedo realizarme una resonancia magnética (RM)?**

Sí, puede. Proporcione al técnico de diagnóstico por imágenes la información sobre su monitor cardíaco de Medtronic para que pueda confirmar los valores adecuados.

**¿Cuánto tiempo debo esperar después de la implantación del monitor cardíaco para retomar mis actividades cotidianas?**

Esto depende de las recomendaciones de su médico, pero no es necesario que limite sus actividades a causa del monitor cardíaco de Medtronic en sí.

*Si tiene otras preguntas sobre cómo es vivir con un monitor cardíaco insertable de Medtronic, regístrese para obtener más información en [MonitorYourHeart.com](https://www.monitoryourheart.com).*

## Hable con su médico

El monitoreo cardíaco a largo plazo debe ser indicado por su médico; no todas las personas pueden realizarse este tratamiento. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del monitoreo a largo plazo, los resultados pueden variar.

Para obtener más información, llame al número gratuito de Medtronic 1-800-551-5544 (de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas, hora del centro) o visite la página de Internet de Medtronic en [Medtronic.com/HeartMonitorISI](http://Medtronic.com/HeartMonitorISI).



<sup>1</sup>Consulte el manual del médico del MCI Reveal LINQ y del MCI LINQ II para ver los parámetros de uso.

### Referencias

- <sup>1</sup>Witkowski M, Bissinger A, Grycewicz T, Lubinski A. Asymptomatic atrial fibrillation in patients with atrial fibrillation and implanted pacemaker. *Int J Cardiol.* January 15, 2017;227:583-588.
- <sup>2</sup>MCI - Guía de comparación de precisión publicada. 2021.
- <sup>3</sup>Datos de la familia de MCI Reveal™ de Medtronic. Datos de archivo. 2022.
- <sup>4</sup>Passman R, Leong-Sit P, Andrei AC, et al. Targeted Anticoagulation for Atrial Fibrillation Guided by Continuous Rhythm Assessment With an Insertable Cardiac Monitor: The Rhythm Evaluation for Anticoagulation With Continuous Monitoring (REACT.COM) Pilot Study. *J Cardiovasc Electrophysiol.* March 2016;27(3):264-270.
- <sup>5</sup>Zuern CS, Kilias A, Berlitz P, et al. Anticoagulation after Catheter Ablation of Atrial Fibrillation Guided by Implantable Cardiac Monitors. *Pacing Clin Electrophysiol.* June 2015;38(6):688-693.
- <sup>6</sup>Mascarenhas DAN, Farooq MU, Ziegler PD, Kantharia BK. Role of insertable cardiac monitors in anticoagulation therapy in patients with atrial fibrillation at high risk of bleeding. *Europace.* June 2016;(18)6:799-806.
- <sup>7</sup>Pothineni NVK, Amankwah N, Santangeli P, et al. Continuous rhythm monitoring-guided anticoagulation after atrial fibrillation ablation. *J Cardiovasc Electrophysiol.* February 2021;32(2):345-353.

### Información adicional sobre el dispositivo

#### Información importante de seguridad sobre el sistema de la familia de monitores cardíacos insertables (MCI) LINQ de Medtronic y el monitoreo remoto

La familia de monitores cardíacos insertables (MCI) LINQ, que incluye el MCI Reveal LINQ y el MCI LINQ II, es un sistema de monitoreo implantable, activado tanto por el paciente como de manera automática, que registra un electrocardiograma (ECG) subcutáneo y se indica en los siguientes casos:

- Pacientes con síndromes clínicos o situaciones de alto riesgo de arritmias cardíacas.
- Pacientes que experimentan síntomas temporales, como mareos, palpitaciones, síncope y dolores de pecho, que pueden sugerir la existencia de una arritmia cardíaca.

Estos dispositivos no se han probado específicamente para uso pediátrico.

Los posibles riesgos relacionados con la implantación de la familia de MCI LINQ incluyen, entre otros, infección de la herida quirúrgica, desplazamiento del dispositivo, erosión del dispositivo a través de la piel o sensibilidad al material del dispositivo. Los accesorios disponibles para su uso con la familia de MCI LINQ podrían experimentar problemas de conexión o de funcionamiento. Consulte los manuales del producto para obtener más detalles y las instrucciones para la resolución de problemas.

El monitoreo cardíaco de la familia de MCI LINQ debe ser indicado por su médico; no todas las personas pueden realizarse este tratamiento. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del uso de este producto, los resultados pueden variar. Para obtener más información, llame al número gratuito de Medtronic

1-800-551-5544 (de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 horas, hora del centro) o visite la página de Internet de Medtronic en [www.medtronic.com](http://www.medtronic.com).

### Asistente del paciente

El Asistente del paciente está diseñado para que el paciente lo utilice de forma no supervisada y fuera del ámbito hospitalario. El asistente del paciente activa la función de administración de datos del monitor cardíaco insertable Reveal para que empiece a grabar los datos del evento cardíaco en la memoria del dispositivo implantado.

El uso del Asistente del paciente cerca de fuentes de interferencia electromagnética, tales como teléfonos celulares, monitores de computadora, etc., puede afectar adversamente el desempeño del dispositivo.

### Monitor del paciente MyCareLink™ de Medtronic

El monitor del paciente MyCareLink de Medtronic es un producto recetado indicado para transferir los datos del paciente desde algunos dispositivos cardíacos implantables de Medtronic, según las instrucciones del médico y las descripciones del manual del producto. Las transmisiones del monitor del paciente MyCareLink a la red CareLink™ están sujetas a la disponibilidad del servicio de telefonía móvil. El monitor del paciente MyCareLink debe estar encendido y dentro de la distancia especificada del dispositivo para recibir por vía inalámbrica los datos de su dispositivo implantado. Este producto no sustituye a la asistencia médica apropiada en casos de emergencia y solo debe utilizarse siguiendo las indicaciones de un médico.

El servicio CareLink de Medtronic debe ser indicado por su médico. Este servicio no es apto para todos los pacientes. Consulte a su médico para determinar si es adecuado para usted. El médico deberá conversar con usted sobre todos los posibles beneficios y riesgos. Si bien muchos pacientes se benefician del uso de este servicio, los resultados pueden variar. Para obtener más información, llame a Servicios de Atención al Paciente de CareLink al 1-800-929-4043 (de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas, hora del centro) o visite la página de Internet de Medtronic en [medtronic.com](http://medtronic.com).

## Obtenga más información en [MonitorYourHeart.com](https://www.monitoryourheart.com)

Regístrese para obtener más información  
sobre cómo es vivir con FA y sobre sus  
opciones de monitoreo cardíaco.



Medtronic  
710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, MN 55432-5604  
EE. UU.

Llamadas gratuitas en los EE. UU.:  
800.633.8766  
Internacional: +1.763.514.4000

[medtronic.com](https://www.medtronic.com)

UC201911496a SL  
©2022 Medtronic.  
Minneapolis, MN.  
Todos los derechos  
reservados.  
Impreso en los EE. UU.  
3/2022