



Balón de dilatación para la trompa de Eustaquio NuVent™

Una nueva y sencilla forma de tratar la disfunción de la trompa de Eustaquio.

Una forma **nueva**, simple, fácil de tratar la disfunción de la trompa de Eustaquio.¹

El balón de dilatación para la trompa de Eustaquio NuVent™ es un sistema de catéter con balón de control manual. Cuando el balón se inserta en el canal de la trompa de Eustaquio y se presuriza, comienza a expandirse. Este proceso permite dilatar el canal, facilitando la restauración de su función.²



Balón de dilatación para la trompa de Eustaquio NuVent™

Descripción general del producto

- A Punta atraumática:** diseñada para no producir traumatismos durante la inserción ni traspasar el istmo óseo.
- B Sección del balón flexible:** su adaptación facilita la inserción en la trompa de Eustaquio.
- C Mango:** con múltiples opciones de agarre para una mayor comodidad.
- D Dispositivo inflador:** para conectar el tubo de extensión.
- E Válvula de la llave de paso:** permite mantener la presión del balón sin aplicar fuerza manual. Se conecta entre el inflador y el tubo de extensión.



Balón para la trompa de Eustaquio



Tubo de extensión


Válvula de la llave de paso

Inflador


Aproximadamente el
4,6 %
de los adultos
estadounidenses padecen
disfunción de la trompa de
Eustaquio.³

Cómo funciona

- 1 Inserte el balón en la fosa nasal con la punta hacia abajo y oriéntelo hacia la abertura de la trompa de Eustaquio.

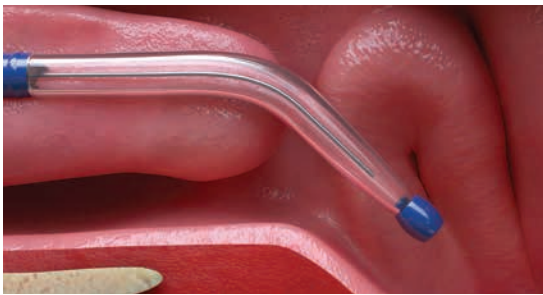

- 2 Haga avanzar el catéter del balón por la trompa de Eustaquio e infle el balón durante dos minutos.

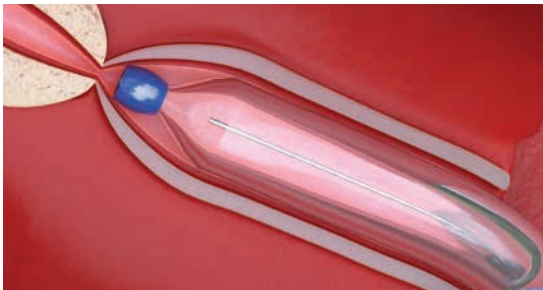

- 3 Desinfe completamente el catéter del balón y retírelo de la trompa de Eustaquio.



Ventajas

- Está diseñado específicamente para el tratamiento de la disfunción obstructiva crónica de la trompa de Eustaquio.⁴
- Cuando se realiza en un consultorio, es un tratamiento mínimamente invasivo.⁵
- Se ha demostrado que la dilatación con balón de la trompa de Eustaquio es eficaz en el tratamiento de esta disfunción.^{5,6}
- Puede adaptarse a la anatomía del paciente.
- La válvula de la llave de paso elimina la necesidad de ejercer presión manual durante el inflado.

Riesgos

Los riesgos asociados con la dilatación con balón de la trompa de Eustaquio suelen desaparecer rápidamente e incluyen: sangrado leve, ligero dolor tras el procedimiento, enfisema subcutáneo, lesiones leves por presión e incapacidad para aliviar los síntomas del paciente.



Información para pedidos


Balón de dilatación para la trompa de Eustaquio NuVent™

Balón	Descripción	Cantidad
1830616EST	Balón para la trompa de Eustaquio de 6 mm × 16 mm	1

Inflador		
18INFKIT	Kit de inflador	1

Todos los balones NuVent™ utilizan el mismo kit de inflador.

Dimensiones del producto

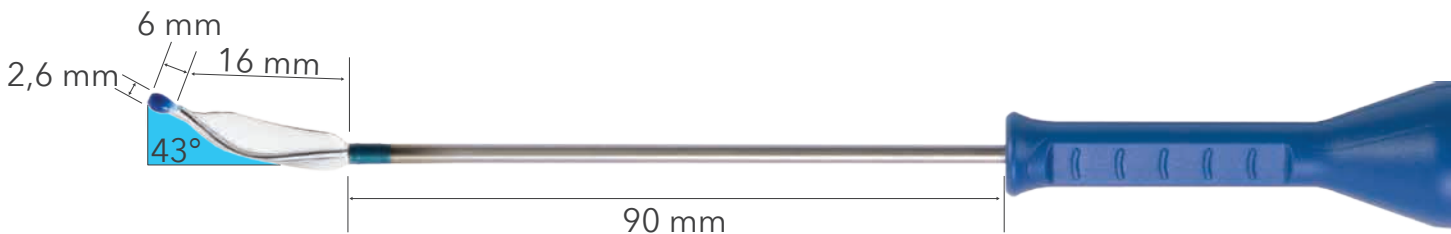

Referencias

1. Datos archivados en Medtronic.
2. Datos archivados en Medtronic.
3. Shan A; Ward BK; Goman AM; et al. Prevalence of Eustachian Tube Dysfunction in Adults in the United States. *JAMA Otolaryngology Head Neck Surg.* 2019;145(10):974-975.
4. Medtronic Data on File.
5. Meyer T; O'Malley E; Schlosser R; et al. A Randomized Controlled Trial of Balloon Dilation as a Treatment for Persistent Eustachian Tube Dysfunction With 1-Year Follow-Up. *Otology/Neurotology.* 2018; 39:894-902.
6. Poe D; Anand V; Dean M; et al. Balloon Dilation of the Eustachian Tube for Dilatory Dysfunction: A Randomized Controlled Trial. *The Laryngoscope.* 2018; 128:1200-1206.

Medtronic

ENT
6743 Southpoint Drive N
Jacksonville, FL 32216
EE. UU.
Llamada gratuita:
(800) 874-5797
Teléfono: (904) 296-9600
Fax: (800) 678-3995

Números de teléfono internacionales
Sede en Europa, Suiza 41-21-802-7000
Sede en Latinoamérica 305-500-9328
Región Adriática 385-1-488-1120
Argentina 54-11-4898-5700
Australia 1-800-668-670
Región Báltica 37-1-67560226
Bélgica 32-2456-09-09
Brasil 55-11-2182-9200
Canadá 1-800-268-5346
Chile 56-2-2655-5110
China 86-10-5869-8989
Colombia 57-1-742-7300
República Checa 420-233-059-111
Francia 33-470-679-800
Alemania 49-2159-8149-353
Grecia 30-210-67-79-099
Hong Kong 852-2919-1300
Hungría 36-188-90600

India 91-22-33074700
Israel 972-9-972-4400
Italia 39-02-24137-324
Japón 81-3-6774-4611
Corea 82-2-3404-3600
Líbano 961-1-370-670
Luxemburgo 32-2456-09-09
Malasia 60-37-953-4800
México 52-55-11-02-90-30
Países Bajos 31-45-566-8800
Polonia 48-22-4656900
Federación Rusa 7-495-580-73-77
Singapur 65-6436-5000
Sudáfrica 27-11-260-9300
España 34-91-625-05-40
Taiwán 886-2-2183-6000
Tailandia 662-232-7400
Reino Unido 44-1923-205-166

Solo con receta médica. Consulte el manual de instrucciones o el prospecto del producto a fin de conocer las instrucciones, advertencias, precauciones y contraindicaciones.

Para obtener más información, llame a Medtronic ENT al 800-874-5797 o consulte el sitio web de Medtronic en **medtronicent.com**.