


Medtronic

Έναρξη χρήσης της εφαρμογής MyCareLink Heart™ για κινητές συσκευές

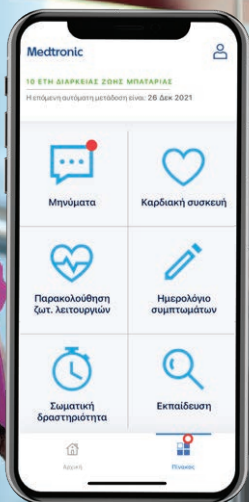

Μια εξατομικευμένη
λύση απομακρυσμένης
παρακολούθησης που
σας βοηθά να παραμένετε
συνδεδεμένοι, αυξάνοντας
παράλληλα την
ηρεμία σας



Γιατί να επιλέξω την απομακρυσμένη παρακολούθηση βάσει εφαρμογής;

Στις μέρες μας, εκατομμύρια άνθρωποι που φέρουν εμφυτευμένες καρδιακές συσκευές παρακολουθούνται απομακρυσμένα. Η απομακρυσμένη παρακολούθηση:

- Σας προσφέρει ηρεμία και βελτιώνει την ποιότητα ζωής
- Μειώνει τις επισκέψεις στο νοσοκομείο και σας εξοικονομεί χρόνο
- Σας βοηθά να αισθάνεστε σίγουροι, καθώς παραμένετε συνδεδεμένοι με την ομάδα φροντίδας σας




Η εφαρμογή μοιράζεται επιλεγμένες πληροφορίες μαζί σας, όπως η σωματική δραστηριότητα ή η διάρκεια ζωής της συσκευής.

Ευελιξία

και
συνδεσιμότητα



Με πληροφορίες συνδεσιμότητας, επιβεβαίωση μετάδοσης και υπενθυμίσεις, η εφαρμογή MyCareLink Heart σάς βοηθά να διασφαλίσετε ότι είστε συνδεδεμένοι με την ομάδα φροντίδας σας.

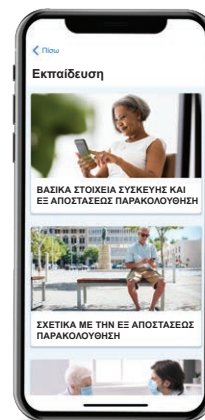

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη ζωή με τη συσκευή σας, καθώς και πηγές για πρόσθετη εκπαίδευση.

Πώς λειτουργεί;



Βήμα 1. Προγραμματισμός

Η κλινική σας προγραμματίζει ημερομηνίες για τη λήψη πληροφοριών από τη συσκευή σας.



Βήμα 2. Αποστολή

Οι πληροφορίες της συσκευής αποστέλλονται αυτόματα στην κλινική με βάση τον προκαθορισμένο προγραμματισμό. Ανάλογα με τη ρύθμιση, η συσκευή σας μπορεί επίσης να στείλει ειδοποιήσεις στην κλινική σας όταν ανιχνεύσει ακανόνιστο ρυθμό ή μη φυσιολογική κατάσταση.



Βήμα 3. Έλεγχος

Η κλινική σας ελέγχει τα δεδομένα σε έναν ασφαλή ιστότοπο.

Μεταβείτε στην τοποθεσία medtronic.com/security για ενημερωμένες πληροφορίες ασφαλείας.



// Τώρα νιώθω πιο άνετα, γνωρίζοντας ότι η συσκευή μου ελέγχεται και μπορώ να δω πότε στάλθηκε η μετάδοση!




// Είναι εύκολη στην κατανόηση. Η εφαρμογή σάς δείχνει τον τρόπο, βήμα προς βήμα.

Στις εικόνες δεν απεικονίζονται πραγματικοί ασθενείς. Οι δηλώσεις αντικατοπτρίζουν μεμονωμένες εμπειρίες. Τα αποτελέσματα μπορεί να ποικίλουν.

// Είναι μια εφαρμογή κινητών, επομένως, όπου κι αν πάω στον κόσμο, έρχεται μαζί μου. Νιώθω ασφαλής και ελεύθερος. Είναι υπέροχο!




Επισκόπηση εφαρμογής

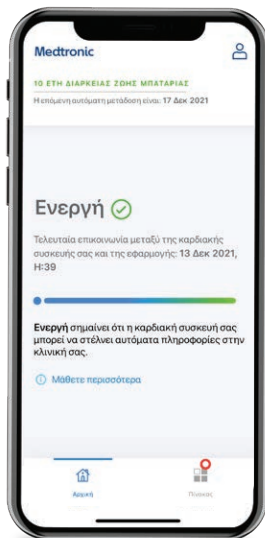

Αρχική σελίδα

Κατάσταση συνδεσιμότητας

Η αρχική σελίδα εμφανίζει την κατάσταση συνδεσιμότητας μεταξύ της εφαρμογής, της καρδιακής συσκευής και της κλινικής σας.

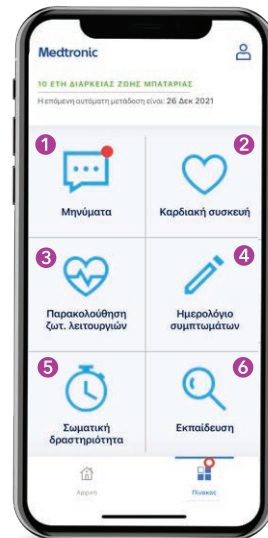

Σελίδα πίνακα διαχείρισης

1 Μηνύματα

Δείτε σημαντικά μηνύματα σχετικά με την κατάσταση μετάδοσης και τη χρήση της εφαρμογής σας. Μπορείτε επίσης να στείλετε μια μετάδοση, εάν σας ζητηθεί από την κλινική σας.

2 Καρδιακή συσκευή

Εντοπίστε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την καρδιακή συσκευή σας, όπως τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, την ημερομηνία εμφύτευσης, το όνομα και τον αριθμό σειράς – καθώς και το τηλέφωνο επικοινωνίας της κλινικής σας.

3 Παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών

Καταγράψτε το βάρος και την αρτηριακή σας πίεση, για να τα μοιραστείτε με τον ιατρό σας σε μια επίσκεψη στο ιατρείο.

4 Ημερολόγιο συμπτωμάτων

Καταγράψτε τα συμπτώματά σας, για να τα μοιραστείτε με τον ιατρό σας σε μια επίσκεψη στο ιατρείο.[†]

5 Σωματική δραστηριότητα

Ελέγξτε/δείτε τα επίπεδα δραστηριότητάς σας με βάση δεδομένα από την καρδιακή συσκευή σας.

6 Εκπαίδευση

Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή με την καρδιακή συσκευή.

[†]Τα δεδομένα που καταχωρούνται εδώ παραμένουν στο τηλέφωνό σας. Δεν αποστέλλονται στην κλινική σας. Εάν αντιμετωπίζετε έκτακτο ιατρικό περιστατικό, καλέστε τις υπηρεσίες επείγοντων περιστατικών.

Εγκατάσταση και ρύθμιση της εφαρμογής

Αυτή η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 15 λεπτά.

Βήμα 1. Προετοιμασία

Βεβαιωθείτε ότι:

- Το **Bluetooth®** είναι **ενεργοποιημένο** στο smartphone ή το tablet σας
- Διαθέτετε **αναγνωριστικό** και **κωδικό πρόσβασης** στο Apple App Store® ή στο Google Play® store
- Διαθέτετε διεύθυνση email που χρησιμοποιείτε τακτικά
- Διαθέτετε τον **αριθμό σειράς της καρδιακής συσκευής σας**, τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην κάρτα ταυτότητας της ιατρικής συσκευής σας

Τοποθετήστε εδώ το αυτοκόλλητο με τον αριθμό σειράς της καρδιακής σας συσκευής

Βήμα 2. Λήψη και εγκατάσταση

Σαρώστε τον κωδικό QR ή μεταβείτε στη διεύθυνση MCLHeart.com/Download. Εάν δεν βλέπετε το **κουμπί Λήψη** (σε συσκευές Apple) ή το **κουμπί Εγκατάσταση** (σε συσκευές Android), η συσκευή σας δεν είναι συμβατή. Επικοινωνήστε με τον ιατρό σας για άλλες επιλογές παρακολούθησης.



Εγκατάσταση και ρύθμιση της εφαρμογής

Βήμα 3. Ρύθμιση

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή, για να συνδεθείτε με την καρδιακή συσκευή σας. Ακολουθούν μερικές **σημαντικές ενέργειες** που πρέπει να προσέχετε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας:

- Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης όπως φαίνεται στην οθόνη. Θα σας ζητηθεί να τον εισαγάγετε ξανά στο Βήμα 4.
- Η **διαδικασία σύζευξης** μπορεί να διαρκέσει έως **έξι λεπτά**. **Μην επεμβαίνετε** όταν η εφαρμογή ξεκινά την επικοινωνία με την καρδιακή συσκευή σας για πρώτη φορά. Διατηρείτε το **Bluetooth ενεργοποιημένο ανά πάσα στιγμή**.
- Κάντε κλικ στην επιλογή **Να επιτρέπεται** για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και σημαντικό υλικό επικοινωνίας από την εφαρμογή. Αυτό το βήμα μπορεί επίσης να γίνει στις ρυθμίσεις του smartphone/tablet σας.

Αίτημα από «MCL Heart» για να σας στέλνει γνωστοποιήσεις

Οι γνωστοποιήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποιήσεις, ήχους και ταμπέλες εικονιδίων. Μπορείτε να τις διαμορφώσετε στις Ρυθμίσεις.

Όχι

Ναι

Βήμα 4. Επαλήθευση διεύθυνσης email

Αυτό το τελευταίο βήμα θα ολοκληρώσει τη διαδικασία ρύθμισης. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο **Επαλήθευση διεύθυνσης email** όπως φαίνεται, συμπληρώστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης από το Βήμα 3 και, στη συνέχεια, πατήστε **Υποβολή**. Η ανανέωση της εφαρμογής ενδέχεται να διαρκέσει ένα λεπτό. Είστε έτοιμοι. Θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις δυνατότητες της εφαρμογής μόλις η κλινική σας σας προσθέσει στο σύστημά της.

Από: <do-not-reply@crhfcloud.com>

Ημερομηνία: Τρίτη, 21 Δεκ. 2021 στις 2:46 μ.μ.

Θέμα: Επαλήθευση της διεύθυνσης email για τον λογαριασμό σας MyCareLink Heart™

Προς: <clk_testing_01@gmail.com>

Στάλθηκε σε: monica.smith@mail.com

Γεια σας,

Έχετε τελειώσει σχεδόν με τη ρύθμιση του λογαριασμού σας Medtronic—απλώς επαληθεύστε τη διεύθυνση email σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω κουμπί.

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ EMAIL

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε

Για να βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι με την κλινική σας:

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο
- Μείνετε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο μέσω Wi-Fi ή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
- Να έχετε το smartphone ή το tablet σας κοντά σας για τουλάχιστον τρεις ώρες την ημέρα
- Κρατήστε την εφαρμογή ανοιχτή και να εκτελείται στο παρασκήνιο

Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές στην εφαρμογή.

Ανατρέξτε την ενότητα "Εκπαίδευση" στην εφαρμογή, όπου θα βρείτε πολλές χρήσιμες πληροφορίες.



Έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με την καρδιακή συσκευή ή τη λύση παρακολούθησης ασθενούς; Καλέστε μας, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε!

Μείνετε συνδεδεμένοι

9011 400 200

Δευτέρα - Παρασκευή
9:00 - 17:00 Εκτός αργιών

Σταθερό 1,30€/1' - Κινητό 1,74€/1' (Με ΦΠΑ + Τέλος Σταθερής ή Κινητής Τηλ/νίας, όπου ισχύει)
Η υπηρεσία απευθύνεται σε ενηλίκους - Για υποδείξεις, παράπονα: 214-2148020 Mediatel, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 125-127 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 11524

Συχνές ερωτήσεις

Πολλαπλές συσκευές

Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή κινητών MyCareLink Heart σε πολλές κινητές συσκευές;

Ναι. Προτού χρησιμοποιήσετε μια δεύτερη κινητή συσκευή, θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει σύζευξη της πρώτης σας κινητής συσκευής. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, για να συνδεθείτε στη δεύτερη κινητή συσκευή σας. Οι φροντιστές μπορούν επίσης να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στα τηλέφωνα τους!

Bluetooth

Θα αλληλεπιδρά η συσκευή μου με άλλες συσκευές Bluetooth; Για παράδειγμα, θα αλληλεπιδρά με το Bluetooth στο αυτοκίνητό μου;

Η καρδιακή συσκευή σας έχει Bluetooth χαμηλής ενέργειας ενώ τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούν τυπικά κλασικό Bluetooth. Τα αυτοκίνητα δεν θα επιχειρήσουν να εδραιώσουν σύνδεση με την καρδιακή συσκευή σας και η καρδιακή συσκευή σας δεν θα μπορεί να ανιχνεύσει μεταδόσεις κλασικού Bluetooth.

Μπαταρία

Εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου μου η εφαρμογή κινητών MyCareLink Heart;

Εάν συνήθως έχετε ενεργοποιημένο το Bluetooth, δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσετε καμία αλλαγή στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της κινητής συσκευής σας. Εάν συνήθως δεν έχετε ενεργοποιημένο το Bluetooth, ενδέχεται να παρατηρήσετε μείωση στη διάρκεια ζωής της μπαταρίας της κινητής συσκευής σας κατά τη χρήση της εφαρμογής μεταξύ των φορτίσεων.

Κατανάλωση δεδομένων εφαρμογής

Πόσα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιεί η εφαρμογή κινητών MyCareLink Heart κάθε μήνα;

Η κατανάλωση δεδομένων της εφαρμογής (8,7 MB/μήνα) ισοδυναμεί με περίπου ένα λεπτό περιήγησης στο Διαδίκτυο την ημέρα.

Ασφάλεια

Εάν κλαπεί η κινητή συσκευή μου, τι θα έκανα κάποιος στην εφαρμογή κινητών MyCareLink Heart;

Όπως και με άλλες εφαρμογές, εάν η κινητή συσκευή σας έχει σύνδεση Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας, τα δεδομένα στην εφαρμογή θα μπορούν να προβληθούν από τον θεατή. Συνιστάται να προστατεύετε την κινητή συσκευή σας με κωδικό PIN, δακτυλικό αποτύπωμα ή άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Ενημερώσεις

Συμβατότητα κινητής συσκευής/λειτουργικού συστήματος

Οι απαιτήσεις για τις κινητές συσκευές και το λειτουργικό σύστημα (OS) για την υποστήριξη της εφαρμογής κινητών MyCareLink Heart θα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη παρακολούθηση. Ενδεχομένως να χρειαστεί να ενημερώσετε ή να αντικαταστήσετε την κινητή συσκευή σας και το λειτουργικό σύστημα, ώστε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ της καρδιακής συσκευής σας και του δικτύου CareLink™ της Medtronic.

Μεταβείτε στη διεύθυνση MCLHeart.com για τον κατάλογο συμβατών συσκευών.

[illegible]

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση αντί του ιατρού σας. Συζητήστε τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις, τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα και κάθε άλλη πληροφορία με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί.

Medtronic

Europa

Medtronic International Trading Sàrl.
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

Greece

Medtronic Hellas SA
Κηφισίας 24 Β
Μαρουσι Αθήνα
Τ.Κ 15125
Τηλ. +30 210 6779099
Φαξ. +30 210 6779399
9ο χλμ. Εθνικής Οδού
Θεσσαλονίκης - Νέων
Μουδανιών, Πυλαία,
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 57001
Τηλ. +30 2310 402100

UC201810041eEL © Medtronic 2022.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τυπώθηκε στην Ευρώπη.

medtronic.eu