

## Συχνές ερωτήσεις

### Ε: Πώς μπορώ να ξέρω εάν λειτουργεί η οικιακή συσκευή επικοινωνίας μου;

**Α.** Εφόσον βλέπετε έναν πράσινο φωτεινό δακτύλιο στην πρόσοψη, η συσκευή επικοινωνίας λειτουργεί. Εάν σβήσετε τα φώτα στο δωμάτιο ή στο δωμάτιο είναι σκοτεινό, ο αισθητήρας φωτός σβήνει τα φώτα της συσκευής επικοινωνίας. Η συσκευή επικοινωνίας εξακολουθεί να λειτουργεί.

### Ε: Πόσο θα χρεωθώ για μια μετάδοση;

**Α.** Όταν η κλινική σας εξετάζει τα δεδομένα που μεταδίδονται από τη συσκευή επικοινωνίας σας, είναι σαν να πηγαίνετε για έλεγχο της συσκευής. Ανάλογα με την ασφαλιστική σας κάλυψη υγείας, μπορεί να επιβαρυνθείτε με ένα τέλος για αυτόν τον έλεγχο συσκευής εξ αποστάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υγειονομικής ασφάλισής σας ή την κλινική.

### Ε: Γιατί το κάτω μέρος του φωτεινού δακτυλίου αναβοσβήνει πράσινο;

**Α.** Εάν πατήσετε το κουμπί και το κάτω μέρος του φωτεινού δακτυλίου αναβοσβήνει πράσινο 3 φορές παράγοντας ταυτόχρονα έναν ήχο, η συσκευή επικοινωνίας είναι απασχολημένη. Περιμένετε και προσπαθήστε ξανά αργότερα. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. την ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο εγχειρίδιο ασθενούς.

### Ε: Ποιο είναι το πρόγραμμά μου για την αποστολή μεταδόσεων; Πώς ξέρω εάν η συσκευή επικοινωνίας μου πραγματοποιεί μετάδοση;

**Α.** Η συσκευή επικοινωνίας συνδέεται ασύρματα με τη συσκευή σας και πραγματοποιεί μεταδόσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που ορίστηκε από την κλινική σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικό σας πρόγραμμα μεταδόσεων, επικοινωνήστε με την κλινική σας.

### Ε: Πού τοποθετώ τη συσκευή επικοινωνίας;

**Α.** Για βέλτιστη απόδοση, η συσκευή επικοινωνίας πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μέχρι 3 m (10 πόδια) από εκεί που κοιμάστε. Μην την τοποθετείτε κάτω από το κρεβάτι σας.

### Ε: Μπορώ να τοποθετήσω άλλες ηλεκτρονικές συσκευές κοντά στη συσκευή επικοινωνίας μου;

**Α.** Άλλες ηλεκτρονικές συσκευές μπορούν να βρίσκονται κοντά στη συσκευή επικοινωνίας (για παράδειγμα, επάνω στο ίδιο κομοδίνο), αλλά θα πρέπει να τηρούνται σε μικρή απόσταση από τη συσκευή επικοινωνίας.

### Ε: Τι θα συμβεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος;

**Α.** Η συσκευή επικοινωνίας χρειάζεται ρεύμα για να λειτουργήσει. Ωστόσο, η διακοπή ρεύματος δεν επηρεάζει την εμφυτευμένη καρδιακή συσκευή σας ή τα δεδομένα της συσκευής σας. Όταν αποκατασταθεί το ρεύμα, η συσκευή επικοινωνίας θα συνεχίσει να λειτουργεί.

### Ε: Θα πάω διακοπές. Χρειάζεται να πάρω μαζί μου τη συσκευή επικοινωνίας μου;

**Α.** Αυτό εξαρτάται από το χρονικό διάστημα της απουσίας σας. Συζητήστε με τον ιατρό σας για να αποφασιστεί εάν πρέπει να πάρετε τη συσκευή επικοινωνίας μαζί σας. Είναι ασφαλές να την πάρετε μαζί σας τόσο στη χειραποσκευή όσο και στις παραδοτέες αποσκευές.

### Ε: Ποιον πρέπει να καλέσω εάν έχω κάποια ερώτηση ή χρειάζομαι βοήθεια;

**Α.** Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε βοήθεια με τη συσκευή επικοινωνίας σας, καλέστε τον αριθμό των Υπηρεσιών ασθενών της Medtronic που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτών των οδηγιών.

www.medtronic.com



#### Medtronic, Inc.

710 Medtronic Parkway  
Minneapolis, MN 55432  
ΗΠΑ  
+1 763 514 4000

EC REP

#### Medtronic B.V.

Earl Bakkenstraat 10  
6422 PJ Heerlen  
Κάτω Χώρες  
+31 45 566 8000

#### Ευρώπη/Μέση Ανατολή/Αφρική Medtronic International Trading Sàrl

Route du Molliau 31  
Case Postale 84  
CH-1131 Tolochenaz  
Ελβετία  
+41 21 802 7000

© 2018 Medtronic  
M971929A012 A  
2018-11-15



\* M 9 7 1 9 2 9 A 0 1 2 \*

#### Αυστραλία



Medtronic Australasia Pty Ltd  
2 Alma Road  
Macquarie Park, NSW 2113  
Αυστραλία  
1800 668 670

#### Καναδάς


Medtronic of Canada Ltd  
99 Hereford Street  
Brampton Ontario L6Y 0R3  
+1 905 460 3800

Medtronic


## Οικιακή συσκευή επικοινωνίας MyCareLink Relay ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ

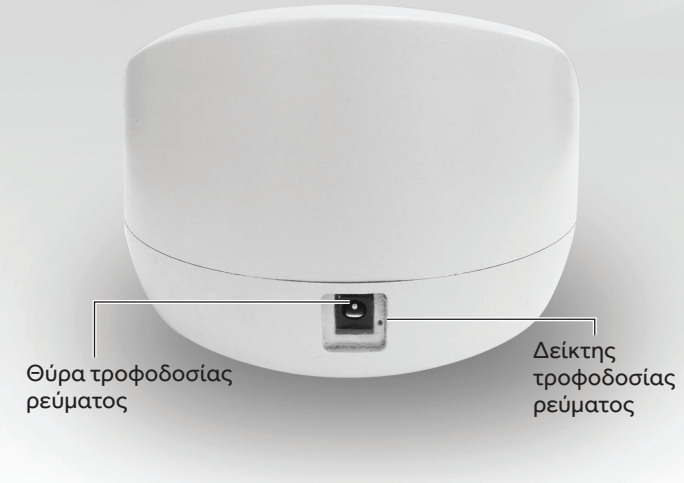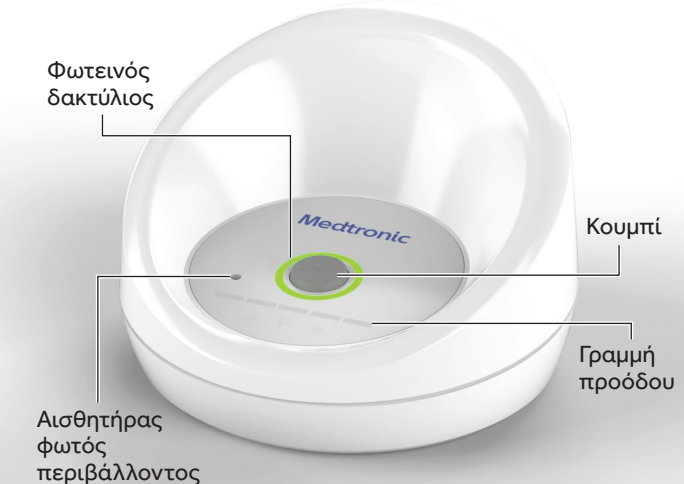

1. Τοποθετήστε τη συσκευή επικοινωνίας σε απόσταση μέχρι 3 m (10 πόδια) από εκεί που κοιμάστε.

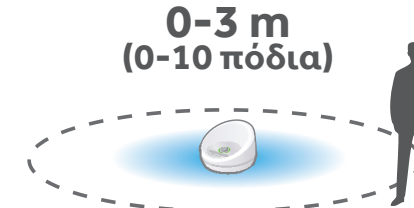

2. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος (μετασχηματιστή) στη συσκευή επικοινωνίας και σε μια πρίζα ρεύματος.

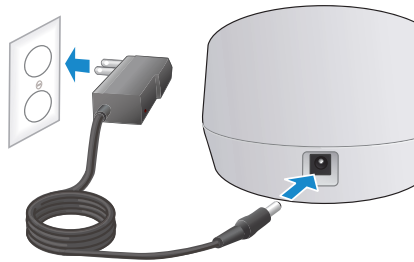

Medtronic

# Κανονική χρήση

## Εγκατάσταση

Ο φωτεινός δακτύλιος περιστρέφεται κατά την εκκίνηση του συστήματος. Μείνετε κοντά στη συσκευή επικοινωνίας για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να συνδεθεί με την εμφυτευμένη καρδιακή συσκευή σας. Αυτό διαρκεί συνήθως λιγότερο από 12 λεπτά.

Μετά την ολοκλήρωση, παράγεται ένας ήχος και ο φωτεινός δακτύλιος είναι σταθερά πράσινος.

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε!




## Το σύστημα λειτουργεί

Όταν ο φωτεινός δακτύλιος είναι σταθερά πράσινος, δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

Η συσκευή επικοινωνίας είναι ενεργοποιημένη και λειτουργεί.

**Σημείωση:** Ο αισθητήρας φωτός απενεργοποιεί τα φώτα της συσκευής επικοινωνίας όταν το δωμάτιο είναι σκοτεινό. Η συσκευή επικοινωνίας εξακολουθεί να λειτουργεί.

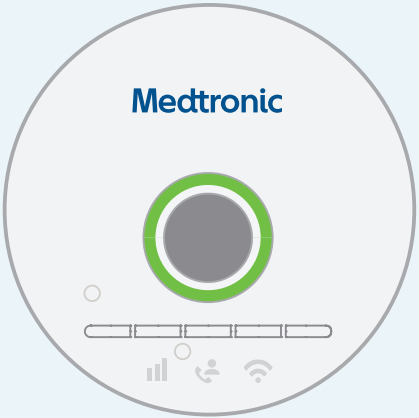

# Αποστολή μετάδοσης που ζητήθηκε από τον κλινικό ιατρό

## 1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα.

Ο φωτεινός δακτύλιος αρχίζει να περιστρέφεται και η γραμμή προόδου αρχίζει να γεμίζει.




## 2. Περιμένετε κοντά στη συσκευή επικοινωνίας μέχρι να γεμίσει πλήρως η γραμμή προόδου.

Αυτό διαρκεί συνήθως λιγότερο από 6 λεπτά. Κατά την ολοκλήρωση, παράγεται ένας ήχος.



## 3. Όταν μόνο ο φωτεινός δακτύλιος είναι σταθερά πράσινος, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια.

Τα δεδομένα της εμφυτευμένης καρδιακής συσκευής σας θα είναι σύντομα στη διάθεση του κλινικού ιατρού.

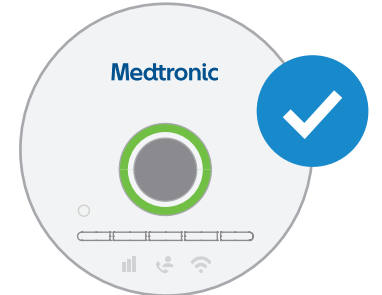

# Αντιμετώπιση προβλημάτων



## Πρόβλημα δικτύου κινητής τηλεφωνίας

Μετακινήστε τη συσκευή επικοινωνίας σε διαφορετική θέση όπου υπάρχει καλύτερη λήψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Εάν το πρόβλημα επιμένει, βλ. την ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο εγχειρίδιο ασθενούς.

## Πρόβλημα συστήματος

Αποσυνδέστε από την πρίζα τη συσκευή επικοινωνίας και στη συνέχεια επανασυνδέστε την. Εάν το πρόβλημα επιμένει, καλέστε τον αριθμό που βρίσκεται στο πίσω μέρος αυτών των οδηγιών.