

Μπορώ να περάσω από τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου αν έχω βηματοδότη, απινιδωτή ή εμφυτεύσιμη συσκευή καρδιακής παρακολούθησης;

ΝΑΙ

Απλά περπατήστε μέσα από τις αψίδες ασφαλείας με κανονικό ρυθμό.

Μη σταματάτε κάτω από την αψίδα και μην την αγγίζετε καθώς περνάτε.

Οι σαρωτές κυμάτων χιλιοστών/πλήρους σώματος είναι ασφαλείς για χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες.

Ζητήστε από τον υπάλληλο ασφαλείας να μην κρατήσει το ραβδί απευθείας πάνω από τη συσκευή σας, ή να το περάσει επανειλημμένα πάνω από τη συσκευή σας.

Μπορείτε να επιδείξετε την κάρτα αναγνώρισης της συσκευής σας και να ζητήσετε σωματικό έλεγχο.

