

# هل يمكنني المرور عبر أمن المطار إذا كان لدي جهاز تنظيم ضربات القلب أو مزيل الرجفان أو جهاز مراقبة القلب؟

نعم

ما عليك سوى السير عبر الممرات الأمنية  
بوتيرة طبيعية.  
لا تتوقف أسفل الممر أو تلمسه أثناء  
عبورك.

تعد الموجات المليمترية / الماسحات  
الضوئية لكامل الجسم آمنة للاستخدام  
وفقًا للتعليمات.

اطلب من عامل الأمان عدم وضع العصا  
مباشرة فوق جهازك ، أو تمريرها بشكل  
متكرر فوق جهازك.  
يمكنك إظهار بطاقة تعريف جهازك  
وطلب الفحص اليدوي بدلاً من ذلك.

