

Kann ich mit einem Herzschrittmacher, Defi oder Herzmonitor durch die Flughafen-Sicherheitskontrolle gehen?

JA

Einfach im normalen Tempo durch die Sicherheitsschleuse gehen.

Nicht stehenbleiben und keine metallenen Oberflächen berühren.



Eine Kontrolle mit einem Ganzkörper-/ Millimeterwellen-Scanner ist unter Anleitung des Sicherheitspersonals möglich.



Bitte Sie das Sicherheitspersonal den tragbaren Detektor nicht über Ihr implantiertes Gerät zu halten oder über diesem hin- und herzubewegen.

Sie können auch Ihren Geräteausweis zeigen und darum bitten, manuell abgetastet zu werden.

