


GUIDE D'UTILISATION RELIATACK™ DISPOSITIF DE FIXATION RÉSORBABLE ARTICULÉ RECHARGEABLE



CHARGEMENT DU DISPOSITIF

Le dispositif doit être en position "recharge", avec le bouton rouge exposé.

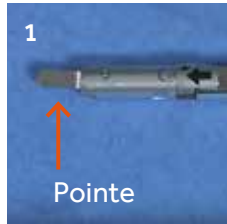

La pointe doit être en position verticale.




Enlevez la recharge de l'emballage blister
NE SAISISSEZ PAS LE CHARGEUR PAR SON SYSTÈME DE POSITIONNEMENT.




Tirez et maintenez le commutateur de verrouillage bleu en position non verrouillée.




Maintenez le commutateur de verrouillage bleu et glissez la recharge sur le chargeur.

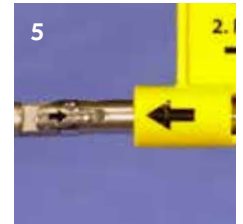


Assurez-vous de l'alignement des deux flèches.

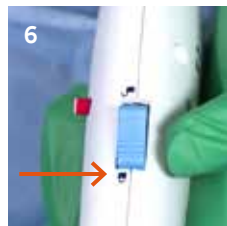


Lâchez le commutateur de verrouillage bleu.

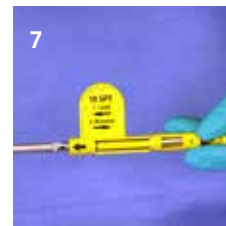

Tirez doucement sur la recharge pour vous assurer que le dispositif est chargé.

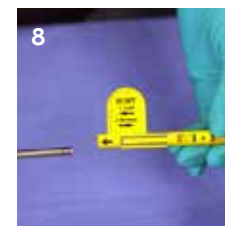

Retirez le système de positionnement jaune.

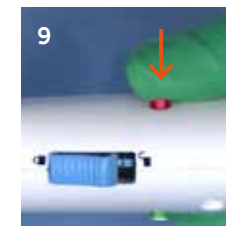

Appuyez sur le bouton de commutation rouge pour sécuriser le chargeur et déverrouiller la gâchette.




Assurez-vous que le dispositif est en position droite, non articulée avant de l'introduire dans le Trocart.

DÉCHARGEMENT DU DISPOSITIF




Assurez-vous que le dispositif est en position droite, non articulée.

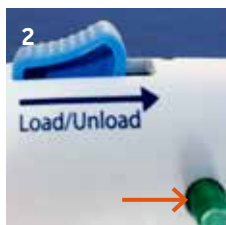


Appuyez sur le bouton de commutation vert pour activer la position de recharge.



Tirez et maintenez le commutateur de verrouillage bleu en position non verrouillée.

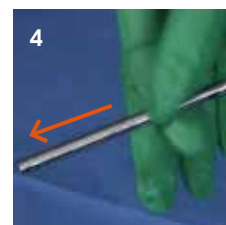

Retirez la recharge du dispositif et jetez-la.
Important : Ne pas réutiliser.

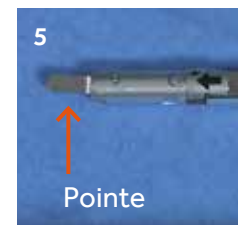

La pointe doit être en position verticale.

ARTICULATION

Position 0° ou 65°

Tournez la molette bleu foncé d'un seul tour dans le sens de la flèche jusqu'à sentir une résistance.

Important : Ne pas forcer.


*Avancer, Ensemble

Medtronic
Further, Together *


ASTUCES D'UTILISATION

1. DIFFICULTÉ DE CHARGEMENT DU DISPOSITIF

Vérifiez que le dispositif est en position Recharge.

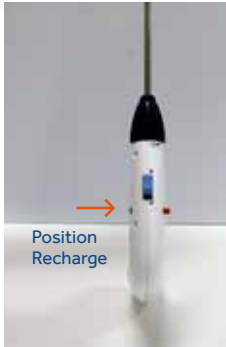

Vérifiez l'alignement des flèches entre la recharge et le chargeur.

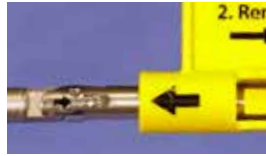

- Si les flèches sont alignées : le dispositif est chargé
- Si les flèches sont mal alignées : le dispositif n'est pas chargé


Vérifiez que la broche est en position verticale.



3. DÉCLENCEMENT DU DISPOSITIF

NE PAS pousser la poignée vers l'avant lors de l'agrafage

APPLIQUEZ une pression délicate vers le bas lors de l'agrafage. Cela permet de rapprocher l'embout distal du dispositif contre le maillage.

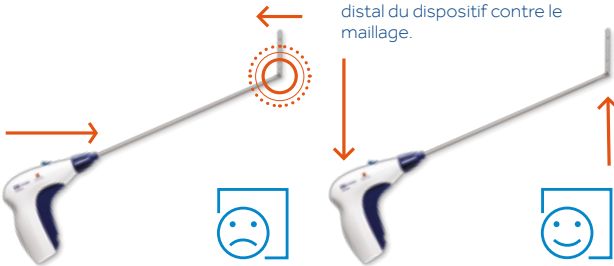


Ne pas exercer de contre-pression importante

2. DIFFICULTÉ DE DÉCHARGEMENT DU DISPOSITIF

Vérifiez que la séquence d'agrafage est terminée




La gâchette est partiellement comprimée. La séquence d'agrafage n'est pas terminée.

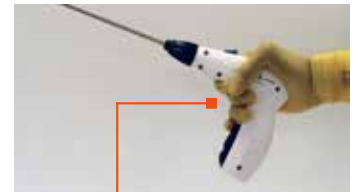

La gâchette est entièrement comprimée. La séquence d'agrafage est terminée.

Vérifiez que le dispositif est en position recharge

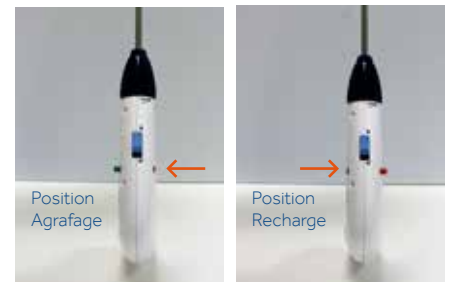

4. JOINT BRISÉ

Vérifiez le retrait sécurisé du dispositif du patient.

1. Faites tourner la mollette d'articulation une fois vers la gauche. Ne pas faire tourner plus de trois fois.
2. Retirez ensuite lentement l'instrument de façon à positionner le joint d'articulation contre l'embout distal du trocart.
3. Retirez le trocart et le dispositif en même temps. Ouvrez un nouveau dispositif.

Medtronic

Medtronic France S.A.S.
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00

RCS Nanterre 722 008 232

Réservé aux professionnels de santé.

UC201902298AFF © Medtronic France 2020.
Tous droits réservés.
Crédit photo : Medtronic.
Production : PARAGON CC. Création avril 2020.

www.medtronic.fr

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

Le dispositif de fixation articulé rechargeable ReliaTack™ est disponible avec en version standard et en agrafes profondes (DPT)

La poignée standard est livrée avec 3 recharges de 10 agrafes standard et la version DPT est livrée avec 3 recharges de 8 et 1 recharge de 5 agrafes profondes.



Recharges de 10 agrafes (réf.: RELTACK10R)



Recharges de 5 agrafes (réf.: RELTACK5R)



1. Le dispositif peut être rechargé et déclenché pour 60 agrafes au total au cours d'une seule intervention.

2. Possibilité de commander séparément des recharges supplémentaires de 5 ou 10 agrafes standards et 5 ou 8 agrafes DPT.



Poignées et leurs 3 recharges de 10 agrafes standard (réf.: RELTACK3x10)



Poignées et leurs 3 recharges de 8 agrafes profondes et 1 recharge de 5 agrafes profondes (réf.: RELTACK4xDPT)

Recharges de 5 agrafes profondes (réf.: RELTACK5RDPT)



Recharges de 8 agrafes profondes (réf.: RELTACK8RDPT)

