

Medtronic

Korte verklaring:

Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Raadpleeg bij gebruik van de MRI SureScan™-implantaten de technische handleiding van deze implantaten voordat u een MRI uitvoert. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale contactpersoon van Medtronic en/of raadpleeg de website van Medtronic op medtronic.eu.

Europa

Medtronic International
Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Zwitserland
www.medtronic.eu
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

medtronic.eu

België


Medtronic Belgium N.V.
Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5
BE-1090 Brussel
België
www.medtronic.be
Tel. +32 (0)2 456 09 00
Fax +32 (0)2 460 26 67

Nederland

Medtronic Trading NL B.V.
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
www.medtronic.nl
Tel. +31 (0)40 711 75 55
Fax +31(0)40 711 75 22

UC202010093NL © Medtronic 2020.
Alle rechten voorbehouden.

DBS-THERAPIE VAN MEDTRONIC NIEUWE ACTIVA™ RC- OPLADER MODEL RS6200

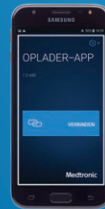

Beknopte handleiding

Medtronic
Further Together

DBS-THERAPIE VAN MEDTRONIC NIEUWE ACTIVA™ RC-OPLADER MODEL RS6200

Beknopte handleiding

DE OPLADER OPLADEN



- 1 Sluit de USB-kabel aan op het dockingstation.
- 2 Steek de USB-kabel in de stroomadapter, en steek de stroomadapter in een stopcontact. Zorg dat het dockingstation op een platte ondergrond staat als het op de stroom is aangesloten.
- 3 Plaats de oplader zo op het dockingstation dat de knop zich aan de bovenkant bevindt. Tussen de oplaadsessies door kunt u de oplader op het dockingstation laten liggen.

Bezig met opladen



Volledig opgeladen



- 4 Als uw oplader volledig opgeladen is, wordt het batterijpictogram zoals in de afbeelding hiernaast weergegeven.

DE OPLADER AAN DE APP KOPPELEN*

**De oplader-app is optioneel en niet vereist voor het opladen van het implantaat*

- 1 Zet uw patiëntenprogrammeerapparaat aan en ontgrendel dit.
- 2 Open de oplader-app door op het pictogram van de app (🔌) te tikken.
- 3 Zet de oplader aan.
- 4 Tik in de oplader-app op **Verbinden**.



- 5 Tik op **Code scannen**.
Opmerking: Tik op 'Toestaan' als de app toegang tot de camera vraagt.

- 6 Richt de camera van het patiëntenprogrammeerapparaat op de scancode op de oplader en zorg dat de hele code zichtbaar is op het scherm van het patiëntenprogrammeerapparaat. Doe dit totdat u bevestiging op het patiëntenprogrammeerapparaat hebt gekregen dat het koppelen voltooid is.

[Zie achterkant voor extra instructies.](#) ➤

Korte verklaring:

Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor gedetailleerde informatie over het gebruik en de indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Raadpleeg bij gebruik van de MRI SureScan™ de technische handleiding van de MRI SureScan™ voordat u een MRI uitvoert. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale contactpersoon van Medtronic en/of raadpleeg de website van Medtronic op medtronic.eu.

UC2020100935NL © Medtronic 2020

Alle rechten voorbehouden.

LJUMGEIBED

DBS-THERAPIE VAN
MEDTRONIC
NIEUWE ACTIVA™ RC-
OPLADER
MODEL RS6200


Beknopte handleiding



Further Together

UW IMPLANTAAT OPLADEN

Bezig met opladen

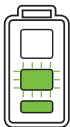

Volledig opgeladen



1 Controleer het batterijniveau van de oplader en laad indien nodig de oplader op.

Zie 'De oplader opladen' op de voorkant voor de instructies.



*Indien u een neurostimulator in de buikholte heeft, wordt er een heupgordel meegeleverd.

2 Plaats de oplader zo in de schouder- of heupgordel dat het cirkelsymbool op de achterkant van de oplader precies onder het cirkelsymbool op de gordel komt te liggen.
Opmerking: Gebruik het contragewicht wanneer u de schoudergordel gebruikt, om de oplader in balans te houden.

3 Zet de oplader aan. De oplader piept totdat de verbinding met uw neurostimulator tot stand is gebracht.

INDICATOREN VAN DE OPLADER

Geluidssignaal	Lampje	Betekenis
 Herhalende pieptoon	 Draait	De oplader zoekt de neurostimulator.
 2 oplopende tonen	 Brandt	De neurostimulator is gevonden. Opmerking: Hoort u 3 aanvullende tonen, lees dan de informatie over de Vervanging aanbevolen-indicator hieronder.
 3 tonen van dezelfde toonhoogte	 Brandt	Vervanging aanbevolen-indicator Raadpleeg de handleiding bij uw patiëntenprogrammeerapparaat of bij de therapie-app voor patiënten voor meer informatie.
Geen	 Knippert langzaam	De neurostimulator wordt opgeladen.
 Een reeks oplopende tonen	 Brandt	De oplaadsessie is voltooid.
 2 aflopende herhalende tonen	 Knippert	Neurostimulator niet gevonden of andere waarschuwing/fout. Controleer de app voor meer informatie.
2 aflopende herhalende tonen	 Knippert	De batterij van de oplader is bijna leeg.

DE OPTIONELE OPLADER-APP GEBRUIKEN



1 **Menu**toets (≡) – Tik hierop voor de instellingen van de oplaadsnelheid en informatie over de app. Standaard is de hoogste oplaadsnelheid ingesteld.

2 **Neurostimulatorbatterij**-pictogram – De batterijstatus van uw neurostimulator. Het cijfer naast deze afbeelding geeft aan hoe vol de neurostimulatorbatterij is.

3 **Verbindings**pictogram – De status van de verbinding tussen de oplader en uw neurostimulator.

4 **Oplader**toets – Tik hierop voor de batterijstatus en volume-instelling van uw oplader.