

Medtronic

Medtronic France S.A.S.
9, boulevard Romain Rolland
75014 Paris
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00

RCS Paris 722 008 232

www.medtronic.fr

UC202114017FF © Medtronic France 2021.
Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.
Production : PARAGON CC. Création janvier 2021.

Consultez votre
médecin pour de plus
amples informations
concernant la thérapie,
l'utilisation du dispositif
ou toute autre question
concernant votre santé.



L'ADMINISTRATION DE NOS THÉRAPIES

Medtronic a mis en place un service d'assistance téléphonique pour répondre aux questions techniques des patients (Comment allumer sa télécommande ? Vérifier la batterie restante de mon neurostimulateur, etc.).

N'hésitez pas à les contacter.

0 800 38 17 00 Service & appel gratuits

Du lundi au vendredi 9h - 18h.

MA TÉLÉCOMMANDE ET SES ACCESSOIRES

La Télécommande



Le Communicateur



BON À SAVOIR

- La télécommande patient et son communicateur doivent être rechargés complètement dès la première prise en main.
- Il est conseillé de recharger vos télécommande et communicateur tous les 2 mois.

GUIDE D'UTILISATION

TÉLÉCOMMANDE PATIENT

Compatible
avec les
dispositifs
Percept™



CE GUIDE EST DESTINÉ AUX PATIENTS


La télécommande est destinée à être utilisée avec le neurostimulateur Percept™ PC indiqué dans le traitement de la maladie de Parkinson, le Tremblement Essentiel et la dystonie.

*Avancer, Ensemble

Medtronic
Further. Together.™

COMMUNICATION AVEC LE NEUROSTIMULATEUR

- 1 Appuyez brièvement sur le bouton central pour allumer le communicateur. Les voyants lumineux s'allument, sinon rechargez votre communicateur.

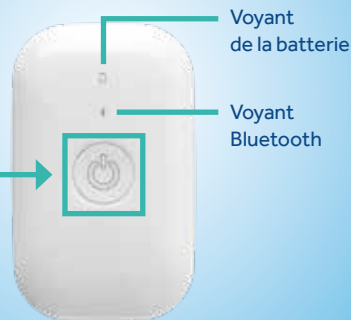

- 2 Garder le communicateur à moins de 1 mètre du site d'implantation du neurostimulateur.



- 3 Allumez la télécommande en appuyant sur le bouton latéral droit.
- 4 Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut pour accéder au menu.
- 5 Cliquez sur l'application **Ma thérapie de SCP** ou sur le bouton **Ouvrir**.



- 6 Appuyez ensuite sur le bouton **Connecter** qui s'affiche à l'écran

ÉCRAN PRINCIPAL



L'écran principal apparaît.

- 1 **Menu** : Appuyez dessus pour accéder aux autres fonctionnalités : tutoriel, rappels, à propos...
- 2 **Autre dispositif** : (uniquement disponible si vous avez deux neurostimulateurs) Cliquez ici pour interroger l'autre neurostimulateur.
- 3 **Ma pile** : Cliquez pour connaître en détail l'état de la batterie de votre neurostimulateur, de votre communicateur et de votre télécommande. Rechargez votre télécommande et votre communicateur régulièrement. Vérifiez régulièrement l'état de la batterie de votre neurostimulateur. Si le message ERI ou EOS s'affiche, contactez votre médecin pour prévoir un remplacement de votre neurostimulateur.

- 4 **Ma thérapie** : Indique si votre thérapie est inactive (la stimulation n'est plus délivrée) ou si votre thérapie est active (la stimulation est délivrée). Vérifiez que votre thérapie est toujours active sauf avis contraire de votre médecin.

- 5 **Événements** : Cliquez pour enregistrer l'un des événements (ex : prise de médicament, chute etc.). Ces événements ont été définis préalablement par votre médecin. Vous pouvez également renseigner un événement directement sur la page d'accueil.



- 6 **Thérapie** : (l'ajustement des réglages n'est possible que si cette option a été préalablement programmée par le médecin.) Sélectionnez Thérapie pour visualiser vos réglages ou les ajuster.