

Medtronic

Medtronic France S.A.S.

9, boulevard Romain Rolland

75014 Paris

Tél. : 01 55 38 17 00

Fax : 01 55 38 18 00

RCS Paris 722 008 232

www.medtronic.fr

UC202110184FF © Medtronic France 2020.

Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.

Production : PARAGON CC. Création décembre 2020.

Consultez votre médecin pour de plus amples informations concernant la thérapie, l'utilisation du dispositif ou toute autre question concernant votre santé.

Medtronic ASSISTANCE

L'ADMINISTRATION DE NOS THÉRAPIES

Medtronic a mis en place un service d'assistance téléphonique pour répondre aux questions techniques des patients (Comment allumer sa télécommande ? Vérifier la batterie restante de mon neurostimulateur, etc.).

N'hésitez pas à les contacter.

0 800 38 17 00 Service & appel gratuits

Du lundi au vendredi 9h - 18h.

MA TÉLÉCOMMANDE ET SES ACCESSOIRES

La Télécommande



Le Communicateur



BON À SAVOIR

- La télécommande patient et son communicateur doivent être rechargés complètement dès la première prise en main.
- Il est conseillé de recharger vos télécommande et communicateur tous les 2 mois.

GUIDE D'UTILISATION

TÉLÉCOMMANDE PATIENT



Compatible avec les dispositifs Activa™

CE GUIDE EST DESTINÉ AUX PATIENTS


La télécommande est destinée à être utilisée avec les neurostimulateurs Activa™ PC, Activa™ SC ou Activa™ RC indiqué dans le traitement de la maladie de Parkinson, le Tremblement Essentiel et la dystonie.

*Avancer, Ensemble


Medtronic
Further, Together *

COMMUNICATION AVEC LE NEUROSTIMULATEUR

- 1 Appuyez sur le bouton central pour allumer le communicateur. Les voyants lumineux s'allument, sinon rechargez votre communicateur.

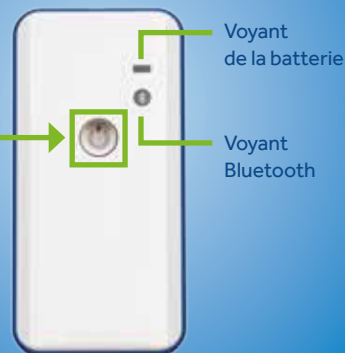

- 2 Positionnez le communicateur blanc au niveau du site d'implantation du neurostimulateur

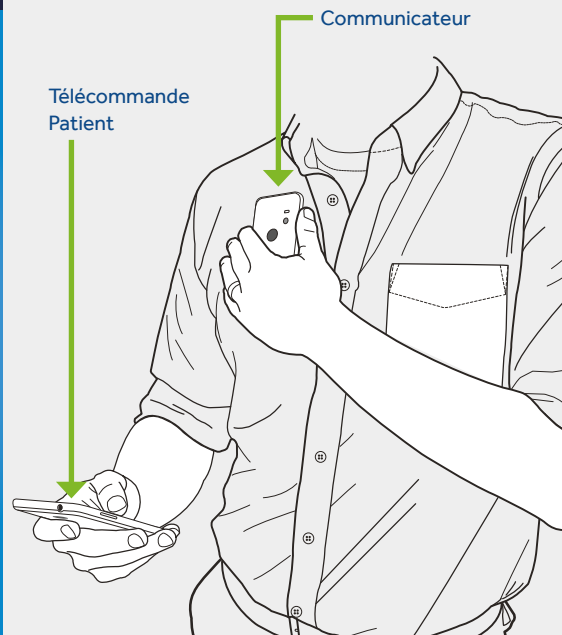

- 3 Allumez la télécommande en appuyant sur le bouton latéral droit.
- 4 Faites glisser votre doigt sur l'écran vers le haut pour accéder au menu.
- 5 Cliquez sur l'application **Medtronic DBS** ou sur le bouton **Ouvrir**.



- 6 Appuyez ensuite sur le bouton **Connecter** qui s'affiche à l'écran

ÉCRAN PRINCIPAL



L'écran principal apparaît.

- 1 **Menu** : Appuyez dessus pour accéder aux autres fonctionnalités : tutoriel, rappels, à propos ...
- 2 **Autre dispositif** : (uniquement disponible si vous avez deux neurostimulateurs) Cliquez ici pour interroger l'autre neurostimulateur.
- 3 **Ma pile** : L'état de la batterie de votre neurostimulateur apparaît ici.

- Si vous êtes doté d'un neurostimulateur rechargeable ne laissez jamais descendre la batterie en dessous de 25% et rechargez régulièrement votre neurostimulateur.
- Si vous êtes implanté d'un stimulateur non rechargeable, vérifiez régulièrement l'état de la batterie, si le message ERI ou EOS s'affiche, contactez votre médecin pour prévoir un remplacement de votre neurostimulateur.

- 4 **Ma thérapie** : Indique si votre thérapie est inactive (la stimulation n'est plus délivrée) ou si votre thérapie est active (la stimulation est délivrée). Vérifiez que votre thérapie est toujours active sauf avis contraire de votre médecin.

- 5 **Pile** : Cliquez pour connaître en détail l'état de la batterie de votre neurostimulateur, de votre communicateur et de votre télécommande. Rechargez en cas de besoin.

- 6 **Thérapie** : (l'ajustement des réglages n'est possible que si cette option a été préalablement programmée par le médecin.) Sélectionnez Thérapie pour visualiser vos réglages ou les ajuster.