



Model WR9230

Medtronic

Europa

Medtronic International
Trading Sàrl
Route du Molliat 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
Zwitserland
www.medtronic.eu
Tel. +41 (0)21 802 70 00
Fax +41 (0)21 802 79 00

medtronic.eu

België

Medtronic Belgium N.V.
Burgemeester Etienne
Demunterlaan 5
BE-1090 Brussel
België
www.medtronic.be
Tel. +32 (0)2 456 09 00
Fax +32 (0)2 460 26 67

Nederland

Medtronic Trading NL BV
Larixplein 4
5616 VB Eindhoven
Nederland
www.medtronic.nl
Tel. +31 (0)40 711 75 55
Fax +31 (0)40 711 75 22

© 2023 Medtronic.

Medtronic, het logo van
Medtronic en Engineering
the extraordinary zijn
handelsmerken van
Medtronic.

Alle overige merken
zijn handelsmerken van
dochterondernemingen van
Medtronic. UC202401728-
inceptiv-patient-recharger-
quick-guide-nl-10680023

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw oplaadset
en de patiëntenhandleiding bij uw handset met daarop
de MyStim RC-app in combinatie met de TM91-
communicator voor volledige instructies en informatie
over waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, risico's en
voordelen van uw Inceptiv™-neurostimulator.

Medtronic

Engineering the extraordinary

Draadloze oplader voor neurostimulatie

Voor gebruik met uw
Inceptiv™-neurostimulator

Beknopte handleiding



Illustratieve weergave van verschillende hulpmiddelen.

Draadloze oplader voor neurostimulatie

Model WR9230 voor Inceptiv™-neurostimulatiesystemen

Beknopte handleiding

Uw oplader opladen

- 
- 1

Sluit de USB-kabel aan op het dockingstation.
- 2

Steek de USB-kabel in de stroomadapter en steek de stroomadapter in een stopcontact. Zorg dat het dockingstation op een vlakke ondergrond staat als deze op de stroom is aangesloten.
- 3

Plaats de oplader zo op het dockingstation dat de knop zich aan de bovenkant bevindt.
- 4

Als de oplader volledig is opgeladen, wordt het batterijpictogram zoals in de afbeelding hiernaast weergegeven.
- Bezig met opladen

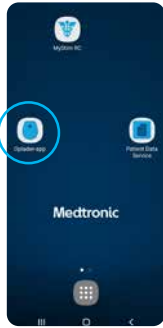
Volledig opgeladen


- OPMERKING:** Het batterijniveau van de batterij moet minimaal 2 balkjes zijn om de neurostimulator te kunnen opladen.

OPMERKING: Plaats uw oplader tussen de oplaadsessies op het dockingstation, zodat de oplader altijd volledig opgeladen is.

Uw neurostimulator opladen

- 
- 1

Controleer of de oplader in het dockingstation minimaal 2 balkjes laat zien.
- 

2

Open de 'Oplader-app' (model A90300) op uw handset.
- 

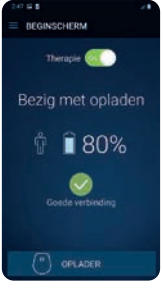
3

Pak de oplader van het dockingstation. Plaats de oplader zo in de riem dat het cirkelsymbool op de achterkant van de oplader precies onder het cirkelsymbool op de riem komt te liggen. Start de oplader met een korte druk op de aan-uitknop.
- 

4

Plaats de riem zo dat de twee cirkels zich boven de neurostimulator bevinden en naar uw lichaam toe zijn gericht. Draag dunne onderkleding of leg een dun lapje textiel tussen uw huid en de oplader.

De oplader blijft piepen terwijl deze de neurostimulator zoekt. Beweeg de oplader langzaam boven de neurostimulator totdat u 2 oplopende tonen hoort en het piepen stopt. Zodra er verbinding is gemaakt, start het opladen automatisch.

Een reeks oplopende tonen geeft aan dat het opladen is voltooid. U wordt geadviseerd uw neurostimulator altijd te hebben opgeladen, zodat de therapie wordt voortgezet.
- 

5

De oplader-app kan dienen als hulpmiddel bij het plaatsen van de oplader, waardoor de oplaadtijd kan worden verkort.

Houd de oplader tijdens het verplaatsen af en toe stil zodat de app de verbindingsterkte kan aangeven.
OPMERKING: Bij een 'uitstekende' verbindingsterkte wordt de neurostimulator sneller opgeladen dan bij een 'goede' verbindingsterkte.

Zie de ommezijde voor verdere instructies ➤



© 2023 Medtronic. Medtronic, het logo van Medtronic en Engineering the extraordinary zijn handelsmerken van Medtronic.
Alle overige merken zijn handelsmerken van dochterondernemingen van Medtronic.
UC202401728-inceptiv-patient-recharger-quick-guide-nl-10680023

LUMGEBIED

Indicatorlampjes op uw oplader

Geluidssignaal	Lampje	Betekenis
 Herhalende pieptoon	 Draait rond	De oplader zoekt de neurostimulator.
 Twee oplopende tonen	 Brandt constant	De neurostimulator is gevonden.
Geen	 Knippert langzaam	De neurostimulator wordt opgeladen.
 Een reeks oplopende tonen	 Brandt constant	De neurostimulator is volledig opgeladen

Geluidssignaal	Lampje	Betekenis
 Twee aflopende, herhalende tonen	 Knippert	Neurostimulator niet gevonden of andere waarschuwing/fout. Controleer de app voor meer informatie.
 Twee aflopende, herhalende tonen	 Knippert	De batterij van uw oplader is bijna leeg.
 Twee aflopende tonen	 Brandt kort, gaat vervolgens uit	Er is nog geen koppeling tot stand gebracht tussen de nieuwe oplader en de oplader-app. Opmerking: Dit treedt alleen op als er nog geen koppeling tot stand is gebracht tussen een vervangende oplader en de oplader-app.

Gebruik van de oplader-app



- Menu-toets (≡)** - Klik hierop voor de instellingen van de oplaadsnelheid en informatie over de app. De oplader gebruikt standaard de hoogste oplaadsnelheid.
- Therapieactivatietoets** - Tijdens het opladen kunt u de therapie in- of uitschakelen.
- Batterijpictogram** neurostimulator - Het batterijniveau van uw neurostimulator. Het getal naast deze afbeelding geeft aan hoe vol de batterij van uw neurostimulator is.
- Verbindingspictogram** - De status van de verbinding tussen uw oplader en uw neurostimulator.
- Opladertoets** - Klik hierop om het batterijniveau en de volume-instelling van uw oplader te bekijken.

Problemen oplossen

U kunt te maken krijgen met problemen met de verbinding:

Tussen de oplader en de neurostimulator:

- Om dit op te lossen, moet u ervoor zorgen dat uw oplader is ingeschakeld, dat uw handset zich in de buurt van de oplader bevindt en dat uw oplader is opgeladen.
- Als de fout niet met bovenstaande acties wordt opgelost, reset de oplader dan door de aan-uitknop 25 tot 45 seconden ingedrukt te houden **totdat de lampjes gaan knipperen. Een knipperend indicatorlampje geeft aan dat de reset is geslaagd.**

Tussen de oplader en de oplader-app:

- Controleer of bluetooth is ingeschakeld en of uw handset niet in vliegtuigmodus staat.
- Als de fout niet met bovenstaande acties wordt opgelost, sluit de oplader-app dan en start hem opnieuw op.

