

## Handleiding voor verzorging en onderhoud van de oplader van uw InterStim™ Micro-systeem

Uw sacrale-neuromodulatietherapie voor uw darm- en/of blaascontroleproblemen wordt afgegeven door het InterStim™ Micro-systeem. Deze gebruikershandleiding geeft u uitleg over het onderhoud en de verzorging van uw oplader.

### De oplader van uw InterStim™ Micro-systeem

#### Oplader

Laadt de neurostimulator wekelijks op in ongeveer 20 minuten\*

#### Dockingstation van de oplader en USB-voedingskabel

Voorziet de oplader van stroom

#### Batterijlampje

- Constant groen: geeft het laadniveau van de oplader aan
- Knipperend groen: geeft aan dat de oplader wordt opgeladen
- Knipperend oranje: geeft aan dat de batterij van de oplader bijna leeg is



Opladen



Volledig opgeladen

### Uw oplader opladen

- 1** Sluit de USB-kabel aan op het blauwe dockingstation van de oplader.
- 2** Steek de USB-kabel in de voedingsadapter. Steek de adapter in een stopcontact. Zorg dat het dockingstation op een platte ondergrond staat als het op de stroom is aangesloten.
- 3** Plaats de oplader zo op het dockingstation dat de knop zich aan de bovenkant bevindt. Tussen de oplaadsessies door kunt u de oplader op het dockingstation laten liggen, zodat hij volledig opgeladen blijft.  
**LET OP:** Als u uw oplader voor het eerst oplaadt, is het belangrijk dat u het opladen van de oplader voltooit zonder de oplader uit het dockingstation te halen. Dit is belangrijk om het apparaat op de juiste manier uit de verzendmodus te halen.
- 4** Als uw oplader volledig is opgeladen, wordt het batterijpictogram weergegeven zoals in de afbeelding links.
- 5** Laat uw oplader op het blauwe dockingstation aan de stroom liggen. Hierdoor blijft uw oplader opgeladen en is hij klaar voor het volgende gebruik.

## Onderhoud van de oplader

Reinig de buitenkant van uw oplader zo nodig met een vochtige doek. Een mild reinigingsmiddel tast de onderdelen niet aan.



De informatie in deze brochure is geen vervanging voor de aanbevelingen van uw zorgverlener. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie over de gebruiksaanwijzing, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverlener.

De veiligheid en effectiviteit van het InterStim™ Micro-systeem zijn niet vastgesteld voor gebruik bij kinderen, tijdens de zwangerschap en bij een ongecorrigeerde, interne verzakking van de endeldarm.

## Medtronic

### Nederland

Medtronic Trading NL B.V.  
Larixplein 4  
5616 VB Eindhoven  
Nederland  
Tel. +31 (0)40 711 75 55  
Fax +31 (0)40 711 75 22

[www.medtronic.nl](http://www.medtronic.nl)

### België

Medtronic Belgium N.V.  
Burgemeester Etienne Demunterlaan 5  
BE-1090 Brussel  
België  
Tel. +32 (0)2 456 09 00  
Fax +32 (0)2 460 26 67

[www.medtronic.be](http://www.medtronic.be)

UC202209233NL © 2022 Medtronic.  
Alle rechten voorbehouden.